

VADEMECUM GENERALE

1

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
1 Beta Interleukin (SYNLAB) Plasma EDTA congelato, Siero congelato	850	LIA	11 gg	

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L < 16,0

1 METILISTIDINA Plasmatica (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	853	LC/MS	16 gg	
---	-----	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

1 METILISTIDINA Urine (SYNLAB) Urine	854	LC-MS	16 gg	
--	-----	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 5 mL

Congelare

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

1,2 CICLOESANDIOLO PER CICLOESANO Urine Fine Turno Urine F.T.	2225	GC	16 gg	
---	------	----	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 791 CREATININA URINE FINE TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

Urine Fine Turno	mg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti a Cicloesano : < 150 (f.t.)
Creatinina Urine Fine Turno	g/L	0,30 - 3,00

1,2 CICLOESANDIOLO PER CICLOESANO Urine Inizio Turno Urine I.T.	2224	GC	16 gg	
---	------	----	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

Urine Inizio Turno	mg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti a Cicloesano : < 150 (f.t.)
Creatinina Urine Inizio Turno	g/L	0,30 - 3,00

1,2 CICLOESANDIOLO PER CICLOESANONE Urine Fine Turno Urine F.T.	1192	GC	16 gg	
---	------	----	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L Soggetti professionalmente esposti a cicloesanone: < 50 (f.t. / f.s.l.)

VADEMECUM GENERALE

1

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
1,2 CICLOESANDIOLO PER CICLOESANONE Urine Inizio Turno	1191	GC	16 gg	

Urine I.T.

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti professionalmente esposti a cicloesanone:
< 50 (f.t. / f.s.l.)

11 Desossicortisolo (SYNLAB)

Siero congelato

Quantità da prelevare: 3 mL

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Uomini: < 2,00
Donne: < 1,15
Stimolazione con metopirone:
> 70,00

11-Desossicorticosterone (DOC) (SYNLAB)

Plasma, Siero

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L

20 - 150

17 beta Estradiolo

Siero

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL

Maschi: < 44,0

Femmine:
Fase follicolare : 24,0 - 251,0
Picco metà ciclo : 38,0 - 649,0
Fase luteinica : 24,0 - 312,0
Postmenopausa non sottoposte a HRT : < 28,0
Postmenopausa sottoposte a HRT : < 144,0

17 Idrossi-pregnenolone (SYNLAB)

Siero

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L

Bambini prematuri (26 - 36 settimane):
3460 - 9790
Fino a 6 mesi: 2290 - 31040
6 - 12 mesi: 2210 - 19810
1 - 3 anni: 350 - 7120
> 3 anni: < 4080

VADEMECUM GENERALE

1

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
17 OH Progesterone Siero congelato	6200	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL
Risposta dopo 48 ore

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Femmine adulte:
Fase follicolare: < 1,05
Fase di ovulazione: 0,13 - 1,46
Fase luteale: 0,27 - 2,41
Gravidanza: 2,24 - 9,30
Post-menopausa: < 0,91

Maschi adulti: 0,29 - 2,06

Bambini 1 - 13 anni: < 2,28

Neonati 1 mese - 1 anno: 0,79 - 16,71

1-IDROSSIPIRENE Urine Fine Turno Urine F.T.	7380	LC-MS	8 gg	
---	------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Soggetti professionalmente esposti:
< 2,5 (f.t. / f.s.l.)

1-IDROSSIPIRENE Urine Inizio Turno Urine I.T.	738	LC-MS	8 gg	
---	-----	-------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Soggetti professionalmente esposti:
< 2,5 (f.t. / f.s.l.)

2,5 ESANDIONE LIBERO Urine Fine Turno Urine F.T.	7174	LC-MS	8 gg	
--	------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti professionalmente esposti a
n-esano:
< 0,5 (f.t.)

2,5 ESANDIONE LIBERO Urine Inizio Turno Urine I.T.	7173	LC-MS	8 gg	
--	------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti professionalmente esposti a
n-esano:
< 0,5 (f.t.)

21 Deossicortisolo (SYNLAB) Siero	855	LC-MS	16 gg	
---	-----	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L

20 - 150

VADEMECUM GENERALE

2

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
21 Idrossilasi Abs (SYNLAB)	392	RIP	26 gg	

Siero congelato

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ratio Fino a 10,00

3 METILISTIDINA Plasmatica (SYNLAB)	856	LC/MS	16 gg	
--	------------	--------------	--------------	--

Plasma EDTA congelato

Quantità da prelevare: 1 mL

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

3 METILISTIDINA Urine (SYNLAB)	8561	LC-MS	16 gg	
---------------------------------------	-------------	--------------	--------------	--

Urine

Quantità da prelevare: 5 mL

Congelare

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

3-METOSSITIRAMINA LIBERA	2349	LC-MS	8 gg	
---------------------------------	-------------	--------------	-------------	--

Plasma EDTA congelato

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L Fino a 30,0

A.Anti Ameba (AMEBIASI) (SYNLAB)	13214	FIA	11 gg	
---	--------------	------------	--------------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo < 1/80 Negativo

A.Anti Antigeni Onconeurali	1244	IMMUNODOT	8 gg	
------------------------------------	-------------	------------------	-------------	--

Siero

In caso di consegna tardiva al laboratorio il campione può essere conservato in un luogo fresco (2 - 8 °C) per un massimo di 14 giorni.

Per conservazioni maggiori ai 14 giorni congelare il campione a -20°C

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti-GAD65	Negativo
Anti-Zic4	Negativo
Anti-Tr (DNER)	Negativo
Anti-SOX1	Negativo
Anti-Ma2	Negativo
Anti-Ma1	Negativo
Anti-Amfifisina	Negativo
Anti-CV2 (CRMP5)	Negativo
Anti-Ri	Negativo
Anti-Yo	Negativo
Anti-HuD	Negativo

A.Anti Bartonella Quintana IgG (SYNLAB)	385	FIA	11 gg	
--	------------	------------	--------------	--

Siero

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo < 1/64 Negativo

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Bartonella Quintana IgM (SYNLAB) Siero	386	FIA	11 gg	

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo < 1/20 Negativo

A.Anti BORRELIA BURGDORFERI IgG Siero	1460	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	------	-------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kUA/L
< 10 Negativo
10 - 15 Indeterminato
> 15 Positivo

A.Anti BORRELIA BURGDORFERI IgG su LIQUOR Liquido Cefalorachidiano (LIQCEFRA)	14601	CHEMILUMINESCENZA	4 gg	
---	-------	-------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kUA/L
< 4,5 Negativo
4,5 - 5,5 Indeterminato
> 5,5 Positivo

A.Anti BORRELIA BURGDORFERI IgM Siero	1461	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	------	-------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Index
< 0,9 Negativo
0,9 - 1,1 Indeterminato
> 1,1 Positivo

A.Anti BORRELIA BURGDORFERI IgM su LIQUOR Liquido Cefalorachidiano (LIQCEFRA)	14602	CHEMILUMINESCENZA	4 gg	
---	-------	-------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kUA/L
< 2,5 Negativo
2,5 - 3,5 Indeterminato
> 3,5 Positivo

A.Anti Citrullina Siero	395	CMIA	2 gg	
-----------------------------------	-----	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 5,00 Negativo

A.Anti Delta IgM Siero	6082	EIA	8 gg	
----------------------------------	------	-----	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

A.Anti Epstein Barr VCA IgG Siero	1071	CMIA	2 gg	
---	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

S/CO
< 0,75 Negativo
0,75 - 1,0 Dubbio
≥ 1,00 Positivo

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Epstein Barr VCA IgM Siero	10710	CMIA	2 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

S/CO
< 0,50 Negativo
0,50 - 1,0 Dubbio
≥ 1,0 Positivo

A.Anti Fattore Intrinseco Plasma EDTA, Plasma Citratato, Plasma Eparinato, Siero	1242	ELISA	8 gg	
--	------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 500 µL

In caso di consegna tardiva al laboratorio il campione può essere conservato in un luogo fresco (2 - 8 °C) per un massimo di 14 giorni.

Per conservazioni maggiori ai 14 giorni congelare il campione a -20°C

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

RU/mL < 20,00 Negativo

A.Anti Ghiandole Salivari (SYNLAB) Siero	149	FIA	16 gg	
--	-----	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo < 1/10 Negativo

A.Anti HBcAb (Markers Epatite B) Siero	604	CMIA	2 gg	
--	-----	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Reattivo

A.Anti HBeAb (Markers Epatite B) Siero	603	CMIA	2 gg	
--	-----	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Reattivo

A.Anti HBeAb (Markers Epatite B) per reflex Siero	2296	CMIA	2 gg	
---	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Reattivo

A.Anti HBsAb Quantitativo Siero	6011	CMIA	2 gg	
---	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mIU/mL
< 10 Negativo
> 10 Positivo

A.Anti HCV (Markers Epatite C) Siero	605	CMIA	2 gg	
--	-----	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Reattivo

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Herpes 1-2 IgM Siero	1563	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Index
< 0,90 Negativo
0,90 - 1,10 Dubbio
> 1,10 Positivo

A.Anti Herpes IgG Tipo 8 (SYNLAB) Siero	1565	FIA	16 gg	
---	------	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo < 1/100 Negativo

A.Anti Herpes Tipo 1 IgG Siero	156	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
--	-----	-------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Index
< 0,90 Negativo
0,90 - 1,10 Dubbio
> 1,10 Positivo

A.Anti Herpes Tipo 2 IgG Siero	1560	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
--	------	-------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Index
< 0,90 Negativo
0,90 - 1,10 Dubbio
> 1,10 Positivo

A.Anti HIV 1-2 Siero	1670	CMIA	2 gg	
--------------------------------	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Reattivo

A.Anti HTLV I/II per screening Siero	2675	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	------	-------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

< 0,90 Negativo
0,90 - 1,10 Dubbio
> 1,10 Positivo

A.Anti Istoni Plasma EDTA, Siero	498	IMMUNOENZIMATICO	8 gg	
--	-----	------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

U.A.
< 1,00 Negativo
≥ 1,00 Positivo

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Leptospira Interrogans IgM Siero	1219	CLIA	8 gg	

Quantità da prelevare: 500 µL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 0,90 Negativo
0,90 – 1,10 Indeterminato
> 1,10 Positivo

A.Anti MAG (Glicoproteina mielina associata) Siero	1584	IMMUNOENZIMATICO	16 gg	
--	-------------	-------------------------	--------------	--

Inviare a 2-8° C entro 24h dal prelievo.
Per tempistiche di conservazione superiori alle 24h congelare il campione a -20°C ed inviare il campione congelato.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

BTU < 1000 Negativo

A.Anti Micoplasma Pneumoniae IgG Siero	1600	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
--	-------------	--------------------------	-------------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kAU/L < 10 Negativo
≥ 10 Positivo

A.Anti Micoplasma Pneumoniae IgM Siero	1601	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
--	-------------	--------------------------	-------------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kAU/L < 10 Negativo
≥ 10 Positivo

A.Anti Morbillo IgG Siero	159	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
-------------------------------------	------------	--------------------------	-------------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kAU/L < 13,5 Negativo
13,5 - 16,5 Indeterminato
> 16,5 Positivo

A.Anti Morbillo IgM Siero	1590	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
-------------------------------------	-------------	--------------------------	-------------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Index < 0,9 Negativo
0,9 - 1,1 Indeterminato
> 1,1 Positivo

A.Anti Parotite IgG Siero	162	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
-------------------------------------	------------	--------------------------	-------------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kAU/L < 9 Negativo
9 - 11 Indeterminato
> 11 Positivo

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti Parotite IgM Siero	1620	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Index
< 0,9 Negativo
0,9 - 1,1 Indeterminato
> 1,1 Positivo

A.Anti Parvovirus B19 IgG Siero	1571	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
---	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kUI/L
< 2,00 Negativo
2,00 - 2,49 Indeterminato
≥ 2,50 Positivo

A.Anti Parvovirus B19 IgM Siero	1572	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
---	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Indice
< 0,90 Negativo
0,90 - 1,09 Indeterminato
≥ 1,10 Positivo

A.Anti Pneumococco IgG (SYNLAB) Siero	13215	EIA	21 gg	
---	-------	-----	-------	--

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L
< 3,3

A.Anti Rosolia IgG (Rubeo) Siero	11601	CMIA	2 gg	
--	-------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTICORPI ANTI-ROSOLIA IgG
UI/mL
< 4,9 Negativo
5,0 - 9,9 Dubbio
≥ 10,0 Positivo

A.Anti Rosolia IgM (Rubeo) Siero	11602	CMIA	2 gg	
--	-------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTICORPI ANTI-ROSOLIA IgM
Index
< 1,20 Negativo
1,20 - 1,60 Dubbio
≥ 1,60 Positivo

A.Anti S. Cerevisiae (ASCA) IgA Siero	8923	IMMUNOENZIMATICO	9 gg	
---	------	------------------	------	--

Quantità da prelevare: 0,5 mL
Non è possibile eseguire il test su campioni emolizzati, lipemici, itterici.
Per conservazione superiore ai 5 gg dal prelievo congelare il campione a -20°

Si esegue il venerdì

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

UR/mL
< 20,00

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.Anti S. Cerevisiae (ASCA) IgG Siero	8922	IMMUNOENZIMATICO	9 gg	

Quantità da prelevare: 0,5 mL
Non è possibile eseguire il test su campioni emolizzati, lipemici, itterici.
Per conservazione superiore ai 5 gg dal prelievo congelare il campione a -20°

SYNLAB ITALIA

Si esegue il venerdì

VALORI DI RIFERIMENTO	
UR/mL	< 20,00

A.Anti Schistosoma Mansoni IgG Siero	116	ELISA	8 gg	
--	-----	-------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO	
NTU	< 9,0 Negativo 9,0 - 11,0 Indeterminato > 11,0 Positivo

A.Anti Tireoglobulina Siero	1373	CMIA	2 gg	
---------------------------------------	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO	
UI/mL	< 4,1

A.Anti Tireoperossidasi Siero	1372	CMIA	2 gg	
---	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO	
UI/mL	< 5,6

A.C.E. (Angiotensin Converting Enzyme) Siero	267	ENZIMATICO UV	2 gg	
--	-----	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO	
U/L	20 - 70 Adulti 33 - 112 Bambini

A.C.E. (Angiotensin Converting Enzyme) su Liquor (SYNLAB) Liquor congelato	8980	ENZIMATICO	9 gg	
--	------	------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO	
U/L	< 2,00

A.L.A. Urine Fine Turno (C) Urine F.T.	70219	CROMATOGRAFICO COLORIMETRICO	8 gg	
--	-------	---------------------------------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL
• Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
• Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO		
A.L.A. Urine Fine Turno	mg/g creatinina	Popolazione generale : < 4,5
		Soggetti professionalmente esposti : > 15,0 allontanamento
Creatinina Urinaria Fine Turno	g/L	0.30 - 3.00

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
A.L.A. Urine Inizio Turno (C) Urine I.T.	7029	CROMATOGRAFICO COLORIMETRICO	8 gg	

Quantità da prelevare: 10 mL

• Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.

• Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

A.L.A. Urine Inizio Turno mg/g creatinina Popolazione generale : < 4,5

Soggetti professionalmente esposti :
> 15,0 allontanamento

Creatinina Urinaria Inizio Turno g/L 0,30 - 3,00

Ac.Valproico (Depakin) (Dipropilacetico) Siero	671	IMMUNOTURBIDIMETRIA	2 gg	
--	-----	---------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/mL Livello terapeutico :
50 - 100

Acacia Longifolia (Acacia) Siero	6T19	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Acarus Siro Siero	6D70	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-----------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Acciuga Siero	6F313	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Acer Negundo (Acero) Siero	6T1	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

ACETATO DI BUTILE Urine Fine Turno Urine F.T.	7610	GC	8 gg	
---	------	----	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

• Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.

• Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L Soggetti professionalmente esposti:
Valore limite non proposto

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ACETATO DI BUTILE Urine Inizio Turno Urine I.T.	761	GC	8 gg	

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti professionalmente esposti:
Valore limite non proposto

ACETATO DI ETILE Urine Fine Turno Urine F.T.	7310	GC	8 gg	
--	------	----	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti professionalmente esposti:
Valore limite non proposto

ACETATO DI ETILE Urine Inizio Turno Urine I.T.	731	GC	8 gg	
--	-----	----	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti professionalmente esposti:
Valore limite non proposto

Acetazolamide (SYNLAB) Siero	1118	HPLC	6 gg	
--	------	------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

10,0 - 20,0

ACETONE Urine Fine Turno Urine F.T.	72919	GC	8 gg	
---	-------	----	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti professionalmente esposti :
Acetone : < 25 (f.t.)
Isopropanolo : < 40 (f.t. / f.s.l.)

ACETONE Urine Inizio Turno Urine I.T.	7299	GC	8 gg	
---	------	----	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti professionalmente esposti :
Acetone : < 25 (f.t.)
Isopropanolo : < 40 (f.t. / f.s.l.)

Acidi Biliari Siero	288	ENZIMATICO	2 gg	
-------------------------------	-----	------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

μmol/L

2,0 - 10,0

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ACIDI GRASSI A CATENA LUNGA E RAPPORTO OMEGA (SYNLAB)	540	GC	22 gg	

Siero congelato

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Acidi Grassi a catena lunghissima (SYNLAB)	79983	GC-MS	16 gg	
---	--------------	--------------	--------------	--

Siero congelato

Quantità da prelevare: 2 mL

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Acidi grassi non esterificati (SYNLAB)	424	ENZIMATICO	16 gg	
---	------------	-------------------	--------------	--

Siero congelato

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

μmol/L

Fino a 2000 durante il digiuno
< 300 Postprandiale

ACIDI METILIPPURICI Urine Fine Turno	7199	HPLC	8 gg	
---	-------------	-------------	-------------	--

Urine F.T.

Quantità da prelevare: 1 mL

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 791 CREATININA URINE FINE TURNO

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDI METILIPPURICI Urine Fine Turno	g/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti a Xileni: < 0,3 (f.t.)
Creatinina Urine Fine Turno	g/L	0,30 - 3,00

ACIDI METILIPPURICI Urine Inizio Turno	7109	HPLC	8 gg	
---	-------------	-------------	-------------	--

Urine I.T.

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.

- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 791 CREATININA URINE FINE TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDI METILIPPURICI Urine Inizio Turno	g/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti a Xileni: < 0,3 (f.t.)
Creatinina Urine Inizio Turno	g/L	0,30 - 3,00

Acidi organici Urinari (SYNLAB)	79981	LCMS	10 gg	
--	--------------	-------------	--------------	--

Urine Congelate

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ACIDO 2-BUTOSSIACETICO Urine Fine Turno	1633	GC	12 gg	
--	-------------	-----------	--------------	--

Urine F.T.

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.

- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO 2-BUTOSSIACETICO Urine Fine Turno	mg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti a 2-butossietanolo: < 200 (f.t.)
Creatinina Urine Fine Turno	g/L	0,30 - 3,00

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ACIDO 2-BUTOSSIACETICO Urine Inizio Turno Urine I.T.	1632	GC	12 gg	

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO 2-BUTOSSIACETICO Urine Inizio Turno	mg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti a 2-butossietanolo:
		< 200 (f.t.)
Creatinina Urine Inizio Turno	g/L	0,30 - 3,00

ACIDO 2-METOSSIACETICO Urine Fine Turno (SYNLAB) Urine F.T.	1557	GC/MS	21 gg	
---	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ACIDO 2-METOSSIACETICO Urine Inizio Turno (SYNLAB) Urine I.T.	1556	GC/MS	21 gg	
---	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Acido 5 OH Indolacetico urine 24H Urine 24h Acidificate	631	HPLC	7 gg	
---	-----	------	------	--

La raccolta del campione di urine delle 24 h prevede l' acidificazione delle urine stesse. L' acidificazione viene effettuata versando nel recipiente, prima di iniziare la raccolta, circa 5 ml di HCl 5 M per ogni litro di urina (4 cucchiari di acido muriatico del commercio). Prelevare un'aliquota di circa 10 ml di urina delle 24 h acidificata, con l' indicazione della diuresi totale ed inviare in apposito contenitore di trasporto.

Risposta dopo 24 h.

A partire dalle 48 ore precedenti l'inizio e per tutto il tempo di raccolta delle urine è necessario osservare una dieta priva dei seguenti alimenti: ananas, avocado, banane, kiwi, more, prugne rosse, melanzane, pomodori, frutta secca, caffè, tè, cioccolato. Durante questo periodo si consiglia, previa consultazione del medico, di evitare l'assunzione di farmaci, in caso contrario, è opportuno comunicare il nome dei farmaci assunti al momento dell'esame

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h 2,0 - 9,0

Acido 5 OH Indolacetico urine 24H II camp. Urine 24h Acidificate	6312	HPLC	7 gg	
--	------	------	------	--

La raccolta del campione di urine delle 24 h prevede l' acidificazione delle urine stesse. L' acidificazione viene effettuata versando nel recipiente, prima di iniziare la raccolta, circa 5 ml di HCl 5 M per ogni litro di urina (4 cucchiari di acido muriatico del commercio). Prelevare un'aliquota di circa 10 ml di urina delle 24 h acidificata, con l' indicazione della diuresi totale ed inviare in apposito contenitore di trasporto.

Risposta dopo 24 h.

A partire dalle 48 ore precedenti l'inizio e per tutto il tempo di raccolta delle urine è necessario osservare una dieta priva dei seguenti alimenti: ananas, avocado, banane, kiwi, more, prugne rosse, melanzane, pomodori, frutta secca, caffè, tè, cioccolato. Durante questo periodo si consiglia, previa consultazione del medico, di evitare l'assunzione di farmaci, in caso contrario, è opportuno comunicare il nome dei farmaci assunti al momento dell'esame

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24 h 2,0 - 9,0

Acido aminoadipico (SYNLAB) Plasma Eparinato	860	LC-MS	16 gg	
--	-----	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Acido aminoadipico urinario (SYNLAB) Urine	8601	HPLC	16 gg	
--	------	------	-------	--

Quantità da prelevare: 5 mL

Congelare

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ACIDO ASPARTICO Plasmatico (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	861	LC/MS	15 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ACIDO ASPARTICO Urinario (SYNLAB) Urine Congelate	8611	LC-MS	15 gg	
---	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Acido beta idrossibutirrico (SYNLAB) Siero congelato	393	ENZIMATICO	16 gg	
--	-----	------------	-------	--

Quantità da prelevare: 2 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ACIDO FENILGLIOSSILICO Urine Fine Turno (C) Urine F.T.	71299	HPLC	8 gg	
--	-------	------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL
L'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) non prevede un valore di riferimento per il singolo metabolita, consiglia, come indicatore biologico di esposizione (IBE) a stirene e a etilbenzene, il dosaggio dell'acido mandelico sommato all'acido fenilgliossilico (nuovi esami cod.1624 - cod.1625).

SYNLAB ITALIA

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO FENILGLIOSSILICO Urine Fine Turno	mg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti: Valore limite non proposto
Creatinina Urine Fine Turno	g/L	0,30 - 3,00

ACIDO FENILGLIOSSILICO Urine Inizio Turno (C) Urine I.T.	7129	HPLC	8 gg	
--	------	------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL
L'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) non prevede un valore di riferimento per il singolo metabolita, consiglia, come indicatore biologico di esposizione (IBE) a stirene e a etilbenzene, il dosaggio dell'acido mandelico sommato all'acido fenilgliossilico (nuovi esami cod.1624 - cod.1625).

SYNLAB ITALIA

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO FENILGLIOSSILICO Urine Inizio Turno	mg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti: Valore limite non proposto
Creatinina Urine Inizio Turno	g/L	0,30 - 3,00

Acido Fitanico (SYNLAB) Siero	8997	GC-MS	16 gg	
---	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Acido Folico (Folati) Siero	662	CMIA	1 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL < 3,5 Carenza

ACIDO FORMICO Urine Fine Turno (C) Urine F.T.	7280	ENZIMATICO UV	6 gg	
---	------	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 791 CREATININA URINE FINE TURNO

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO FORMICO Urine Fine Turno	mg/gr creatinina	Popolazione generale : 3 - 30
		Soggetti professionalmente ESPOSTI : < 80
Creatinina Urine Fine Turno	g/L	0,30 - 3,00

ACIDO FORMICO Urine Inizio Turno (C) Urine I.T.	728	ENZIMATICO UV	6 gg	
---	-----	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO FORMICO Urine Inizio Turno	mg/g creatinina	Popolazione generale : 3 - 30
		Soggetti professionalmente ESPOSTI : < 80
Creatinina Urine Inizio Turno	g/L	0,30 - 3,00

ACIDO GAMMA-AMMINOBUTIRRICO (GABA) Plasmatico (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	522	LC/MS	15 gg	
--	-----	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 2 mL

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ACIDO GLUTAMMICO Plasmatico (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	862	LC/MS	15 gg	
--	-----	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ACIDO GLUTAMMICO Urinario (SYNLAB) Urine Congelate	8621	LC-MS	15 gg	
--	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ACIDO IPPURICO Urine Fine Turno (C) Urine F.T.	70991	HPLC	8 gg	

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 791 CREATININA URINE FINE TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO IPPURICO Urine Fine Turno	g/g creatinina	Popolazione generale : < 1,17
		Si consiglia il dosaggio dell'orto-cresolo urinario quale indicatore biologico di esposizione a Toluene
Creatinina Urinaria Fine Turno	g/L	0,30 - 3,00

ACIDO IPPURICO Urine Inizio Turno (C) Urine I.T.	7099	HPLC	8 gg	
--	-------------	-------------	-------------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO IPPURICO Urine Inizio Turno	g/g creatinina	Popolazione generale : < 1,17
		Si consiglia il dosaggio dell'orto-cresolo urinario quale indicatore biologico di esposizione a Toluene
Creatinina Urine Inizio Turno	g/L	0,30 - 3,00

ACIDO MANDELICO + ACIDO FENILGLOSISSILICO Urine Fine Turno Urine F.T.	1625	HPLC	8 gg	
---	-------------	-------------	-------------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ac. Mandelico + Ac. Fenilglossilico FT	mg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti : Etilbenzene - Stirene : < 150 (f.t.)
Creatinina Urine Fine Turno	g/L	0,30 - 3,00

ACIDO MANDELICO + ACIDO FENILGLOSISSILICO Urine Inizio Turno Urine I.T.	1624	HPLC	8 gg	
---	-------------	-------------	-------------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ac. Mandelico + Ac. Fenilglossilico IT	mg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti : Etilbenzene - Stirene : < 150 (f.t.)
Creatinina Urine Inizio Turno	g/L	0,30 - 3,00

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ACIDO MANDELICO Urine Fine Turno (C) Urine F.T.	71119	HPLC	22 gg	

Quantità da prelevare: 10 mL

L'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) non prevede un valore di riferimento per il singolo metabolita, consiglia, come indicatore biologico di esposizione (IBE) a stirene e a etilbenzene, il dosaggio dell'acido mandelico sommato all'acido fenilgliossilico (nuovi esami cod.1624 – cod.1625).

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 791 CREATININA URINE FINE TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO MANDELICO Urine Fine Turno	mg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti: Valore limite non proposto
Creatinina Urine Fine Turno	g/L	0,30 - 3,00

SYNLAB ITALIA

ACIDO MANDELICO Urine Inizio Turno (C) Urine I.T.	7119	HPLC	22 gg	
---	------	------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

L'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) non prevede un valore di riferimento per il singolo metabolita, consiglia, come indicatore biologico di esposizione (IBE) a stirene e a etilbenzene, il dosaggio dell'acido mandelico sommato all'acido fenilgliossilico (nuovi esami cod.1624 – cod.1625).

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 791 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO MANDELICO Urine Inizio Turno	mg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti: Valore limite non proposto
Creatinina Urine Inizio Turno	g/L	0,30 - 3,00

SYNLAB ITALIA

Acido Metil Malonico (SYNLAB) Siero	1064	LC-MS	11 gg	
---	------	-------	-------	--

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/L	Fino a 47
--	------	-----------

ACIDO MICO FENOLICO (MICO FENOLATO) Siero	555	LC-MS	6 gg	
---	-----	-------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

Il prelievo non può essere effettuato in provette con gel separatore in quanto quest'ultimo può modificare il dosaggio del farmaco nel siero e quindi il risultato dell'esame effettuato con queste provette non è attendibile.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	1,0 - 4,0
--	------	-----------

Acido Omogentisico (SYNLAB) Urine	1123	LC-MS	16 gg	
---	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Acido Omovanillico urine 24H Urine 24h Acidificate	6330	HPLC	7 gg	
--	------	------	------	--

La raccolta del campione di urine delle 24 h prevede l' acidificazione delle urine stesse. L' acidificazione viene effettuata versando nel recipiente, prima di iniziare la raccolta, circa 5 ml di HCl 5 M per ogni litro di urina (4 cucchiaini di acido muriatico del commercio). Prelevare un'aliquota di circa 10 ml di urina delle 24 h acidificata, con l' indicazione della diuresi totale ed inviare in apposito contenitore di trasporto.
Risposta dopo 24 h

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/24h	Fino a 6,9
--	--------	------------

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ACIDO S-FENILMERCAPTURICO Urine Fine Turno Urine F.T.	1273	LC-MS	8 gg	

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO S-FENILMERCAPTURICO Urine Fine Turno	µg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti a benzene: < 25 (f.t.)
Creatinina Urine Fine Turno	g/L	0,30 - 3,00

ACIDO S-FENILMERCAPTURICO Urine Inizio Turno Urine I.T.	6309	LC-MS	8 gg	
---	-------------	--------------	-------------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO S-FENILMERCAPTURICO Urine Inizio Turno	µg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti a benzene: < 25 (f.t.)
Creatinina Urine Inizio Turno	g/L	0,30 - 3,00

ACIDO TRANS, TRANS-MUCONICO Urine Fine Turno (C) Urine F.T.	7960	LC-MS	8 gg	
---	-------------	--------------	-------------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE FINE TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO TRANS, TRANS-MUCONICO Urine Fine Turno	µg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti a benzene: < 500 (f.t.)
Creatinina Urine Fine Turno	g/L	0,30 - 3,00

ACIDO TRANS,TRANS-MUCONICO Urine Inizio Turno (C) Urine I.T.	796	LC-MS	8 gg	
--	------------	--------------	-------------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

ACIDO TRANS, TRANS-MUCONICO Urine Inizio Turno	µg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti a benzene: < 500 (f.t.)
Creatinina Urine Inizio Turno	g/L	0,30 - 3,00

ACIDO TRICLOROACETICO (ATA) - (T.C.A.) Urine Inizio Turno Urine I.T.	707	GC	8 gg	
--	------------	-----------	-------------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Soggetti professionalmente esposti a Tricloroetilene: < 15 (f.t./f.s.l.)
--	------	--

ACIDO TRICLOROACETICO (ATA)- (T.C.A.) Urine Fine Turno Urine F.T.	7070	GC	8 gg	
---	-------------	-----------	-------------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Soggetti professionalmente esposti a Tricloroetilene: < 15 (f.t./f.s.l.)
--	------	--

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Acido Vanilmandelico urine 24H Urine 24h Acidificate	629	HPLC	7 gg	

La raccolta del campione di urine delle 24 h prevede l' acidificazione delle urine stesse. L' acidificazione viene effettuata versando nel recipiente, prima di iniziare la raccolta, circa 5 ml di HCl 5 M per ogni litro di urina (4 cucchiari di acido muriatico del commercio). Prelevare un'aliquota di circa 10 ml di urina delle 24 h acidificata, con l' indicazione della diuresi totale ed inviare in apposito contenitore di trasporto.

Risposta dopo 24 h

A partire dalle 48 ore precedenti l'inizio e per tutto il tempo di raccolta delle urine è necessario osservare una dieta priva dei seguenti alimenti: avocado, banane, kiwi, frutta secca, caffè, tè, cioccolato. Durante questo periodo si consiglia, previa consultazione del medico, di evitare l'assunzione di farmaci, in caso contrario, è opportuno comunicare il nome dei farmaci assunti al momento dell'esame.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h < 6,6

Acquaporina IgG (SYNLAB) Siero	1635	FIA	8 gg	
--	------	-----	------	--

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo < 1/10 Negativo

ACRILONITRILE Urine Fine Turno Urine F.T.	7972	GC	8 gg	
---	------	----	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L Soggetti professionalmente esposti:
Valore limite non proposto

ACRILONITRILE Urine Inizio Turno Urine I.T.	7971	GC	8 gg	
---	------	----	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L Soggetti professionalmente esposti:
Valore limite non proposto

ACTH Plasma EDTA congelato	640	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
--------------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L < 46

ACTH Post prandiale solo per Spoke Plasma EDTA congelato	1376	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
--	------	-------------------	------	--

Separare in centrifuga refrigerata

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L

Actinomiceti Esame Colturale Materiale Bioptico (BIOPT), Espettorato, Liquidi Cavitari, Pus, Tampone da Ascesso	B8967	COLTURALE	8 gg	
---	-------	-----------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Adenosina Deaminasi (SYNLAB) Siero	370	EIA	8 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

nmol/min/mL 1,0 - 3,0

ADIPONECTINA (SYNLAB) Siero congelato	1316	EIA	16 gg	
---	------	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Maschi:	Femmine:
0 - 7 anni: 2,3 - 26,5	0 - 7 anni: 2,3 - 26,5
8 - 9 anni: 4,0 - 14,9	8 - 9 anni: 4,0 - 14,9
10 - 11 anni: 4,0 - 13,8	10 - 11 anni: 4,0 - 13,8
12 - 13 anni: 4,5 - 13,2	12 - 13 anni: 4,5 - 13,2
14 - 15 anni: 3,7 - 13,7	14 - 15 anni: 3,7 - 13,7
16 - 20 anni: 4,0 - 19,4	16 - 20 anni: 4,0 - 19,4
oltre i 21 anni: 2,0 - 13,9	oltre i 21 anni: 4,0 - 19,4

ADRENALINA - NORADRENALINA plasmatica Plasma EDTA congelato	7870	HPLC	7 gg	
---	------	------	------	--

Quantità da prelevare: 3 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ADRENALINA	pg/mL	Clino : fino a 111 Orto : fino a 141
NORADRENALINA	pg/mL	Clino : 70 - 750 Orto : 200 - 1700

Adrenocorticoidi ABS (SYNLAB) Siero	1146	FIA	11 gg	
---	------	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo < 1/10 Negativo

Aedes Communis (Zanzara) Siero	6171	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Agglutinine a Frigore Siero	031	AGGLUTINAZIONE IN PROVETTA	3 gg	
---------------------------------------	-----	----------------------------	------	--

Quantità da prelevare: 2 mL
- eseguire il prelievo utilizzando materiale termostato a 37 °C;
- utilizzare provette senza anticoagulante;
- mantenere il campione a 37 °C fino al momento della separazione;
- centrifugare il campione, separare immediatamente il siero ed inviare una aliquota di almeno 2 ml;
- il campione separato deve essere conservato a 2 - 8 °C.
Risposta dopo 24 h

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Assenti

Aglio Siero	6F47	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-----------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Agrostis Alba (Agrostide) Siero	6G9	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

ALANINA Plasmatica (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	822	LC/MS	15 gg	
---	-----	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ALANINA Urine (SYNLAB) Urine Congelate	8221	LC-MS	15 gg	
--	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Albicocca Siero	6F237	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Album Siero	6F1	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-----------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Albuminemia Siero	2602	COLORIMETRICO	1 gg	
-----------------------------	------	---------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

g/dL 3,4 - 5,0

ALCOOL BUTILICO Urine Fine Turno Urine F.T.	7320	GC	8 gg	
---	------	----	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

• Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
• Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ALCOOL BUTILICO Urine Fine Turno	mg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti: < 2 (i.t.) - < 10 (f.t.)
Creatinina Urine Fine Turno	g/L	0,30 - 3,00

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ALCOOL BUTILICO Urine Inizio Turno Urine I.T.	732	GC	8 gg	

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ALCOOL BUTILICO Urine Inizio Turno	mg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti: < 2 (i.t.) - < 10 (f.t.)
Creatinina Urine inizio turno	g/L	0,30 - 3,00

ALCOOL ISOBUTILICO Urine Fine Turno Urine F.T.	73211	GC	8 gg	
--	-------	----	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Soggetti professionalmente esposti: Valore limite non proposto
--	------	---

ALCOOL ISOBUTILICO Urine Inizio Turno Urine I.T.	73210	GC	8 gg	
--	-------	----	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	Soggetti professionalmente esposti: Valore limite non proposto
--	------	---

Aldolasi Siero	303	ENZIMATICO UV	2 gg	
--------------------------	-----	---------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	U/L	< 7,6
--	-----	-------

Aldosterone 24h Urine 24h	625	CHEMILUMINESCENZA	6 gg	
-------------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 4 mL
Non si esegue il sabato

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/24h	1,19 - 28,10
--	--------	--------------

Aldosterone in Clinostatismo Plasma EDTA congelato	6220	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
--	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 2 mL
Il paziente deve rimanere supino per almeno 2 ore. Centrifugare rapidamente (entro 30 minuti) a temperatura ambiente, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	ng/L	11,7 - 236,0
--	------	--------------

Aldosterone in Ortostatismo Plasma EDTA congelato	622	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
---	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 2 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 minuti) a temperatura ambiente, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	ng/L	22,0 - 353,0
--	------	--------------

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Alfa 1 Antitripsina feci (SYNLAB) Feci	1151	EIA	9 gg	

Quantità da prelevare: 5 grammi

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L < 260

Alfa 1 Fetoproteina Siero	651	CMIA	2 gg	
-------------------------------------	-----	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL Maschi: 0,00 - 8,70
Femmine:
Donne : 0,00 - 8,70
Donne in gravidanza : (Mediana)
15 settimana : 32,17
16 settimana : 36,86
17 settimana : 42,24
18 settimana : 48,40
19 settimana : 55,45
20 settimana : 63,53
21 settimana : 72,80

Alfa 1 Fetoproteina (Liq. Amniotico) Liquido Amniotico Congelato	65100	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
--	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Settimana di gestazione	Mediana	2,0MoM
2,5MoM 3,0MoM		
15 settimana :	17,3	
34,6 43,3	51,9	
16 settimana :	14,3	
28,6 35,8	42,9	
17 settimana :	11,9	
23,8 29,8	35,7	
18 settimana :	9,8	
19,6 24,5	29,4	
19 settimana :	8,1	
16,2 20,3	24,3	
20 settimana :	6,7	
13,4 16,8	20,1	

Alfa 1 Microglobulina Urine Mattino	525	NEFELOMETRIA	2 gg	
---	-----	--------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L < 12,0

Alfa 2 Macroglobulina Siero	1311	IMMUNONEFELOMETRIA	3 gg	
---------------------------------------	------	--------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L 1,30 - 3,00

Alfa Latto-albumina Siero	6F76	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Alfa-1 Antitripsina Siero	130	IMMUNONEFELOMETRIA	2 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L 0,9 - 2,0

Alfa-1-Glicoproteina (Mucoproteina) Siero	105	IMMUNOTURBIDIMETRIA	2 gg	
---	-----	---------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L 0,58 - 1,55

ALFA-AMILASI Siero	6K87	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Algoritmo R.O.M.A. Post-menopausa Siero	1417	CALCOLO DERIVATO	2 gg	
---	------	------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

%
Valore R.O.M.A. < 25,3% :
Basso rischio di carcinoma
epiteliale ovarico

Valore R.O.M.A. > o = 25,3% :
Alto rischio di carcinoma
epiteliale ovarico

Algoritmo R.O.M.A. Pre-menopausa Siero	1415	CALCOLO DERIVATO	2 gg	
--	------	------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

%
Valore R.O.M.A. < 7,4% :
Basso rischio di carcinoma
epiteliale ovarico

Valore R.O.M.A. > o = 7,4% :
Alto rischio di carcinoma
epiteliale ovarico

Alloro Plasma, Siero	6F278	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

ALLUMINIO Sierico Siero	7191	ASSORBIMENTO ATOMICO (AA)	8 gg	
-----------------------------------	------	------------------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

Utilizzare provetta specifica Metal Free (cod. SAP 600068373).

Subito dopo il prelievo la provetta non deve essere aperta, travasata o aliquotata, ma inviata tale quale al laboratorio

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L Popolazione generale:
< 6

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ALLUMINIO Urine Fine Turno Urine F.T.	7190	ASSORBIMENTO ATOMICO	8 gg	

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 791 CREATININA URINE FINE TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

ALLUMINIO Urine Fine Turno	µg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti: < 50 (f.t. / f.s.l.)
Creatinina Urine Fine Turno	g/L	0,30 - 3,00

ALLUMINIO Urine Inizio Turno Urine I.T.	719	ASSORBIMENTO ATOMICO	8 gg	
---	-----	----------------------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

ALLUMINIO Urine Inizio Turno	µg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti: < 50 (f.t. / f.s.l.)
Creatinina Urine Inizio Turno	g/L	0,30 - 3,00

Alnus Incana (Ontano) Siero	6T2	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---------------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

Alopecurus Pratensis (Codina di Prato) Siero	6G16	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

Alpha-Gal Galactose-alpha-1,3-galactose (alpha-Gal) Thyroglobulin,bovine Siero	5O215	ImmunoCAP	5 gg	
--	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	KUA/L	< 0,10
--	-------	--------

ALT (GPT) Siero	2901	IFCC	1 gg	
---------------------------	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

	U/L	< 55
--	-----	------

Alt a1 Alternaria alternata Siero	5M229	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	KUA/L	< 0,10
--	-------	--------

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Alternaria alternata (tenuis) Siero	6M6	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

AMARANTO (AMARANTHUS RETROFLEXUS) Siero	6W14	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Amb a1 Ambrosia elatior Siero	5W230	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Ambrosia Elatior (Comune) Siero	6W1	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Ambrosia Occidentale Siero	6W2	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Ambrosia Trifida (Ambrosia Gigante) Siero	6W3	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Amfetamine / Metamfetamine / MDMA (Ecsatsy) test di conferma su urine	6353	LC-MS-MS	8 gg	

Urine

Quantità da prelevare: 20 ml aliquote B e C
Se il campione è inviato dopo le 24 ore dalla raccolta congelare a - 20 °C.
Il sabato è da escludere dal conteggio degli 8 giorni di refertazione

SYNLAB ITALIA

Per l' esecuzione di questo esame è necessario inviare i campioni con catena di custodia. Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

VALORI DI RIFERIMENTO

AMFETAMINA	ng/mL	Fino a 250 Negativo
METAMFETAMINA	ng/mL	Fino a 250 Negativo
MDMA	ng/mL	Fino a 250 Negativo
MDA	ng/mL	Fino a 250 Negativo
MDEA	ng/mL	Fino a 250 Negativo
MBDB	ng/mL	Fino a 250 Negativo

Amfetamine/Metamfetamine matrice urinaria	6337	IMMUNOENZIMATICO	3 gg	
Urine				

VALORI DI RIFERIMENTO

Amfetamine/Metamfetamine	ng/mL	Fino a 500 Negativo
--------------------------	-------	------------------------

Amfetamine/Metamfetamine matrice urinaria - Valenza clinica	6337CL	IMMUNOENZIMATICO	3 gg	
Urine				

VALORI DI RIFERIMENTO

Amfetamine/Metamfetamine	ng/mL	Fino a 500 Negativo
--------------------------	-------	------------------------

Amfetamine/Metamfetamine/MDMA ((Ecstasy) matrice pilifera	1080	LC-MS-MS	13 gg	
Capelli				

Quantità da prelevare: DIAMETRO CIOCCA 1 CM DIVISO IN 2 ALIQUOTE
Eseguire il prelievo secondo procedura ed inviare i campioni con catena di custodia.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

AMFETAMINE		
Amfetamina	ng/mg	Fino a 0,2
Metamfetamina	ng/mg	Fino a 0,2
METILENDIOSSIANFETAMINE		
MDMA	ng/mg	Fino a 0,2
MDA	ng/mg	Fino a 0,2
MDEA	ng/mg	Fino a 0,2
MBDB	ng/mg	Fino a 0,2

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Amfetamine/Metamfetamine/MDMA matrice pilifera - Valenza Clinica	1080CL	LC-MS-MS	13 gg	

Capelli

Quantità da prelevare: Diametro ciocca 1 cm diviso in 2 aliquote
Eeguire il prelievo secondo procedura ed inviare i campioni con catena di custodia.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

AMFETAMINE		
Amfetamina	ng/mg	Fino a 0,2
Metamfetamina	ng/mg	Fino a 0,2
METILENDIOSSIANFETAMINE		
MDMA	ng/mg	Fino a 0,2
MDA	ng/mg	Fino a 0,2
MDEA	ng/mg	Fino a 0,2
MDBD	ng/mg	Fino a 0,2

AMH Anti Mullerian Hormone	453	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-----------------------------------	-----	-------------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L	Maschi: > 18 anni : 0,73 - 16,05 Pediatrici (fino a 60 giorni) : 15,11 - 266,59	Femmine: 18 - 25 anni : 0,96 - 13,34 26 - 30 anni : 0,17 - 7,37 31 - 35 anni : 0,07 - 7,35 36 - 40 anni : 0,03 - 7,15 41 - 45 anni : < 3,27 > 45 anni : < 1,15 Pediatrici (fino a 60 giorni) : < 3,39
------	---	--

Amicacina (SYNLAB)	347	KIMS	6 gg	
---------------------------	-----	------	------	--

Siero congelato

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L	< 5,0 Concentrazione minima 20,0 – 40,0 Concentrazione massima
------	---

Amilasemia (Alfa-Amilasi)	310	ENZIMATICO	1 gg	
----------------------------------	-----	------------	------	--

Siero

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L	< 100
-----	-------

Amilasi Isoenzimi	307	CALCOLO DERIVATO	3 gg	
--------------------------	-----	------------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Amilasi	U/L	31 - 107
Amilasi pancreatica	U/L	< 53
Amilasi salivare	U/L	< 47

Amilasi Pancreatica	3100	IFCC	1 gg	
----------------------------	------	------	------	--

Siero

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L	< 51
-----	------

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Amilasuria Urine 24h	311	ENZIMATICO	2 gg	

Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo

VALORI DI RIFERIMENTO

U/ora 1 - 17

AMILOIDE A Siero	574	NEFELOMETRIA	4 gg	
----------------------------	-----	--------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L < 6,4

AMINOACIDI Plasma (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	7996	LC/MS	29 gg	
--	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 5 mL
Centrifugare rapidamente (< 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

AMINOACIDI Urine (SYNLAB) Urine Congelate	79960	LC-MS	29 gg	
---	-------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Amiodarone e metabolita (SYNLAB) Siero	6250	LC/MS	6 gg	
--	------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Amiodarone mg/L 0,70 - 2,50
Desetilamiodarone mg/L

Amitriptilina + Nortriptilina (SYNLAB) Siero	842	LC-MS	9 gg	
--	-----	-------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Amitriptilina µg/L Valore di riferimento non proposto
Nortriptilina µg/L 70 - 170
Amitriptilina + Nortriptilina µg/L 80 - 200

AMMINE AROMATICHE Urine Fine Turno Urine F.T.	7400	CROMATOGRAFICO COLORIMETRICO	8 gg	
---	------	---------------------------------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL
• Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
• Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L
Popolazione generale:
< 1,5

Soggetti professionalmente esposti:
Valore limite non proposto

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
AMMINE AROMATICHE Urine Inizio Turno Urine I.T.	740	CROMATOGRAFICO COLORIMETRICO	8 gg	

Quantità da prelevare: 10 mL

• Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.

• Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Popolazione generale:
< 1,5

Soggetti professionalmente esposti:
Valore limite non proposto

Ammoniemia Plasma EDTA congelato	292	GLUTAMMATO DEIDROGENASI	2 gg	
--	-----	----------------------------	------	--

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/dL

31,00 - 123,00

Amoxicillina Siero	6C6	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione

kU/L

Classe

Ampicillina Siero	6C5	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-----------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione

kU/L

Classe

Amplificazione e sequenziamento della regione codificante del gene APC Sangue Intero EDTA	8362	PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO	31 gg	
---	------	---------------------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ana o3 Anacardium occidentale Siero	5F443	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L

< 0,10

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANA REFLEX Siero	2299	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	8 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL
Se Ab Anti-DNA Nativo Quantitativo ≥ 5 aggiunto codice 2300 Anticorpi Anti-dsDNA reflex

SYNLAB ITALIA

Solo per profilo ANA REFLEX (cod. 2299R). Non accettabile singolarmente.

VALORI DI RIFERIMENTO		
Ab Anti-ENA Screen (9 antigeni)		Negativo
Ab Anti-ENA Antigene Ssa (Ro) 52 kD	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo
Ab Anti-ENA Antigene Ssa (Ro) 60 kD	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo
Ab Anti-ENA Antigene Ssb (La)	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo
Ab Anti-ENA Antigene Scl-70	A.I.(Antic. Index)	< 0.70 Negativo 0,70 - 1,00 Indeterminato > 1,00 Positivo
Ab Anti-ENA Antigene Sm/RNP	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo
Ab Anti-ENA Antigene Sm	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo
Ab Anti-ENA Antigene RNP	A.I.(Antic. Index)	< 0.70 Negativo 0,70 - 1,00 Indeterminato > 1,00 Positivo
Ab Anti-Antigene Jo-1	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo
Ab Anti-DNA Nativo Quantitativo	kU/L	< 5,00 Negativo 5,00 - 10,00 Indeterminato ≥ 10,00 Positivo

Anacardia Plasma, Siero	6F202	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-----------------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO	
Concentrazione	kU/L
Classe	

Analisi mirata di mutazione familiare Sangue Intero EDTA	8370	PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO	11 gg	
--	------	---------------------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + INF_GEN09

SYNLAB ITALIA

Inserire obbligatoriamente nella notizia clinica NOTE la mutazione richiesta ed il Gene da analizzare

VALORI DI RIFERIMENTO	
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche	

Analisi vuota per blocco referto	BR		1 gg	
---	----	--	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Ananas Siero	6F210	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO	
Concentrazione	kU/L
Classe	

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANDROSTENEDIOLO GLUCORONIDE	6375	ELISA	7 gg	

Siero congelato

Quantità da prelevare: 2 mL
Centrifugare rapidamente entro 30 minuti, separare e congelare

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L Maschi: 1,53 - 14,82
Femmine:
Premenopausa : 0,22 - 4,64
Postmenopausa : 0,61 - 3,71
Pubertà : 0,51 - 4,03

Angiotensina II (SYNLAB)	6241	CLIA	16 gg	
Plasma EDTA congelato				
Quantità da prelevare: 2 mL Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.				SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L 25 - 60

Anguria	6F329	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Siero				
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Anice	6F271	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Plasma, Siero				
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

ANISAKIS IgG (SYNLAB)	410	EIA	11 gg	
Siero				
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ratio < 1,000 Negativo
> 1,000 Positivo

Anisakis Simplex	6P4	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Siero				
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Annexina V IgG (SYNLAB)	1126	ELETTROIMMUNODIFFUSIO NE	13 gg	
Siero				
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

ANO - CONDILOMI	IN10285	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
CIT-ANO				
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 25_AP1				SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANO - EMORROIDECTOMIA/RESEZ RETTALE STARR CIT-ANO	IN10000	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 25_AP1

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

ANO - FISTOLA ANALE CIT-ANO	IN10027	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
---------------------------------------	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 25_AP1

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e
cliniche

ANO - NEWPAP - DNA: MONOSTRATO + HPV HIGH RISK CIT-ANO	IN10316	COLORAZIONE CITOCHIMICA PAPANICOLAOU,	11 gg	
--	---------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CONTENITORE THIN PREP
Il test HPV associato è 8443

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e
cliniche

ANO - PAP TEST MONOSTRATO CIT-ANO	IN10317	COLORAZIONE CITOCHIMICA PAPANICOLAOU,	11 gg	
---	---------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CONTENITORE THIN PREP

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e
cliniche

ANO - POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA (SING.) CIT-ANO	IN10001	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

ANO - RAGADE ANALE CIT-ANO	IN10034	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
--------------------------------------	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 25_AP1

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e
cliniche

Anthoxanthum Odoratum (Paleino Odoroso) Siero	6G1	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Anti Centromero CENP- B Abs Siero	141	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	4 gg	
---	-----	---	------	--

Quantità da prelevare: 0,4 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 0,80 Negativo
0,80 - 1,10 Indeterminato
> 1,10 Positivo

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Antiaging Check DNA	8717	MASS-ARRAY	11 gg	

Kit Saliva per Test Genetici, Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale

Quantità da prelevare: 2 campioni
LINEA IUNIC

SYNLAB ITALIA

Compilare il modulo di consenso esami genetici SCHEACC034 + consenso informato (INF_GEN20 Synlab o consenso dello specialista)

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Antibiogramma Anaerobi	ANAER	MIC	1 gg	
-------------------------------	-------	-----	------	--

<su campione esistente>

Antibiogramma Anaerobi	ANAER2	MIC	1 gg	
-------------------------------	--------	-----	------	--

<su campione esistente>

Antibiogramma AST-N204	AST-N204	MIC	1 gg	
-------------------------------	----------	-----	------	--

<su campione esistente>

Antibiogramma AST-N378	AST-N378	MIC	1 gg	
-------------------------------	----------	-----	------	--

<su campione esistente>

Antibiogramma AST-N379	AST-N379	MIC	1 gg	
-------------------------------	----------	-----	------	--

<su campione esistente>

Antibiogramma AST-N397	AST-N397	MIC	1 gg	
-------------------------------	----------	-----	------	--

<su campione esistente>

Antibiogramma AST-N437	AST-N437	MICRODILUIZIONE	1 gg	
-------------------------------	----------	-----------------	------	--

<su campione esistente>

Antibiogramma AST-N439	AST-N439	MICRODILUIZIONE	1 gg	
-------------------------------	----------	-----------------	------	--

<su campione esistente>

Antibiogramma AST-P658	AST-P658	MIC	1 gg	
-------------------------------	----------	-----	------	--

<su campione esistente>

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Antibiogramma AST-P659 <su campione esistente>	AST-P659	MIC	1 gg	

Antibiogramma AST-ST03 <su campione esistente>	AST-ST03	MIC	1 gg	
--	----------	-----	------	--

Antibiogramma AST-XN26 <su campione esistente>	AST-XN26	MICRODILUIZIONE	1 gg	
--	----------	-----------------	------	--

Antibiogramma eseguito presso Osp. Niguarda - Milano Aspirato Gastrico Neutralizzato, Materiale Bioptico (BIOPT), Aspirato Bronchiale (BAS), Espettorato, Lavaggio Broncoalveolare (BAL), Liquidi Cavitari, Liquido Pleurico, Esame non richiesto ma aggiunto in automatico in caso di approfondimenti o positività per l'esame culturale Micobatteri. Liquido Seminale, Liquor, Pus, Aspirato da Tracheostoma, Urine Mattino	2030		1 gg	
--	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Antibiogramma eseguito presso Osp. Niguarda - Milano Aspirato Gastrico Neutralizzato, Materiale Bioptico (BIOPT), Aspirato Bronchiale (BAS), Espettorato, Lavaggio Broncoalveolare (BAL), Liquidi Cavitari, Liquido Pleurico, Esame non richiesto ma aggiunto in automatico in caso di approfondimenti o positività per l'esame culturale Micobatteri. Liquido Seminale, Liquor, Pus, Aspirato da Tracheostoma, Urine Mattino	2031		1 gg	
--	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Antibiogramma eseguito presso Osp. Niguarda - Milano Aspirato Gastrico Neutralizzato, Materiale Bioptico (BIOPT), Aspirato Bronchiale (BAS), Espettorato, Lavaggio Broncoalveolare (BAL), Liquidi Cavitari, Liquido Pleurico, Esame non richiesto ma aggiunto in automatico in caso di approfondimenti o positività per l'esame culturale Micobatteri. Liquido Seminale, Liquor, Pus, Aspirato da Tracheostoma, Urine Mattino	2032		1 gg	
--	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Antibiogramma Haemophilus <su campione esistente>	HAEMO	MIC	1 gg	
---	-------	-----	------	--

Antibiogramma Haemophilus <su campione esistente>	HAEMO2	MIC	1 gg	
---	--------	-----	------	--

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Antibiogramma per Campylobacter <su campione esistente>	B5035		1 gg	

Antibiogramma per Gonococco <su campione esistente>	GONO2		1 gg	
---	-------	--	------	--

ANTIBIOGRAMMA PER MICOBATTERI Aspirato Gastrico Neutralizzato, Materiale Biopico (BIOPT), Aspirato Bronchiale (BAS), Espettorato, Lavaggio Broncoalveolare (BAL), Liquidi Cavitari, Liquido Pleurico, Esame non richiesto ma aggiunto in automatico in caso di approfondimenti o positività per l'esame culturale Micobatteri. Liquido Seminale, Liquor, Pus, Aspirato da Tracheostoma, Urine Mattino	2026	SIRE + PZA kit MGIT	1 gg	
--	------	---------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Streptomycin
Isoniazide
Rifampicina
Etambutolo
Pirazinamide

Approfondimento eseguito presso Osp. Niguarda

Antibiogramma per Neisseria gonorrhoeae <su campione esistente>	GONO01		1 gg	
---	--------	--	------	--

Anticorpi Anti Adenovirus IgG Siero	1154	ELISA	8 gg	
---	------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU
< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Indeterminato
> 11,0 Positivo

Anticorpi Anti Adenovirus IgM Siero	1155	ELISA	8 gg	
---	------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU
< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Indeterminato
> 11,0 Positivo

ANTICORPI ANTI ASCARIS IgG (SYNLAB) Siero	582	EIA	16 gg	
---	-----	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL
< 9,0 Negativo

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti Bartonella Henselae IgG	1610	CLIA	7 gg	

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 0,90 Negativo
0,90 - 1,10 Indeterminato
> 1,10 Positivo

Anticorpi Anti Bartonella Henselae IgM	1611	CLIA	7 gg	
---	-------------	-------------	-------------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 0,90 Negativo
0,90 - 1,10 Indeterminato
> 1,10 Positivo

Anticorpi Anti Beta 2 Glicoproteina 1 IgA	1224	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	5 gg	
--	-------------	---	-------------	--

Siero

Quantità da prelevare: 700 µL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 20 Negativo
≥ 20 - 40 Positivo basso
≥ 40 - 80 Positivo medio
≥ 80 - 160 Positivo alto

Anticorpi Anti Beta 2 Glicoproteina IgG	1520	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	5 gg	
--	-------------	---	-------------	--

Siero

Quantità da prelevare: 700 µL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 20 Negativo
≥ 20 - 40 Positivo basso
≥ 40 - 80 Positivo medio
≥ 80 - 160 Positivo alto

Anticorpi Anti Beta 2 Glicoproteina IgM	1521	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	5 gg	
--	-------------	---	-------------	--

Siero

Quantità da prelevare: 700 µL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 20 Negativo
≥ 20 - 40 Positivo basso
≥ 40 - 80 Positivo medio
≥ 80 - 160 Positivo alto

Anticorpi Anti Canali del calcio (SYNLAB)	435	RIP	10 gg	
--	------------	------------	--------------	--

Siero

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

N-Type pmol/L < 110,00
PQ-Type pmol/L < 40,00

Anticorpi Anti Cardiolipina IgG (A.A.Fosfolipidi)	1391	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	5 gg	
--	-------------	---	-------------	--

Siero

Quantità da prelevare: 700 µL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 20 Negativo
≥ 20 - 40 Positivo basso
≥ 40 - 80 Positivo medio
≥ 80 - 160 Positivo alto

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti Cardiolipina IgM (A.A.Fosfolipidi) Siero	1392	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	5 gg	

Quantità da prelevare: 700 µL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L
< 20 Negativo
≥ 20 - 40 Positivo basso
≥ 40 - 80 Positivo medio
≥ 80 - 160 Positivo alto

Anticorpi Anti Cellule Parietali APCA Siero	1355	MICROSCOPIA IN FLUORESCENZA	4 gg	
---	------	--------------------------------	------	--

Quantità da prelevare: 700 µL
Substrato: rene, fegato, stomaco di ratto
Non si esegue il sabato.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ab ANTI-CELLULE PARIETALI GASTRICHE (APCA)
< 1/40 Negativo
≥ 1/40 Positivo
endpoint 1/640

ANTICORPI ANTI CHIKUNGUNYA IgM Siero	2251	CLIA	8 gg	
--	------	------	------	--

Quantità da prelevare: 0,5 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 0,9 Negativo
0,9 - 1,1 Indeterminato
> 1,1 Positivo

ANTICORPI ANTI CITOPLASMA GRANULOCITI NEUTROFILI (ANCA) Siero	1354	ELISA	4 gg	
---	------	-------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ab Anti-Proteinasi 3 (PR3) kUR/L < 20,00 Negativo
≥ 20,00 Positivo
Ab Anti-Mieloperossidasi (MPO) kUR/L < 20,00 Negativo
≥ 20,00 Positivo

Anticorpi Anti Chlamidia Pneumoniae IgA Siero	13204	ELISA	7 gg	
---	-------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 50 µL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU < 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Indeterminato
> 11,0 Positivo

Anticorpi Anti Chlamidia Pneumoniae IgG Siero	13200	ELISA	7 gg	
---	-------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 50 µL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU < 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Indeterminato
> 11,0 Positivo

Anticorpi Anti Chlamidia Pneumoniae IgM Siero	13201	ELISA	7 gg	
---	-------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 50 µL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU < 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Indeterminato
> 11,0 Positivo

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti Clamidia Trachomatis IgA Siero Quantità da prelevare: 50 µL	1323	ELISA	7 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO NTU < 9,0 Negativo 9,0 - 11,0 Indeterminato > 11,0 Positivo				
Anticorpi Anti Clamidia Trachomatis IgG Siero Quantità da prelevare: 50 µL	1320	ELISA	7 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO NTU < 9,0 Negativo 9,0 - 11,0 Indeterminato > 11,0 Positivo				
Anticorpi Anti Clamidia Trachomatis IgM Siero Quantità da prelevare: 50 µL	1319	ELISA	7 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO NTU < 9,0 Negativo 9,0 - 11,0 Indeterminato > 11,0 Positivo				
Anticorpi Anti Coxsackie Virus A Ig Totali Siero Quantità da prelevare: 50 µL	12659	CFR (FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO)	5 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO < 1/8 Negativo 1/8 - 1/16 Indeterminato (**) 1/32 = Basso Positivo > 1/32 Positivo (**) Da ricontrollare a distanza di tempo				
Anticorpi Anti Coxsackie Virus B Ig Totali Siero Quantità da prelevare: 50 µL	126599	CFR (FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO)	5 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO < 1/8 Negativo 1/8 - 1/16 Indeterminato (**) 1/32 = Basso Positivo > 1/32 Positivo (**) Da ricontrollare a distanza di tempo				
Anticorpi Anti Cromatina (Nucleosoma) Siero Quantità da prelevare: 0,40 mL	1329	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	4 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO A.I.(Antic. Index) < 0,80 Negativo 0,80 - 1,10 Indeterminato > 1,10 Positivo				

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti Cute Siero Substrato: esofago di primate regione prossimale	134	MICROSCOPIA IN FLUORESCENZA	8 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO Ab Anti-sostanza intercellulare < 1/10 Negativo ≥ 1/10 Positivo Ab Anti-Lamina basale < 1/10 Negativo ≥ 1/10 Positivo				
Anticorpi Anti Difterite IgG Siero Quantità da prelevare: 1 mL	13209	ELISA	8 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 0,010 Nessuna protezione. Si raccomanda di sottoporre il dato al medico curante. 0,010 - 0,090 Protezione non affidabile. Si raccomanda di sottoporre il dato al medico curante. 0,100 - 1,0 Protezione affidabile > 1,0 Protezione a lungo termine.				
Anticorpi Anti DNA Nativo Quantitativo Siero Quantità da prelevare: 0,40 mL In caso di esito dubbio o positivo si procede all' esecuzione del test anti-DNA nativo metodo immunofluorescenza indiretta.	6228	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	4 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 5,00 Negativo 5,00 - 10,00 Indeterminato ≥ 10,00 Positivo				
Anticorpi Anti Dnasi B Siero Quantità da prelevare: 1 mL	1065	NEFELOMETRIA	3 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 200 Negativo				
Anticorpi Anti Echinococco IgG Siero Quantità da prelevare: 1 mL	1158	ELISA	8 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO NTU < 9,0 Negativo 9,0 - 11,0 Indeterminato > 11,0 Positivo				
Anticorpi Anti Echo Virus Neurotropi Ig Totali Siero	12649	CFR (FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO)	5 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO < 1/8 Negativo 1/8 - 1/16 Indeterminato (**) 1/32 = Basso Positivo > 1/32 Positivo (**) Da ricontrrollare a distanza di tempo				

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti Echo Virus Pneumotropi Ig Totali Siero	126499	CFR (FISSAZIONE DEL COMPLEMENTO)	5 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1/8 Negativo
1/8 - 1/16 Indeterminato (**)
1/32 = Basso Positivo
> 1/32 Positivo

(**) Da ricontrollare a distanza di tempo

Anticorpi Anti Endomisio IgA (EMA) Siero	154	MICROSCOPIA IN FLUORESCENZA	4 gg	
---	-----	-----------------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

Quantità da prelevare: 700 µL
Substrato: esofago di primate regione distale

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1/10 Negativo
≥ 1/10 Positivo
endpoint 1/640

Anticorpi Anti Endomisio IgG Siero	1541	MICROSCOPIA IN FLUORESCENZA	4 gg	
---------------------------------------	------	-----------------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

Quantità da prelevare: 700 µL
Substrato: esofago di primate regione distale

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1/10 Negativo
≥ 1/10 Positivo
endpoint 1/640

ANTICORPI ANTI EPATITE E IgG Siero	6083	CLIA	9 gg	
---------------------------------------	------	------	------	--

SYNLAB ITALIA

Quantità da prelevare: 0,7 mL

VALORI DI RIFERIMENTO

Index
< 0,90 Negativo
0,90 – 1,10 Indeterminato
> 1,10 Positivo

ANTICORPI ANTI EPATITE E IgM Siero	1902	CLIA	9 gg	
---------------------------------------	------	------	------	--

SYNLAB ITALIA

Quantità da prelevare: 0,7 mL

VALORI DI RIFERIMENTO

Index
< 0,40 Negativo
0,40 – 0,50 Indeterminato
> 0,50 Positivo

ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDI - Profilo completo IgG Siero	1680	IMMUNODOT	8 gg	
--	------	-----------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti-Sulfatide	Negativo
Anti-GM1	Negativo
Anti-GM2	Negativo
Anti-GM3	Negativo
Anti-GM4	Negativo
Anti-GD1a	Negativo
Anti-GD1b	Negativo
Anti-GD2	Negativo
Anti-GD3	Negativo
Anti-GT1a	Negativo
Anti-GT1b	Negativo
Anti-GQ1b	Negativo

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDI - Profilo completo IgM Siero	1681	IMMUNODOT	8 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti-Sulfatide	Negativo
Anti-GM1	Negativo
Anti-GM2	Negativo
Anti-GM3	Negativo
Anti-GM4	Negativo
Anti-GD1a	Negativo
Anti-GD1b	Negativo
Anti-GD2	Negativo
Anti-GD3	Negativo
Anti-GT1a	Negativo
Anti-GT1b	Negativo
Anti-GQ1b	Negativo

Anticorpi anti gliadina deamidata IgA Siero	1112	MULTIPLEX LUMINEX	4 gg	
---	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 700 µL
Inviare il siero separato in provette di altezza 7.5 cm (75 mm) e diametro 1.0 cm (10 mm)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L	< 15,0 Negativo 15,0 - 20,0 Indeterminato > 20,0 Positivo
------	---

Anticorpi anti gliadina deamidata IgG Siero	111	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	4 gg	
---	-----	--------------------------------------	------	--

Quantità da prelevare: 700 µL
Inviare il siero separato in provette di altezza 7.5 cm (75 mm) e diametro 1.0 cm (10 mm)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L	< 15,0 Negativo
------	-----------------

Anticorpi Anti Gliadina IgA Siero	1183	ELISA	11 gg	
---	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 500 µL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL	< 8,0 Negativo 8,0 - 15,0 Indeterminato ≥ 15,0 Positivo
------	---

Anticorpi Anti Gliadina IgG Siero	1184	ELISA	11 gg	
---	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 500 µL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL	< 50,00 Negativo
------	------------------

ANTICORPI ANTI HERPES 6 (HHV6) IgG Siero	399	CLIA	10 gg	
--	-----	------	-------	--

Quantità da prelevare: 0,7 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Index	< 0,80 Negativo 0,80 - 1,00 Indeterminato > 1,00 Positivo
-------	---

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti Insula (ICA) Siero Quantità da prelevare: 0,3 mL Substrato: pancreas di primate	125	MICROSCOPIA IN FLUORESCENZA	7 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO Ab ANTI-INSULA PANCREATICA < 1/10 Negativo ≥ 1/10 Positivo				
ANTICORPI ANTI LDL OSSIDATE Siero congelato Quantità da prelevare: 0,5 mL	8976	IMMUNOENZIMATICO	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO U/mL 4.000 - 12.000				
ANTICORPI ANTI LEGIONELLA PNEUMOPHILA (IgG+IgM) (Sierogruppi 1-6) Siero Quantità da prelevare: 0.5 mL Si esegue solo il mercoledì	1321	CLIA	7 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO A.I.(Antic. Index) < 0,90 Negativo 0,90 - 1,10 Indeterminato > 1,10 Positivo				
Anticorpi Anti Legionella Pneumophila IgM Siero Quantità da prelevare: 0,5 mL	2158	CLIA	7 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO A.I.(Antic. Index) < 0,90 Negativo 0,90 - 1,10 Indeterminato > 1,10 Positivo				
Anticorpi Anti Listeria IgG Siero Quantità da prelevare: 0.5 mL	122	ELISA	5 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO Index < 0,85 Negativo 0,85 - 1,14 Indeterminato 1,15 - 2,10 Positivo Debole > 2,10 Positivo				
ANTICORPI ANTI MALARIA IgG e IgM Siero Quantità da prelevare: 2 mL	469	ELISA	16 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO U.A. < 9,0 Negativo 9,0 - 11,0 Indeterminato > 11,0 Positivo				
Anticorpi Anti Membrana Basale del Glomerulo Siero Quantità da prelevare: 0,40 mL	138	IMMUNOBLOTTING	5 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO 0 - 5 Negativo 6 - 10 Indeterminato 11 - 50 Positivo > 50 Fortemente positivo				

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti Microsoma LKM Siero	1350	MICROSCOPIA IN FLUORESCENZA	4 gg	
Quantità da prelevare: 700 µL Substrato: rene, fegato, stomaco di ratto				
VALORI DI RIFERIMENTO Ab ANTI-LKM (Microsomi epatici e renali)				
< 1/40 Negativo ≥ 1/40 Positivo endpoint 1/640				
Anticorpi anti Mieloperossidasi (MPO) Siero	1364	ELISA	4 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO kUR/L				
< 20,00 Negativo ≥ 20,00 Positivo				
Anticorpi Anti Mitocondri (AMA) Siero	135	MICROSCOPIA IN FLUORESCENZA	4 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO Ab ANTI-MITOCONDRI				
< 1/40 Negativo ≥ 1/40 Positivo endpoint 1/640				
Anticorpi Anti Muscolo Liscio (ASMA) Siero	136	MICROSCOPIA IN FLUORESCENZA	4 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO Ab ANTI-MUSCOLO LISCIO				
< 1/40 Negativo ≥ 1/40 Positivo endpoint 1/640				
Anticorpi Anti Muscolo Striato Siero	1360	MICROSCOPIA IN FLUORESCENZA	11 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO Ab ANTI-MUSCOLO STRIATO				
< 1/100 Negativo ≥ 1/100 Positivo				
Anticorpi Anti P Ribosoma Siero	337	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	4 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO A.I.(Antic. Index)				
< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo				
Anticorpi Anti PCNA Plasma EDTA, Sangue Intero EDTA, Siero	1109	IMMUNOBLOTTING	8 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L				
< 6,0 Negativo 6,0 - 12,0 Indeterminato > 12,0 Positivo				

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti Pertosse IgA Siero	1631	ELISA	7 gg	

Quantità da prelevare: 700 µL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU
< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Indeterminato
> 11,0 Positivo

ANTICORPI ANTI PERTOSSE IgA REFLEX Siero	2291	ELISA	7 gg	
--	-------------	--------------	-------------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU
< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Indeterminato
> 11,0 Positivo

Anticorpi Anti Pertosse IgG Siero	163	ELISA	7 gg	
---	------------	--------------	-------------	--

Quantità da prelevare: 700 µL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU
< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Indeterminato
> 11,0 Positivo

Anticorpi Anti Pertosse IgM Siero	1630	ELISA	7 gg	
---	-------------	--------------	-------------	--

Quantità da prelevare: 700 µL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU
< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Indeterminato
> 11,0 Positivo

Anticorpi anti Proteinasi 3 (PR3) Siero	1365	ELISA	4 gg	
---	-------------	--------------	-------------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kUR/L
< 20,00 Negativo
≥ 20,00 Positivo

ANTICORPI ANTI RABBIA (SYNLAB) Siero	13213	NT	16 gg	
--	--------------	-----------	--------------	--

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL
< 0,5 Titolo non protettivo
≥ 0,5 Titolo protettivo

ANTICORPI ANTI- RIBOSOMA P per Reflex Siero	2306	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	2 gg	
---	-------------	---	-------------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index)
< 1,00 Negativo
≥ 1,00 Positivo

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti Spermatozoi Siero	832	MICROSCOPIA IN FLUORESCENZA	8 gg	

Quantità da prelevare: 0.5 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

ANTICORPI ANTI TBE IgG Siero	8880	CLIA	8 gg	
--	------	------	------	--

Quantità da prelevare: 0,5 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 0,90 Negativo
0,90 - 1,10 Indeterminato
> 1,10 Positivo

ANTICORPI ANTI TBE IgM Siero	8882	CLIA	8 gg	
--	------	------	------	--

Quantità da prelevare: 0,5 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 0,90 Negativo
0,90 - 1,10 Indeterminato
> 1,10 Positivo

Anticorpi Anti Toxocara canis IgG Siero	13216	ELISA	16 gg	
---	-------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

U.A. < 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Indeterminato
> 11,0 Positivo

Anticorpi Anti Toxoplasma Gondii IgA Siero	427	ELISA	8 gg	
--	-----	-------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Index < 0,8 Negativo
0,8 - 1,2 Indeterminato
> 1,2 Positivo

Anticorpi anti Transglutaminasi (IgA o IgG) Reflex (CELIACHIA REFLEX) Siero	1905	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	4 gg	
---	------	--------------------------------------	------	--

Quantità da prelevare: 700 µL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 15,0 Negativo

Anticorpi Anti Transglutaminasi IgA Siero	155	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	4 gg	
---	-----	--------------------------------------	------	--

Quantità da prelevare: 700 µL

Inviare il siero separato in provette di altezza 7.5 cm (75 mm) e diametro 1.0 cm (10 mm)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 15,0 Negativo

Anticorpi Anti Transglutaminasi IgG Siero	1559	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	4 gg	
---	------	--------------------------------------	------	--

Quantità da prelevare: 700 µL

Inviare il siero separato in provette di altezza 7.5 cm (75 mm) e diametro 1.0 cm (10 mm)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 15,0 Negativo

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Anticorpi Anti Treponema IgG (IB) Siero	1553	IMMUNOBLOT	16 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti Tp 47 kDa	Negativo
Anti Tp 45 kDa (tmpA)	Negativo
Anti Tp 17 kDa	Negativo
Anti Tp 15 kDa	Negativo

Anticorpi Anti Treponema IgM (IB) Siero	1554	IMMUNOBLOT	16 gg	
---	------	------------	-------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti Tp 47 kDa	Negativo
Anti Tp 45 kDa (tmpA)	Negativo
Anti Tp 17 kDa	Negativo
Anti Tp 15 kDa	Negativo

Anticorpi Anti Treponema Pallidum IgG Siero	113	CLIA	6 gg	
---	-----	------	------	--

Quantità da prelevare: 0,5 mL
Per conservazioni superiori ai 7 giorni dal prelievo congelare il campione a -20°C

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index)	< 0,9 Negativo 0,9 - 1,1 Indeterminato > 1,1 Positivo
--------------------	---

Anticorpi Anti Treponema Pallidum IgM Siero	114	CLIA	6 gg	
---	-----	------	------	--

Quantità da prelevare: 0,5 mL
Per conservazioni superiori ai 7 giorni dal prelievo congelare il campione a -20°C

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index)	< 0,9 Negativo 0,9 - 1,1 Indeterminato > 1,1 Positivo
--------------------	---

ANTICORPI ANTI TRICHINELLA IgG (SYNLAB) Siero	472	EIA	11 gg	
---	-----	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL	< 9,0 Negativo
------	----------------

ANTICORPI ANTI VIRUS EPATITE DELTA Siero	6081	IMMUNOENZIMATICO	8 gg	
--	------	------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Risposta dopo 24 h

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

ANTICORPI ANTI WEST NILE IgG Siero	6203	CLIA	8 gg	
--	------	------	------	--

Quantità da prelevare: 0,5 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index)	< 0,90 Negativo 0,90 - 1,10 Indeterminato > 1,10 Positivo
--------------------	---

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTICORPI ANTI WEST NILE IgM Siero Quantità da prelevare: 0,5 mL	6204	CLIA	8 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO A.I.(Antic. Index) < 0,90 Negativo 0,90 - 1,10 Indeterminato > 1,10 Positivo				
ANTICORPI ANTI-CANDIDA ALBICANS IgA Siero Quantità da prelevare: 0,7 mL	1049	ELISA	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO NTU < 9,0 Negativo 9,0 - 11,0 Indeterminato > 11,0 Positivo				
ANTICORPI ANTI-CANDIDA ALBICANS IgG Siero Quantità da prelevare: 0,7 mL	1050	ELISA	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO NTU < 25,0 Negativo 25,0 - 30,0 Indeterminato > 30,0 Positivo				
ANTICORPI ANTI-CANDIDA ALBICANS IgM Siero Quantità da prelevare: 0,7 mL	1048	ELISA	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO NTU < 9,0 Negativo 9,0 - 11,0 Indeterminato > 11,0 Positivo				
Anticorpi Anti-Cardiolipina IgA Siero Quantità da prelevare: 700 µL	1225	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	5 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO kU/L < 20 Negativo ≥ 20 - 39 Positivo basso ≥ 40 - 79 Positivo medio ≥ 80 - 160 Positivo alto				
ANTICORPI ANTI-CHIKUNGUNYA IgG Siero Quantità da prelevare: 0,5 mL	2250	CLIA	8 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO A.I.(Antic. Index) < 0,9 Negativo 0,9 - 1,1 Indeterminato > 1,1 Positivo				
ANTICORPI ANTI-CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgA Reflex Siero Quantità da prelevare: 0,5 mL	2292	ELISA	7 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO NTU < 9,0 Negativo 9,0 - 11,0 Indeterminato > 11,0 Positivo				

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTICORPI ANTI-CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA reflex Siero	2293	ELISA	7 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU
< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Indeterminato
> 11,0 Positivo

ANTICORPI ANTI-COXSACKIE VIRUS (B1 B2 B3 B4 B5 B6) IgG Siero	892	MICROSCOPIA IN FLUORESCENZA	9 gg	
--	-----	-----------------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Coxsackie virus B1 IgG	Negativo
Coxsackie virus B2 IgG	Negativo
Coxsackie virus B3 IgG	Negativo
Coxsackie virus B4 IgG	Negativo
Coxsackie virus B5 IgG	Negativo
Coxsackie virus B6 IgG	Negativo

ANTICORPI ANTI-COXSACKIE VIRUS (B1 B2 B3 B4 B5 B6) IgM Siero	8920	MICROSCOPIA IN FLUORESCENZA	9 gg	
--	------	-----------------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Coxsackie virus B1 IgM	Negativo
Coxsackie virus B2 IgM	Negativo
Coxsackie virus B3 IgM	Negativo
Coxsackie virus B4 IgM	Negativo
Coxsackie virus B5 IgM	Negativo
Coxsackie virus B6 IgM	Negativo

ANTICORPI ANTI-DENGUE IgG Siero	413	CLIA	8 gg	
---	-----	------	------	--

Quantità da prelevare: 0,5 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 0,9 Negativo
0,9 - 1,1 Indeterminato
> 1,1 Positivo

ANTICORPI ANTI-DENGUE IgM Siero	414	CLIA	8 gg	
---	-----	------	------	--

Quantità da prelevare: 0,5 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 0,9 Negativo
0,9 - 1,1 Indeterminato
> 1,1 Positivo

ANTICORPI ANTI-DFS70 Siero	2302	CLIA	8 gg	
--------------------------------------	------	------	------	--

Quantità da prelevare: 0,5 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

CU
< 20 Negativo
≥ 20 Positivo

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTICORPI ANTI-dsDNA Reflex Siero	2300	MICROSCOPIA IN FLUORESCENZA	2 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ab Anti - DNA NATIVO (IFI)

< 1/10 Negativo
≥ 1/10 Positivo
endpoint >1/640

ANTICORPI ANTI-EPST.BARR NUCLEAR ANTIGEN (EBNA) IgG Siero	10701	CMIA	2 gg	
---	-------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

S/CO

< 0,5 Non Reattivo
0,5 - 0,9 Dubbio
≥ 1,00 Reattivo

ANTICORPI ANTI-FASCIOLA EPATICA Ig TOTALI (SYNLAB) Siero	492	EIA	16 gg	
--	-----	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

ANTICORPI ANTI-FEBBRE GIALLA IgG + IgM (SYNLAB) Siero	367	FIA	11 gg	
---	-----	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anticorpi Anti-Febbre Gialla IgG

Titolo

< 1/20 Negativo

Anticorpi Anti-Febbre Gialla IgM

Titolo

< 1/20 Negativo

ANTICORPI ANTI-FRANCISELLA TULARENSIS IgG (Tularemia) (SYNLAB) Siero	1052	EIA	9 gg	
--	------	-----	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL

< 10,0 Negativo

Anticorpi Anti-GAD 65 Siero	158	CHEMILUMINESCENZA	4 gg	
---------------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL

< 10,0 Negativo
≥ 10,0 Positivo

ANTICORPI ANTI-GIARDIA LAMBLIA IgG Siero	4612	EIA	18 gg	
--	------	-----	-------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTICORPI ANTI-GIARDIA LAMBLIA IgG

U/mL

< 10,00 Negativo
10,00 - 16,00 Indeterminato
> 16,00 Positivo

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTICORPI ANTI-GP210 per Reflex Siero	2304	IMMUNOBLOTTING	2 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

U.A.
< 5 Negativo
5 - 10 Indeterminato
> 10 Positivo

ANTICORPI ANTI-HAV IgG (Virus Epatite A) Siero	607	CMIA	2 gg	
--	-----	------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo (Non rilevato)

ANTICORPI ANTI-HAV IgM (Virus Epatite A) Siero	608	CMIA	2 gg	
--	-----	------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo (Non rilevato)

ANTICORPI ANTI-IA2 Siero	1377	CHEMILUMINESCENZA A SANDWICH	4 gg	
------------------------------------	------	------------------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L
< 10 Negativo
≥ 10 Positivo

ANTICORPI ANTI-INSULINA Siero	6522	CHEMILUMINESCENZA	4 gg	
---	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kUA/L ≤ 20,0

ANTICORPI ANTI-M2 Siero	2308	CLIA	8 gg	
-----------------------------------	------	------	------	--

Quantità da prelevare: 0,5 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

CU
< 20 Negativo
≥ 20 Positivo

ANTICORPI ANTI-MITOCONDRI (AMA) per Reflex Siero	2307	MICROSCOPIA IN FLUORESCENZA	2 gg	
--	------	-----------------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ab ANTI-MITOCONDRI

<1/40 Negativo
≥ 1/40 Positivo
endpoint 1/640

ANTICORPI ANTI-MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA Siero	2343	ELISA	7 gg	
--	------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 700 µL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU
< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Indeterminato
> 11,0 Positivo

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTICORPI ANTI-MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA reflex	2294	ELISA	6 gg	

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

NTU
< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Indeterminato
> 11,0 Positivo

ANTICORPI ANTI-NUCLEO (Hep-2)	1338	MICROSCOPIA IN FLUORESCENZA	4 gg	
-------------------------------	------	-----------------------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 0.40 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ab ANTI NUCLEO (Hep-2)
< 1/160 Negativo
≥ 1/160 Positivo
endpoint 1/640

ANA Titolo
ANA Pattern
ANA Titolo
ANA Pattern
ANA Titolo
ANA Pattern

ANTICORPI ANTI-NUCLEO per Reflex	2301	MICROSCOPIA IN FLUORESCENZA	8 gg	
----------------------------------	------	-----------------------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL
Solo per profilo ANA REFLEX (cod. 2299R). Non accettabile singolarmente.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ab ANTI NUCLEO (Hep-2)
< 1/160 Negativo
≥ 1/160 Positivo
endpoint 1/640

ANA Titolo
ANA Pattern
ANA Titolo
ANA Pattern
ANA Titolo
ANA Pattern

ANTICORPI ANTI-PCNA per Reflex	2305	IMMUNOBLOTTING	2 gg	
--------------------------------	------	----------------	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KU/L
< 6 Negativo
6 - 12 Indeterminato
> 12 Positivo

ANTICORPI ANTI-RECETTORE ACETILCOLINA	643	MICROSCOPIA IN FLUORESCENZA	8 gg	
---------------------------------------	-----	-----------------------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ab Anti-Recettore Acetilcolina subunità adulta (AChR-E)
< 1/10 Negativo
≥ 1/10 Positivo
Ab Anti-Recettore Acetilcolina subunità fetale (AChR-G)
< 1/10 Negativo
≥ 1/10 Positivo

Anticorpi anti-Recettori TSH (TRAB)	6516	CMIA	3 gg	
-------------------------------------	------	------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL
Attendere la formazione del coagulo, centrifugare e inviare a 2-8 gradi.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/L
< 3,10

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTICORPI ANTI-RETICOLINA IgA Siero	128	MICROSCOPIA IN FLUORESCENZA	8 gg	
Quantità da prelevare: 500 µL Substrato : fegato di scimmia				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Ab Anti-Reticolina IgA < 1/10 Negativo ≥ 1/10 Positivo				
ANTICORPI Anti-SARSCoV-2 IgG - S1/RBD QUANTITATIVI Siero	2216	CMIA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				
VALORI DI RIFERIMENTO				
BAU WHO/mL < 7,1 Negativo ≥ 7,1 Positivo				
ANTICORPI ANTI-SURRENE Siero	143	MICROSCOPIA IN FLUORESCENZA	11 gg	
Quantità da prelevare: 500 µL				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Ab ANTI-SURRENE <1/10 Negativo ≥ 1/10 Positivo				
ANTICORPI ANTI-TAENIA SOLIUM (CISTICERCOSI) IgG (SYNLAB) Siero	817	EIA	8 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				
VALORI DI RIFERIMENTO				
U/mL < 9,0 Negativo				
Antidepressivi Triciclici (SYNLAB) Siero	6700	LC-MS	11 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Negativo				
ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA) Siero	6513	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Non si esegue il sabato				
VALORI DI RIFERIMENTO				
U/L < 75				
Antimicogramma Materiale Vario	B5903		5-6 gg	
Antimicogramma AST-YS08 <su campione esistente>	AST-YS08	MIC	1 gg	

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ANTIMONIO Urine Fine Turno Urine F.T.	7440	ASSORBIMENTO ATOMICO	21 gg	

Quantità da prelevare: 10 mL

• Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.

• Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Popolazione generale: < 5

ANTIMONIO Urine Inizio Turno Urine I.T.	744	ASSORBIMENTO ATOMICO	21 gg	
---	-----	----------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

• Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.

• Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Popolazione generale: < 5

Anti-SARS CoV-2 (COVID19) IgM (Metodo CLIA) - ABBOTT - Siero	2175	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTICORPI ANTI-SARS-CoV-2 IgM Proteina SPIKE

Index

< 1,0 Negativo

Antitrombina Plasma Citratato	018	CROMOGENICO anti-Xa	1 gg	
---	-----	---------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

%

80 - 120

Api m1 Apis mellifera Siero	5I208	ImmunoCAP	5 gg	
---------------------------------------	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L

< 0,10

Api m10 Apis mellifera Siero	5I217	ImmunoCAP	5 gg	
--	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L

< 0,10

Api m2 Apis mellifera Siero	5I214	ImmunoCAP	5 gg	
---------------------------------------	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L

< 0,10

Api m3 Apis mellifera Siero	5I215	ImmunoCAP	5 gg	
---------------------------------------	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L

< 0,10

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Api m5 Apis mellifera Siero	5I216	ImmunoCAP	5 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Apis Mellifera (Ape) Siero	6I1	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

APIXABAN (Eliquis) Plasma Citrato congelato	1934	CROMOGENICO	3 gg	
---	------	-------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL di plasma citrato separato e congelato
Compilare la Scheda anamnestica paziente SCHEAN019

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL
Per dosaggio 5 mg/2die
Picco : 102 - 416
Valle : 42 - 283

Per dosaggio 2,5 mg/2die
Picco : 55 - 300
Valle : 26 - 248

Apolipoproteina A1 Siero	3250	IMMUNOTURBIDIMETRIA	2 gg	
------------------------------------	------	---------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L ≥ 1,25 (desiderabile)

Apolipoproteina B Siero	3260	IMMUNOTURBIDIMETRIA	2 gg	
-----------------------------------	------	---------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L ≤ 1,00 (desiderabile)

Apolipoproteina E (SYNLAB) Siero	480	NEFELOMETRIA	9 gg	
--	-----	--------------	------	--

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 20,0 - 60,0

APPENDICE - APPENDICECTOMIA CIT-APPENDICE	IN10002	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 15_AP2

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Approfondimento diagnostico IFI Siero	1339	MICROSCOPIA IN FLUORESCENZA	4 gg	
---	------	--------------------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ab ANTI-DNA NATIVO (IFI)

<1/10 Negativo
≥ 1/10 Positivo
endpoint 1/640

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Aptoglobina Siero	131	NEFELOMETRIA	2 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L 0,30 - 2,00

Ara h1 Arachis hypogaea Siero	5F422	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Ara h2 Arachis hypogaea Siero	5F423	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Ara h3 Arachis hypogaea Siero	5F424	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Ara h6 Arachis hypogaea Siero	5F447	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Ara h9 Arachis hypogaea Siero	5F427	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Arachide Siero	6F13	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe kU/L

Arancia Siero	6F33	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe kU/L

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ARGENTO Sierico (SYNLAB) Siero	7371	IPMS	16 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 0,30

ARGENTO Urine Fine Turno (SYNLAB) Urine F.T.	7370	IPMS	16 gg	
--	------	------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L Fino a 0,90

ARGENTO Urine Inizio Turno (SYNLAB) Urine I.T.	737	IPMS	16 gg	
--	-----	------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L Fino a 0,90

ARGININA Plasmatica (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	825	LC/MS	15 gg	
--	-----	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ARGININA Urinaria (SYNLAB) Urine Congelate	8251	LC-MS	15 gg	
--	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Aringa Siero	6F205	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe kU/L

Array CGH Post Natale DX (CE -IVD) Sangue Intero EDTA	8713	ARRAY CGH	41 gg	
---	------	-----------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di accettazione SCHEACC038

SYNLAB ITALIA

ATTENZIONE : è consigliabile l'invio di 1 campione di sangue intero EDTA per ciascun genitore e l'invio di 1 campione di sangue intero Li-heparina del paziente

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ARRAY-CGH PRENATALE 60KB (Cariotipo molecolare)	2045	ARRAY CGH	8 gg	

Liquido Amniotico, Villi coriali

Quantità da prelevare: 7-10 mL Liq.Amn o 15mg Villi Coriali
Compilare il modulo di accettazione CONS_GEN36

SYNLAB ITALIA

ATTENZIONE : è obbligatorio l'invio di 1 campione di sangue intero EDTA per ciascun genitore (fare riferimento alle indicazioni riportate sulla CONS_GEN36). Effettuare un'accettazione per ciascun campione. Il prezzo è da intendersi per campione: in caso di feto negativo verrà fatturato solo l'importo per 1 campione di materiale fetale, in caso di feto positivo verrà fatturato l'importo di 3 campioni (1 materiale fetale + 2 campioni dei genitori)

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ARSENICO Urine Fine Turno	7432	ASSORBIMENTO ATOMICO	21 gg	
----------------------------------	------	----------------------	-------	--

Urine F.T.

Quantità da prelevare: 10 mL
• Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
• Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L Soggetti professionalmente esposti:
< 50 (f.t. / f.s.l.)

ARSENICO Urine Inizio Turno	7431	ASSORBIMENTO ATOMICO	21 gg	
------------------------------------	------	----------------------	-------	--

Urine I.T.

Quantità da prelevare: 10 mL
• Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
• Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L Soggetti professionalmente esposti:
< 50 (f.t. / f.s.l.)

Art v1 Artemisia vulgaris	5W231	ImmunoCAP	5 gg	
----------------------------------	-------	-----------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Art v3 Artemisia vulgaris	5W233	ImmunoCAP	5 gg	
----------------------------------	-------	-----------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Artemisia Absinthium (Assenzio)	6W5	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	-----	-------------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Artemisia Vulgaris (Assenzio Selvatica)	6W6	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	-----	-------------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ARTICOLAZ. - BIOPSIA ARTICOLAZIONI CIT-ARTICOLAZ.	IN10004	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

ARTICOLAZ. - BIOPSIA DA DISCO INTERVERTEBRALE CIT-ARTICOLAZ.	IN10005	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 7_AP2

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

ARTICOLAZ. - BIOPSIA per malattia di Dupuytren o di Quervain CIT-ARTICOLAZ.	IN10007	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

ARTICOLAZ. - BIOPSIA SINOVIALE, BIOPSIA TENDINEA CIT-ARTICOLAZ.	IN10008	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ARTICOLAZ. - ESCISSIONE NEOFORMAZIONE SINOVIA CIT-ARTICOLAZ.	IN10009	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 2_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

ARTICOLAZ. - MENISCECTOMIA POST-TRAUMATICA CIT-ARTICOLAZ.	IN10010	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 9_AP2

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

ARTICOLAZ. ASPORTAZIONE DI NEOFORMAZIONE (ARTICOLAZIONI) CIT-ARTICOLAZ.	IN10003	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 12_AP2

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

ARTO INFERIORE - AMPUTAZIONE CIT-ARTO INFERIORE	IN10011	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 1_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ARTO INFERIORE - AMPUTAZIONE (PER NEOPLASIA) CIT-ARTO INFERIORE	IN10012	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 1_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

ARTO SUPERIORE - AMPUTAZIONE CIT-ARTO SUPERIORE	IN10013	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 1_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

ARTO SUPERIORE - AMPUTAZIONE (PER NEOPLASIA) CIT-ARTO SUPERIORE	IN10014	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 1_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Ascaris Lumbricoides Siero	6P1	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Asp f1 Apspergillus fumigatus Siero	5M218	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Asp f2 Apspergillus fumigatus Siero	5M219	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Asp f3 Apspergillus fumigatus Siero	5M220	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Asp f4 Apspergillus fumigatus Siero	5M221	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Asp f6 Apspergillus fumigatus Siero	5M222	ImmunoCAP	5 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Asparago Siero	6F261	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

ASPERGILLO (ASPERGILLUS NIGER) Siero	6M207	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

ASPERGILLOSI ANTIGENE Siero	598	CHEMILUMINESCENZA	9 gg	
---------------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 2 mL

I campioni di siero non devono essere contaminati da spore fungine e/o batteri. Trasportare e conservare i campioni in provette sigillate non esposte all'aria.
L'esame necessita di provetta dedicata.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 0,16 Negativo
0,16 – 0,20 Dubbio
> 0,20 Positivo

Aspergillus Fumigatus Siero	6M3	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---------------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

ASPERGILLUS FUMIGATUS Ig TOTALI Siero	4608	AGGLUTINAZIONE	19 gg	
---	------	----------------	-------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo <1/320 Negativo
1/320 Indeterminato
≥ 1/640 Positivo

AST (GOT) Siero	2900	ENZIMATICO	1 gg	
---------------------------	------	------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L < 34

ASTICE Siero	6F80	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

VADEMECUM GENERALE

A

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Atriplex Lentiformis (Bietolone) Siero	6W15	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione	kU/L			
Classe				
ATROFIA OTTICA DI LEBER (SYNLAB) Sangue Intero EDTA	560	PCR	31 gg	
Compilare modulo consenso informato esami genetici Synlab Leinfelden				SYNLAB GERMANIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Aureo Basidium Pullulans Siero	6M12	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione	kU/L			
Classe				
Avena Siero	6F7	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione	kU/L			
Classe				
Avena Sativa (Avena) Siero	6G14	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione	kU/L			
Classe				
Avocado Plasma, Siero	6F96	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione	kU/L			
Classe				
Azotemia (Urea) Siero	210	ENZIMATICO	1 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
	mg/dL	19 - 49		
Azoturia Urine 24h	211	ENZIMATICO	2 gg	
Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo				
VALORI DI RIFERIMENTO				
	g/24h	25,6 - 42,8		

VADEMECUM GENERALE

B

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
B 2 Microglobulina Siero	1309	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 0,97 - 2,64

B 2 Microglobulina urine FT Urine F.T.	13093	IMMUNOTURBIDIMETRIA	2 gg	
--	-------	---------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 0,030 - 0,100

B 2 Microglobulina 24h Urine 24h	13091	IMMUNOTURBIDIMETRIA	2 gg	
--	-------	---------------------	------	--

Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24 h 0,030 - 0,100

B 2 Microglobulina urine IT Urine I.T.	13092	IMMUNOTURBIDIMETRIA	2 gg	
--	-------	---------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 0,030 - 0,100

Banana Siero	6F92	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe kU/L

Bande Oligoclonali Liquor - Siero (SYNLAB) Liquido Cefalorachidiano (LIQCELSP)	7998	TURBIDIMETRIA/ISOELETT ROFOCALIZZAZIONE	16 gg	
--	------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

Da accettare contestualmente al codice 7998F SIERO PER BANDE OLIGOCLONALI

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e
cliniche

Barbiturici matrice urinaria Urine	6670	EMIT	3 gg	
--	------	------	------	--

Non si esegue il sabato

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL Negativo

BARBITURICI Sierici Plasma Litio Eparina, Siero	66708	EMIT	4 gg	
---	-------	------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

L'esame "BARBITURICI" comprende i composti sottoelencati che non sono eseguiti singolarmente :
Amobarbitale, Butobarbitale, Butalbale, Talbutale, Fenobarbitale, Pentobarbitale, Secobarbitale

Campioni con risultati che indicano la presenza di barbiturici richiedono un'ulteriore valutazione, allo scopo di identificare lo o gli specifici barbiturici presenti

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L < 3,00 Negativo
≥ 3,00 Positivo

VADEMECUM GENERALE

B

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
BARIO Urine Fine Turno (SYNLAB) Urine F.T.	7810	ICP-MS	9 gg	

Quantità da prelevare: 20 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 5,7

BARIO Urine Inizio Turno (SYNLAB) Urine I.T.	781	ICP-MS	9 gg	
--	-----	--------	------	--

Quantità da prelevare: 20 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 5,7

BARTONELLA RICERCA ANTICORPI IgG e IgM Siero	2284	CLIA	7 gg	
--	------	------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anticorpi Anti-Bartonella Henselae IgG	A.I.(Antic. Index)	< 0,90 Negativo 0,90 - 1,10 Indeterminato > 1,10 Positivo
Anticorpi Anti-Bartonella Henselae IgM	A.I.(Antic. Index)	< 0,90 Negativo 0,90 - 1,10 Indeterminato > 1,10 Positivo

Basilico Siero	6F269	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

Batteri anaerobi in materiali biologici esame colturale	B595		7 gg	
--	------	--	------	--

Agoaspirato NAS, Materiale Intraoperatorio, Liquido Ascitico, Liquidi Cavitari, Liquido da Drenaggio, Liquido Pleurico, Liquido Sinoviale, Sangue, Tampone Ferita, Tampone da Lesione, Tampone Pus

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Batteri identificazione biochimica Piastra Seminata#	B550		5-6 gg	
--	------	--	--------	--

Batteri identificazione biochimica Piastra Seminata#	B5501	BIOCHIMICO	3 gg	
--	-------	------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

B

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Batteri in campioni biologici diversi ricerca microscopica Liquidi Cavitari, Liquido Cefalorachidiano (LIQCELS), Pus da Ferita, Pus, Tampone, Tampone da Ascesso, Tampone piaga da Decubito, Tampone Ferita, Tampone Ferita chirurgica, Tampone Fistola, Tampone da Lesione, Tampone da piaga, Tampone Ulcera, Tampone da Ulcus Cruris, Tampone Pustola, Tampone Pus, Urine, Materiale Vario	B5100		5-6 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE MATERIALE INCLUSO IN PARAFFINA				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
BCL2-JH: t(14;18) Test qualitativo su materiale bioptico CIT-SOMA	8720	PCR	11 gg	
Quantità da prelevare: 2 CAMPIONI SANGUE EDTA o 1 SANGUE MIDOLLARE Utilizzare il sacchetto fucsia per l'invio dei campioni				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
BCL2-JH: t(14;18) test qualitativo su sangue intero CIT-SOMA	8748	PCR E ELETTROFORESI SU GEL	11 gg	
Quantità da prelevare: 2 CAMPIONI SANGUE EDTA o 1 SANGUE MIDOLLARE Utilizzare il sacchetto fucsia per l'invio dei campioni				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
BCR-ABL 1 t(9;22) p190 test quantitativo Sangue Intero EDTA	8727	REAL TIME PCR	11 gg	
Quantità da prelevare: 4 PROVETTE SANGUE EDTA Compilare consenso informato INF_GEN00				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
BCR-ABL 1 t(9;22) p210 test quantitativo Sangue Intero EDTA	8732	REAL TIME PCR	11 gg	
Quantità da prelevare: 4 SANGUE INTERO EDTA Compilare consenso informato INF_GEN00				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
BCR-ABL 1 t(9;22) test qualitativo (Cromosoma Philadelphia) Sangue Intero EDTA, Sangue Midollare in EDTA o CITRATO	99009	PCR	11 gg	
Quantità da prelevare: 3 SANGUE INTERO EDTA o 1 SANGUE MIDOLLARE Compilare consenso informato INF_GEN00				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Benzene Urine Fine Turno Urine F.T.	7660	GC	8 gg	
Quantità da prelevare: 10 mL Utilizzare provetta specifica di tipologia no vacutainer (cod. SAP 500021291 PROVETTA PER URINE 10mL FONDO A U +TAPPO)				
VALORI DI RIFERIMENTO				
µg/L Soggetti professionalmente esposti: < 5 Si consiglia come indice biologico di esposizione il dosaggio dell'Acido S-fenilmercapturico nelle urine				

VADEMECUM GENERALE

B

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
BENZENE Urine Inizio Turno	766	GC	8 gg	

Quantità da prelevare: 10 mL
Utilizzare provetta specifica di tipologia no vacutainer (cod. SAP 500021291 PROVETTA PER URINE 10mL FONDO A U +TAPPO)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO	µg/L	Soggetti professionalmente esposti: < 5
		Si consiglia come indice biologico di esposizione il dosaggio dell'Acido S-fenilmercapturico nelle urine

Benzodiazepina matrice urinaria - Valenza Clinica	6691CL	EMIT	3 gg	
Urine				
Non si esegue il sabato				SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO		
BENZODIAZEPINE (Test di screening)	Negativo	
	ng/mL	

Benzodiazepine Matrice Piliifera Valenza Clinica	1567CL	LC-MS-MS	13 gg	
Capelli				
				SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO		
BENZODIAZEPINE		Negativo
7-amminoflunitrazepam	ng/mL	Fino a 0,05
Alprazolam	ng/mL	Fino a 0,05
Bromazepam	ng/mL	Fino a 0,05
Diazepam	ng/mL	Fino a 0,05
Flunitrazepam	ng/mL	Fino a 0,05
Lorazepam	ng/mL	Fino a 0,05
Nordazepam	ng/mL	Fino a 0,05
Oxazepam	ng/mL	Fino a 0,05

Benzodiazepine matrice piliifera -valenza medico legale	1567	LC-MS-MS	13 gg	
Capelli				
				SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO		
BENZODIAZEPINE		Negativo
7-Amminoflunitrazepam	ng/mg	Fino a 0,05
Alprazolam	ng/mg	Fino a 0,05
Bromazepam	ng/mg	Fino a 0,05
Diazepam	ng/mg	Fino a 0,05
Flunitrazepam	ng/mg	Fino a 0,05
Lorazepam	ng/mg	Fino a 0,05
Nordazepam	ng/mg	Fino a 0,05
Oxazepam	ng/mg	Fino a 0,05

BENZODIAZEPINE Sieriche	66918	EMIT	2 gg	
Siero				
				SYNLAB ITALIA

Quantità da prelevare: 1 mL
L'esame "BENZODIAZEPINE" comprende i composti sottoelencati che non sono quindi eseguiti singolarmente:
Medazepam, Alprazolam, Bromazepam, Clonazepam, Clordiazepossido, Desalchilflurazepam, Diazepam, Flunitrazepam, Flurazepam, Lorazepam, Nitrazepam, Oxazepam, Prazepam, Temazepam, Triazolam, Demoxepam, N-Desmetildiazepam

Campioni con risultati che indicano la presenza di benzodiazepine richiedono un'ulteriore valutazione, allo scopo di identificare lo o le specifiche benzodiazepine presenti

Il prelievo non può essere effettuato in provette con gel separatore in quanto quest'ultimo può modificare il dosaggio del farmaco nel siero e quindi il risultato dell'esame effettuato con queste provette non è attendibile.

VALORI DI RIFERIMENTO	mg/L	< 0,3 Negativo ≥ 0,3 Positivo
-----------------------	------	----------------------------------

VADEMECUM GENERALE

B

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Benzodiazepine su urine test di conferma Urine	1566	LC-MS-MS	8 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

BENZODIAZEPINE		
7-Amminoflunitrazepam	ng/mL	< 50
alfa-idrossialprazolam	ng/mL	< 50
Bromazepam	ng/mL	< 50
Lorazepam	ng/mL	< 50
Nordazepam	ng/mL	< 50
Oxazepam	ng/mL	< 50

Benzodiazepine test di screening su urine -valenza medico legale Urine	6691	EMIT	3 gg	
--	------	------	------	--

Non si esegue il sabato

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

BENZODIAZEPINE (Test di screening)	ng/mL	Negativo
------------------------------------	-------	----------

Ber e1 Bertholletia excelsa Siero	5F354	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

BERILLIO Urine Fine Turno Urine F.T.	1448	ICP-MS	8 gg	
--	------	--------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L Popolazione generale:
< 0,76

BERILLIO Urine Inizio Turno Urine I.T.	1449	ICP-MS	8 gg	
--	------	--------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L Popolazione generale:
< 0,76

Bet v1 Betulla verrucosa Siero	5T215	ImmunoCAP	5 gg	
--	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Bet v2 Betula verrucosa Siero	5T216	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

VADEMECUM GENERALE

B

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Beta Latto-globulina	6F77	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Betula verrucosa (Betulla)	6T3	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

BHCG Totale Plasmatica	6180	CMIA	1 gg	
Siero				

VALORI DI RIFERIMENTO

mUI/mL

Uomini : < 5

Donne:
Non in gravidanza : < 5

In gravidanza :
sett. 1 - 10 202 - 231000
11 - 15 22536 - 234990
16 - 22 8007 - 50064
23 - 40 1600 - 49413

Bicarbonati	2400	ENZIMATICO	2 gg	
Plasma Eparinato				

Quantità da prelevare: 3 mL
Provetta dedicata e tappata

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/L

Maschi:
1 - 2 anni: 17 - 25
3 - 17 anni: 18 - 29
oltre i 18 anni: 22 - 29

Femmine:
1 - 2 anni: 17 - 25
3 - 17 anni: 18 - 29
oltre i 18 anni: 22 - 29

Bilirubinemia Frazionata	281	DIAZOREAZIONE	1 gg	
Siero				

VALORI DI RIFERIMENTO

Bilirubina totale mg/dL 0,20 - 1,20
Bilirubina diretta mg/dL < 0,5

Bilirubinemia Totale	280	SALE DI DIAZONIO	1 gg	
Siero				

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL 0,20 - 1,20

Bilirubinemia Totale reflex	1412	SALE DI DIAZONIO	1 gg	
Siero				

VALORI DI RIFERIMENTO

BILIRUBINA TOTALE mg/dL 0,20 - 1,20
Bilirubina Diretta mg/dL < 0,5

VADEMECUM GENERALE

B

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
BIOPSIA LIQUIDA GENE EGFR: ricerca mutazioni sugli esoni 18,19,20,21	8745	REAL TIME PCR	11 gg	

CIT-SANGUE (STRECK TUBE)

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE sangue in cell free DNA BCT
E' obbligatorio inserire la data prelievo.

SYNLAB ITALIA

Il materiale da utilizzare per l'esecuzione del test su sangue in cell free DNA è ordinabile presso il magazzino (cod. SAP 550000904 Kit per DNA Circolante).
Nel caso venga richiesto esame su sangue in cell free DNA BCT, se disponibile referto su biopsia solida inserirne l'esito su scheda accettazione SCHEACC042.

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

BIOPSIA LIQUIDA Gene KRAS: ricerca mutazioni negli esoni 2, 3, 4	8746	REAL TIME PCR	11 gg	
---	------	---------------	-------	--

CIT-SANGUE (STRECK TUBE)

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE sangue in cell free DNA BCT
E' obbligatorio inserire la data prelievo.

SYNLAB ITALIA

Il materiale da utilizzare per l'esecuzione del test su sangue in cell free DNA è ordinabile presso il magazzino (cod. SAP 550000904 Kit per DNA Circolante).
Nel caso venga richiesto esame su sangue in cell free DNA BCT, se disponibile referto su biopsia solida inserirne l'esito su scheda accettazione SCHEACC042.

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

BIOPSIA LIQUIDA PROFILAZIONE MOLECOLARE DEL TUMORE DEL COLON	8747	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	11 gg	
---	------	---	-------	--

CIT-SANGUE (STRECK TUBE)

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE sangue in cell free DNA BCT
E' obbligatorio inserire la data prelievo.

SYNLAB ITALIA

Il materiale da utilizzare per l'esecuzione del test su sangue in cell free DNA è ordinabile presso il magazzino (cod. SAP 550000904 Kit per DNA Circolante).
Nel caso venga richiesto esame su sangue in cell free DNA BCT, se disponibile referto su biopsia solida inserirne l'esito su scheda accettazione SCHEACC042.

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

BIOPSIA LIQUIDA PROFILAZIONE MOLECOLARE DEL TUMORE DEL POLMONE	8564	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	11 gg	
---	------	---	-------	--

CIT-SANGUE (STRECK TUBE)

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE sangue in cell free DNA BCT
E' obbligatorio inserire la data prelievo.

SYNLAB ITALIA

Il materiale da utilizzare per l'esecuzione del test su sangue in cell free DNA è ordinabile presso il magazzino (cod. SAP 550000904 Kit per DNA Circolante).
Nel caso venga richiesto esame su sangue in cell free DNA BCT, se disponibile referto su biopsia solida inserirne l'esito su scheda accettazione SCHEACC042.

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Bismuto (SYNLAB)	4210	ICP-MS	16 gg	
-------------------------	------	--------	-------	--

Sangue Intero Eparinato

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 0,2

VADEMECUM GENERALE

B

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
BITEST (Screening biochimico nel I trimestre di gravidanza)	8951	IF-TRACE	6 gg	

Siero congelato

Quantità da prelevare: 2 mL
Inviare modulo SCHEAN05 compilando tutti i dati obbligatori
La data del prelievo deve essere al massimo il giorno successivo alla misurazione della translucenza nucale.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Data di nascita
Ultima Mestruazione (U.M.)
Data presunta del parto (D.P.P.)
Data prelievo
Precedenti cromosomopatie
Diabete insulino-dipendente
Età materna alla D.P.P. anni
Misura CRL con U.S.
Osso nasale
E.G. alla data del prelievo da U.M. Settimane
E.G. alla data del prelievo in base a misura CRL Settimane
Data ecografia
Ecografia eseguita da dott. / dott.ssa:
Peso Kg
NT mm
MoM
PAPP-A UI/L
MoM
Free β-HCG UI/L
MoM
Risultato screening
Rischio di Sindrome di Down
Rischio di Sindrome di Down atteso in base alla sola età
Rischio di sindrome di EDWARDS e PATAU,calcolato c

Blatella Germanica (Scarafaggio)	616	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	-----	-------------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

BOCCA - BIOPSIA CAVO ORALE	IN10015	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	18 gg	
-----------------------------------	---------	--	-------	--

CIT-BOCCA

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

BOCCA - BIOPSIA CAVO ORALE ESCISSIONE/NEOFORMAZIONE	IN10016	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	18 gg	
--	---------	--	-------	--

CIT-BOCCA

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

BOCCA - BIOPSIA LINGUA	IN10093	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
-------------------------------	---------	--	-------	--

CIT-BOCCA

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VADEMECUM GENERALE

B

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
BOCCA - EMIGLOSSECTOMIA CIT-BOCCA	IN10017	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 15_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

BOCCA - RESEZIONE CUNEIFORME LINGUA CIT-BOCCA	IN10094	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

BORDETELLA ANTICORPI IgG e IgM Siero	2269	ELISA	7 gg	
--	------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anticorpi Anti Pertosse IgG	NTU	< 9,0 Negativo 9,0 - 11,0 Indeterminato > 11,0 Positivo
Anticorpi Anti Pertosse IgM	NTU	< 9,0 Negativo 9,0 - 11,0 Indeterminato > 11,0 Positivo

BORRELIA BURGDOFERI DNA Liquor congelato, Plasma EDTA congelato, Sangue Intero EDTA, Siero congelato, Urine Congelate	1548	REAL TIME PCR	11 gg	
--	------	---------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Borrelia burgdorferi DNA	Non rilevato
	Limite di sensibilità (LoD): 0,568 copie/μL

Ricerca eseguita su :

BORRELIA BURGDOFERI ANTICORPI IgG e IgM Siero	2285	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anticorpi Anti-Borrelia Burgdorferi IgG	kAU/L	< 10 Negativo 10 - 15 Indeterminato > 15 Positivo
Anticorpi Anti-Borrelia Burgdorferi IgM	Index	< 0,9 Negativo 0,9 - 1,1 Indeterminato > 1,1 Positivo

VADEMECUM GENERALE

B

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
BORRELIA IgG TEST DI CONFERMA Siero	1194	IMMUNOBLOTTING	16 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Borrelia IgG	Negativo
p100	
VlsE	
p58	
p41	
p39	
OspA	
OspC B. s.s.	
OspC B. afz.	
OspC B. gar.	
OspC B. spiel.	
p18 B. s.s.	
p18 B. afz.	
p18 B. bav.	
p18 B. gar.	
p18 B. spiel.	

BORRELIA IgM TEST DI CONFERMA Siero	1193	IMMUNOBLOTTING	16 gg	
---	------	----------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Borrelia IgM	Negativo
p100	
VlsE	
p58	
p41	
p39	
OspA	
OspC B. s.s.	
OspC B. afz.	
OspC B. gar.	
OspC B. spiel.	
p18 B. s.s.	
p18 B. afz.	
p18 B. bav.	
p18 B. gar.	
p18 B. spiel.	

Bos d4 Boss spp. Siero	5F76	ImmunoCAP	5 gg	
----------------------------------	------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Bos d5 Boss spp. Siero	5F77	ImmunoCAP	5 gg	
----------------------------------	------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Bos d6 Bos spp. Siero	5E204	ImmunoCAP	5 gg	
---------------------------------	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

VADEMECUM GENERALE

B

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Bos d8 Boss spp. Siero	5F78	ImmunoCAP	5 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Botrytis Cinerea Siero	6M7	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
----------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

BP180 Abs Plasma EDTA, Plasma Citratato, Plasma Eparinato, Siero	1076	ELISA	9 gg	
--	------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 500 µL

In caso di consegna tardiva al laboratorio il campione può essere conservato in un luogo fresco (2 - 8 °C) per un massimo di 14 giorni.

Per conservazioni maggiori ai 14 giorni congelare il campione a -20°C

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

RU/mL < 20 Negativo

BP230 Abs Plasma EDTA, Plasma Citratato, Plasma Eparinato, Siero	1075	ELISA	9 gg	
--	------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 500 µL

In caso di consegna tardiva al laboratorio il campione può essere conservato in un luogo fresco (2 - 8 °C) per un massimo di 14 giorni.

Per conservazioni maggiori ai 14 giorni congelare il campione a -20°C

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

RU/mL < 20 Negativo

BRCA extended Sangue Intero EDTA	2033	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	
--	------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN09 Synlab oppure consenso dello specialista).

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

BRCA somatico su solido : ricerca di mutazioni e microriarrangiamenti nei geni BCRA1 e 2 su biopsia CIT-SOMA	2072	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	16 gg	
--	------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE MATERIALE INCLUSO IN PARAFFINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

BRCA1 e 2 REFLEX : ricerca di mutazioni e microriarrangiamenti Sangue Intero EDTA	2081	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	31 gg	
---	------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 camp. Sangue EDTA + 1 tampone cavo orale

Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN09 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

ATTENZIONE : è obbligatorio, oltre all'invio della campione di sangue intero anche l'invio di un tampone del cavo orale del paziente

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

B

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
BREATH TEST LATTOSIO (Lettura) Kit Specifico Breath Test Latt	2239	SPETTROMETRIA DI MASSA	5 gg	

PER LA REGIONE LOMBARDIA : PRESTAZIONE EROGABILE SOLO IN STRUTTURE/POLIAMBULATORI CHE PRESENTANO LA SEZIONE DI GASTROENTEROLOGIA

SYNLAB ITALIA

Per la corretta esecuzione e per non alterare il risultato del test occorre seguire le istruzioni di seguito riportate:

- Dopo aver ottenuto il permesso dal proprio medico curante, sospendere l'eventuale assunzione in corso di antibiotici, antiacidi o gastroprotettori nelle due settimane precedenti l'esame;
- Non assumere fermenti lattici o lassativi nei 3 giorni precedenti l'esame;
- La sera del giorno precedente il test, si dovrà consumare una cena a base solo di riso, carne (o pesce) e acqua. Evitare salumi, insaccati, farinacei (pane e pasta) burro, margarina, latticini e condimenti vari;
- Dalla mezzanotte precedente al test non mangiare e non fumare. Presentarsi quindi a digiuno la mattina dell'esame. Si può assumere acqua.

Durante l'effettuazione del test, il paziente, per non alterare la composizione dell'aria espirata, dovrà rispettare le seguenti indicazioni:

- non mangiare
- non fumare
- evitare di allontanarsi dal laboratorio e comunque di eseguire qualsiasi attività fisica
- è possibile bere acqua naturale (non gasata) in modiche quantità

VALORI DI RIFERIMENTO

T0	per mille	
T90	per mille	
Recupero percentuale	%	0 – 3,9 Intolleranza/malassorbimento al lattosio ≥ 4 Assorbimento nella norma

Breath Test urea C13 (lettura) Kit Specifico	1488	GC/MS	5 gg	
--	------	-------	------	--

Per ottenere un risultato preciso ed attendibile, il paziente deve:

- essere a digiuno da almeno 6 ore
- eseguire il test dopo almeno 4 settimane dalla fine della cura antibiotica specifica
- eseguire il test dopo aver sospeso per almeno 15 giorni la somministrazione di antiacidi.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

T0	per mille	
T30	per mille	
DOB = T30 - T0	per mille	< 5,00

Broccolo Siero	6F260	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

Bromazepam Siero	1594	HPLC	8 gg	
----------------------------	------	------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L	Maschi: Soggetti in terapia : 50,0 - 200,0	Femmine: Soggetti in terapia : 50,0 - 200,0
------	---	--

BROMELINA Siero	6K202	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

VADEMECUM GENERALE

B

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Bromuro sierico (SYNLAB) Siero	405	SPETTROFOTOMETRIA	22 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL
- Osservare un digiuno 8-12 ore prima del prelievo
- evitare di sostenere sforzi fisici nelle 12 ore prima del prelievo
- non fumare nel periodo di tempo intercorrente tra il risveglio e l'effettuazione del prelievo
- non assumere alcool nelle 12 ore precedenti il prelievo

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO	mg/L	500,00 - 1.500
-----------------------	------	----------------

Bromus Inermis (Paleo) Siero	6G11	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO	kU/L	
Concentrazione		
Classe		

BRONCO - ASBESTO E SIDEROCITI SINGOLO CAMPIONE CIT-BRONCO	IN10284	COLORAZIONE CON PAPANICOLAOU + PERLS	10 gg	
---	---------	--------------------------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN ALCOOL 70°/95°
Codice SIAPEC : 7_AP1

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO	Vedi Allegato
-----------------------	---------------

BRONCO - BIOPSIA TRANSBRONCHIALE CIT-BRONCO	IN10018	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO	Vedi Allegato
-----------------------	---------------

BRONCO - ESPETTORATO SINGOLO CAMPIONE CIT-BRONCO	IN10019	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON	10 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN ALCOOL 70°/95°

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO	Vedi Allegato
-----------------------	---------------

Buprenorfina matrice pilifera Capelli	1081	LC-MS-MS	13 gg	
---	------	----------	-------	--

Quantità da prelevare: Diametro ciocca 1 cm diviso in 2 aliquote
Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione.
Esegui il prelievo secondo procedura ed inviare i campioni con catena di custodia.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO		
BUPRENORFINA		
Buprenorfina	ng/mg	Fino a 0,05
Norbuprenorfina	ng/mg	Fino a 0,05

Buprenorfina matrice pilifera - Valenza clinica Capelli	1081CL	LC-MS-MS	13 gg	
---	--------	----------	-------	--

Quantità da prelevare: Diametro ciocca 1 cm diviso in 2 aliquote
Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione.
Esegui il prelievo secondo procedura ed inviare i campioni con catena di custodia.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO		
BUPRENORFINA		
Buprenorfina	ng/mg	Fino a 0,05
Norbuprenorfina	ng/mg	Fino a 0,05

VADEMECUM GENERALE

B

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Buprenorfina matrice urinaria Urine	848	EMIT	3 gg	

Se il campione è inviato dopo le 24 ore dalla raccolta congelare a - 20 °C. Per l'esecuzione di questo esame è necessario inviare i campioni con catena di custodia. Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

SYNLAB ITALIA

Non si esegue il sabato

VALORI DI RIFERIMENTO

BUPRENORFINA (Test di screening) Negativo
ng/mL

Buprenorfina matrice urinaria - Valenza clinica Urine	848CL	EMIT	3 gg	
---	-------	------	------	--

Se il campione è inviato dopo le 24 ore dalla raccolta congelare a - 20 °C.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

BUPRENORFINA (Test di screening) Negativo
ng/mL

Buprenorfina test di conferma su urine Urine	6346	LC-MS-MS	8 gg	
--	------	----------	------	--

Quantità da prelevare: 20 mL aliquote B e C
Se il campione è inviato dopo le 24 ore dalla raccolta congelare a - 20 °C.
Il sabato è da escludere dal conteggio degli 8 giorni di refertazione.

SYNLAB ITALIA

Per l'esecuzione di questo esame è necessario inviare i campioni con catena di custodia.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

VALORI DI RIFERIMENTO

Buprenorfina < 5,0
ng/mL Negativo
Norbuprenorfina < 5
ng/mL Negativo

C1 inattivatore (esterasi) Siero	1201	NEFELOMETRIA	2 gg	
--	------	--------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 210 - 390

C1q (Esterasi) Siero	1202	NEFELOMETRIA	3 gg	
--------------------------------	------	--------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 100,0 - 250,0

CA 15-3 Siero	6512	CMIA	2 gg	
-------------------------	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 31,3

CA 19-9 (GICA) Siero	6511	CMIA	2 gg	
--------------------------------	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 37,0

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CA 50 Siero	6518	CHEMILUMINESCENZA	4 gg	

Risposta dopo 48 h

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 25,0

CA 72-4 Siero	6517	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
-------------------------	------	-------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L < 6

CA-125 Siero	6510	CMIA	2 gg	
------------------------	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 35,0

Cabergolina (SYNLAB) Siero	1119	LC-MS	6 gg	
--------------------------------------	------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L Valore di riferimento non proposto

Cacao Siero	6F93	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-----------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe kU/L

CACO (DIOSPYRUS KAKI) Siero	6F301	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---------------------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe kU/L

Cadmio ematico Sangue intero Li-Eparina	7131	ASSORBIMENTO ATOMICO	8 gg	
---	------	----------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L Soggetti professionalmente esposti:
< 5

CADMIO Urine Fine Turno (C) Urine F.T.	71309	ICP-MS	8 gg	
--	-------	--------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio. Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 791 CREATININA URINE FINE TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

CADMIO Urine Fine Turno µg/g creatinina Soggetti professionalmente esposti:
< 5
Creatinina Urine Fine Turno g/L 0,30 - 3,00

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CADMIO Urine Inizio Turno (C) Urine I.T.	7139	ICP-MS	8 gg	

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.

- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

CADMIO Urine Inizio Turno	µg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti:
		< 5
Creatinina Urine Inizio Turno	g/L	0,30 - 3,00

Caffe' Siero	6F221	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

Caffeina (SYNLAB) Siero	798	GAS CROMATOGRAFIA	11 gg	
-----------------------------------	-----	-------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/L	2,0 – 20,0 Valori normali
		5,0 – 20,0 Neonati prematuri con apnea
		> 20,0 Tossicità

Calamaro Siero	6F258	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

Calcemia (Ca) Siero	244	COLORIMETRICO	1 gg	
---------------------------------	-----	---------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/dL	8,4 - 10,2
--	-------	------------

Calcio Ionizzato Siero congelato	250	POTENZIOMETRICO ISE	3 gg	
--	-----	---------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	mmol/L	1,09 - 1,30
--	--------	-------------

Calcitonina Siero congelato	6410	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
---------------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	ng/L	Maschi: < 12,7	Femmine: < 5,9
--	------	----------------	----------------

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Calciuria - campione estemporaneo Urine	2540	COLORIMETRICO	1 gg	

Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/mg creatinina	Maschi:	Femmine:
	0 - 0 anni: 0,03 - 0,81	0 - 0 anni: 0,03 - 0,81
	1 - 1 anni: 0,03 - 0,56	1 - 1 anni: 0,03 - 0,56
	2 - 2 anni: 0,02 - 0,50	2 - 2 anni: 0,02 - 0,50
	3 - 6 anni: 0,02 - 0,30	3 - 6 anni: 0,02 - 0,30
	7 - 17 anni: 0,04 - 0,70	7 - 17 anni: 0,04 - 0,70
	oltre i 18 anni: 0,05 - 0,30	oltre i 18 anni: 0,05 - 0,30

Calciuria (Ca) Urine 24h	254	COLORIMETRICO	2 gg	
--------------------------------------	-----	---------------	------	--

Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h	100,00 - 300,00
--------	-----------------

Calprotectina fecale Feci	843	CHEMILUMINESCENZA	5 gg	
-------------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
I campioni di feci dovranno essere raccolti ed inviati in nuovi dispositivi dedicati (cod. SAP 600063554).

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/g	< 50 Normale
	50 - 120 Borderline
	> 120 Elevato

CALRETICULINA: stato mutazionale esone 9 analisi qualitativa Sangue Intero EDTA	8723	REAL TIME PCR, PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO	11 gg	
---	------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 2 provette sangue EDTA
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Campylobacter esame colturale Feci	B5034		4 gg	
--	-------	--	------	--

Can f1 Canis familiaris Siero	5E101	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L	< 0,10
-------	--------

Can f5 Canis familiaris Siero	5E226	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L	< 0,10
-------	--------

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CANCER PANEL - pannello NGS per la predisposizione al carcinoma ereditario	2091	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	

Sangue Intero EDTA

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Candida Albicans	6M5	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------	-----	-------------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L

Classe

CANDIDOSI ANTIGENE MANNAN (SYNLAB)	433	EIA	8 gg	
---	-----	-----	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL

< 1,40 Negativo
1,40 – 2,60 Indeterminato
> 2,60 Positivo

Cannabinoidi matrice pilifera	1082	LC-MS-MS	13 gg	
--------------------------------------	------	----------	-------	--

Capelli

Quantità da prelevare: Diametro ciocca 1 cm diviso in 2 aliquote

Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione.

Eseguire il prelievo secondo procedura ed inviare i campioni con catena di custodia.

Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

CANNABINOIDI

THC ng/mg Fino a 0,1

THC-COOH pg/mg Fino a 0,2

Cannabinoidi matrice pilifera - Valenza Clinica	1082CL	LC-MS-MS	13 gg	
--	--------	----------	-------	--

Capelli

Quantità da prelevare: Diametro ciocca 1 cm diviso in 2 aliquote

Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione.

Eseguire il prelievo secondo procedura ed inviare i campioni con catena di custodia.

Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

CANNABINOIDI

THC ng/mg Fino a 0,1

THC-COOH pg/mg Fino a 0,2

Cannabinoidi matrice urinaria	667	IMMUNOENZIMATICO	3 gg	
--------------------------------------	-----	------------------	------	--

Urine

VALORI DI RIFERIMENTO

CANNABINOIDI (Test di screening)

ng/mL

Fino a 50
Negativo

Cannabinoidi matrice urinaria - Valenza clinica	667CL	IMMUNOENZIMATICO	3 gg	
--	-------	------------------	------	--

Urine

VALORI DI RIFERIMENTO

CANNABINOIDI (Test di screening)

ng/mL

Fino a 50
Negativo

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cannabinoidi test di conferma su urine Urine	6347	LC-MS-MS	8 gg	

Se il campione è inviato dopo le 24 ore dalla raccolta congelare a - 20 °C.
Il sabato è da escludere dal conteggio degli 8 giorni di refertazione

SYNLAB ITALIA

Per l' esecuzione di questo esame è necessario inviare i campioni con catena di custodia. Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

VALORI DI RIFERIMENTO

THC - COOH ng/mL Fino a 15
Negativo

Cannella Plasma, Siero	6F220	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
----------------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Capesanta Siero	6F338	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Carbamazepina (Tegretol) Siero	674	IMMUNOTURBIDIMETRIA	2 gg	
--	-----	---------------------	------	--

Non si esegue il sabato

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/mL Livello terapeutico :
4 - 12
Concentrazione tossica :
> 15

CARBOSSIEMOGLOBINA Sangue Intero Eparinato	720	CO-Ossimetria	8 gg	
--	-----	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

% Hb totale Soggetti professionalmente esposti:
< 3.5 (f.t.)

Carcinoma Cellule Squamose (S.C.C. o T.A.4) Siero	117	IF-TRACE	2 gg	
---	-----	----------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 1,9

CARCIOFO (CYNARA SCOLYMUS) Siero	6F358	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CARDIO PGx - Pannello farmacogenetica per farmaci cardiologici	8712	MASS-ARRAY	11 gg	

Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE (5 mL)

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario specifico per il test (INF_GEN018 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

CARDIOPANEL EXTENDED - pannello NGS per la diagnosi di Cardiomiopatia	2058	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	
--	------	---	-------	--

Sangue Intero EDTA

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Cariotipo da Liquido Amniotico	1425	COLTURA IN SITU E BANDEGGIO QFQ	16 gg	
---------------------------------------	------	---------------------------------	-------	--

Liquido Amniotico

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + SCHEACC024

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Cariotipo da Villocentesi	1428	CITOGENETICA	16 gg	
----------------------------------	------	--------------	-------	--

Villi coriali

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + SCHEACC023

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Cariotipo su materiale abortivo	1507	MICROSCOPICO	21 gg	
--	------	--------------	-------	--

Tessuto Abortivo

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + SCHEACC033

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Cariotipo su sangue periferico	9900	COLTURE IN SOSPENSIONE E BANDEGGIO QFQ	21 gg	
---------------------------------------	------	--	-------	--

Sangue intero Li-Eparina

Inviare la scheda accettazione SCHEACC013

SYNLAB ITALIA

I campioni su sangue periferico devono essere spediti il prima possibile dopo il prelievo. Saranno accettati solo i campioni che perverranno presso il laboratorio Synlab Italia entro 96 ore (4 gg) dal prelievo.

Il campione non deve essere inviato il sabato e nei giorni prefestivi.

Sono necessarie 2 provette contenenti litio-eparina per ogni paziente.

PER SERVICE E PRIVATI CON PARTICOLARE ESEZIONE

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cariotipo su sangue periferico ad alta risoluzione Sangue intero Li-Eparina	1423	MICROSCOPICO	21 gg	

Quantità da prelevare: 2 CAMPIONI
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + SCHEACC013

SYNLAB ITALIA

I campioni su sangue periferico devono essere spediti il prima possibile dopo il prelievo. Saranno accettati solo i campioni che perverranno presso il laboratorio Synlab Italia entro 96 ore (4 gg) dal prelievo

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Carne di Bue Siero	6F27	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Carne di Coniglio Siero	6F213	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Carne di Maiale Siero	6F26	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Carne di Montone Siero	6F88	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Carne di Pollo Siero	6F83	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Carne di Tacchino Siero	6F284	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Carnitina (SYNLAB) Siero congelato	79970	LC-MS	9 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e
cliniche

Carota Siero	6F31	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Carpino bianco Plasma, Siero	6T209	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Caseina Siero	6F78	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Castagna Siero	6F299	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Catecolamine frazionate urine 24H Urine 24h Acidificate	787	HPLC	7 gg	
---	-----	------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

La raccolta del campione di urine delle 24 h prevede l' acidificazione delle urine stesse. L' acidificazione viene effettuata versando nel recipiente, prima di iniziare la raccolta, circa 5 ml di HCl 5 M per ogni litro di urina (4 cucchiaini di acido muriatico del commercio). Prelevare un'aliquota di circa 10 ml di urina delle 24 h acidificata con l'indicazione della diuresi totale ed inviare in apposito contenitore di trasporto.

Risposta dopo 24 h.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ADRENALINA Urinaria	µg/24h	< 27,0
NORADRENALINA Urinaria	µg/24h	< 97,0

Cavolfiore Siero	6F291	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
----------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cavolino di Bruxelles Siero	6F217	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
Cavolo Siero	6F216	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
CD20+ sangue periferico Sangue Intero EDTA	1717	CITOFUORIMETRIA	8 gg	
Quantità da prelevare: 4 mL - prelevare in K3 EDTA ; - volume minimo 4 mL ; - temperatura di conservazione ambiente (20±5°C) - il prelievo deve essere tassativamente eseguito nello stesso giorno della spedizione in service ; - non possono essere accettati campioni biologici inviati VENERDI e PREFESTIVI.				SYNLAB ITALIA
Compilare modulo SCHEACC039 Richiesta sottopopolazioni linfocitarie				
VALORI DI RIFERIMENTO				
		%		
CDT-Transferrina Carboidrato Carente (Desialata) HPLC Provetta Dedicata Siero	1346	HPLC	5 gg	
				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
		%		
		Fino a 2,0		
CEA (Carcino - Embryonic Antigen) Siero	650	CMIA	2 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
		ng/mL		
		< 5,0		
Ceci Plasma, Siero	6F309	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
Ceruloplasmina Siero	140	IMMUNOTURBIDIMETRIA	2 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
		g/L		
		0,20 - 0,60		
CERVICE - BIOPSIA CERVICE UTERINA CERVICE UTERINA	IN10021	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	18 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CERVICE - CONIZZAZIONE/LEEP DELLA CERVICE CERVICE UTERINA	IN10022	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
CERVICE - POLIPECTOMIA ENDOCERVICALE CERVICE UTERINA	IN10024	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
CERVICE UTERINA - COLORAZIONE IMMUNOCITOCHIMICA: L1 CERVICE UTERINA	IN10261	COLORAZIONI IMMUNOCITOCHIMICHE + VALUTAZIONE	13 gg	
Quantità da prelevare: 1 CONTENITORE THIN PREP Codice SIAPEC : 3_AP9				SYNLAB ITALIA
SOLO SU CITOLOGICI ESEGUITI PRESSO IL NOSTRO LABORATORIO				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
CERVICE UTERINA - COLORAZIONE IMMUNOCITOCHIMICA: p16 CERVICE UTERINA	IN10262	COLORAZIONI IMMUNOCITOCHIMICHE + VALUTAZIONE	13 gg	
Quantità da prelevare: 1 CONTENITORE THIN PREP Codice SIAPEC : 3_AP9				SYNLAB ITALIA
SOLO SU CITOLOGICI ESEGUITI PRESSO IL NOSTRO LABORATORIO				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
CERVICE UTERINA - FULLPAP: MONOSTRATO+HPV+P16-L1 CERVICE UTERINA	IN10264	COLORAZIONE CON PAPANICOLAOU+HPV-PCR + 2 COLORAZIONI	11 gg	
Quantità da prelevare: 1 CONTENITORE THIN PREP				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
CERVICE UTERINA - HR-HPV COMPLETO DNA+RNA CERVICE UTERINA	IN10310		8 gg	
Quantità da prelevare: 1 CONTENITORE THIN PREP				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
CERVICE UTERINA - NEWPAP - DNA: MONOSTRATO + HPV HIGH RISK Contenitore in fase liquida per citologia	IN10266	CITOLOGIA + BD ONCLARITY	11 gg	
Quantità da prelevare: 1 CONTENITORE THIN PREP				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
CERVICE UTERINA - NEWPAP-RNA: MONOSTR+HPV HIGH RISK CERVICE UTERINA	IN10268	CITOLOGIA + TMA	11 gg	
Quantità da prelevare: 1 CONTENITORE THIN PREP				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CERVICE UTERINA - PAP TEST MONOSTRATO CERVICE UTERINA	IN10270	COLORAZIONE CON PAPANICOLAOU	11 gg	

Quantità da prelevare: 1 CONTENITORE THIN PREP

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

CERVICE UTERINA - PAP TEST SINGOLO VETRINO CERVICE UTERINA	IN10269	COLORAZIONE CON PAPANICOLAOU	11 gg	
--	---------	------------------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 VETRINO FISSATO

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

CERVICE UTERINA- HR HPV RNA di Papilloma Virus Contenitore in fase liquida per citologia	IN10298	AMPLIFICAZIONE TMA	10 gg	
--	---------	--------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CONTENITORE THIN PREP

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

CERVICE-TRIPAP - Pap test in fase liquida + Ricerca di DNA e mRNA di HPV Contenitore in fase liquida per citologia	IN10301	CITOLOGIA + REAL TIME PCR	11 gg	
--	---------	---------------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CONTENITORE THIN PREP

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Cetriolo Siero	6F244	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

CH 50 (complementemia) (SYNLAB) Siero congelato	1200	TURBIDIMETRIA	16 gg	
---	------	---------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 minuti) a temperatura ambiente, separare immediatamente dopo la centrifugazione e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL 41,7 - 95,1

Champignon (Funghi) Siero	6F212	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Chenopodium Album (Farinaccio) Siero	6W10	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Chimotripsina Fecale Feci	404	COLORIMETRICO	16 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/g 37°C

Maschi:
Attività Insufficiente : < 6,6
Attività Dubbia : 6,6 - 13,2
Attività Normale : > 13,2

Femmine:
Attività Insufficiente : < 6,6
Attività Dubbia : 6,6 - 13,2
Attività Normale : > 13,2

Chinidina (SYNLAB) Siero	293	HPLC	6 gg	
------------------------------------	-----	------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

Il prelievo non può essere effettuato in provette con gel separatore in quanto quest'ultimo può modificare il dosaggio del farmaco nel siero e quindi il risultato dell'esame effettuato con queste provette non è attendibile.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

1,0 - 5,0

Chiodi garofano Plasma, Siero	6F268	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione

kU/L

Classe

CHLAMYDIA PNEUMONIAE ANTICORPI IgG e IgM Siero	2270	ELISA	7 gg	
--	------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anticorpi Anti-Chlamydia Pneumoniae IgG

NTU

< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Indeterminato
> 11,0 Positivo

Anticorpi Anti-Chlamydia Pneumoniae IgM

NTU

< 9,0 Negativo
9,0 - 11,0 Indeterminato
> 11,0 Positivo

CHLAMYDIA PSITTACI ANTICORPI IgG,IgM e IgA (SYNLAB) Siero	2286	FIA	10 gg	
---	------	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anticorpi Anti-Chlamydia Psittaci IgG

Titolo

< 1/64 Negativo

Anticorpi Anti-Chlamydia Psittaci IgM

Titolo

< 1/20 Negativo

Anticorpi Anti-Chlamydia Psittaci IgA

Titolo

< 1/32 Negativo

Chlamydia psittaci IgA ABS (SYNLAB) Siero	13183	FIA	11 gg	
---	-------	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo

< 1/32 Negativo

Chlamydia psittaci IgG (SYNLAB) Siero	13180	FIA	10 gg	
---	-------	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo

< 1/64 Negativo

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Chlamydia psittaci IgM (SYNLAB) Siero	13182	FIA	10 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo < 1/20 Negativo

CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICORPI IgG e IgM Siero	2271	ELISA	7 gg	
---	------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anticorpi Anti-Chlamydia Trachomatis IgG	NTU	< 9,0 Negativo 9,0 - 11,0 Indeterminato > 11,0 Positivo
Anticorpi Anti-Chlamydia Trachomatis IgM	NTU	< 9,0 Negativo 9,0 - 11,0 Indeterminato > 11,0 Positivo

CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA SU TAMPONE CONGIUNTIVALE Tampone Congiuntivale destro, Tampone Congiuntivale sinistro	60011	REAL TIME PCR	6 gg	
---	-------	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)

SYNLAB ITALIA

Il campione deve essere inviato al laboratorio nel sacchetto di colore verde

VALORI DI RIFERIMENTO

Non rilevato

Chrysanthemum Leucanthemum (Margherita dei prati) Siero	6W7	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

Ciclosporina Sangue Intero EDTA	694	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
---	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Non si esegue il sabato

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

CICLOSPORINA (CSA)	µg/L	50 - 250 Range terapeutico
CICLOSPORINA (CSA) Tempo 1	µg/L	50 - 250 Range terapeutico

Ciliegia Siero	6F242	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

Cioccolato Siero	6F105	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
----------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cipolla Siero	6F48	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Cistatina C Plasma Eparinato, Siero	352	IMMUNOTURBIDIMETRIA	2 gg	
---	-----	---------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 0,64 - 1,23

Cisticercosi (Tenia Solium) Abs conferma (SYNLAB) Siero	4830	IMMUNOBLOTTING	16 gg	
---	------	----------------	-------	--

Viene eseguito in automatico in caso di screening positivo

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

CISTINA Plasmatica (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	558	LC/MS	15 gg	
---	-----	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

CISTINA Urinaria (SYNLAB) Urine 24H Congelate	365	LC-MS	16 gg	
---	-----	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

CITOMEGALOVIRUS (CMV) DNA QUALITATIVO su plasma o sangue Plasma EDTA congelato, Sangue Intero EDTA	2342	TMA	8 gg	
--	------	-----	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL plasma / 1 campione sangue intero
Il sangue intero in EDTA NON va congelato ma conservato a 2-8°C

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Citomegalovirus DNA (CMV) Qualitativo Non rilevato
Limite di sensibilità (LoD): UI/mL
Ricerca eseguita su :

CITOMEGALOVIRUS (CMV) DNA QUANTITATIVO su plasma o sangue Plasma EDTA congelato, Sangue Intero EDTA	2341	TMA	8 gg	
---	------	-----	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL plasma / 1 campione sangue intero
Il sangue intero in EDTA NON va congelato ma conservato a 2-8°C

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Citomegalovirus DNA (CMV) Quantitativo UI/mL Nessuna UI rilevata
log10 UI/mL
Limite di quantificazione (LoQ) : UI/mL
Ricerca eseguita su :

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Citomegalovirus Avidita' IgG Siero	1535	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

< 0,150 Avidità bassa
Possibile infezione primaria negli ultimi 3 mesi

0,150 - 0,250 Avidità intermedia
Possibile infezione recente o incompleta
maturazione dell'avidità delle IgG

> 0,250 Avidità alta
Improbabile infezione primaria negli ultimi 3 mesi

Citomegalovirus Avidita' IgG Reflex Siero	2276	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

< 0,150 Avidità bassa
Possibile infezione primaria negli ultimi 3 mesi

0,150 - 0,250 Avidità intermedia
Possibile infezione recente o incompleta
maturazione dell'avidità delle IgG

> 0,250 Avidità alta
Improbabile infezione primaria negli ultimi 3 mesi

Citomegalovirus IgG Abs Siero	1531	CMIA	2 gg	
---	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTICORPI ANTI-CITOMEGALOVIRUS IgG AU/mL < 6,0 Negativo
≥ 6,0 Positivo

Citomegalovirus IgG Abs conferma Siero	1533	IMMUNOBLOTTING	16 gg	
--	------	----------------	-------	--

Per una valutazione corretta, precisa ed affidabile del test di conferma è necessario richiedere contestualmente la determinazione di IgG e IgM.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Citomegalovirus IgG Negativo

IE1
CM2
p150
P65
gB1
gB2
Avidità IgG IE1
Avidità IgG CM2
Avidità IgG p150
Avidità IgG gB2
Interpretazione del risultato 1
Interpretazione del risultato 2

Citomegalovirus IgM Abs Siero	1532	CMIA	2 gg	
---	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTICORPI ANTI-CITOMEGALOVIRUS IgM Index < 0,85 Negativo
0,85 - 1,0 Dubbio
≥ 1,0 Positivo

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Citomegalovirus IgM Abs conferma Siero	1534	IMMUNOBLOTTING	16 gg	

Per una valutazione corretta, precisa ed affidabile del test di conferma è necessario richiedere contestualmente la determinazione di IgG e IgM.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Citomegalovirus IgM	Negativo
IE1	
CM2	
p150	
P65	
gB1	
gB2	
Interpretazione del risultato 1	
Interpretazione del risultato 2	

Citraturia (campione estemporaneo) Urine Mattino	749	ENZIMATICO UV	7 gg	
--	-----	---------------	------	--

Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mmoli/L 2,20 - 4,40

Citraturia delle 24 ore Urine 24h	7491	ENZIMATICO UV	7 gg	
---	------	---------------	------	--

Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/24h 1,50 - 4,70

Cladosporium Herbarum Siero	6M2	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---------------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

Clearance della Creatinina Urine 24h	221	CINETICO COLORIMETRICO	2 gg	
--	-----	---------------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Creatinina plasmatica	mg/dL	Maschi: 0,73 - 1,18	Femmine: 0,55 - 1,02
Creatinina urinaria	mg/dL	Maschi: 58,00 - 161,00	Femmine: 45,00 - 106,00
Clearance della creatinina	mL/min	71,00 - 151,00	

Clearance Urea Urine 24h	2111	ENZIMATICO UV	2 gg	
------------------------------------	------	---------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Urea plasmatica	mg/dL	19 - 49
Urea urinaria	mg/dL	
Clearance dell'urea	mL/min	40 - 95

Clobazam Siero	693	HPLC	8 gg	
--------------------------	-----	------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 30 - 300
Per soggetti in terapia

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CLOMIPRAMINA E METABOLITA (SYNLAB) Siero	397	LC-MS	16 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL
Raccogliere il campione (per il follow up) sempre alla stessa ora del giorno

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 230,0 - 450,0

Clonazepam Siero	689	HPLC	8 gg	
----------------------------	-----	------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 4 - 80
Per soggetti in terapia

Clordiazepossido Siero	1595	HPLC	8 gg	
----------------------------------	------	------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L Maschi: Soggetti in terapia : 400,0 - 3.000
Femmine: Soggetti in terapia : 400,0 - 3.000

Cloremia (Cl) Siero	243	POTENZIOMETRIA INDIRETTA	1 gg	
---------------------------------	-----	-----------------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/L 98 - 107

Cloro urinario (Cl) Urine 24h	253	ELETTRODI IONOSELETTIVI DILUITI (INDIRETTA)	2 gg	
---	-----	---	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/24h 110 - 250

CLOROFORMIO Urine Fine Turno Urine F.T.	7720	GC	8 gg	
---	------	----	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL
• Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
• Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L Soggetti professionalmente esposti:
Valore limite non proposto

CLOROFORMIO Urine Inizio Turno Urine I.T.	772	GC	8 gg	
---	-----	----	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL
• Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
• Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L Soggetti professionalmente esposti:
Valore limite non proposto

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
COLORURO DI METILENE Urine Fine Turno Urine F.T.	7451	GC	22 gg	

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Soggetti professionalmente esposti:
< 300 (f.t.)

COLORURO DI METILENE Urine Inizio Turno Urine I.T.	745	GC	22 gg	
--	-----	----	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Soggetti professionalmente esposti:
< 300 (f.t.)

CLOSTRIDIUM DIFFICILE DNA - VARIANTE TOSSINOGENICA Feci	1662	REAL TIME PCR	3 gg	
---	------	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Le feci vanno raccolte in un contenitore sterile

Saggio qualitativo di amplificazione multiplex degli acidi nucleici per la rilevazione dei geni codificanti le tossine A e B del Clostridium difficile (C. difficile), variante tossinogenica, incluso il ceppo ipervirulento NAP1/BI/027, nel DNA estratto da campioni di feci o feci non formate

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Non rilevato

Limite di sensibilità (LoD): 500 copie/mL

Clostridium difficile ricerca tossina A/B e GDH Feci	B5880	IMMUNOCROMATOGRAFICO	1 gg	
--	-------	----------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Tossina A	Negativa
Tossina B	Negativa
GDH (Glutammato deidrogenasi)	Negativa

Clostridium difficile ricerca tossina A/B e GDH (II campione) Feci	B58802	IMMUNOCROMATOGRAFICO	1 gg	
--	--------	----------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Tossina A	Negativa
Tossina B	Negativa
GDH (Glutammato deidrogenasi)	Negativa

Clostridium difficile ricerca tossina A/B e GDH (III campione) Feci	B58803	IMMUNOCROMATOGRAFICO	1 gg	
---	--------	----------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Tossina A	Negativa
Tossina B	Negativa
GDH (Glutammato deidrogenasi)	Negativa

Clozapina Siero	1576	LC-MS	8 gg	
---------------------------	------	-------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

350,0 - 600,0

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Clozapina e Norclozapina Siero	357	LC-MS	8 gg	
Quantità da prelevare: 2 mL Vengono determinate Clozapina e N-Desmetilclozapina.				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Clozapina	µg/L	350,0 - 600,0		
Norclozapina	µg/L	0,4 - 1,0 x clozapina		
CMV DNA Qualitativo (Citomegalovirus) Aspirato Bronchiale (BAS), Lavaggio Broncoalveolare (BAL), Liquido Amniotico Congelato, Liquor congelato, Tampone Cavo Orale, Urine Congelate Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE DISPOSITIVI DA UTILIZZARE PER LA RACCOLTA : CONTENITORE STERILE : Aspirato Bronchiale (BAS), Lavaggio Broncoalveolare (BAL), Liquido Amniotico congelato, Liquor congelato TAMPONE ROSA (cod. SAP 500003323) : Tampone Cavo Orale PROVETTA TAPPO BEIGE (cod. SAP 500022210) : Urine congelate	8391	REAL TIME PCR	8 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
Citomegalovirus DNA (CMV) Qualitativo		Non rilevato		
Limite di sensibilità (LoD):	UI/mL			
Ricerca eseguita su :				
CMV DNA Quantitativo (Citomegalovirus) Aspirato Bronchiale (BAS), Lavaggio Broncoalveolare (BAL), Liquido Amniotico Congelato, Liquor congelato, Tampone Cavo Orale, Urine Congelate Quantità da prelevare: Plasma 1 ML - Liq. Amniotico 8 ML - Urine 5 ML DISPOSITIVI DA UTILIZZARE PER LA RACCOLTA : CONTENITORE STERILE : Aspirato Bronchiale (BAS), Lavaggio Broncoalveolare (BAL), Liquido Amniotico congelato, Liquor congelato TAMPONE ROSA (cod. SAP 500003323) : Tampone Cavo Orale PROVETTA TAPPO BEIGE (cod. SAP 500022210) : Urine congelate	60061	REAL TIME PCR	8 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
Citomegalovirus DNA (CMV) Quantitativo	UI/mL	Nessuna UI rilevata		
Limite di quantificazione (LoQ):	UI/mL			
	log10 UI/mL			
Ricerca eseguita su :				
COBALTO Sierico Siero	7261	ASSORBIMENTO ATOMICO (AA)	8 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL Utilizzare provetta specifica Metal Free (cod. SAP 600068373). Subito dopo il prelievo la provetta non deve essere aperta, travasata o aliquotata, ma inviata tale quale al laboratorio				
VALORI DI RIFERIMENTO				
	µg/L	Popolazione generale: < 0,61		
COBALTO Urine Fine Turno Urine F.T.	7260	ICP-MS	8 gg	
Quantità da prelevare: 10 mL • Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio. • Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta				
VALORI DI RIFERIMENTO				
	µg/L	Soggetti professionalmente esposti: < 15 (f.t. / f.s.l.)		
COBALTO Urine Inizio Turno Urine I.T.	726	ICP-MS	8 gg	
Quantità da prelevare: 10 mL • Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio. • Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta				
VALORI DI RIFERIMENTO				
	µg/L	Soggetti professionalmente esposti: < 15 (f.t. / f.s.l.)		

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cocaina matrice pilifera Capelli	1083	LC-MS-MS	13 gg	

Quantità da prelevare: Diametro ciocca 1 cm diviso in 2 aliquote
Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione.
Eseguire il prelievo secondo procedura ed inviare i campioni con catena di custodia.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COCAINA		
Cocaina	ng/mg	Vedi Nota
Benzoilecgonina	ng/mg	Fino 0,05

Cocaina matrice pilifera - Valenza clinica Capelli	1083CL	LC-MS-MS	13 gg	
--	--------	----------	-------	--

Quantità da prelevare: Diametro ciocca 1 cm diviso in 2 aliquote
Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione.
Eseguire il prelievo secondo procedura ed inviare i campioni con catena di custodia.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COCAINA		
Cocaina	ng/mg	Vedi Nota
Benzoilecgonina	ng/mg	Fino a 0,05

Cocaina matrice urinaria Urine	669	IMMUNOENZIMATICO	3 gg	
--	-----	------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

COCAINA (Test di screening)	ng/mL	Fino a 300 Negativo
-----------------------------	-------	------------------------

Cocaina matrice urinaria - Valenza clinica Urine	669CL	IMMUNOENZIMATICO	3 gg	
--	-------	------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

COCAINA (Test di screening)	ng/mL	Fino a 300 Negativo
-----------------------------	-------	------------------------

Cocaina test di conferma su urine Urine	6348	LC-MS-MS	8 gg	
---	------	----------	------	--

Se il campione è inviato dopo le 24 ore dalla raccolta congelare a - 20 °C.
Il sabato è da escludere dal conteggio degli 8 giorni di refertazione

SYNLAB ITALIA

Per l' esecuzione di questo esame è necessario inviare i campioni con catena di custodia. Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

VALORI DI RIFERIMENTO

Cocaina	ng/mL	Fino a 100 Negativo
Benzoilecgonina	ng/mL	Fino a 100 Negativo

Coenzima Q10 Plasma EDTA congelato	1585	HPLC	8 gg	
--	------	------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	µg/L	750,0 - 1.000
--	------	---------------

COLECISTI - COLECISTECTOMIA ALLARGATA CIT-COLECISTI	IN10028	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 7_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
COLECISTI - COLECISTECTOMIA SEMPLICE CIT-COLECISTI	IN10029	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 16_AP2

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

COLEDOCO - DIGER.BIOPSIA ENDOSCOPICA (SING.) CIT-COLEDOCO	IN10030	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	16 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Colesterolo HDL Siero	325	ENZIMATICO	1 gg	
---------------------------------	-----	------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

Maschi: > 40

Femmine: > 50

COLESTEROLO LDL (DETERMINAZIONE INDIRECTA) Siero	2328	CALCOLO DERIVATO	1 gg	
--	------	------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

COLESTEROLO LDL (DETERMINAZIONE INDIRECTA) mg/dL

Valore desiderabile < 116

Limiti decisionali/target terapeutici:
Per soggetti a rischio moderato < 100
Per soggetti a rischio alto < 70
Per soggetti a rischio molto alto < 55
Valore desiderabile < 3

mmol/L

Colesterolo totale Siero	320	ENZIMATICO	1 gg	
------------------------------------	-----	------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

< 200 desiderabile

Colesterolo VLDL (SYNLAB) Siero	3251	ELETTROFORETICO	9 gg	
---	------	-----------------	------	--

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

< 300,0

Colinesterasi Siero	300	DGKC BUTIRRATO- TIOCOLINA/37°C	1 gg	
-------------------------------	-----	-----------------------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L

Maschi: 4.389 - 10.928

Femmine: 2.879 - 12.669

Colinesterasi eritrocitaria Sangue Intero EDTA	3001	ENZIMATICO COLORIMETRICO	8 gg	
--	------	-----------------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/L

5.400 - 11.000

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
COLON - COLECTOMIA TOTALE CIT-COLON	IN10031	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 6_AP5				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
COLON - DIGERENTE BIOPSIA ENDOSCOPICA (SING.) CIT-COLON	IN10032	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	16 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
COLON - EMICOLECTOMIA (CON LINFOADENECTOMIA) CIT-COLON	IN10033	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 10_AP5				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
COLON - POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA (SING.) CIT-COLON	IN10035	INCLUSIONE IN PARAFFINA	16 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
COLON - RESEZIONE SEGMENTARIA DEL COLON CIT-COLON	IN10036	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 10_AP5				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
Complemento C1 Esterasi Inibitore Attività (SYNLAB) Plasma Citrato congelato	646	SPETTROFOTOMETRIA	16 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL Centrifugare rapidamente (entro 30 min) a temperatura ambiente, separare e congelare				
VALORI DI RIFERIMENTO				
% 70 - 130				
Complemento C3 Proattivatore Siero congelato	1203	IMMUNONEFELOMETRIA	4 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				
VALORI DI RIFERIMENTO				
g/L 0,23 - 0,53				
COMPLEMENTO C5 Siero	120999	NEFELOMETRIA	6 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				
VALORI DI RIFERIMENTO				
g/L 0,09 - 0,17				

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Conta Eosinofili Sangue Intero EDTA	008	CITOMETRICO IN FLUORESCENZA	2 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

CONTA EOSINOFILI	10 ⁹ /L	Maschi: 0 - 5 anni: 0,00 - 1,00 oltre i 6 anni: 0,00 - 0,50	Femmine: 0 - 5 anni: 0,00 - 1,00 oltre i 6 anni: 0,00 - 0,50
	%		

Conta Leucociti Sangue Intero EDTA	007	CITOMETRICO IN FLUORESCENZA	2 gg	
--	-----	-----------------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

	10 ⁹ /L	Maschi: 0 - 0 anni: 5,00 - 20,00 1 - 1 anni: 6,00 - 18,00 2 - 2 anni: 6,00 - 17,00 3 - 3 anni: 5,70 - 16,00 4 - 4 anni: 5,50 - 16,00 5 - 5 anni: 5,20 - 15,00 6 - 6 anni: 5,00 - 15,00 7 - 7 anni: 4,70 - 14,00 8 - 16 anni: 4,50 - 14,00 17 - 17 anni: 4,50 - 13,00 oltre i 18 anni: 4,00 - 10,00	Femmine: 0 - 0 anni: 5,00 - 20,00 1 - 1 anni: 6,00 - 18,00 2 - 2 anni: 6,00 - 17,00 3 - 3 anni: 5,70 - 16,00 4 - 4 anni: 5,50 - 16,00 5 - 5 anni: 5,20 - 15,00 6 - 6 anni: 5,00 - 15,00 7 - 7 anni: 4,70 - 14,00 8 - 16 anni: 4,50 - 14,00 17 - 17 anni: 4,50 - 13,00 oltre i 18 anni: 4,00 - 10,00
--	--------------------	---	--

Coombs Diretto Sangue Intero EDTA	021	AGGLUTINAZIONE SU COLONNA	3 gg	
---	-----	---------------------------	------	--

Prelevare 1 ml di sangue intero in EDTA.
Risposta dopo 48 h

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

Coombs Indiretto Siero	022	AGGLUTINAZIONE SU COLONNA	3 gg	
----------------------------------	-----	---------------------------	------	--

Risposta dopo 48 h

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

COPEPTINA ProAVP Siero congelato	2157	IF-TRACE	3 gg	
--	------	----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	pmol/L	< 4,9 diabete insipido centrale in pazienti con privazione di liquidi
		> 21,4 diabete insipido nefrogenico in pazienti senza privazione di liquidi

Cor a14 Corylus avellana Siero	5F439	ImmunoCAP	5 gg	
--	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	KUA/L	< 0,10
--	-------	--------

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cor a8 Corylus avellana Siero	5F425	ImmunoCAP	5 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Cor a9 Corylus avellana Siero	5F440	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Corticosterone (SYNLAB) Siero	62120	LC-MS	16 gg	
---	-------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 1,00 - 20,00

Cortisol Binding Globulin (SYNLAB) Siero	418	RIA	11 gg	
--	-----	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L Maschi: 22 - 55 Femmine: 40 - 154

Cortisolo plasmatico Siero	623	CMIA	1 gg	
--------------------------------------	-----	------	------	--

Mattina ore 8.00 - Pomeriggio ore 18.00

VALORI DI RIFERIMENTO

CORTISOLO Plasmatico µg/dL
Mattino (prima delle 10) : 3,7 - 19,4
Pomeriggio (dopo le 17) : 2,9 - 17,3
DST < 1,8

Orario di raccolta del campione

Cortisolo plasmatico Sera Siero	4104	CMIA	2 gg	
---	------	------	------	--

Mattina ore 8.00 - Pomeriggio ore 18.00

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/dL Pomeriggio dopo le 17 :
2,9 - 17,3

Cortisolo Pomeridiano Siero	1369	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
---------------------------------------	------	-------------------	------	--

Mattina ore 8.00 - Pomeriggio ore 18.00

VALORI DI RIFERIMENTO

CORTISOLO POMERIDIANO ng/mL
Pomeriggio dopo le 17 : 2,9 - 17,3
Orario di raccolta del campione

Cortisolo salivare Saliva	6231	ELISA	8 gg	
-------------------------------------	------	-------	------	--

Il campione di saliva dovrà essere raccolto con il dispositivo dedicato SALIVETTE, diversamente il campione non potrà essere analizzato.
Dopo la raccolta del campione, inviare la provetta Salivette conservata a 2-8° C senza effettuare nessuna ulteriore manipolazione.
La centrifugazione sarà effettuata direttamente dal laboratorio.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L
Mattina : 0,32 - 10,76
Sera : 0,06 - 2,74

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cortisolo urinario Urine 24h	626	CMIA	2 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

CORTISOLO LIBERO Urinario µg/24h 4,30 - 176,00
Diuresi

Corylus Avellana (Nocciolo) Siero	6T4	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

COTONE-FIBRA NON TRATTATA Siero	601	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

COXIELLA BURNETI ANTICORPI IgG e IgM (SYNLAB) Siero	2287	EIA	16 gg	
---	------	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Coxiella Burnetii IgG - FASE 2 Anticorpi U/mL < 20 Negativo
Coxiella Burnetii IgM - FASE 2 Anticorpi Indice < 0,9 Negativo

Coxiella Burnetii IgG - Fase 2 Anticorpi (SYNLAB) Siero	1363	EIA	16 gg	
---	------	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 20 Negativo

Coxiella Burnetii IgM - Fase 2 Anticorpi (SYNLAB) Siero	1362	EIA	16 gg	
---	------	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Indice < 0,9 Negativo

CPK Siero	301	NAC (N-ACETIL-L-CISTEINA)	1 gg	
---------------------	-----	---------------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L Maschi: < 200 Femmine: < 168

Creatina Sierica (SYNLAB) Siero	542	SPETTROFOTOMETRIA	8 gg	
---	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 5 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L Bambini : 5,0 - 11,0
Adulti : 3,0 - 7,0

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Creatina Urinaria (SYNLAB) Urine 24h	528	SPETTROFOTOMETRIA	9 gg	

Quantità da prelevare: 25 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Creatine Kinase MB MASSA Siero	428	CMIA	1 gg	
--	-----	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L

Maschi: < 5,2

Femmine: < 3,1

CREATININA Urine Fine Turno Urine F.T.	7300	COLORIMETRICO	8 gg	
--	------	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L

0,30 - 3,00

CREATININA Urine Inizio Turno Urine I.T.	730	COLORIMETRICO	8 gg	
--	-----	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L

0,30 - 3,00

Creatininemia Siero	220	ENZIMATICO	1 gg	
-------------------------------	-----	------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

CREATININA

mg/dL

Maschi: 0,73 - 1,18

Femmine: 0,55 - 1,02

μmol/L

Maschi: 64 - 104

Femmine: 49 - 90

Creatininuria Urine 24h	232	ENZIMATICO	2 gg	
-----------------------------------	-----	------------	------	--

Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h

Maschi: 870,00 - 2.410

Femmine: 670,00 - 1.590

Creatininuria per adulterazione Urine	6314	ENZIMATICO	3 gg	
---	------	------------	------	--

Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

> 0 = 20

Creatininuria su campione estemporaneo Urine	1911	ENZIMATICO	1 gg	
--	------	------------	------	--

Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L

0,4 - 2,0

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Crioglobuline (CRIOCRITO) Siero	142	PRECIPITAZIONE A FREDDO	8 gg	

Eseguibile presso la sede di Padova. Provette a caldo. - utilizzare il materiale necessario mantenendolo in termostato a 37° c.
- usare provette senza anticoagulante.
- conservare il campione a 37°c fino al momento della centrifugazione.
- centrifugare rapidamente il campione e separare il siero.

VALORI DI RIFERIMENTO

CRIOGLOBULINE % Assenti
Criocrito %

CRIPTOMERIA (CRYPOMERIA JAPONICA) Siero	6T17	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Criptosporidiosi Ricerca ed Identificazione (SYNLAB) Feci	569	EIA	11 gg	
---	-----	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 5 g

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

CROMO Sierico Siero	7144	ASSORBIMENTO ATOMICO	8 gg	
-------------------------------	------	----------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

Utilizzare provetta specifica Metal Free (cod. SAP 600068373).

Subito dopo il prelievo la provetta non deve essere aperta, travasata o aliquotata, ma inviata tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L Popolazione generale:
< 0,29

Soggetti professionalmente esposti:
Valore limite non proposto

CROMO Urine Fine Turno Urine F.T.	71419	ICP-MS	8 gg	
---	-------	--------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB ITALIA

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L Popolazione generale:
< 0,7
(ACGIH 2025)

Soggetti professionalmente esposti a:
Cromo VI, fumi, composti solubili: < 25 (f.t. / f.s.l.)
(ACGIH 2020)

CROMO Urine Inizio Turno Urine I.T.	7149	ICP-MS	8 gg	
---	------	--------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB ITALIA

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L Popolazione generale:
< 0,7
(ACGIH 2025)

Soggetti professionalmente esposti a:
Cromo VI, fumi, composti solubili: < 25 (f.t. / f.s.l.)
(ACGIH 2020)

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Cromogranina A Siero congelato	62121	IF-TRACE	3 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 101,90

Cromosoma Y : ricerca di microdelezioni Sangue Intero EDTA	60150	PCR E ANALISI DI FRAMMENTI	11 gg	
--	-------	----------------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 5 mL

Inviare il consenso sanitario specifico per il test del medico specialista.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Cryptococcus neoformans circulating antigen (SYNLAB) Siero	578	AGGLUTINAZIONE	13 gg	
--	-----	----------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo < 1/2 Negativo

Cryptosporidium Ag ricerca diretta Feci	6199	immunocromatografico	3-4 gg	
---	------	----------------------	--------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

CTD (Malattie del Tessuto Connettivo) SCREENING Siero	1330	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	4 gg	
---	------	--------------------------------------	------	--

Quantità da prelevare: 0.40 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

CTX Plasmatico Siero congelato	351	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

Attendere la formazione del coagulo, centrifugare, separare il siero e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L
Uomini :
30 - 50 anni : < 0,585
51 - 70 anni : < 0,710
> 70 anni : < 0,850

Cumino Plasma, Siero	6F265	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe kU/L

CUORE - BIOPSIA ENDOMIocardica CIT-CUORE	IN10037	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 4_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CUORE - BIOPSIA MUSCOLO/BEM CIT-CUORE	IN10038	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 4_AP4				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
CUORE - VALVOLA CARDIACA CIT-CUORE	IN10040	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 4_AP4				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
Cup a1 Cupressus arizonica Siero	5T226	ImmunoCAP	5 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				
VALORI DI RIFERIMENTO				
KUA/L < 0,10				
Cupremia (Rame Sierico) Siero	248	COLORIMETRICO	2 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
µg/dL Maschi: 70,0 - 140,0 Femmine: 80,0 - 155,0				
Cupremia (Rame Sierico) / Zinco Siero	8999	CALCOLO DERIVATO	2 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
0,54 - 2,75				
Cupressus Sempervirens (Cipresso) Siero	6T23	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione kU/L Classe				
Curry Plasma, Siero	6F281	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione kU/L Classe				
Curva a due determinazioni da carico di glucosio 75 grammi (solo per interni) Plasma	1079	ENZIMATICO	1 gg	
Eseguibile solo presso le sedi di Chioggia e Padova se supera la durata di 2 ore				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Glucosio basale mg/dL 70 - 100 Glucosio dopo Tempo 1 mg/dL < 140				

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Curva cortisolo salivare (x Veneto) Saliva	1959	ELISA	6 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

CORTISOLO SALIVARE	µg/L	Mattina : 0,32 - 10,76 Sera : 0,06 - 2,74
CORTISOLO SALIVARE Tempo 1	µg/L	
CORTISOLO SALIVARE Tempo 2	µg/L	
CORTISOLO SALIVARE Tempo 3	µg/L	

CURVA GLICEMICA DOPO CARICO DI 75 grammi di GLUCOSIO Plasma	2012	ENZIMATICO	1 gg	
---	------	------------	------	--

Eseguibile solo presso le sedi di Chioggia e Padova se supera la durata di 2 ore

VALORI DI RIFERIMENTO

Glucosio	mg/dL	70 - 100
Glucosio dopo Tempo 1	mg/dL	
Glucosio dopo Tempo 2	mg/dL	< 155
Glucosio dopo Tempo 3	mg/dL	
Glucosio dopo Tempo 4	mg/dL	< 140
Glucosio dopo Tempo 5	mg/dL	
Glucosio dopo Tempo 6	mg/dL	

Curva Glicemica Gravidanza Plasma	1166	ENZIMATICO	1 gg	
---	------	------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Glucosio	mg/dL	< 92
Glucosio dopo Tempo 1	mg/dL	< 180
Glucosio dopo Tempo 2	mg/dL	< 153

Curva Glicemica SERVICE Plasma	2049	ENZIMATICO	1 gg	
--	------	------------	------	--

Eseguibile solo presso le sedi di Chioggia e Padova se supera la durata di 2 ore

VALORI DI RIFERIMENTO

Glucosio basale	mg/dL	70 - 100
Glucosio dopo Tempo 1	mg/dL	
Glucosio dopo Tempo 2	mg/dL	< 155
Glucosio dopo Tempo 3	mg/dL	
Glucosio dopo Tempo 4	mg/dL	< 140
Glucosio dopo Tempo 5	mg/dL	
Glucosio dopo Tempo 6	mg/dL	

Curva Glucagone (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	2151	RIA	21 gg	
--	------	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Glucagone basale	ng/L	< 209
dopo Tempo 1	ng/L	
dopo Tempo 2	ng/L	
dopo Tempo 3	ng/L	
dopo Tempo 4	ng/L	
dopo Tempo 5	ng/L	

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Curva Insulinemica Siero	6533	CMIA	2 gg	

Eseguibile solo presso le sedi di Chioggia e Padova se supera la durata di 2 ore

VALORI DI RIFERIMENTO

INSULINA basale	μU/mL	< 25
INSULINA dopo Tempo 1	μU/mL	
INSULINA dopo Tempo 2	μU/mL	
INSULINA dopo Tempo 3	μU/mL	
INSULINA dopo Tempo 4	μU/mL	
INSULINA dopo Tempo 5	μU/mL	
INSULINA dopo Tempo 6	μU/mL	

Curva Peptide C Siero	2150	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
---------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Peptide C basale	μg/L	0,81 - 3,85
dopo Tempo 1	μg/L	
dopo Tempo 2	μg/L	
dopo Tempo 3	μg/L	
dopo Tempo 4	μg/L	
dopo Tempo 5	μg/L	

CURVULARIA (CURVULARIA LUNATA) Siero	6M16	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione Classe	kU/L
--------------------------	------

CUTE - BIOPSIA CUTE (PUNCH) CIT-CUTE E ANNESSI	IN10042	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e
cliniche

CUTE - SENO PILONIDALE CIT-CUTE E ANNESSI	IN10043	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

CUTE E ANNESSI - BIOPSIA ESCISSORIALE CUTE CIT-CUTE E ANNESSI	IN10044	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e
cliniche

CUTE E ANNESSI - ESCISSIONE ALLARGATA CUTE E/O TESSUTI MOLLI CIT-CUTE E ANNESSI	IN10045	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e
cliniche

VADEMECUM GENERALE

C

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
CYFRA 21-1 Siero	65190	CMIA	3 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L ≤ 2,08

Cynodon Dactylon (Erba Canina) Siero	6G2	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

DABIGATRAN (Pradaxa) Plasma Citrato congelato	1935	CROMOGENICO	3 gg	
---	------	-------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL di plasma citrato separato e congelato
Compilare la Scheda anamnestica paziente SCHEAN019

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL
Per dosaggio 150 mg/2die
Picco : 74 - 383
Valle : 40 - 215

Per dosaggio 110 mg/2die
Picco : 52 - 275
Valle : 28 - 155

Dactylis Glomerata (Erba Mazzolina) Siero	6G3	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

DAO TEST Siero	1587	IMMUNOENZIMATICO	16 gg	
--------------------------	------	------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL
< 3 Intolleranza Elevata
3 - 10 Intolleranza Moderata
> 10 Intolleranza Assente

DATTERO (PHOENIX DACTILYFERA) Siero	6F289	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

D-Dimero Plasma Citratato	043	Immunoturbidimetrico	1-2 gg	
-------------------------------------	-----	----------------------	--------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L FEU < 500

VADEMECUM GENERALE

D

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Delta 4 Androstenedione	637	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

nmol/L

Uomini :
≥ 22 anni : < 5,76

Stadio di Tanner
Stadio I : < 1,05
Stadio II : < 1,92
Stadio III : < 2,41
Stadio IV : < 4,75
Stadio V : < 6,15

Donne :
22 - 39 anni : 1,29 - 7,86
40 - 54 anni : < 6,63
> 54 anni : 1,74 - 9,77

Stadio di Tanner
Stadio I : < 1,68
Stadio II : < 4,92
Stadio III : < 6,28
Stadio IV : < 8,10
Stadio V : 1,36 - 11,21

Der p1 dermatophagoides pteronyssinus	5D202	ImmunoCAP	5 gg	
--	--------------	------------------	-------------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L

< 0,10

Der p10 dermatophagoides pteronyssinus	5D205	ImmunoCAP	5 gg	
---	--------------	------------------	-------------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L

< 0,10

Der p2 dermatophagoides pteronyssinus	5D203	ImmunoCAP	5 gg	
--	--------------	------------------	-------------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L

< 0,10

Der p23 dermatophagoides pteronyssinus	5D209	ImmunoCAP	5 gg	
---	--------------	------------------	-------------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L

< 0,10

Dermatophagoides farinae	6D2	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---------------------------------	------------	--------------------------	-------------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe

KU/L

VADEMECUM GENERALE

D

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Dermatophagoides microceras	6D3	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Dermatophagoides pteronyssinus	6D1	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---------------------------------------	-----	-------------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Desmogleina 1 Abs	1073	ELISA	9 gg	
--------------------------	------	-------	------	--

Plasma EDTA, Plasma Citratato, Plasma Eparinato, Siero

Quantità da prelevare: 500 µL

In caso di consegna tardiva al laboratorio il campione può essere conservato in un luogo fresco (2 - 8 °C) per un massimo di 14 giorni.
Per conservazioni maggiori ai 14 giorni congelare il campione a -20°C

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

RU/mL < 20,00 Negativo

Desmogleina 3 Abs	1074	ELISA	9 gg	
--------------------------	------	-------	------	--

Plasma EDTA, Plasma Citratato, Plasma Eparinato, Siero

Quantità da prelevare: 500 µL

In caso di consegna tardiva al laboratorio il campione può essere conservato in un luogo fresco (2 - 8 °C) per un massimo di 14 giorni.
Per conservazioni maggiori ai 14 giorni congelare il campione a -20°C

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

RU/mL < 20,00 Negativo

Desossipiridinolina libera urine 2 ore	1644	HPLC	8 gg	
---	------	------	------	--

Urine 2h

La mattina dell'esame, svuotare completamente la vescica e gettare queste urine segnando l'ora. Successivamente bere 250 ml di acqua, evitare di bere altro, mangiare o fumare. Dopo 2 ore urinare direttamente nel contenitore e consegnarlo al laboratorio.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

pmol/µmol creat. Maschi: 2,9 - 5,3 Femmine: 3,5 - 7,1

Desossipiridinolina totale urine 2 ore	1646	HPLC	8 gg	
---	------	------	------	--

Urine 2h

La mattina dell'esame, svuotare completamente la vescica e gettare queste urine segnando l'ora. Successivamente bere 250 ml di acqua, evitare di bere altro, mangiare o fumare. Dopo 2 ore urinare direttamente nel contenitore e consegnarlo al laboratorio.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

pmol/µmol creat. Maschi: 6,0 - 26,0 Femmine: 6,0 - 23,0

Desossipiridinolina totale urine 24H	6321	HPLC	8 gg	
---	------	------	------	--

Urine 24h

Risposta dopo 24 h

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

pmol/µmol creat. Maschi: 4 - 19 Femmine: 4 - 21

VADEMECUM GENERALE

D

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
DHEA Siero	6360	ELISA	4 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL
Attendere la formazione del coagulo, centrifugare e inviare a 2-8 gradi.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Maschi:
1 - 5 anni: < 0,63
6 - 7 anni: < 1,11
8 - 10 anni: < 1,86
11 - 12 anni: < 2,02
13 - 14 anni: < 3,19
15 - 16 anni: 0,40 - 4,91
17 - 19 anni: 0,30 - 7,01
oltre i 20 anni: 0,52 - 5,18

Femmine:
1 - 5 anni: < 0,63
6 - 7 anni: < 1,11
8 - 10 anni: < 1,86
11 - 12 anni: < 2,02
13 - 14 anni: < 3,19
15 - 16 anni: 0,40 - 4,91
17 - 19 anni: 0,30 - 7,01
oltre i 20 anni: 0,36 - 7,82

DHEA-S Siero	636	CMIA	1 gg	
------------------------	------------	-------------	-------------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/dL

Maschi:
0 - 0 anni: 31,6 - 214,1
1 - 4 anni: 32,7 - 276,0
5 - 10 anni: 24,4 - 209,7
11 - 14 anni: 16,6 - 242,7
15 - 19 anni: 45,1 - 385,0
20 - 24 anni: 238,4 - 539,3
25 - 34 anni: 167,9 - 591,9
35 - 44 anni: 139,7 - 484,4
45 - 54 anni: 136,2 - 447,6
55 - 64 anni: 48,6 - 361,8
65 - 70 anni: 228,5 - 283,6

Femmine:
0 - 0 anni: 31,6 - 214,1
1 - 4 anni: 32,7 - 276,0
5 - 10 anni: 24,4 - 209,7
11 - 14 anni: 8,6 - 169,8
15 - 19 anni: 61,2 - 493,6
20 - 24 anni: 134,2 - 407,4
25 - 34 anni: 95,8 - 511,7
35 - 44 anni: 74,8 - 410,2
45 - 54 anni: 56,2 - 282,9
55 - 64 anni: 29,7 - 182,2
65 - 70 anni: 33,6 - 78,9

Diagnosi molecolare di Alfa Talassemia - Analisi dei geni alfa globinici	1152	MLPA	22 gg	
---	-------------	-------------	--------------	--

Sangue Intero EDTA

Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN08 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Diagnosi molecolare di beta talassemia - sequenziamento completo del gene HBB	8424	PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO	16 gg	
--	-------------	-------------------------------------	--------------	--

Liquido Amniotico, Sangue Intero EDTA, Villi coriali

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario specifico per il test (INF_GEN07 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

DIAGNOSI MOLECOLARE DI CADASIL : ricerca di mutazioni nel gene NOTCH3	2065	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	
--	-------------	--	--------------	--

Sangue Intero EDTA

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

DIAGNOSI MOLECOLARE DI EMOCROMATOSI (VARIANTI C282Y E H63D NEL GENE HFE)	60541	RFLP PCR	11 gg	
---	--------------	-----------------	--------------	--

Sangue Intero EDTA

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario dello specialista

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

D

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
DIAGNOSI MOLECOLARE DI FIBROSI CISTICA (TEST DI 1° LIVELLO)	60140	PCR E ANALISI DI FRAMMENTI	8 gg	

Liquido Amniotico, Sangue Intero EDTA

Quantità da prelevare: 5 mL

Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista).

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Diagnosi molecolare di Fibrosi Cistica: sequenziamento completo del gene CFTR	8409	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	22 gg	
--	------	---	-------	--

Sangue Intero EDTA

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario specifico per il test (INF_GEN03 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Diagnosi molecolare di telangectasia emorragica ereditaria (HHT)	8708	PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO	31 gg	
---	------	------------------------------	-------	--

Sangue Intero EDTA

Quantità da prelevare: 1 PROVETTA T.VIOLA

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario specifico per il test (INF_GEN17 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Diazepam	1593	HPLC	8 gg	
-----------------	------	------	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Maschi:
Soggetti in terapia : 200,0 - 2.500Femmine:
Soggetti in terapia : 200,0 - 2.500

DIGIUNO - DIGERENTE BIOPSIA ENDOSCOPICA (SING.)	IN10320	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	16 gg	
--	---------	--	-------	--

CIT-COLON

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Digossina	660	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg	
------------------	-----	---------------------	------	--

Siero

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Livello terapeutico :
0,8 - 2,0

Diidrotestosterone (DHT)	6210	IMMUNOENZIMATICO	4 gg	
---------------------------------	------	------------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

Risposta dopo 48 h

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L

Maschi:
1 - 9 anni: < 85,7
10 - 14 anni: 11,1 - 875,6
15 - 19 anni: 70,3 - 1.261
20 - 89 anni: 143,0 - 842,0Femmine:
2 - 9 anni: < 88,9
10 - 14 anni: 22,5 - 280,6
15 - 17 anni: 62,6 - 760,3
18 - 50 anni: < 596,0
51 - 83 anni: < 431,0

VADEMECUM GENERALE

D

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
DISBIOSI TEST Urine Mattino	8921	HPLC + LC/MS	8 gg	

Al fine di garantire la corretta gestione in sicurezza del campione e per evitare che non sia considerato idoneo, ricordiamo l'importanza dell'utilizzo della provetta preposta della quale riportiamo di seguito le specifiche: codice SAP 500022210 descrizione VAC URI 16X100 11ML BEIG (tipologia vacutainer fondo a U 10 mL)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO				
Scatolo	µg/L	< 10 10 - 20 20,1 - 40 > 40	Assenza di Disbiosi Disbiosi Lieve Disbiosi Media Disbiosi Grave	
Indicano	mg/L	< 20 20 - 40 40,1 - 80 > 80	Assenza di Disbiosi Disbiosi Lieve Disbiosi Media Disbiosi Grave	

DITO - AMPUTAZIONE DITO CIT-DITO	IN10046	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
-------------------------------------	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 1_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				

DITO - AMPUTAZIONE DITO (PER NEOPLASIA) CIT-DITO	IN10047	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 1_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				

DNA - Chlamydia Trachomatis	60010	PCR REAL TIME	6 gg	
-----------------------------	-------	---------------	------	--

Liquido Seminale, Tampone Cervicale, Tampone Faringeo, Tampone Rettale, Tampone Uretrale, Tampone Vaginale, Urine Mitto

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE (urine 10 ml)
DISPOSITIVI DA UTILIZZARE PER LA RACCOLTA :
CONTENITORE STERILE : Liquido Seminale

SYNLAB ITALIA

TAMPONE ROSA (cod. SAP 500003323) : Tampone Cervicale, Tampone Vaginale, Tampone Rettale, Tampone Faringeo

TAMPONE ARANCIONE (cod. SAP 500003321) : Tampone Uretrale

PROVETTA TAPPO BEIGE (cod. SAP 500022210) : Urine I Mitto

VALORI DI RIFERIMENTO	
Chlamydia Trachomatis DNA	Non rilevato
Ricerca eseguita su :	

DNA - Fattore II Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	60542	PCR REAL TIME	6 gg	
--	-------	---------------	------	--

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario dello specialista

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				

DNA - HBV Quantitativo Plasma EDTA congelato, Siero congelato	60091	REAL TIME PCR	8 gg	
--	-------	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 1,5 mL
Per l'esecuzione delle analisi di biologia molecolare per HCV, HBV e HIV non è possibile richiedere più di una analisi per lo stesso campione (esempio: se per 1 paziente si richiede HCV qualitativo e HCV quantitativo, è necessario inviare 2 campioni anche se la richiesta può essere fatta sulla stessa accettazione)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO				
Ricerca eseguita su :				
HBV DNA Quantitativo	UI/mL	Nessuna UI rilevata		
		Limite di quantificazione (LoQ): 10 UI/mL		
	log10 UI/mL			

VADEMECUM GENERALE

D

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
DNA - OMOCISTEINA A1298C (MTHFR) Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	601240	PCR REAL TIME	6 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario dello specialista

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

DNA - OMOCISTEINA C677T (MTHFR) Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	60124	PCR REAL TIME	6 gg	
--	-------	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario dello specialista

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

DNA - Toxoplasma Gondii Liquido Amniotico Congelato, Liquido Cefalorachidiano (LIQCEFRA), Sangue Intero EDTA	60080	REAL TIME PCR	6 gg	
--	-------	---------------	------	--

Quantità da prelevare: sangue 5 mL, Liq.amniotico 8 mL
Il sangue intero in EDTA NON va congelato, bensì conservato a + 4°C.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Non rilevato

Limite di sensibilità (LoD): 400 copie/mL

DNA-SS Anticorpi (SYNLAB) Siero	482	EIA	9 gg	
---	-----	-----	------	--

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL Fino a 20,0

Dolichovespula Arenaria (Calabrone giallo) Siero	615	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Dolichovespula Maculata (Calabrone) Siero	612	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Dopamina plasmatica Plasma EDTA congelato, Plasma Eparinato congelato	7890	HPLC	7 gg	
---	------	------	------	--

Quantità da prelevare: 3 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL Fino a 29

Dopamina urine 24H Urine 24h Acidificate	789	HPLC	7 gg	
--	-----	------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL
La raccolta del campione di urine delle 24 h prevede l' acidificazione delle urine stesse. L' acidificazione viene effettuata versando nel recipiente, prima di iniziare la raccolta, circa 5 ml di HCl 5 M per ogni litro di urina (4 cucchiaini di acido muriatico del commercio). Prelevare un' aliquota di circa 10 ml di urina delle 24 h acidificata con l' indicazione della diuresi totale ed inviare in apposito contenitore di trasporto.
Risposta dopo 24 h.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/24h Fino a 500

VADEMECUM GENERALE

D

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Dos. catene leggere Kappa Lambda urinarie Urine 24h	846	IMMUNONEFELOMETRIA	3 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Catene leggere tipo kappa	g/L	Assente
Catene leggere tipo lambda	g/L	Assente
Rapporto kappa/lambda		0,750 - 4,500

Dosaggi seriati del TSH Siero	6142	CMIA	1 gg	
---	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

TSH basale	μUI/mL	Maschi: 0 - 13 anni: 0,70 - 4,17 14 - 19 anni: 0,47 - 3,41 oltre i 20 anni: 0,35 - 4,94	Femmine: 0 - 13 anni: 0,70 - 4,17 14 - 19 anni: 0,47 - 3,41 oltre i 20 anni: 0,35 - 4,94
TSH Tempo 1	μUI/mL		
TSH Tempo 2	μUI/mL		
TSH Tempo 3	μUI/mL		
TSH Tempo 4	μUI/mL		
TSH Tempo 5	μUI/mL		

Dosaggi seriati FSH Siero	6151	CMIA	1 gg	
-------------------------------------	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

FSH basale	mUI/mL	Maschi: 0,95 - 11,95	Femmine: Fase follicolare : 3,03 - 8,08 Picco metà ciclo : 2,55 - 16,69 Fase luteinica : 1,38 - 5,47 Postmenopausa : 26,72 - 133,41
FSH Tempo 1	mUI/mL		
FSH Tempo 2	mUI/mL		
FSH Tempo 3	mUI/mL		
FSH Tempo 4	mUI/mL		
FSH Tempo 5	mUI/mL		

Dosaggi seriati LH Siero	6161	CMIA	1 gg	
------------------------------------	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

LH basale	mUI/mL	Maschi: Adulti : 0,5 - 12,0	Femmine: Fase follicolare : 1,8 - 11,7 Picco metà ciclo : 7,5 - 89,0 Fase luteinica : 0,5 - 14,0 Postmenopausa senza HRT : 5,1 - 61,9
LH Tempo 1	mUI/mL		
LH Tempo 2	mUI/mL		
LH Tempo 3	mUI/mL		
LH Tempo 4	mUI/mL		
LH Tempo 5	mUI/mL		

Dosaggio C3 Siero	1209	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg	
-----------------------------	------	---------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

	mg/dL	Maschi: 0 - 14 anni: 82 - 173 oltre i 15 anni: 83 - 193	Femmine: 0 - 14 anni: 82 - 173 oltre i 15 anni: 83 - 193
--	-------	---	--

VADEMECUM GENERALE

D

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Dosaggio C4 Siero	12099	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

Maschi:
0 - 14 anni: 13 - 46
oltre i 15 anni: 15 - 57

Femmine:
0 - 14 anni: 13 - 46
oltre i 15 anni: 15 - 57

Dosaggio catene leggere Kappa Lambda sieriche Siero	845	IMMUNONEFELOMETRIA	3 gg	
---	-----	--------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Catene leggere tipo kappa	g/L	1,70 - 3,70
Catene leggere tipo lambda	g/L	0,90 - 2,10
Rapporto kappa/lambda		1,350 - 2,650

Dosaggio catene leggere libere Kappa e Lambda sieriche Plasma EDTA, Plasma Eparinato, Siero	1667	IMMUNONEFELOMETRIA	3 gg	
---	------	--------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

FLC Kappa	mg/L	6,70 - 22,40
FLC Lambda	mg/L	8,30 - 27,00
Rapporto Kappa/Lambda		0,310 - 1,560

Dosaggio catene leggere libere Kappa e Lambda urinarie Urine 24h	1668	IMMUNONEFELOMETRIA	3 gg	
--	------	--------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Catene leggere tipo Kappa	mg/L	< 25,80
Catene leggere tipo Lambda	mg/L	< 11,30
Rapporto kappa/lambda		1,400 - 6,200

DPYD:ricerca polimorfismi associati alla tossicità al trattamento con fluoropirimidine Sangue Intero EDTA	8773	REAL TIME PCR	11 gg	
---	------	---------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

DUODENO - DIGERENTE BIOPSIA ENDOSCOPICA (SING.) CIT-DUODENO	IN10048	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	16 gg	
---	---------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

DUODENO - POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA (SING.) CIT-DUODENO	IN10049	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	16 gg	
--	---------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
E.coli O:157 nelle feci esame colturale Feci	B591		5-6 gg	

EBV (Epstein Barr virus) DNA QUALITATIVO Plasma EDTA congelato, Sangue Intero EDTA	60050	REAL TIME PCR	8 gg	
--	-------	---------------	------	--

Quantità da prelevare: Sangue Intero 5 mL - Liquor 1mL
Il sangue intero non va congelato ma conservato a 2-8°C

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Epstein Barr Virus DNA (EBV) Non rilevato
Limite di sensibilità : copie/mL
Ricerca eseguita su :

EBV (EPSTEIN BARR VIRUS) DNA QUANTITATIVO Plasma EDTA congelato, Sangue Intero EDTA	2340	REAL TIME PCR	8 gg	
---	------	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Il sangue intero non va congelato ma conservato a 2-8°C

SYNLAB ITALIA

Attenzione: il limite di rilevabilità varia in funzione del materiale analizzato.

VALORI DI RIFERIMENTO

Epstein Barr Virus DNA (EBV) Quantitativo copie/mL Nessuna copia rilevata
log10 copie/mL
Limite di quantificazione (LoQ) : copie/mL
Ricerca eseguita su :

EBV (EPSTEIN-BARR VIRUS) WESTERN BLOT IgG Siero	4605	IMMUNOBLOT	11 gg	
---	------	------------	-------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

VCA
EA
EBNA

EBV (EPSTEIN-BARR VIRUS) WESTERN BLOT IgM Siero	4604	IMMUNOBLOT	11 gg	
---	------	------------	-------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

VCA Negativo
EA Negativo
EBNA Negativo

Echinococco conferma (SYNLAB) Siero	597	IMMUNOBLOTTING	16 gg	
---	-----	----------------	-------	--

Il test viene eseguito in automatico qualora lo screening fosse positivo

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

Ecstasy (MDMA) matrice urinaria Urine	6338	IMMUNOENZIMATICO	3 gg	
---	------	------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

MDMA (Ecstasy) (Test di screening) ng/mL Fino a 500
Negativo

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
EDOXABAN (Lixiana) Plasma Citrato congelato	1936	CROMOGENICO	3 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL di plasma citrato separato e congelato
Compilare la Scheda anamnestica paziente SCHEAN019

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Per dosaggio 60 mg/die
Picco : 120 - 240
Valle : 10 - 40

Per dosaggio 30 mg/die
Picco : 55 - 115
Valle : 10 - 20

Elastasi 1 Pancreatica Fecale Feci	520	CHEMILUMINESCENZA	16 gg	
--	-----	-------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
I campioni di feci dovranno essere raccolti ed inviati in nuovi dispositivi dedicati (cod. SAP 600063554).

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/g di feci

< 100 Grave insufficienza pancreatica esocrina
100 - 200 Insufficienza pancreatica esocrina da lieve a moderata
> 200 Normale

Elettroforesi Siero	260	ELETTROFORESI CAPILLARE	3 gg	
-------------------------------	-----	----------------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Proteine totali	g/dL	6,4 - 8,3
Tracciato		
Rapporto albumina/globuline		1,10 - 2,40
Albumina	%	55,8 - 66,1
Alfa 1	%	2,9 - 4,9
Alfa 2	%	7,1 - 11,8
Beta 1	%	4,7 - 7,2
Beta 2	%	3,2 - 6,5
Gamma globuline	%	11,1 - 18,8
Albumina	g/dl	4,02 - 4,76
Alfa 1	g/dl	0,21 - 0,35
Alfa 2	g/dl	0,51 - 0,85
Beta 1	g/dl	0,34 - 0,52
Beta 2	g/dl	0,23 - 0,47
Gamma globuline	g/dl	0,80 - 1,35

Elettroforesi Hb Sangue Intero EDTA	039	HPLC	4 gg	
---	-----	------	------	--

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Hb A2	%	2,5 - 3,2
Hb Fetale	%	≤ 1,0
Hb Anomale	%	Assenti

Elettroforesi Proteine Urinarie Urine 24h	265	ELETTROFORESI SU GEL AGAROSIO	5 gg	
---	-----	----------------------------------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Proteine totali urinarie	mg/24h	
Albumina	%	
Alfa 1 Globuline	%	
Alfa 2 Globuline	%	
Beta Globuline	%	
Gamma Globuline	%	
Commento		

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
EMICRANEA EMIPLEGICA FAMILIARE O SPARADICA - pannello NGS	2096	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	

Sangue Intero EDTA

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

EMILARINGECTOMIA	IN10079	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
-------------------------	---------	--	-------	--

CIT-LARINGE

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 21_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

EMOCOLTURA DA CATETERE VENOSO CENTRALE (CVC)	B568	COLTURALE	6 gg	
---	------	-----------	------	--

Sangue

Quantità da prelevare: 10 mL
RICHIEDERE SEMPRE INSIEME AL CODICE B5682 EMOCOLTURA DA CVC PER BATTERI ANAEROBI

SYNLAB ITALIA

Inviare sempre 2 flaconi (1 terreno di coltura specifica per batteri aerobi e 1 per batteri anaerobi)

- Prelevare 8 - 10 mL di sangue per ogni flacone
- non applicare ETICHETTE sul barcode del flacone
- mantenere i flaconi a temperatura ambiente ed inviarli il più velocemente possibile

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

EMOCOLTURA DA CVC PER BATTERI ANAEROBI	B5682	COLTURALE	6 gg	
---	-------	-----------	------	--

Sangue

Quantità da prelevare: 10 mL
RICHIEDERE SEMPRE INSIEME AL CODICE B568 EMOCOLTURA DA CVC

SYNLAB ITALIA

Inviare sempre 2 flaconi (1 terreno di coltura specifica per batteri aerobi e 1 per batteri anaerobi)

- Prelevare 8 - 10 mL di sangue per ogni flacone
- non applicare ETICHETTE sul barcode del flacone
- mantenere i flaconi a temperatura ambiente ed inviarli il più velocemente possibile

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

EMOCOLTURA DA VENA PERIFERICA PER ANAEROBI	B5681	COLTURALE	6 gg	
---	-------	-----------	------	--

Sangue

Quantità da prelevare: 10 mL
RICHIEDERE SEMPRE INSIEME AL CODICE B527 EMOCOLTURA DA VENA PERIFERICA

SYNLAB ITALIA

Inviare sempre 2 flaconi (1 terreno di coltura specifica per batteri aerobi e 1 per batteri anaerobi)

- Prelevare 8 - 10 mL di sangue per ogni flacone
- non applicare ETICHETTE sul barcode del flacone
- mantenere i flaconi a temperatura ambiente ed inviarli il più velocemente possibile

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Emocromocitometrico completo Sangue Intero EDTA	0014	FOTO/IMPEDENZIOMETRIC O-CITOMETRICO IN FLUORESCENZA	1-3 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Globuli Bianchi (WBC)	10 ⁹ /L	Maschi: 0 - 0 anni: 6,60 - 15,60 1 - 1 anni: 6,00 - 15,00 2 - 3 anni: 5,40 - 13,80 4 - 5 anni: 5,10 - 12,90 6 - 11 anni: 4,80 - 12,00 12 - 14 anni: 4,50 - 11,40 15 - 17 anni: 4,20 - 10,80 18 - 64 anni: 3,90 - 10,20 oltre i 65 anni: 3,60 - 10,50	Femmine: 0 - 0 anni: 6,60 - 15,60 1 - 1 anni: 6,00 - 15,00 2 - 3 anni: 5,40 - 13,80 4 - 5 anni: 5,10 - 12,90 6 - 11 anni: 4,80 - 12,00 12 - 14 anni: 4,50 - 11,40 15 - 17 anni: 4,20 - 10,80 18 - 64 anni: 3,90 - 10,20 oltre i 65 anni: 3,60 - 10,50
Globuli Rossi (RBC)	10 ¹² /L	Maschi: 0 - 1 anni: 3,70 - 5,15 2 - 5 anni: 3,85 - 5,15 6 - 11 anni: 3,95 - 5,25 12 - 14 anni: 4,10 - 5,55 15 - 17 anni: 4,20 - 5,65 18 - 64 anni: 4,30 - 5,75 oltre i 65 anni: 4,00 - 5,65	Femmine: 0 - 1 anni: 3,70 - 5,15 2 - 5 anni: 3,85 - 5,15 6 - 11 anni: 3,95 - 5,25 12 - 17 anni: 3,90 - 5,15 18 - 64 anni: 3,90 - 5,20 oltre i 65 anni: 3,85 - 5,20
Emoglobina (Hgb)	g/L	Maschi: 0 - 1 anni: 102,0 - 134,0 2 - 5 anni: 107,0 - 139,0 6 - 11 anni: 112,0 - 146,0 12 - 14 anni: 125,0 - 160,0 15 - 17 anni: 130,0 - 166,0 18 - 64 anni: 135,0 - 172,0 oltre i 65 anni: 125,0 - 172,0	Femmine: 0 - 1 anni: 102,0 - 134,0 2 - 5 anni: 107,0 - 139,0 6 - 11 anni: 112,0 - 146,0 12 - 17 anni: 120,0 - 154,0 18 - 64 anni: 120,0 - 156,0 oltre i 65 anni: 118,0 - 158,0
Ematocrito (Hct)	%	Maschi: 0 - 1 anni: 32,0 - 41,0 2 - 5 anni: 33,0 - 42,0 6 - 11 anni: 34,0 - 44,0 12 - 14 anni: 37,0 - 48,0 15 - 17 anni: 38,0 - 49,0 18 - 64 anni: 40,0 - 51,0 oltre i 65 anni: 37,0 - 49,0	Femmine: 0 - 1 anni: 32,0 - 41,0 2 - 5 anni: 33,0 - 42,0 6 - 11 anni: 34,0 - 44,0 12 - 17 anni: 35,0 - 45,0 18 - 64 anni: 36,0 - 46,0 oltre i 65 anni: 35,0 - 46,0
Volume corpuscolare medio (MCV)	fL	Maschi: 0 - 1 anni: 72,0 - 93,0 2 - 3 anni: 73,0 - 91,0 4 - 5 anni: 74,0 - 89,0 6 - 11 anni: 76,0 - 91,0 12 - 14 anni: 78,0 - 93,0 15 - 17 anni: 79,0 - 96,0 18 - 64 anni: 80,0 - 99,0 oltre i 65 anni: 80,0 - 101,0	Femmine: 0 - 1 anni: 72,0 - 93,0 2 - 3 anni: 73,0 - 91,0 4 - 5 anni: 74,0 - 89,0 6 - 11 anni: 76,0 - 91,0 12 - 14 anni: 78,0 - 93,0 15 - 17 anni: 79,0 - 96,0 18 - 64 anni: 80,0 - 99,0 oltre i 65 anni: 80,0 - 101,0
Contenuto medio Hgb (MCH)	pg	Maschi: 0 - 0 anni: 23,0 - 32,0 1 - 3 anni: 24,0 - 31,0 4 - 5 anni: 25,0 - 31,0 6 - 11 anni: 25,0 - 32,0 12 - 14 anni: 26,0 - 33,0 15 - 17 anni: 27,0 - 33,0 oltre i 18 anni: 27,0 - 34,0	Femmine: 0 - 0 anni: 23,0 - 32,0 1 - 3 anni: 24,0 - 31,0 4 - 5 anni: 25,0 - 31,0 6 - 11 anni: 25,0 - 32,0 12 - 14 anni: 26,0 - 33,0 15 - 17 anni: 27,0 - 33,0 oltre i 18 anni: 27,0 - 34,0
Concentrazione media Hgb (MCHC)	g/L	Maschi: 0 - 1 anni: 300,0 - 350,0 2 - 3 anni: 300,0 - 355,0 4 - 5 anni: 310,0 - 360,0 oltre i 6 anni: 315,0 - 360,0	Femmine: 0 - 1 anni: 300,0 - 350,0 2 - 3 anni: 300,0 - 355,0 4 - 5 anni: 310,0 - 360,0 oltre i 6 anni: 315,0 - 360,0
Distribuzione volume eritrocitario (RDW)	%	Maschi: 11,2 - 13,7	Femmine: 11,2 - 13,7
Piastrine (PLT)	10 ⁹ /L	Maschi: 0 - 0 anni: 240 - 520 1 - 1 anni: 220 - 490 2 - 3 anni: 200 - 460 4 - 5 anni: 200 - 445 6 - 11 anni: 180 - 415 12 - 14 anni: 170 - 400 15 - 17 anni: 160 - 385 18 - 64 anni: 150 - 370 oltre i 65 anni: 160 - 370	Femmine: 0 - 0 anni: 240 - 520 1 - 1 anni: 220 - 490 2 - 3 anni: 200 - 460 4 - 5 anni: 200 - 445 6 - 11 anni: 180 - 415 12 - 14 anni: 170 - 400 15 - 17 anni: 160 - 385 18 - 64 anni: 150 - 370 oltre i 65 anni: 160 - 370
Volume piastrinico medio (MPV)	fL	Maschi: 9,2 - 12,1	Femmine: 9,2 - 12,1
Granulociti Neutrofili	%		
Linfociti	%		
Monociti	%		
Granulociti Eosinofili	%		
Granulociti Basofili	%		

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Promielociti	%			
Linfociti atipici	%			
Mielociti	%			
Metamielociti	%			
Blasti	%			
Prolinfociti	%			
Plasma cellule	%			
Eritroblasti	%			
Granulociti Immaturi	%			
Granulociti Neutrofili	10 ⁹ /L	Maschi: 0 - 1 anni: 1,50 - 8,70 2 - 3 anni: 1,50 - 8,50 4 - 5 anni: 1,70 - 8,50 6 - 11 anni: 1,70 - 8,10 12 - 17 anni: 1,70 - 8,90 oltre i 18 anni: 1,50 - 7,70	Femmine: 0 - 1 anni: 1,50 - 8,70 2 - 3 anni: 1,50 - 8,50 4 - 5 anni: 1,70 - 8,50 6 - 11 anni: 1,70 - 8,10 12 - 17 anni: 1,70 - 8,90 oltre i 18 anni: 1,50 - 7,70	
Linfociti	10 ⁹ /L	Maschi: 0 - 0 anni: 3,20 - 11,20 1 - 1 anni: 3,00 - 10,00 2 - 3 anni: 2,20 - 8,50 4 - 5 anni: 1,80 - 7,00 6 - 11 anni: 1,50 - 6,00 12 - 17 anni: 1,20 - 5,00 18 - 64 anni: 1,10 - 4,50 oltre i 65 anni: 1,10 - 4,00	Femmine: 0 - 0 anni: 3,20 - 11,20 1 - 1 anni: 3,00 - 10,00 2 - 3 anni: 2,20 - 8,50 4 - 5 anni: 1,80 - 7,00 6 - 11 anni: 1,50 - 6,00 12 - 17 anni: 1,20 - 5,00 18 - 64 anni: 1,10 - 4,50 oltre i 65 anni: 1,10 - 4,00	
Monociti	10 ⁹ /L	Maschi: 0 - 0 anni: 0,20 - 1,45 1 - 1 anni: 0,15 - 1,20 2 - 3 anni: 0,10 - 1,10 4 - 5 anni: 0,10 - 1,00 6 - 14 anni: 0,10 - 0,95 oltre i 15 anni: 0,10 - 0,90	Femmine: 0 - 0 anni: 0,20 - 1,45 1 - 1 anni: 0,15 - 1,20 2 - 3 anni: 0,10 - 1,10 4 - 5 anni: 0,10 - 1,00 6 - 14 anni: 0,10 - 0,95 oltre i 15 anni: 0,10 - 0,90	
Granulociti Eosinofili	10 ⁹ /L	Maschi: 0 - 0 anni: 0,05 - 0,80 1 - 1 anni: 0,03 - 0,70 2 - 5 anni: 0,02 - 0,75 6 - 11 anni: 0,02 - 0,70 12 - 14 anni: 0,02 - 0,65 15 - 17 anni: 0,02 - 0,55 oltre i 18 anni: 0,02 - 0,50	Femmine: 0 - 0 anni: 0,05 - 0,80 1 - 1 anni: 0,03 - 0,70 2 - 5 anni: 0,02 - 0,75 6 - 11 anni: 0,02 - 0,70 12 - 14 anni: 0,02 - 0,65 15 - 17 anni: 0,02 - 0,55 oltre i 18 anni: 0,02 - 0,50	
Granulociti Basofili	10 ⁹ /L	0,00 - 0,20		
COMMENTO				

Emoglobina Glicata	205	HPLC	3 gg	
Sangue Intero EDTA				

VALORI DI RIFERIMENTO			
EMOGLOBINA GLICATA (HbA1c)	% Hb Totale	< 6,5	
EMOGLOBINA GLICATA (HbA1c - IFCC)	mmoli/mol	< 48	

ENA: Antigene JO-1	13126	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	4 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 0,40 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO			
A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo		

ENA: Antigene RNP	1326	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	4 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 0,40 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO			
A.I.(Antic. Index)	< 0.70 Negativo 0,70 - 1,10 Indeterminato > 1,10 Positivo		

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ENA: Antigene RNP 68 kD Siero	1328	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	4 gg	

Quantità da prelevare: 0,40 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 1,00 Negativo
≥ 1,00 Positivo

ENA: Antigene RNP A Siero	1327	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	4 gg	
-------------------------------------	------	---	------	--

Quantità da prelevare: 0,40 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 0,70 Negativo
0,70 - 1,10 Indeterminato
> 1,10 Positivo

ENA: Antigene S.S.A. Siero	13121	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	4 gg	
--------------------------------------	-------	---	------	--

Quantità da prelevare: 0,40 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 1,00 Negativo
≥ 1,00 Positivo

ENA: Antigene S.S.A. 52 kD Siero	1324	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	4 gg	
--	------	---	------	--

Quantità da prelevare: 0,40 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 1,00 Negativo
≥ 1,00 Positivo

ENA: Antigene S.S.A. 60 kD Siero	1325	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	4 gg	
--	------	---	------	--

Quantità da prelevare: 0,40 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 1,00 Negativo
≥ 1,00 Positivo

ENA: Antigene S.S.B. Siero	13122	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	4 gg	
--------------------------------------	-------	---	------	--

Quantità da prelevare: 0,40 mL

- Osservare un digiuno 8-12 ore prima del prelievo
- evitare di sostenere sforzi fisici nelle 12 ore prima del prelievo
- non fumare nel periodo di tempo intercorrente tra il risveglio e l'effettuazione del prelievo
- non assumere alcool nelle 12 ore precedenti il prelievo.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 1,00 Negativo
≥ 1,00 Positivo

ENA: Antigene SCL-70 Siero	13125	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	4 gg	
--------------------------------------	-------	---	------	--

Quantità da prelevare: 0,40 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 0,70 Negativo
0,70 - 1,00 Indeterminato
> 1,00 Positivo

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ENA: Antigene Sm Siero	13123	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	4 gg	

Quantità da prelevare: 0,40 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 1,00 Negativo
≥ 1,00 Positivo

ENA: Antigene Sm/R.N.P. Siero	13124	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	4 gg	
---	-------	---	------	--

Quantità da prelevare: 0,40 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

A.I.(Antic. Index) < 1,00 Negativo
≥ 1,00 Positivo

ENA: Screening Siero	1312	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	4 gg	
--------------------------------	------	---	------	--

Quantità da prelevare: 0,40 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

Enterovirus (Poliovirus) Abs (SYNLAB) Siero	445	NT	22 gg	
---	-----	----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anticorpi Anti-Poliovirus 1 Titolo < 1/4 Negativo
Anticorpi Anti-Poliovirus 3 Titolo < 1/4 Negativo

ENTEROVIRUS RNA Liquor congelato, Plasma EDTA congelato	60040	REAL TIME PCR	9 gg	
---	-------	---------------	------	--

Quantità da prelevare: Liquor 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Enterovirus RNA Non rilevato
Limite di sensibilità (LoD): 500 copie/mL
Limite di sensibilità (LoD) : copie/mL
Ricerca eseguita su :

EPATITE DELTA (HDV) RNA Plasma EDTA congelato, Siero congelato	1044	REAL TIME PCR	8 gg	
--	------	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Non rilevato
Limite di sensibilità (LoD): 45 copie/mL

Epitelio / Forfora di Gatto Siero	6E1	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Epitelio di Cane Siero	6E2	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Epitelio di Capra Siero	6E80	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-----------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Epitelio di Cavia Siero	6E6	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-----------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Epitelio di Coniglio Siero	6E82	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Epitelio di Criceto Siero	6E84	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Epitelio di Maiale Siero	6E83	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
------------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Epitelio di Pecora Siero	6E81	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
------------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Epitelio di Ratto Siero	6E73	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-----------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Epitelio di Topo Siero	6E71	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione	kU/L			
Classe				
EPSTEIN BARR VIRUS EA Abs Early IgG Siero	1072	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
	kU/L	< 10 Negativo 10 - 40 Indeterminato > 40 Positivo		
EPSTEIN BARR VIRUS EA Abs Early IgG Reflex Siero	2290	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
	kU/L	< 10 Negativo 10 - 40 Indeterminato > 40 Positivo		
Eritropoietina Plasma, Siero	644	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
	U/L	4,3 - 29,0		
ES. CITOLOGICO URINE PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE 1° CAMP CIT-URINA	IN10278	COLORAZIONE CON PAPANICOLAOU	8 gg	
Quantità da prelevare: 1 CONTENITORE CYTOLYT				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
ES. CITOLOGICO URINE PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE 2° CAMP CIT-URINA	IN10279	COLORAZIONE CON PAPANICOLAOU	8 gg	
Quantità da prelevare: 1 CONTENITORE CYTOLYT				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
ES. CITOLOGICO URINE PER RICERCA CELLULE NEOPLASTICHE 3° CAMP CIT-URINA	IN10280	COLORAZIONE CON PAPANICOLAOU	8 gg	
Quantità da prelevare: 1 CONTENITORE CYTOLYT				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame Chimico del Calcolo Renale	810	SPETTROMETRICO A RAGGI INFRAROSSI	3 gg	

Calcolo

Non si esegue il sabato

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ossalato di calcio monoidrato	%
Ossalato di calcio biidrato	%
Fosfato di calcio	%
Fosfato di calcio biidrato	%
Fluorofosfato di calcio	%
Fosfato Idrato di ammonio e magnesio	%
Carbonato e fosfato di calcio	%
Carbonato di calcio	%
Acido urico	%
Urato di ammonio	%
Cistina	%
Altro da annotare	

Esame culturale campioni biologici diversi	B508		4-5 gg	
---	------	--	--------	--

Bile, Aspirato Bronchiale (BAS), Catetere Venoso Centrale (CVC), Catetere Vescicale, Cuoio capelluto, Latte Materno, Lavaggio Broncoalveolare (BAL), Materiale Ungueale, Punta Catetere Bronchiale, Secrezione Mammaria, Tampone da Ascesso, Tampone piaga da Decubito, Tampone Ferita, Tampone Ferita chirurgica, Tampone Fistola, Tampone da Lesione, Tampone da Linfonodo, Tampone Ombelicale, Tampone da PEG, Tampone Peritoneale, Tampone da piaga, Tampone Ulcera, Tampone da Ulcus Cruris, Tampone Pustola, Aspirato da Tracheostoma, Materiale Vario

Esame culturale campioni biologici diversi II campione	B5081		5-6 gg	
---	-------	--	--------	--

Materiale Vario

Esame culturale campioni biologici diversi III campione	B5082		5-6 gg	
--	-------	--	--------	--

Materiale Vario

Esame culturale campioni biologici diversi IV campione	B5083		5-6 gg	
---	-------	--	--------	--

Materiale Vario

Esame culturale campioni biologici diversi V campione	B5084		5-6 gg	
--	-------	--	--------	--

Materiale Vario

Esame culturale del sangue (Emocoltura)	B527		8 gg	
--	------	--	------	--

Sangue

Accettare sempre contestualmente all'esame B5681 (Esame culturale batteri anaerobi)
- Inviare sempre 2 flaconi (1 terreno di coltura specifica per batteri aerobi e 1 per batteri anaerobi)
- Prelevare 8 - 10 mL di sangue per ogni flacone
- Non applicare etichette sul barcode del flacone
- Mantenere i flaconi a temperatura ambiente ed inviarli in laboratorio il più velocemente possibile

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale delle feci (Coprocultura) Feci	B501		5-6 gg	
Esame colturale delle feci (Coprocultura) II Campione Feci	B5012		5-6 gg	
Esame colturale delle feci (Coprocultura) III Campione Feci	B5013		5-6 gg	
Esame colturale delle feci (Coprocultura) IV Campione Feci	B5014		5-6 gg	
Esame colturale delle feci (Coprocultura) V Campione Feci	B5015		5-6 gg	
Esame colturale delle feci (Coprocultura) VI Campione Feci	B5016		5 gg	
Esame colturale delle feci (Coprocultura) VII Campione Feci	B5017		5 gg	
Esame colturale delle feci (Coprocultura) VIII Campione Feci	B5018		5 gg	
Esame colturale dell'urina (Urinocoltura) Urine Utilizzare provetta specifica (cod. SAP 600069725)	B500		4-5 gg	
Esame colturale dell'urina (Urinocoltura) II° campione Urine Utilizzare provetta specifica (cod. SAP 600069725)	B5002		4-5 gg	

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame culturale dell'urina (Urinocoltura) III° campione Urine	B5003		4-5 gg	

Utilizzare provetta specifica (cod. SAP 600069725)

Esame culturale espettorato Espettorato	B507		4-5 gg	
---	------	--	--------	--

Esame culturale espettorato II campione Espettorato	B50701		4-5 gg	
---	--------	--	--------	--

Esame culturale espettorato III campione Espettorato	B50702		4-5 gg	
--	--------	--	--------	--

Esame culturale liquidi cavitari Liquido Ascitico, Liquidi Cavitari, Liquido Pleurico, Liquido Sinoviale	B5037	COLTURALE	7 gg	
--	-------	-----------	------	--

Utilizzare per la raccolta un contenitore sterile a tenuta di liquidi (ad esempio contenitore urine cod. 500022329)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Esame culturale liquido seminale Liquido Seminale	B543		4-5 gg	
---	------	--	--------	--

Utilizzare per la raccolta un contenitore sterile a tenuta di liquidi (ad esempio contenitore urine cod. 500022329)

Esame culturale per CPE Tampone Rettale	B5632	COLTURALE	4 gg	
---	-------	-----------	------	--

Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE

Identificazione - 1 -
Identificazione - 2 -
Identificazione - 3 -
Carica batterica
Identificazione
Commento

ESAME COLTURALE PER MICOBATTERI Aspirato Gastrico Neutralizzato, Materiale Bioptico (BIOPT), Aspirato Bronchiale (BAS), Espettorato, Lavaggio Broncoalveolare (BAL), Liquidi Cavitari, Liquido Pleurico, Liquido Seminale, Liquor, Pus, Aspirato da Tracheostoma, Urine Mattino	2024	COLTURALE	71 gg	
---	------	-----------	-------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Colturale per Micobatteri

Assenza di bacilli alcol-acido resistenti

Microscopico per Micobatteri

Assenza di bacilli alcol-acido resistenti

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale per VRE Tampone Rettale Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)	B5622	COLTURALE	4 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
Esame colturale pus Pus da Ferita, Pus, Tampone Pus	B548		5-6 gg	
Esame colturale secreto prostatico Secreto Prostatico	B553		5-6 gg	
Esame colturale tampone anale Tampone Rettale Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)	B5041		4-5 gg	
Nel caso si voglia eseguire la ricerca di batteri multiresistenti, i codici esame da accettare sono i seguenti: -B5622 Esame colturale per VRE (Ricerca Enterococchi Vancomicina resistenti su Tampone rettale) -B5632 Esame colturale per CPE (Ricerca Enterobatteri produttori di carbapenemasi su Tampone rettale)				
Esame colturale tampone auricolare Tampone Auricolare Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)	B564		4-5 gg	
Esame colturale tampone auricolare destro Tampone Auricolare Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)	B564D		4-5 gg	
Esame colturale tampone auricolare sinistro Tampone Auricolare Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)	B564S		4-5 gg	
Esame colturale tampone cavo orale Tampone Cavo Orale Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)	B5031		4-5 gg	
Esame colturale tampone cervicale Tampone Endocervicale Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)	B531	COLTURALE	4-5 gg	
Esame colturale tampone congiuntivale Tampone Congiuntivale Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)	B565		4-5 gg	

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame culturale tampone congiuntivale destro Tampone Congiuntivale Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)	B565D		4-5 gg	
Esame culturale tampone congiuntivale sinistro Tampone Congiuntivale Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)	B565S		4-5 gg	
Esame culturale tampone cutaneo Tampone Cutaneo Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)	B5070	COLTURALE	4-5 gg	
Esame culturale tampone cutaneo II Campione Tampone Cutaneo Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)	B5072		4-5 gg	
Esame culturale tampone cutaneo III Campione Tampone Cutaneo Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)	B5073		5-6 gg	
Esame culturale tampone cutaneo IV Campione Tampone Cutaneo Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)	B5074		5-6 gg	
Esame culturale tampone cutaneo V Campione Tampone Cutaneo Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)	B5075		5-6 gg	
Esame culturale tampone faringeo Tampone Faringeo Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)	B503		4-5 gg	
Esame culturale tampone linguale Tampone Linguale Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)	B5032		4-5 gg	
Esame culturale tampone nasale Tampone Nasale Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)	B573		4-5 gg	

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame colturale tampone nasale destro Tampone Nasale destro	B573D		4-5 gg	

Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)

Esame colturale tampone nasale sinistro Tampone Nasale sinistro	B573S		4-5 gg	
---	-------	--	--------	--

Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)

Esame colturale tampone solco balano prepuziale Tampone solco Balanoprepuziale	B504		4-5 gg	
--	------	--	--------	--

Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)

Esame colturale tampone uretrale Tampone Uretrale	B533		4-5 gg	
---	------	--	--------	--

Utilizzare Tampone Tappo Arancione (cod. SAP 500003321)

Eseguire un secondo tampone a secco, farlo ruotare su un vetrino, farlo asciugare all'aria e inserirlo in apposito contenitore

Esame colturale tampone vaginale Tampone Vaginale	B505		4-5 gg	
---	------	--	--------	--

Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)

Eseguire un secondo tampone a secco, farlo ruotare su un vetrino, farlo asciugare all'aria e inserirlo in apposito contenitore

Esame colturale tampone vulvare Tampone Vulvare	B5040		4-5 gg	
---	-------	--	--------	--

Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)

Esame Feci x Parassiti Feci	514	MICROSCOPICO	3 gg	
---------------------------------------	-----	--------------	------	--

Utilizzare contenitore specifico (cod. SAP 600072259)

VALORI DI RIFERIMENTO

Ricerca protozoi, elminti e loro uova

Parassiti osservati :

Il Specie :

Esame Feci x Parassiti Il Campione Feci	5141	MICROSCOPICO	3 gg	
---	------	--------------	------	--

Utilizzare contenitore specifico (cod. SAP 600072259)

VALORI DI RIFERIMENTO

Ricerca protozoi, elminti e loro uova

Parassiti osservati :

Il Specie :

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame Feci x Parassiti III Campione	5142	MICROSCOPICO	3 gg	
Feci				

Utilizzare contenitore specifico (cod. SAP 600072259)

VALORI DI RIFERIMENTO

Ricerca protozoi, elminti e loro uova

Parassiti osservati :

Il Specie :

Esame Feci x Parassiti IV Campione	5143	MICROSCOPICO	3 gg	
Feci				

Utilizzare contenitore specifico (cod. SAP 600072259)

VALORI DI RIFERIMENTO

Ricerca protozoi, elminti e loro uova

Parassiti osservati :

Il Specie :

Esame Feci x Parassiti V Campione	5144	MICROSCOPICO	3 gg	
Feci				

Utilizzare contenitore specifico (cod. SAP 600072259)

VALORI DI RIFERIMENTO

Ricerca protozoi, elminti e loro uova

Parassiti osservati :

Il Specie :

Esame Feci x Parassiti VI Campione	5145	MICROSCOPIA	3 gg	
Feci				

Utilizzare contenitore specifico (cod. SAP 600072259)

VALORI DI RIFERIMENTO

Ricerca protozoi, elminti e loro uova

Parassiti osservati :

Il Specie :

Esame Feci x Parassiti VII Campione	5146	MICROSCOPIA	3 gg	
Feci				

Utilizzare contenitore specifico (cod. SAP 600072259)

VALORI DI RIFERIMENTO

Ricerca protozoi, elminti e loro uova

Parassiti osservati :

Il Specie :

Esame Feci x Parassiti VIII Campione	5147	MICROSCOPIA	3 gg	
Feci				

Utilizzare contenitore specifico (cod. SAP 600072259)

VALORI DI RIFERIMENTO

Ricerca protozoi, elminti e loro uova

Parassiti osservati :

Il Specie :

ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO ENDOCERVICALE	B9030	COLTURALE	4-5 gg	
Tampone Endocervicale				

Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE																											
ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO URETRALE Tampone Uretrale	B9028	COLTURALE	4-5 gg																												
Utilizzare Tampone Tappo Arancione (cod. SAP 500003321)																															
ESAME MICROBIOLOGICO URINE I MITTO Urine I mitto	B9029	COLTURALE	4-5 gg																												
Esame microscopico di sangue periferico Sangue Intero EDTA	4599	MICROSCOPICO	2 gg																												
VALORI DI RIFERIMENTO <table><tr><td>Granulociti Neutrofili</td><td>%</td><td>50 - 70</td></tr><tr><td>Linfociti</td><td>%</td><td>20 - 45</td></tr><tr><td>Monociti</td><td>%</td><td>4 - 8</td></tr><tr><td>Granulociti Eosinofili</td><td>%</td><td>0 - 4</td></tr><tr><td>Granulociti Basofili</td><td>%</td><td>0 - 2</td></tr><tr><td>Promielociti</td><td>%</td><td></td></tr><tr><td>Mielociti</td><td>%</td><td></td></tr><tr><td>Metamielociti</td><td>%</td><td></td></tr><tr><td>Blasti</td><td>%</td><td></td></tr></table> COMMENTO					Granulociti Neutrofili	%	50 - 70	Linfociti	%	20 - 45	Monociti	%	4 - 8	Granulociti Eosinofili	%	0 - 4	Granulociti Basofili	%	0 - 2	Promielociti	%		Mielociti	%		Metamielociti	%		Blasti	%	
Granulociti Neutrofili	%	50 - 70																													
Linfociti	%	20 - 45																													
Monociti	%	4 - 8																													
Granulociti Eosinofili	%	0 - 4																													
Granulociti Basofili	%	0 - 2																													
Promielociti	%																														
Mielociti	%																														
Metamielociti	%																														
Blasti	%																														
Esame microscopico Espettorato Aspirato Bronchiale (BAS), Espettorato, Aspirato da Tracheostoma	B507M		2-3 gg																												
Esame microscopico Espettorato II Camp Espettorato	B5071M		2-3 gg																												
Esame microscopico Espettorato III Camp Espettorato	B5072M		2-3 gg																												
Esame microscopico Tampone Cervicale Tampone Cervicale	B5100C		5-6 gg																												
Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)																															
Esame microscopico Tampone Uretrale Tampone Uretrale	B5100U		3 gg																												
Utilizzare Tampone Tappo Arancione (cod. SAP 500003321)																															
Esame microscopico Tampone Vaginale Tampone Vaginale	B5100V		3 gg																												
Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)																															

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame Urine Completo Urine	400	COLORIMETRICO/CITOFLUORIMETRICO	1 gg	

Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo

VALORI DI RIFERIMENTO

Aspetto		
Colore		
pH		5,5 - 7,5
Densità relativa		1,005 - 1,030
Glucosio	mg/dL	< 10
Albumina	mg/dL	< 15,0
Emoglobina	mg/dL	< 0,03
Corpi Chetonici	mg/dL	< 2,0
Bilirubina	mg/dL	< 0,2
Urobilinogeno	mg/dL	< 1,0
Nitriti		Assenti
Esterasi Leucocitaria		Assente
Sedimento		
Emazie	/μL	< 15
Leucociti	/μL	< 20
Cellule Epiteliali Squamose	/μL	
Batteri		
Muco		

NOTE

OSSERVAZIONI MICROSCOPICHE

Esame Urine Completo II Camp. Urine	401	COLORIMETRICO/CITOFLUORIMETRICO	1-2 gg	
---	-----	---------------------------------	--------	--

Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo

VALORI DI RIFERIMENTO

Aspetto		
Colore		
pH		5,5 - 7,5
Densità relativa		1,005 - 1,030
Glucosio	mg/dL	< 10
Albumina	mg/dL	< 15,0
Emoglobina	mg/dL	< 0,03
Corpi Chetonici	mg/dL	< 2,0
Bilirubina	mg/dL	< 0,2
Urobilinogeno	mg/dL	< 1,0
Nitriti		Assenti
Esterasi Leucocitaria		Assente
Sedimento		
Emazie	/μL	< 15
Leucociti	/μL	< 20
Cellule Epiteliali Squamose	/μL	
Batteri		
Muco		

NOTE

OSSERVAZIONI MICROSCOPICHE

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Esame Urine Completo III Camp. Urine	402	COLORIMETRICO/CITOFLOUORIMETRICO	1-2 gg	

Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo

VALORI DI RIFERIMENTO

Aspetto		
Colore		
pH		5,5 - 7,5
Densità relativa		1,005 - 1,030
Glucosio	mg/dL	< 10
Albumina	mg/dL	< 15,0
Emoglobina	mg/dL	< 0,03
Corpi Chetonici	mg/dL	< 2,0
Bilirubina	mg/dL	< 0,2
Urobilinogeno	mg/dL	< 1,0
Nitriti		Assenti
Esterasi Leucocitaria		Assente
Sedimento		
Emazie	/μL	< 15
Leucociti	/μL	< 20
Cellule Epiteliali Squamose	/μL	
Batteri		
Muco		

NOTE

OSSERVAZIONI MICROSCOPICHE

Esame Urine Interni Urine	4001	COLORIMETRICO/CITOFLOUORIMETRICO	1-2 gg	
-------------------------------------	------	----------------------------------	--------	--

Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo

VALORI DI RIFERIMENTO

Aspetto		
Colore		
pH		5,5 - 7,5
Densità relativa		1,005 - 1,030
Glucosio	mg/dL	< 10
Albumina	mg/dL	< 15
Emoglobina	mg/dL	< 0,03
Corpi Chetonici	mg/dL	< 2,0
Bilirubina	mg/dL	< 0,2
Urobilinogeno	mg/dL	< 1,0
Nitriti		Assenti
Esterasi Leucocitaria		Assente
Sedimento		
Emazie	/μL	< 15
Leucociti	/μL	< 20
Cellule Epiteliali Squamose	/μL	
Batteri		
Muco		

NOTE

OSSERVAZIONI MICROSCOPICHE

Escrementi di Piccione Siero	6E7	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ESOFAGO - DIGERENTE BIOPSIA ENDOSCOPICA (SING.) CIT-ESOFAGO	IN10050	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	16 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ESOFAGO - POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA (SING.) CIT-ESOFAGO	IN10051	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	16 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ESOFAGO - RESEZIONE ESOFAGO-GASTRICA CIT-ESOFAGO	IN10052	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 9_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

ESOFAGO - RESEZIONE SEGMENTARIA DELL'ESOFAGO CIT-ESOFAGO	IN10053	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 10_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

ESOMA – Pannello NGS Sangue Intero EDTA	8827	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	31 gg	
---	------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso privacy esami genetici INF_GEN00 da conservare presso la struttura + inviare consenso sanitario specifico per il test
(CONS_INF20 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Estriolo Libero Siero	6111	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
---------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Valori in gravidanza :

27a sett.	2,3 - 6,4
28a sett.	2,3 - 7,0
29a sett.	2,3 - 7,7
30a sett.	2,4 - 8,6
31a sett.	2,6 - 9,9
32a sett.	2,8 - 11,4
33a sett.	3,0 - > 12
34a sett.	3,3 - > 12
35a sett.	3,9 - > 12
36a sett.	4,7 - > 12
37a sett.	5,6 - > 12
38a sett.	6,6 - > 12
39a sett.	7,3 - > 12
40a sett.	7,6 - > 12

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ESTRIOLO Plasmatico Siero	611	IMMUNOENZIMATICO	11 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL
Attendere la formazione del coagulo, centrifugare e inviare a 2-8 gradi.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Maschi:
oltre i 7 anni: < 4,25

Femmine:
17 - 20 settimana : 5,49 - 25,30
21 - 24 settimana : 6,73 - 41,14
25 - 28 settimana : 13,40 - 50,28
29 - 32 settimana : 17,49 - 54,91
33 - 36 settimana : 18,52 - 61,62
37 - 41 settimana : 21,97 - 84,83
Donne non gravide : 0,63 - 4,56

Estrone Siero	634	ELISA	11 gg	
-------------------------	-----	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Attendere la formazione del coagulo, centrifugare e inviare a 2-8 gradi

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L

Maschi:
: < 187,2

Femmine:
Premenopausa : 19,5 - 231,9
Postmenopausa : < 166,4

Etanolo Plasma	7341	ENZIMATICO	1 gg	
--------------------------	------	------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

ETANOLO

mg/dL

Non Rilevato

ETANOLO Ematico con valenza medico legale Sangue Intero NaF-K Oxalate	1664	GC	8 gg	
---	------	----	------	--

Quantità da prelevare: 2 mL
Congelare il campione se trascorrono più di 24 ore dal prelievo

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L

< 0,50 (Art. 186 Codice della Strada)

< 0,05 (Art. 186bis Codice della Strada - norme
neo patentati)

Etanolo urinario Urine	734	ENZIMATICO	2 gg	
----------------------------------	-----	------------	------	--

Quantità da prelevare: 3 mL
Provetta dedicata e ben tappata
Non si esegue il sabato

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ETANOLO URINARIO (Test di screening)

mg/dL

Non rilevato

ETG Screening Matrice Urinaria - Val. Clinica Urine	1505CL	EIA	12 gg	
---	--------	-----	-------	--

Se il campione è inviato dopo le 24 ore dalla raccolta congelare a - 20 °C.
Il sabato è da escludere dal conteggio dai giorni di refertazione

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ETILGLUCORONIDE urine (test di screening)

ng/mL

< 250

VADEMECUM GENERALE

E

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Etilglucuronide matrice pilifera (Val. Medico Legale) Capelli	1087	LC-MS-MS	13 gg	

Quantità da prelevare: Diametro ciocca 1 cm
Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione. Per l'esecuzione di questo esame è necessario inviare i campioni con catena di custodia.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mg

< 5 indica astinenza o consumo occasionale

5 - 30 indica consumo ripetuto, non occasionale

> 30 indica consumo abituale eccessivo
(> 4 U.S./die)

Etilglucuronide matrice urinaria screening Urine	1505	EIA	12 gg	
--	------	-----	-------	--

Se il campione è inviato dopo le 24 ore dalla raccolta congelare a - 20 °C.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ETILGLUCORONIDE TEST DI SCREENING

ng/mL

Negativo

Cut off: 250 ng/mL

Etilglucuronide su matrice pilifera (valenza clinica) Capelli	1550CL	LC-MS-MS	13 gg	
---	--------	----------	-------	--

Quantità da prelevare: Diametro ciocca 1 cm
Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mg

< 5 indica astinenza o consumo occasionale

5 - 30 indica consumo ripetuto, non occasionale

> 30 indica consumo abituale eccessivo
(> 4 U.S./die)

Etosuccimide Siero congelato	672	LC-MS	5 gg	
--	-----	-------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti in terapia :
40,0 - 100,0

Euroglyphus Maynei Siero	6D74	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
------------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione

Classe

kU/L

Everolimus (SYNLAB) Sangue Intero EDTA	6340	LC-MS	11 gg	
--	------	-------	-------	--

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

3,00 - 8,00

F.D.P. Plasmatici Plasma Citrato congelato	041	AGGLUTINAZIONE AL LATTICE	2 gg	
--	-----	------------------------------	------	--

Prelevare il sangue intero e dispensare in provetta da 5 ml con fondo a U contenente Na Citrato (1 parte di Na Citrato + 9 parti di sangue intero);

- agitare delicatamente per inversione almeno 3 volte;
- centrifugare immediatamente a 3000 giri per 10 minuti;
- prelevare una aliquota di surnatante di almeno 1 ml e congelare rapidamente a - 20 °C;

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

VADEMECUM GENERALE

F

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
FAGIOLINI (PHASEOLUS VULGARIS)	6F315	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Fagiolo	6F15	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

FAGIOLO ROSSO (PHASEOLUS VULGARIS)	6F287	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Fagus Species (Faggio)	6T5	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

FALSA AMBROSIA (AMBROSIA ACANTHICARPA)	6W4	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

FARINGE - EMIFARINGECTOMIA	IN10054	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
CIT-FARINGE				

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 18_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

FARINGE - FARINGOLARINGECTOMIA TOTALE	IN10055	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
CIT-FARINGE				

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 17_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

FARINGE - TONSILLECTOMIA PER LINFOMA	IN10056	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
CIT-FARINGE				

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 19_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VADEMECUM GENERALE

F

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
FARINGE - TONSILLECTOMIA E/O ADENOIDECTOMIA CIT-FARINGE	IN10057	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 27_AP2

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Fattore V Plasma Citrato congelato	360	COAGULATIVO	8 gg	
--	-----	-------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

% 62 - 150

Fattore II Plasma Citrato congelato	441	COAGULATIVO	8 gg	
---	-----	-------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

% 70 - 146

Fattore IX Plasma Citrato congelato	0740	COAGULATIVO	8 gg	
---	------	-------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

% 55 - 163

Fattore VII Plasma Citrato congelato	342	COAGULATIVO	8 gg	
--	-----	-------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

% 67 - 143

Fattore VIIIc Plasma Citrato congelato	7620	COAGULATIVO	8 gg	
--	------	-------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

% 50 - 150

Fattore X Plasma Citrato congelato	440	COAGULATIVO	8 gg	
--	-----	-------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

% 60 - 152

Fattore XI Plasma Citrato congelato	0741	COAGULATIVO	8 gg	
---	------	-------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

% 67 - 127

Fattore XII (Hageman) Plasma Citrato congelato	0743	COAGULATIVO	8 gg	
--	------	-------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

% 52 - 164

VADEMECUM GENERALE

F

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Fattore XIII Plasma Citrato congelato	074	CROMOGENICO	8 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

% 50 - 155

Feci Potere Digestivo (Es. Chimico Fisico) Feci	517	MICROSCOPIA	4 gg	
---	-----	-------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Aspetto
Consistenza
Colore
Reazione
Muco
Flora fungina
Fibre Vegetali
Fibre Carnee
Amido
Grassi neutri

Feci Potere Digestivo II campione Feci	5172	MICROSCOPIA	4-5 gg	
--	------	-------------	--------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Aspetto
Consistenza
Colore
Reazione
Muco
Flora fungina
Fibre Vegetali
Fibre Carnee
Amido
Grassi neutri

Feci Potere Digestivo III campione Feci	5173	MICROSCOPIA	4-5 gg	
---	------	-------------	--------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Aspetto
Consistenza
Colore
Reazione
Muco
Flora fungina
Fibre Vegetali
Fibre Carnee
Amido
Grassi neutri

Feci ricerca sangue occulto Feci	515	Immunotorbidimetrico	3 gg	
--	-----	----------------------	------	--

Utilizzare kit specifico (cod. SAP 600071175)

VALORI DI RIFERIMENTO

FECI RICERCA SANGUE OCCULTO
ng/mL Negativa
< 100

VADEMECUM GENERALE

F

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Feci ricerca sangue occulto II campione Feci	5152	Immunotorbidimetrico	3 gg	

Utilizzare kit specifico (cod. SAP 600071175)

VALORI DI RIFERIMENTO

FECI RICERCA SANGUE OCCULTO II CAMPIONE
ng/mL Negativa
< 100

Feci ricerca sangue occulto III campione Feci	5153	Immunotorbidimetrico	3 gg	
---	------	----------------------	------	--

Utilizzare kit specifico (cod. SAP 600071175)

VALORI DI RIFERIMENTO

FECI RICERCA SANGUE OCCULTO III CAMPIONE
ng/mL Negativa
< 100

Feci ricerca sangue occulto IV campione Feci	5154	Immunotorbidimetrico	3 gg	
--	------	----------------------	------	--

Utilizzare kit specifico (cod. SAP 600071175)

VALORI DI RIFERIMENTO

FECI RICERCA SANGUE OCCULTO IV CAMPIONE
ng/mL Negativa
< 100

Feci ricerca sangue occulto V campione Feci	5155	Immunotorbidimetrico	3 gg	
---	------	----------------------	------	--

Utilizzare kit specifico (cod. SAP 600071175)

VALORI DI RIFERIMENTO

FECI RICERCA SANGUE OCCULTO V CAMPIONE
ng/mL Negativa
< 100

Feci ricerca sangue occulto VI campione Feci	5156	Immunotorbidimetrico	3 gg	
--	------	----------------------	------	--

Utilizzare kit specifico (cod. SAP 600071175)

VALORI DI RIFERIMENTO

FECI RICERCA SANGUE OCCULTO VI CAMPIONE
ng/mL Negativa
< 100

FEGATO - AGOBIOPSIA EPATICA CIT-FEGATO	IN10060	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

FEGATO - BIOPSIA FEGATO CIT-FEGATO	IN10061	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 9_AP3

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

FEGATO - EPATECTOMIA CIT-FEGATO	IN10062	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 8_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VADEMECUM GENERALE

F

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
FEGATO - RESEZIONE SEGMENTARIA CIT-FEGATO	IN10063	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 8_AP5				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
Fel d 1 Felis domesticus Siero	5E94	ImmunoCAP	5 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				
VALORI DI RIFERIMENTO				
KUA/L < 0,10				
Fel d2 Felis domesticus Siero	5E220	ImmunoCAP	5 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				
VALORI DI RIFERIMENTO				
KUA/L < 0,10				
Fenciclidina matrice urinaria - Valenza clinica Urine	6690CL	EMIT	3 gg	
Se il campione è inviato dopo le 24 ore dalla raccolta congelare a - 20 °C. Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.				
Non si esegue il sabato				
VALORI DI RIFERIMENTO				
FENCICLIDINA (Test di screening) Negativo				
ng/mL				
FENILALANINA Plasmatica (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	272	LC/MS	15 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
FENILALANINA Urine (SYNLAB) Urine Congelate	487	LC-MS	15 gg	
Quantità da prelevare: 10 mL Congelare				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Fenitoina (Dintoina) (Difenilidantoina) Plasma Litio Eparina, Siero	675	EMIT	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL Il prelievo non può essere effettuato in provette con gel separatore in quanto quest'ultimo può modificare il dosaggio del farmaco nel siero e quindi il risultato dell'esame effettuato con queste provette non è attendibile.				
VALORI DI RIFERIMENTO				
μg/mL 10,00 – 20,00 : Concentrazione terapeutica > 30,00 : Concentrazione tossica				
FENOLO Urine Fine Turno Urine F.T.	7083	HPLC	8 gg	
Quantità da prelevare: 10 mL				
VALORI DI RIFERIMENTO				
mg/L Soggetti professionalmente esposti : < 200 (f.t.)				

VADEMECUM GENERALE

F

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
FENOLO Urine Inizio Turno Urine I.T.	7082	HPLC	8 gg	

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti professionalmente esposti :
< 200 (f.t.)

Fenotipo Rh (Aspetto Genico) Sangue Intero EDTA	0231	AGGLUTINAZIONE SU COLONNA	3 gg	
---	------	---------------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ferritina Siero	663	CMIA	1 gg	
---------------------------	-----	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Maschi:
Bassa : < 15
Borderline : 15 - 40
Normale : 41 - 200

Femmine:
Bassa : < 12
Borderline : 12 - 40
Normale : 41 - 150

Ferro Urine 24h Urine 24h	8995	ASSORBIMENTO ATOMICO	8 gg	
-------------------------------------	------	----------------------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta con indicazione della diuresi

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/24h

100 - 400

Ferro Urine Fine Turno Urine F.T.	7242	ASSORBIMENTO ATOMICO	8 gg	
---	------	----------------------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Soggetti professionalmente esposti:
Valore limite non proposto

Ferro Urine Inizio Turno Urine I.T.	7240	ASSORBIMENTO ATOMICO	8 gg	
---	------	----------------------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Soggetti professionalmente esposti:
Valore limite non proposto

Festuca Elatior (paleo dei prati) Siero	6G4	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe

kU/L

VADEMECUM GENERALE

F

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
FETO - ETA' GESTAZ.ANT.ALLA 20^SETT.E/O PESO <500 CIT-FETO	IN10066	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 1_AP8

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Fibrinogeno Plasma Citratato	020	CLAUSS	1 gg	
--	-----	--------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL 180 - 400

Fibromax Test Siero	4500		9 gg	
-------------------------------	------	--	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Separare il siero subito dopo il prelievo. Necessario compilare il modulo SCHEACC_005

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Fibronectina (SYNLAB) Plasma Citrato congelato	3790	NEFELOMETRIA	10 gg	
--	------	--------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 200 - 400

Fibrotest - Actitest Siero	6224		9 gg	
--------------------------------------	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Alfa 2 MACROGLOBULINA	g/L
APTOGLOBINA	g/L
APOLIPOPROTEINA A1	g/L
BILIRUBINEMIA TOTALE	μmol/L
GAMMA GT	UI/L
ALT (GPT)	UI/L

Fico Siero	6F402	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
----------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

Filariasis Antibodies Screening (SYNLAB) Siero	13218	EIA	11 gg	
--	-------	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

VADEMECUM GENERALE

F

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
---------	------	--------	-----	---------

FIP1L1/PDGFRa: Ricerca riarrangiamento genico analisi qualitativa

8731

PCR

11 gg

Sangue Intero EDTA, Sangue Midollare in EDTA o CITRATO

Quantità da prelevare: 3 SANGUE INTERO EDTA o 1 SANGUE MIDOLLARE
ACCETTABILE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

SYNLAB ITALIA

Data la delicatezza del campione, è necessario far pervenire i campioni al laboratorio nel minore tempo possibile o, comunque, entro e non oltre 24h dal prelievo, utilizzando la busta fucsia.

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

FISH - VESCICA CR 3, 7, 9 e 17

IN10324

FISH

11 gg

CIT-URINA

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

SYNLAB ITALIA

Raccogliere l'urina in 1 barattolo con liquido fissativo Cytolyt. Conservare a temperatura ambiente e inviare il giorno stesso al laboratorio. Il campione deve pervenire in Laboratorio entro al massimo 48 ore dalla raccolta (obbligatorio indicare la data di raccolta del campione).

La consegna campioni può avvenire solo da lunedì a mercoledì.

Qualora l'accettazione non avvenga tramite sistema interfacciato, è necessario inviare i campioni unitamente a SCHEACC001 compilata in tutte le sue parti, di cui si inoltra versione aggiornata.

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

FISH PER SINGOLA REGIONE BERSAGLIO

2036

IBRIDAZIONE
FLUORESCENTE IN SITU

16 gg

Liquido Amniotico, Sangue intero Li-Eparina, Villi coriali

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

SYNLAB ITALIA

Poiché i test FISH sono da intendersi come approfondimento di esami cariotipo, per la loro esecuzione sarà sufficiente l'invio dello specifico consenso previsto per il cariotipo su sangue periferico richiesto.

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

FISH PER SONDE CENTROMERICHE

2090

IBRIDAZIONE
FLUORESCENTE IN SITU

16 gg

Liquido Amniotico, Sangue intero Li-Eparina, Villi coriali

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

SYNLAB ITALIA

Poiché i test FISH sono da intendersi come approfondimento di esami cariotipo, per la loro esecuzione sarà sufficiente l'invio dello specifico consenso previsto per il cariotipo su sangue periferico richiesto.

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

FISH PER WHOLE CHROMOSOME PAINTING

2089

IBRIDAZIONE
FLUORESCENTE IN SITU

16 gg

Liquido Amniotico, Sangue intero Li-Eparina, Villi coriali

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

SYNLAB ITALIA

Poiché i test FISH sono da intendersi come approfondimento di esami cariotipo, per la loro esecuzione sarà sufficiente l'invio dello specifico consenso previsto per il cariotipo su sangue periferico richiesto.

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

FLECAINIDE (SYNLAB)

403

LC-MS

6 gg

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

Raccogliere il campione prima della dose successiva e sempre alla stessa ora del giorno

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 0,20 - 0,80

Flunitrazepam

686

HPLC

8 gg

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 5 - 15
Per soggetti in terapia

VADEMECUM GENERALE

F

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Fluoride (SYNLAB) Fluoremia Siero - Plasma	571	POTENZIOMETRIA	16 gg	

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 0 - 30
Intervallo terapeutico :
100 - 300

FLUORURI Urine Fine Turno Urine F.T.	75009	POTENZIOMETRIA DIRETTA CON ELETTRODI IONO-SELETTIVI	8 gg	
--	-------	---	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L Soggetti professionalmente esposti:
< 3 (f.t.)

FLUORURI Urine Inizio Turno Urine I.T.	7509	POTENZIOMETRIA DIRETTA CON ELETTRODI IONO-SELETTIVI	8 gg	
--	------	---	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L Soggetti professionalmente esposti:
< 2 (i.t.)

Forfora di Cane Siero	6E5	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L
Concentrazione
Classe

Forfora di Cavallo Siero	6E3	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
------------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L
Concentrazione
Classe

Forfora di Mucca Siero	6E4	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
----------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L
Concentrazione
Classe

Formaggio Fermentato Siero	6F82	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L
Concentrazione
Classe

VADEMECUM GENERALE

F

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Formaggio Molle Siero	6F81	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

FORMULA LEUCOCITARIA	003	MICROSCOPICO	2 gg	
Sangue Intero EDTA				

Il laboratorio Synlab deve necessariamente avere a disposizione:

- provetta sangue periferico EDTA (opportunamente identificato con i dati del paziente);
- per laboratori di diagnostica: scheda raw-data strumento contaglobuli (opportunamente identificato con i dati del paziente) corredato di notizie cliniche/sospetto diagnostico del paziente se disponibili;
- striscio a fresco di sangue periferico su vetrino conforme (cod. SAP materiale 500032840 SP-SLIDES DASIT PAC/50EA) opportunamente identificato con i dati del paziente (scrivendo a matita sulla porzione sabbata senza apporre etichette sul vetrino stesso) ed inserito nel proprio portavetrino (cod. SAP materiale 600070291 PORTAVETR. POST. 1 POSTO PAC/10EA).

VALORI DI RIFERIMENTO

Granulociti Neutrofili	%	50 - 70
Linfociti	%	20 - 45
Monociti	%	4 - 8
Granulociti Eosinofili	%	0 - 4
Granulociti Basofili	%	0 - 2
Promielociti	%	
Mielociti	%	
Metamielociti	%	
Blasti	%	

COMMENTO

Fosfatasi Acida Totale	283	COLORIMETRICO CINETICO	2 gg	
Siero congelato				

Quantità da prelevare: 3 mL

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L	≤ 4,7
-----	-------

Fosfatasi Alcalina	282	PARANITROFENILFOSFAT O	1 gg	
Siero				

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L	Maschi: 0 - 0 anni: 134 - 518 1 - 9 anni: 156 - 369 10 - 12 anni: 141 - 460 13 - 14 anni: 127 - 517 15 - 16 anni: 89 - 365 17 - 18 anni: 59 - 164 oltre i 19 anni: 35 - 105	Femmine: 0 - 0 anni: 134 - 518 1 - 9 anni: 156 - 369 10 - 12 anni: 141 - 460 13 - 14 anni: 62 - 280 15 - 16 anni: 54 - 128 17 - 18 anni: 48 - 95 oltre i 19 anni: 35 - 105
-----	--	---

Fosfatasi Alcalina Ossea Specifica	2820	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1,5 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L	Maschi: 5,5 - 22,9	Femmine: Premenopausa : 4,9 - 26,6 Postmenopausa : 5,2 - 24,4
------	--------------------	---

Fosfatasi Alcalina Placentare (SYNLAB)	1137	EIA	9 gg	
Siero congelato				

Quantità da prelevare: 2 mL siero congelato diviso in 2 aliquote

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata.

Recuperare 2,0 mL di siero, divisi in due aliquote distinte, e congelare.

Stampare due copie della stessa etichetta con medesimo ID campione

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mU/L	< 100 Non fumatori
------	--------------------

VADEMECUM GENERALE

F

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Fosfatasi prostatica (PAP) Siero congelato	2830	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 3,50

Fosfaturia (P) Urine 24h	255	FOSFOMOLIBDATO	2 gg	
--------------------------------------	-----	----------------	------	--

Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo

VALORI DI RIFERIMENTO

g/24h 0,40 - 1,30

FOSFOETANOLAMMINA Plasmatica (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	8742	LC/MS	15 gg	
---	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

FOSFOETANOLAMMINA Urinaria (SYNLAB) Urine Congelate	8743	LC-MS	15 gg	
---	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Fosfolipidi Siero	328	ENZIMATICO COLORIMETRICO	2 gg	
-----------------------------	-----	-----------------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL 150 - 250

Fosforemia (P) Siero	245	FOSFOMOLIBDATO	1 gg	
----------------------------------	-----	----------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL 2,3 - 5,1

FOSFORO URINARIO SU CAMPIONE ESTEMPORANEO Urine	2243	COLORIMETRICO	1 gg	
---	------	---------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/mg creatinina

Maschi:	Femmine:
0 - 0 anni: 0,30 - 5,24	0 - 0 anni: 0,30 - 5,24
1 - 1 anni: 0,30 - 3,95	1 - 1 anni: 0,30 - 3,95
2 - 2 anni: 0,30 - 3,13	2 - 2 anni: 0,30 - 3,13
3 - 6 anni: 0,30 - 2,00	3 - 6 anni: 0,30 - 2,00
7 - 17 anni: 0,30 - 0,95	7 - 17 anni: 0,30 - 0,95
oltre i 18 anni: 0,20 - 0,80	oltre i 18 anni: 0,20 - 0,80

VADEMECUM GENERALE

F

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
FOX TEST Siero	2352	DOSAGGIO IMMUNOLOGICO SU FASE SOLIDA	5 gg	

Quantità da prelevare: 2 mL
Accettare singolarmente, senza altre analisi nella medesima richiesta.

SYNLAB ITALIA

ALIMENTI ANALIZZATI : latte vaccino, latte pecora, latte capra, lievito di birra, lievito chimico, farro, orzo, grano, mais, riso, coniglio, maiale, agnello, tacchino, pollo, uova, manzo, salmone, tonno, mix cefalopodi non distinto (seppia, calamaro, polpo), merluzzo, sogliola, gamberi, zucchina, melanzana, peperoni, cicoria, lattuga, carota, asparago, spinaci, pomodori, funghi, patata, sedano, cipolla, cavolfiore, pesca, uva, kiwi, arancia, limone, albicocca, pera, prugna, banana, mela, fragole, fagioli, piselli, soia, arachide, mandorla, noce, oliva, cacao, caffè, the, zucchero bianco, miele.

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Fragola Siero	6F44	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Francisella IgM (Tularemia) (SYNLAB) Siero	436	EIA	11 gg	
--	-----	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 10,0 Negativo

Fraxinus Species (Frassino) Siero	6T15	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Free beta HCG per BITEST Siero congelato	8970	IF-TRACE	7 gg	
--	------	----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare e conservare a temperatura ambiente per massimo 48 ore

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/L Donne non gravide: < 0,74

Settimana di Gestazione
1° trimestre
11a 16,7 - 120,5
12a 14,6 - 105,7
13a 11,3 - 81,5
14a 8,3 - 59,9
2° trimestre
15a 5,6 - 46,4
16a 4,2 - 34,5
17a 3,4 - 25,6
18a 2,9 - 27,0

FREE PSA Siero	65140	CMIA	1 gg	
--------------------------	-------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

PSA Free ng/mL
PSA Totale ng/mL < 4,000
Rapporto PSA Free / PSA Totale % > 23 %

VADEMECUM GENERALE

F

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Fructosamine test Siero	2050	COLORIMETRICO	2 gg	
Quantità da prelevare: 3 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
		μmol/L	151,0 - 300,0	
Frutto passione Plasma, Siero	6F294	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
FSH Siero	615	CMIA	1 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
		mUI/mL	Maschi: 1,0 - 12,0	Femmine: Fase follicolare : 3,0 - 8,1 Picco metà ciclo : 2,6 - 16,7 Fase luteinica : 1,4 - 5,5 Postmenopausa : 26,7 - 133,4
Fusarium Moniliforme Siero	6M9	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
G.SALIVARE - AGOBIOPSIA GHIANDOLE SALIVARI CIT-G.SALIVARE	IN10067	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
		Vedi Allegato		
G.SALIVARE - ASPORTAZIONE ALLARGATA GHIANDOLA SALIVARE CIT-G.SALIVARE	IN10068	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 12_AP2				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
		Vedi Allegato		
G.SALIVARE - ASPORTAZIONE SEMPLICE GHIANDOLA SALIVARE CIT-G.SALIVARE	IN10069	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 22_AP2				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
		Vedi Allegato		
G.SALIVARE - BIOPSIA GHIANDOLA SALIVARE CIT-G.SALIVARE	IN10070	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

G

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
G.SALIVARE - NODULECTOMIA GHIANDOLA SALIVARE CIT-G.SALIVARE	IN10071	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 22_AP2

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

G-6-PDH Eritrocitaria Sangue Intero EDTA	044	ENZIMATICO CINETICO	6 gg	
--	-----	---------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

G-6-PDH ERITROCITARIA	U/g Hb (37°C)	10,10 - 14,19
Emoglobina (Hgb)	g/L	
Volume Corpuscolare Medio (MCV)	fL	

GABAPENTINA (Neurontina) Siero congelato	363	LC-MS-MS	6 gg	
--	-----	----------	------	--

Quantità da prelevare: 500 µL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L	2,0 – 20,0 Per soggetti in terapia
------	---------------------------------------

Gad c1 Gadus morhua Siero	5F426	ImmunoCAP	5 gg	
-------------------------------------	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L	< 0,10
-------	--------

Gal d1 Gallus spp. Siero	5F233	ImmunoCAP	5 gg	
------------------------------------	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L	< 0,10
-------	--------

Gal d2 Gallus spp. Siero	5F232	ImmunoCAP	5 gg	
------------------------------------	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L	< 0,10
-------	--------

Gal d4 Gallus spp. Siero	5K208	ImmunoCAP	5 gg	
------------------------------------	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L	< 0,10
-------	--------

Galactose 1 Phosphatase Uridyl Transferase (SYNLAB) Sangue Intero EDTA	474	RIA	11 gg	
--	-----	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Compilare modulo consenso informato esami genetici Synlab Leinfelden

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µmol/min/g Hb	20,00 - 35,00
---------------	---------------

VADEMECUM GENERALE

G

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Gambero Siero	6F24	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Gambero acquadolce Plasma, Siero	6F320	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

GAMMA GT Siero	285	SUBSTRATO L-GAMMA- GLUTAMILE-3-CARBOSSI-4- NITROANILIDE	1 gg	
--------------------------	-----	---	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L Maschi: < 73 Femmine: < 38

Gastrina Siero congelato	655	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
------------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L 13 - 115

GASTRO PGx - Pannello farmacogenetica per farmaci gastrici Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	8751	MASS-ARRAY	11 gg	
---	------	------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

GASTROPROFILE Siero congelato	6550	CHEMILUMINESCENZA	4 gg	
---	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 2 mL

Per l'esecuzione del test è necessario il digiuno da almeno 8-12 ore prima del prelievo.

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) a temperatura ambiente, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Pepsinogeno I	ng/mL	70,0 - 240,0
Pepsinogeno II	ng/mL	< 13,0
Pepsinogeno I / Pepsinogeno II		3,0 - 20,0
Gastrina 17	pmol/L	1,7 - 7,6
Helicobacter Pylori	EIU	< 30 Negativo ≥ 30 Positivo

*** INTERPRETAZIONE:***

Gene ABCB1: ricerca delle variazioni 3435T/C, 1236T/C e 2677T-A/G Sangue Intero EDTA	8358	RFLP PCR	11 gg	
--	------	----------	-------	--

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

G

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Gene ApoB: ricerca della variazione R3500Q Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	8363	PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO	11 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Gene ApoE: genotipizzazione E2-E3-E4 Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	8366	PCR E REVERSE DOT BLOT	11 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
GENE ATP7B : DIAGNOSI MOLECOLARE DELLA MALATTIA DI WILSON Sangue Intero EDTA	2056	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Gene BRAF: ricerca mutazioni nell'esone 15 CIT-SOMA	8522	MASS-ARRAY	11 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE MATERIALE INCLUSO IN PARAFFINA				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
GENE CFTR: ANALISI MIRATA DI SINGOLA REGIONE NOTA DEL GENE Sangue Intero EDTA	8407	PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO	11 gg	
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario specifico per il test (INF_GEN03 Synlab oppure consenso dello specialista)				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Gene CYP2C19: ricerca delle variazioni *2 e *3 Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	8379	PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO	11 gg	
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Gene CYP2C9: ricerca delle variazioni *2 e *3 Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	8380	RFLP PCR	11 gg	
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				

VADEMECUM GENERALE

G

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
GENE CYP2D6 : ricerca di variazioni note Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	1636	PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO	11 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Gene DMD: Ricerca di delezioni nel gene DMD (Distrofia muscolare di Duchenne) Liquido Amniotico, Sangue Intero EDTA, Villi coriali	6308	MLPA	11 gg	
--	------	------	-------	--

Quantità da prelevare: 5 mL
Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN05 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

GENE EGFR: ricerca mutazioni sugli esoni 18,19,20,21 su materiale bioptico CIT-SOMA	8524	MASS-ARRAY	11 gg	
---	------	------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE MATERIALE INCLUSO IN PARAFFINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Gene Fattore V: ricerca della mutazione G1691A (detta di Leiden) Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	60540	PCR REAL TIME	6 gg	
---	-------	---------------	------	--

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario dello specialista

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Gene Fattore V: ricerca della mutazione H1299R (detta HR2) Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	1274	RFLP PCR	6 gg	
---	------	----------	------	--

Quantità da prelevare: 3 mL
Inviare il consenso sanitario specifico per il test del medico specialista

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Gene Fattore V: ricerca della mutazione Y1702C Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	8403	REAL TIME PCR	11 gg	
---	------	---------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario dello specialista

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Gene Fattore VII: ricerca della mutazione R353Q Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	8404	RFLP PCR	11 gg	
--	------	----------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario dello specialista

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

G

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Gene Fattore XII: ricerca della mutazione C46T Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	8401	RFLP PCR	11 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario dello specialista

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Gene Fattore XIII: ricerca della mutazione V34L Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	8402	RFLP PCR	11 gg	
--	------	----------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario dello specialista

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Gene FIBRB (fibrinogeno beta): ricerca della mutazione - 455G>A Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	8410	REAL TIME PCR	11 gg	
---	------	---------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario dello specialista

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

GENE FMR1: ANALISI DI PREMUTAZ. E MUTAZ. COMPLETA (X-FRAGILE E PAT. ASSOCIATE A PREMUTAZ.) Liquido Amniotico, Sangue Intero EDTA, Villi coriali	488	PCR E ANALISI DI FRAMMENTI	11 gg	
---	-----	----------------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 5 mL

Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista).

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Gene FSHR: ricerca delle variazioni T307A e N680S Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	8415	RFLP PCR	11 gg	
--	------	----------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Gene GPIa: ricerca della variazione C807T Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	8418	RFLP PCR	11 gg	
--	------	----------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Gene GPIIIa : ricerca della variazione HPA 1a/1b Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	8193	REAL TIME PCR	11 gg	
---	------	---------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

G

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Gene JAK2 : Sequenziamento esone 12 Sangue Intero EDTA Quantità da prelevare: 2 PROVETTE SANGUE EDTA Compilare consenso informato INF_GEN00	8728	PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Gene JAK2: identificazione qualitativa di V617F Sangue Intero EDTA Quantità da prelevare: 2 CAMPIONI Utilizzare il sacchetto fucsia per l'invio dei campioni	1262	PCR REAL TIME	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Gene KIT : ricerca mutazioni note CIT-SOMA Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE MATERIALE INCLUSO IN PARAFFINA	2034	MASS-ARRAY	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Gene KRAS: ricerca mutazioni esoni 2,3,4 su materiale biotipico CIT-SOMA Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE MATERIALE INCLUSO IN PARAFFINA	8456	MASS-ARRAY	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Gene LHB: ricerca della variazione p.I35T (rs34349826) Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00	8463	PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Gene LHB: ricerca della variazione p.W28R (rs1800447) Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00	8462	PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Gene LHGR: ricerca della mutazione R554X (rs121912524) Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00	8464	RFLP PCR	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Gene MMP9: ricerca della variazione rs3918242 Tampone Cavo Orale Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00	8472	PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				

VADEMECUM GENERALE

G

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
GENE NRAS: ricerca mutazioni in esoni 2, 3, 4 su materiale biotipico	8523	MASS-ARRAY	11 gg	

CIT-SOMA

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE MATERIALE INCLUSO IN PARAFFINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Gene PAI-1 RICERCA DELLA MUTAZIONE 4G/5G	1051	RFLP PCR	6 gg	
---	------	----------	------	--

Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario dello specialista

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Gene PDGFRa : ricerca mutazioni note	2035	MASS-ARRAY	11 gg	
---	------	------------	-------	--

CIT-SOMA

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE MATERIALE INCLUSO IN PARAFFINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Gene PIK3CA : ricerca mutazioni negli esoni 1, 2, 4, 7, 9, 20	8525	MASS-ARRAY	11 gg	
--	------	------------	-------	--

CIT-SOMA

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE MATERIALE INCLUSO IN PARAFFINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

GENE PTEN : diagnosi molecolare delle sindromi di Cowden,Bannayan-Riley-Ruvalcaba e Lhermitte-Duclos	2069	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	
---	------	---	-------	--

Sangue Intero EDTA

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Gene SHOX : ricerca di delezioni e duplicazioni nel gene	8783	MLPA	11 gg	
---	------	------	-------	--

Sangue Intero EDTA

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista).

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Gene SMN1: Ricerca di delezioni responsabili di atrofia muscolare spinale (SMA)	8505	MLPA	11 gg	
--	------	------	-------	--

Liquido Amniotico, Sangue Intero EDTA, Villi coriali

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario specifico per il test (INF_GEN06 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

G

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Gene TP53: sequenziamento completo Materiale Bioptico, Sangue Intero EDTA	8486	PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO	31 gg	

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario dello specialista (solo se germinale)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Gene TPMT : ricerca aplotipi responsabili di tossicità alle tiopurine Sangue Intero EDTA	2084	REAL TIME PCR	11 gg	
--	------	---------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare INF_GEN20

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Gene VKORC: ricerca della variazione C1173T Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	8519	RFLP PCR	11 gg	
--	------	----------	-------	--

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Gene VKORC: ricerca della variazione G-1639A Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	8518	REAL TIME PCR	11 gg	
---	------	---------------	-------	--

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Gene VKORC: ricerca della variazione G3730A Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	8520	REAL TIME PCR	11 gg	
--	------	---------------	-------	--

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Gentamicina Siero	6955	IMMUNOTURBIDIMETRIA	8 gg	
-----------------------------	------	---------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 4,00 - 10,00

GHB test di conferma su urine Urine	1569	LC-MS-MS	8 gg	
---	------	----------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

GHB mg/L < 5,00

GHB test di screening su urine- valenza medico legale Urine	1568	IMMUNOCHEMICO	11 gg	
---	------	---------------	-------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

GHB mg/L Negativo

VADEMECUM GENERALE

G

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
GHB Valenza Clinica Urine	1568CL	IMMUNOCHIMICO	11 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

GHB mg/L Negativo

Giardia Ag ricerca diretta Feci	6201	immunocromatografico	2 gg	
---	------	----------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

NEGATIVO

GLDH (SYNLAB) Siero	1638	SPETTROFOTOMETRIA	11 gg	
-------------------------------	------	-------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L Maschi: < 7,0 Femmine: < 5,0

Gliadina Gliadina Siero	5F98	ImmunoCAP	5 gg	
-----------------------------------	------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Glicemia Plasma	200	ENZIMATICO	1 gg	
---------------------------	-----	------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL 70 - 100

Glicemia basale per prelievi esterni Plasma	1281	ENZIMATICO	1 gg	
---	------	------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL 70 - 100

Glicemia Post Prandiale Plasma	201	ENZIMATICO	1 gg	
--	-----	------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

Glicemia postprandiale tardiva (per interni) Plasma	1283	ENZIMATICO	1 gg	
---	------	------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

Glicemia preprandiale (per interni) Plasma	1282	ENZIMATICO	1 gg	
--	------	------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

VADEMECUM GENERALE

G

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
GLICINA Plasmatica (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	826	LC/MS	15 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
GLICINA Urinaria (SYNLAB) Urine Congelate	8261	LC-MS	15 gg	
Quantità da prelevare: 10 mL				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Glicosaminoglicani (SYNLAB) Urine Mattino	526	SPETTROFOTOMETRIA	26 gg	
Quantità da prelevare: 15 mL				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
GLICOSAMINOGLICANI COLORIMETRIA (SYNLAB) Urine 24h	799801	SPETTROFOTOMETRIA	41 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Glicosuria Urine 24h	206	ENZIMATICO	1 gg	
Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo				
VALORI DI RIFERIMENTO				
g/24h < 0,15				
Glicosuria Frazionata Urine	207	ENZIMATICO	1 gg	
Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo				
VALORI DI RIFERIMENTO				
GLICOSURIA FRAZIONATA mg/dL < 10				
GLICOSURIA FRAZIONATA Tempo 1 mg/dL < 10				
GLICOSURIA FRAZIONATA Tempo 2 mg/dL < 10				
GLICOSURIA FRAZIONATA Tempo 3 mg/dL < 10				
Glucagone (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	6521	RIA	21 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.				
VALORI DI RIFERIMENTO				
ng/L < 209				
GLUTAMMINA Plasmatica (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	818	LC/MS	15 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				

VADEMECUM GENERALE

G

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Glutamina Urinaria (SYNLAB) Urine Congelate Quantità da prelevare: 10 mL	8180	LC-MS	15 gg	SYNLAB GERMANIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Glutazione Perossidasi (SYNLAB) Sangue Intero EDTA Quantità da prelevare: 2 mL	6615	SPETTROFOTOMETRIA	16 gg	SYNLAB GERMANIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
U/g Hb 27,5 - 73,6				
Glutazione Sangue Intero Sangue Intero EDTA Quantità da prelevare: 1 mL Congelare il sangue intero per l'invio al laboratorio	2264	HPLC	8 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Glutazione libero µmol/L 500 - 1.500				
Glutazione ossidato µmol/L 25 - 150				
Rapporto Glutazione libero/ossidato 10 - 15				
Glutine Siero Quantità da prelevare: 1 mL	6F79	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione kU/L				
Classe				
Gly m5 Glycine max Siero Quantità da prelevare: 1 mL	5F431	ImmunoCAP	5 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
KUA/L < 0,10				
Gly m6 Glycine max Siero Quantità da prelevare: 1 mL	5F432	ImmunoCAP	5 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
KUA/L < 0,10				
Glycyphagus Domesticus Siero Quantità da prelevare: 1 mL	6D73	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione kU/L				
Classe				
Granchio Siero Quantità da prelevare: 1 mL	6F23	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione kU/L				
Classe				

VADEMECUM GENERALE

G

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Grano (Frumento) Siero	6F4	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Grano Saraceno Siero	6F11	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

GRANOTURCO (ZEA MAIS) Siero	6G202	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---------------------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Greer Labs. Inc. Siero	6H1	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
----------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Grelina (SYNLAB) Siero congelato	1261	RIA	31 gg	
--	------	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L 911 - 1.715

Gruppo e fattore Rh Sangue Intero EDTA	023	AGGLUTINAZIONE SU COLONNA	3 gg	
--	-----	---------------------------	------	--

La provetta deve essere dedicata;
scrivere sempre sulla provetta e sulla richiesta dedicata: cognome, nome, data di nascita
del paziente e firma del prelevatore;
utilizzare una provetta con diametro di 12 mm.
Risposta dopo 48h.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

GRUPPO :
Rh (D):

H.G.H. (Ormone Somatotropo) Siero congelato	6540	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
---	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L Maschi: < 3,00 Femmine: < 8,00

VADEMECUM GENERALE

H

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
H.G.H. 6 Dosaggi seriati Siero congelato	654	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

H.G.H. basale	µg/L	Maschi: 0,00 - 3,00	Femmine: 0,00 - 8,00
H.G.H. dopo Tempo 1	µg/L		
H.G.H. dopo Tempo 2	µg/L		
H.G.H. dopo Tempo 3	µg/L		
H.G.H. dopo Tempo 4	µg/L		
H.G.H. dopo Tempo 5	µg/L		
H.G.H. dopo Tempo 6	µg/L		

Haemophilus Influenzae B Abs Siero	432	ELISA	11 gg	
--	-----	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L	< 0,15 : Protezione insufficiente
	0,15 - 1,0 : Paziente immunizzato o con pregressa infezione da Haemophilus influenzae B
	> 1,0 : Immunità naturale sufficiente o con una protezione acquisita dopo la terza vaccinazione

HALIBUT (HIPPOGLOSSUS STENOLEVIS) Siero	6F303	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

Hantavirus Abs IgG (SYNLAB) Siero	875	EIA	11 gg	
---	-----	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Indice	< 0,8 Negativo 0,8 - 1,1 Indeterminato > 1,1 Positivo
--------	---

Hantavirus Abs IgM (SYNLAB) Siero	8750	EIA	11 gg	
---	------	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Indice	< 0,8 Negativo 0,8 - 1,1 Indeterminato > 1,1 Positivo
--------	---

HBcAb IgM A BASSO TITOLO Siero	6090	ELFA	2 gg	
--	------	------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

PEI kU/L	< 5 Negativo 5 -10 Indeterminato ≥ 10 Positivo
----------	--

VADEMECUM GENERALE

H

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
HBeAg (Markers Epatite B) Siero	602	CMIA	2 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Reattivo

HBeAg (Markers Epatite B) per reflex Siero	2295	CMIA	2 gg	
--	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Reattivo

HBsAg (Antigene Au) Markers Epatite B Siero	600	CMIA	2 gg	
---	-----	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Reattivo

HBsAg (Antigene di superficie virus epat. B) Quant. Siero	1170	CMIA	2 gg	
---	------	------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kUI/L < 0,05 Negativo

HBsAg TEST DI CONFERMA Siero	6001	CMIA	2 gg	
--	------	------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Non confermato

HBV DNA Genotipo (SYNLAB) Sangue Intero EDTA	1099	PCR	11 gg	
--	------	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 5 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

HCV - R.I.B.A. (Western Blot) Siero	6050	IMMUNOBLOTTING	8 gg	
---	------	----------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

HCV - R.I.B.A. (Test di conferma)

Negativo

C1
C2
E2
NS3
NS4
NS5

HCV REFLEX Siero	2289	CMIA	8 gg	
----------------------------	------	------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

Se anticorpi anti-HCV positivi, aggiunta analisi 60530R HCV RNA Quantitativo per reflex.
Se rilevato HCV RNA Quantitativo, aggiunta analisi 60520R HCV RNA Genotipo per reflex.

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo (Non rilevato)

VADEMECUM GENERALE

H

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
HCV RNA Genotipo Plasma EDTA congelato, Siero congelato	60520	REAL TIME PCR	12 gg	

Quantità da prelevare: 1,5 mL di Siero o Plasma
Il test può essere richiesto singolarmente solo se accompagnato da una carica virale recente (entro 30 giorni) o contestualmente all'esame HCV RNA QUALITATIVO (cod. 60510).

SYNLAB ITALIA

Per l'esecuzione delle analisi di biologia molecolare per HCV, HBV e HIV non è possibile richiedere più di una analisi per lo stesso campione (esempio: se per 1 paziente si richiede HCV qualitativo e HCV quantitativo, è necessario inviare 2 campioni anche se la richiesta può essere fatta sulla stessa accettazione)

VALORI DI RIFERIMENTO

HCV RNA Genotipo
Sottotipo

HCV RNA Qualitativo (PCR) Plasma EDTA congelato, Siero congelato	60510	REAL TIME PCR	8 gg	
--	-------	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 1,5 mL di Siero o Plasma
Per l'esecuzione delle analisi di biologia molecolare per HCV, HBV e HIV non è possibile richiedere più di una analisi per lo stesso campione (esempio: se per 1 paziente si richiede HCV qualitativo e HCV quantitativo, è necessario inviare 2 campioni anche se la richiesta può essere fatta sulla stessa accettazione)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Non rilevato
Limite di sensibilità (LoD): 4 UI/mL

HCV RNA Quantitativo Plasma EDTA congelato, Siero congelato	60530	REAL TIME PCR	8 gg	
---	-------	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 1,5 mL di Siero o Plasma
Per l'esecuzione delle analisi di biologia molecolare per HCV, HBV e HIV non è possibile richiedere più di una analisi per lo stesso campione (esempio: se per 1 paziente si richiede HCV qualitativo e HCV quantitativo, è necessario inviare 2 campioni anche se la richiesta può essere fatta sulla stessa accettazione)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

HCV RNA Quantitativo
UI/mL
Nessuna UI rilevata
Limite di quantificazione (LoQ): 10 UI/mL
log10 UI/mL

He4 (Ovarian Cancer Marker) Siero	6323	CMIA	2 gg	
---	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

pmol/L
Femmine:
Premenopausa : < 70,0
Postmenopausa : < 140,0

Helicobacter Pylori Abs IgG Siero	148	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
---	-----	-------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L
< 0,9 Negativo
0,9 - 1,1 Dubbio
> 1,1 Positivo

Helicobacter Pylori IgA Conferma Siero	1139	WESTERNBLOT	11 gg	
--	------	-------------	-------	--

Quantità da prelevare: 0,3 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

H

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Helicobacter Pylori IgA Screening Siero	1138	ELISA	11 gg	

Quantità da prelevare: 0,3 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L
< 8,0 Negativo
8,0 – 12,0 Indeterminato
> 12,0 Positivo

HELICOBACTER PYLORI IgG - WESTERN BLOT Siero	4597	WESTERN BLOT	11 gg	
--	------	--------------	-------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

HELMINTHOSPORUM (H. HALODES) Siero	6M8	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Hemopexin (Emopessina) (SYNLAB) Siero	438	IMMUNODIFFUSIONE RADIALE	9 gg	
---	-----	--------------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 500 - 1.150

HERPES VIRUS 8 DNA Plasma EDTA congelato, Sangue Intero EDTA	645	REAL TIME PCR	8 gg	
--	-----	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Herpes Virus 8 DNA (HHV8) Non rilevato
Limite di sensibilità (LoD) : copie/mL

Hev b 6.02 Hevea brasiliensis Siero	5K220	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Hev b1 Hevea brasiliensis Siero	5K215	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Hev b11 Hevea brasiliensis Siero	5K224	ImmunoCAP	5 gg	
--	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

VADEMECUM GENERALE

H

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Hev b3 Hevea brasiliensis Siero	5K217	ImmunoCAP	5 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Hev b5 Hevea brasiliensis Siero	5K218	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Hev b8 Hevea brasiliensis Siero	5K221	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

HHV-6 DNA (Human Herpes virus 6) Plasma EDTA congelato, Sangue Intero EDTA	60071	REAL TIME PCR	8 gg	
--	-------	---------------	------	--

Il sangue intero in EDTA NON va congelato, bensì conservato a 2-8°C

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Human Herpes Virus 6 DNA (HHV6) Non rilevato
Limite di sensibilità (LoD) : copie/mL
Ricerca eseguita su :

Histamine Urinary (SYNLAB) (Istamina urinaria) Urine 24H Congelate	66590	EIA	11 gg	
--	-------	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

HIV 1 RNA Quantitativo Plasma EDTA congelato	60131	REAL TIME PCR	16 gg	
--	-------	---------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1,5 mL

Per l'esecuzione delle analisi di biologia molecolare per HCV, HBV e HIV non è possibile richiedere più di una analisi per lo stesso campione (esempio: se per 1 paziente si richiede HCV qualitativo e HCV quantitativo, è necessario inviare 2 campioni anche se la richiesta può essere fatta sulla stessa accettazione)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

HIV-1 RNA Quantitativo copie/mL Nessuna Copia Rilevata
Limite di quantificazione (LoQ): 30 copie/mL
log10 copie/mL

HIV 1 RNA resistenza ai farmaci (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	6013C	PCR	16 gg	
--	-------	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 2 mL

Questo esame è da chiedere con HIV RNA quantitativo o dopo aver fornito una carica virale recente.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

H

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
HIV DUO ULTRA Siero	1671	IMMUNOFLUORESCENZA (ELFA)	3 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

E' richiesta provetta dedicata. Dopo l'esecuzione del prelievo attendere la formazione del coagulo, centrifugare e inviare a 2-8 gradi. Oltre le 72H è richiesto il congelamento del campione a -20 gradi.

SYNLAB ITALIA

Compilare MOD075SY per il consenso informato.

VALORI DI RIFERIMENTO

HIV-DUO ULTRA	Negativo
HIV-DUO Anticorpo	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo
HIV-DUO Antigene	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo

HIV FARMACO RESISTENZA

Plasma EDTA congelato

6013D

19 gg

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Sostituzioni Proteasi
Sostituzioni RT
Inserzioni/Delezioni RT
Proteasi : rilevanti
Proteasi : naturali
Proteasi : addizionali
RT : rilevanti
RT : naturali
RT : addizionali

HIV1/HIV2 RIBA (Test di conferma)

Siero

1672

IMMUNOBLOTTING

4 gg

SYNLAB ITALIA

Quantità da prelevare: 1 mL

VALORI DI RIFERIMENTO

HIV1/HIV2 RIBA (Test di conferma)
HIV1 gp 120
HIV1 gp 41
HIV1/HIV2 p 31
HIV1/HIV2 p 24
HIV1/HIV2 p 17
HIV2 gp 105
HIV2 gp 36

HLA MORBO CELIACO DQ2 - DQ8

Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale

60125

REAL TIME PCR

9 gg

SYNLAB ITALIA

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

HLA Tipizzazione classe I (Loci A-B-C)

Sangue Intero EDTA

60115

PCR + IBRIDAZIONE

11 gg

SYNLAB ITALIA

Quantità da prelevare: 5 mL

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

HLA Tipizzazione Classe II (loci DRB1 - DQB1)

Sangue Intero EDTA

60119

PCR + IBRIDAZIONE

11 gg

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

H

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
HLA Tipizzazione completa (loci A-B-C, DRB1-DQB1) Sangue Intero EDTA	60114	PCR E REVERSE DOT BLOT	11 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

HLA-B27 RICERCA MOLECOLARE Sangue Intero EDTA	60121	PCR REAL TIME	9 gg	
---	-------	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

HLA-G : ricerca molecolare della mutazione -725C/G e della inserzione/delezione di 14bp Sangue Intero EDTA	1218	PCR REAL TIME	11 gg	
--	------	---------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Holcus Lanatus (Bambagiona) Siero	6G13	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

HPV DNA (validato clinicamente) screening e tipizzazione di ceppi ad alto rischio oncogeno CIT-SOMA	8443	BD Onclarity	5 gg	
---	------	--------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Qualora si utilizzi un tampone per la raccolta di materiale biologico, si raccomanda l'utilizzo di un tampone a secco o comunque privo di mezzo di coltura (tipo STUART usati per microbiologia colturale)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

HPV DNA RICERCA E TIPIZZAZIONE DI CEPPI AD ALTO E BASSO RISCHIO ONCOGENO CIT-SOMA	1078	REAL TIME PCR E REVERSE DOT BLOT	12 gg	
---	------	----------------------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Qualora si utilizzi un tampone per la raccolta di materiale biologico, si raccomanda l'utilizzo di un tampone a secco o comunque privo di mezzo di coltura (tipo STUART usati per microbiologia colturale)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

H

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
---------	------	--------	-----	---------

HSV-1/HSV-2 DNA (Herpes Simplex virus 1-2)

60070

REAL TIME PCR

8 gg

Liquor congelato, Plasma EDTA congelato, Sangue Intero EDTA, Tampone Anale, Tampone Cavo Orale, Tampone Cervicale, Tampone Linguale, Tampone Ulcera, Tampone Uretrale, Tampone Vaginale, Tampone Vulvare

SYNLAB ITALIA

Il sangue intero in EDTA NON va congelato, bensì conservato a 2-8°C

DISPOSITIVI DA UTILIZZARE PER LA RACCOLTA:

TAMPONE ROSA (cod. SAP 500003323) : Tampone Ulcera, Tampone Vulvare, Tampone Vaginale, Tampone Cavo Orale, Tampone Cervicale, Tampone Linguale, Tampone Anale

TAMPONE ARANCIO (cod. SAP 500003321) : Tampone Uretrale

CONTENITORE STERILE : Liquor

I campioni devono essere inviati al laboratorio nei sacchetti di colore verde

VALORI DI RIFERIMENTO

Herpes Simplex Virus 1-2 DNA (HSV-1/HSV-2) Non rilevato

Tipo :

Limite di sensibilità (LoD) :

Ricerca eseguita su :

I.G.F. BP-3

6420

CHEMILUMINESCENZA

2 gg

Siero congelato

SYNLAB ITALIA

Quantità da prelevare: 1 mL

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Maschi:

0 - 4 anni: 0,70 - 5,20

5 - 7 anni: 1,10 - 6,50

8 - 9 anni: 1,60 - 7,70

10 - 12 anni: 2,10 - 8,90

13 - 20 anni: 2,90 - 10,00

oltre i 21 anni: 2,20 - 7,80

Femmine:

0 - 4 anni: 0,70 - 5,20

5 - 7 anni: 1,10 - 6,50

8 - 9 anni: 1,60 - 7,70

10 - 12 anni: 2,10 - 8,90

13 - 20 anni: 2,90 - 10,00

oltre i 21 anni: 2,20 - 7,80

I73 CHIRONOMIDI (CHIRONOMUS YOSHIMATSUI)

6173

CHEMILUMINESCENZA

3 gg

Siero

SYNLAB ITALIA

Quantità da prelevare: 1 mL

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione

kU/L

Classe

IDENTIFICAZIONE MICOBATTERI

2025

DNA-STRIP (ibridazione con fosfatasi alcalina)

1 gg

Aspirato Gastrico Neutralizzato, Materiale Bioptico (BIOPT), Aspirato Bronchiale (BAS), Espettorato, Lavaggio

Broncoalveolare (BAL), Liquidi Cavità, Liquido Pleurico

Esame non richiesto ma aggiunto in automatico in caso di approfondimenti o positività per l'esame culturale Micobatteri.

Liquido Seminale, Liquor, Pus, Aspirato da Tracheostoma,

Urine Mattino

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Assenza di bacilli
alcol-acido resistenti

Idrossiprolina urine 24 H

632

HPLC

8 gg

Urine 24h

SYNLAB ITALIA

A partire dalle 48 ore precedenti l'inizio e per tutto il tempo di raccolta delle urine evitare i seguenti alimenti: carne, derivati della carne, brodo ed estratti di carne, prodotti contenenti gelatina, pesce, dolci, uova.

Durante questo periodo si consiglia, previa consultazione del medico, di evitare l'assunzione di farmaci.

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h

Maschi:

Adulti : 10,0 - 40,0

Adulti oltre 65 anni : 5,0 - 17,0

Bambini fino ad 1 anno : 55,0 - 220,0

Giovani 1 - 13 anni : 25,0 - 80,0

Femmine:

Adulti : 10,0 - 40,0

Adulti oltre 65 anni : 5,0 - 17,0

Bambini fino ad 1 anno : 55,0 - 220,0

Giovani 1 - 13 anni : 25,0 - 80,0

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgA su liquor (SYNLAB) Liquido Cefalorachidiano (LIQCEFRA)	878	NEFELOMETRIA	8 gg	

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

IgA-1 (SYNLAB) Siero	1147	TURBIDIMETRIA	9 gg	
--------------------------------	------	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

IgA-2 (SYNLAB) Siero	1148	TURBIDIMETRIA	9 gg	
--------------------------------	------	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

IgE PRIST (IgE totali) Siero	665	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg	
--	-----	---------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL

Maschi:
0 - 0 anni: < 15
1 - 5 anni: < 60
6 - 9 anni: < 90
10 - 15 anni: < 200
oltre i 16 anni: < 100

Femmine:
0 - 0 anni: < 15
1 - 5 anni: < 60
6 - 9 anni: < 90
10 - 15 anni: < 200
oltre i 16 anni: < 100

IgG specifiche : ACCIUGA (Engraulis encrasicolus) (INTOLLERANZA) Siero	7F313		9 gg	
--	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : AGLIO (Allium sativum) (INTOLLERANZA) Siero	7F47		9 gg	
--	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : AGNELLO (Ovis aries) (INTOLLERANZA) Siero	7F88		9 gg	
--	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgG specifiche : ALBICOCCA (Prunus armeniaca) (INTOLLERANZA)	7F237		9 gg	

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : ALLORO (FOGLIA)(Laurus nobilis) (INTOLLERANZA)	7F278		9 gg	
--	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : ANACARDO (Anacardium occidentale) (INTOLLERANZA)	7F202		9 gg	
--	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : ANANAS (Ananas comosus) (INTOLLERANZA)	7F210		9 gg	
--	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : ANGURIA (Citullus lanatus) (INTOLLERANZA)	7F329		9 gg	
---	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : ANICE (Pimpinella anisum) (INTOLLERANZA)	7F271		9 gg	
--	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : ARACHIDE (Arachis hypogaea) (INTOLLERANZA)	7F13		9 gg	
--	------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgG specifiche : ARANCIA (Citrus sinensis) (INTOLLERANZA) Siero	7F33		9 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : ARINGA (Clupea harengus) (INTOLLERANZA) Siero	7F205		9 gg	
--	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : ASPARAGO (Asparagus officinalis) (INTOLLERANZA) Siero	7F261		9 gg	
--	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : ASTICE (Homarus americanus) (INTOLLERANZA) Siero	7F80		9 gg	
---	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : AVENA (Avena sativa) (INTOLLERANZA) Siero	7F7		9 gg	
--	-----	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : AVOCADO (Persea americana) (INTOLLERANZA) Siero	7F96	Chemiluminescenza	9 gg	
--	------	-------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : BANANA (Musa spp) (INTOLLERANZA) Siero	7F92	Chemiluminescenza	9 gg	
---	------	-------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgG specifiche : BASILICO (Ocimum basilicum) (INTOLLERANZA)	7F269		9 gg	

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : BIANCO D'UOVO (Albumine) (INTOLLERANZA)	7F1	CHEMILUMINESCENZA	9 gg	
---	-----	-------------------	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : BROCCOLI (Brassica oleracea var capitata) (INTOLLERANZA)	7F260		9 gg	
--	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : CACAO (Theobroma cacao) (INTOLLERANZA)	7F93	Chemiluminescenza	9 gg	
--	------	-------------------	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : CACO (Diospyros kaki) (INTOLLERANZA)	7F301		9 gg	
--	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : CAFFE' (Coffea spp) (INTOLLERANZA)	7F221		9 gg	
--	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : CALAMARO (Loligo spp) (INTOLLERANZA)	7F258		9 gg	
--	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgG specifiche : CANNELLA (Cinnamomum verum) (INTOLLERANZA)	7F220		9 gg	

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : CAPESANTE (Pecten spp) (INTOLLERANZA)	7F338		9 gg	
---	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : CARCIOFO (Cynara scolymus) (INTOLLERANZA)	7F358		9 gg	
---	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : CARNE DI CONIGLIO (Oryctolagus spp) (INTOLLERANZA)	7F213		9 gg	
--	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : CARNE DI MAIALE (Sus scrofa) (INTOLLERANZA)	7F26		9 gg	
---	------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : CARNE DI MANZO (Bos spp) (INTOLLERANZA)	7F27		9 gg	
---	------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : CARNE DI POLLO (Gallus gallus domesticus) (INTOLLERANZA)	7F83		9 gg	
--	------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgG specifiche : CARNE DI TACCHINO (Meleagris gallopavo) (INTOLLERANZA)	7F284		9 gg	

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : CAROTA (Daucus carota) (INTOLLERANZA)	7F31		9 gg	
---	------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : CASEINA (INTOLLERANZA)	7F78		9 gg	
--	------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : CASTAGNA (Castanea spp) (INTOLLERANZA)	7F299		9 gg	
--	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : CAVOLFIORRE (Brassica oleracea var botrytis) (INTOLLERANZA)	7F291		9 gg	
---	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : CAVOLINO BRUXELLES (Brassica oleracea var gemmifera) (INTOLLERANZA)	7F217		9 gg	
---	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : CAVOLO (Brassica oleracea var capitata) (INTOLLERANZA)	7F216		9 gg	
--	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgG specifiche : CECE (Cicer arietinum) (INTOLLERANZA) Siero	7F309		9 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : CETRIOLO (Cucumis sativus) (INTOLLERANZA) Siero	7F244		9 gg	
--	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : CILIEGIA (Prunus avium) (INTOLLERANZA) Siero	7F242		9 gg	
---	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : CIOCCOLATO (Theobroma cacao) (INTOLLERANZA) Siero	7F105		9 gg	
--	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : CIPOLLA (Allium cepa var cepa) (INTOLLERANZA) Siero	7F48		9 gg	
--	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : DATTERO (Phoenix dactylifera) (INTOLLERANZA) Siero	7F289		9 gg	
---	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : FAGIOLINI (Phaseolus vulgaris) (INTOLLERANZA) Siero	7F315		9 gg	
--	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgG specifiche : FAGIOLO (Phaseolus spp) (INTOLLERANZA) Siero	7F15		9 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : FAGIOLO ROSSO (Phaseolus vulgaris) (INTOLLERANZA) Siero	7F287		9 gg	
--	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : FICO (Ficus carica) (INTOLLERANZA) Siero	7F402		9 gg	
---	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : FORMAGGIO DOLCE (INTOLLERANZA) Siero	7F81		9 gg	
---	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : FORMAGGIO FERMENTATO (INTOLLERANZA) Siero	7F82		9 gg	
--	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : FRAGOLA (Fragaria spp) (INTOLLERANZA) Siero	7F44		9 gg	
--	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : FUNGO (Agaricus spp) (INTOLLERANZA) Siero	7F212		9 gg	
--	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgG specifiche : GAMBERO (Penaeus spp) (INTOLLERANZA) Siero	7F24		9 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : GLUTINE (INTOLLERANZA) Siero	7F79		9 gg	
---	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : GRANCHIO (Callinectes sapidus) (INTOLLERANZA) Siero	7F23		9 gg	
--	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : GRANO (Triticum aestivum) (INTOLLERANZA) Siero	7F4		9 gg	
---	-----	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : GRANO SARACENO (Fagopyrum spp) (INTOLLERANZA) Siero	7F11		9 gg	
--	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : GRANOTURCO (Zea mays) (INTOLLERANZA) Siero	7F8		9 gg	
---	-----	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : HALIBUT (Hippoglossus stenolepis) (INTOLLERANZA) Siero	7F303		9 gg	
---	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgG specifiche : KIWI (Actinidia chinensis) (INTOLLERANZA) Siero	7F84		9 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : LAMPONE (Rubus idaeus) (INTOLLERANZA) Siero	7F343		9 gg	
--	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : LATTE VACCINO (INTOLLERANZA) Siero	7F2		9 gg	
---	-----	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : LATTE VACCINO BOLLITO (INTOLLERANZA) Siero	7F231		9 gg	
---	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : LATTOALBUMINA (alfa-lattoalbumina) (INTOLLERANZA) Siero	7F76		9 gg	
--	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : LATTOGLOBULINA (beta-lattoglobulina) (INTOLLERANZA) Siero	7F77		9 gg	
--	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : LATTUGA (Lactuca Sativa) (INTOLLERANZA) Siero	7F215		9 gg	
--	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgG specifiche : LENTICCHIA (Lens culinaris) (INTOLLERANZA)	7F235		9 gg	

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : LIEVITO (Saccharomyces cerevisiae) (INTOLLERANZA)	7F45		9 gg	
---	------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : LIEVITO DI BIRRA (INTOLLERANZA)	7F403		9 gg	
---	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : LIMONE (Citrus limon) (INTOLLERANZA)	7F208		9 gg	
--	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : MALTO D'ORZO (Hordeum vulgare) (INTOLLERANZA)	7F90	Chemiluminescenza	9 gg	
---	------	-------------------	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : MANDARINO (Citrus reticulata) (INTOLLERANZA)	7F302		9 gg	
--	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : MANDORLA (Prunus dulcis) (INTOLLERANZA)	7F20		9 gg	
---	------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgG specifiche : MANGO (Mangifera indica) (INTOLLERANZA) Siero	7F91	Chemiluminescenza	9 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : MELA (Malus spp) (INTOLLERANZA) Siero	7F49		9 gg	
--	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : MELANZANA (Solanum melongena) (INTOLLERANZA) Siero	7F262		9 gg	
---	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : MELONE (Cucumis melo + Citrus lanatus) (INTOLLERANZA) Siero	7F87		9 gg	
--	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : MENTA (Mentha spp) (INTOLLERANZA) Siero	7F405		9 gg	
--	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : MERLUZZO (Gadus morhua) (INTOLLERANZA) Siero	7F3		9 gg	
---	-----	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : MIELE (INTOLLERANZA) Siero	7F247		9 gg	
---	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgG specifiche : MIGLIO ITALIANO (Setaria italica) (INTOLLERANZA)	7F56		9 gg	

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : MIRTILLO (Vaccinium spp) (INTOLLERANZA)	7F288		9 gg	
---	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : MITILE (Mytilus spp) (INTOLLERANZA)	7F37		9 gg	
---	------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : NESPOLA (Eriobotrya japonica) (INTOLLERANZA)	7F401		9 gg	
--	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : NOCCIOLA (Corylus avellana) (INTOLLERANZA)	7F17		9 gg	
--	------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : NOCE (Juglans spp) (INTOLLERANZA)	7F256		9 gg	
---	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : NOCE BRASILIANA (Bertholletia excelsa) (INTOLLERANZA)	7F18		9 gg	
---	------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgG specifiche : NOCE DI COCCO (Cocos nucifera) (INTOLLERANZA)	7F36		9 gg	

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : NOCE DI PECAN (Carya illinoensis) (INTOLLERANZA)	7F201		9 gg	
--	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : Olive verdi (INTOLLERANZA)	7F223	CHEMILUMINESCENZA	9 gg	
--	-------	-------------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : ORIGANO (Origanum vulgare) (INTOLLERANZA)	7F283		9 gg	
---	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : ORZO (Hordeum vulgare) (INTOLLERANZA)	7F6		9 gg	
---	-----	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : OSTRICA (Crassostrea virginica) (INTOLLERANZA)	7F290		9 gg	
--	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : OVOALBUMINA (INTOLLERANZA)	7F232		9 gg	
--	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgG specifiche : OVOMUCOIDE (INTOLLERANZA) Siero	7F233		9 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : PAPAIA (Carica papaya) (INTOLLERANZA) Siero	7F293		9 gg	
--	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : PAPRICA/PEPERONE (Capsicum annum) (INTOLLERANZA) Siero	7F218		9 gg	
---	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : PARMIGIANO (INTOLLERANZA) Siero	7F67		9 gg	
--	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : PATATA (Solanum tuberosum) (INTOLLERANZA) Siero	7F35		9 gg	
--	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : PATATA DOLCE (Ipomoea batatas) (INTOLLERANZA) Siero	7F54		9 gg	
--	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : PEPE DI CAIENNA (Capsicum annum) (INTOLLERANZA) Siero	7F19		9 gg	
--	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgG specifiche : PEPE NERO (Piper nigrum) (INTOLLERANZA)	7F280		9 gg	

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : PEPE VERDE (Capsicum annum) (INTOLLERANZA)	7F263		9 gg	
---	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : PEPERONCINO ROSSO (Capsicum frutescens) (INTOLLERANZA)	7F279		9 gg	
--	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : PERA (Pyrus spp) (INTOLLERANZA)	7F94	Chemiluminescenza	9 gg	
---	------	-------------------	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : PESCA (Prunus persica) (INTOLLERANZA)	7F95	Chemiluminescenza	9 gg	
---	------	-------------------	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : PESCE PERSICO (Sebastes spp) (INTOLLERANZA)	7F65		9 gg	
---	------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : PESCE SPADA (Xiphias gladius) (INTOLLERANZA)	7F312		9 gg	
--	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgG specifiche : PINOLO (Pinus pinea) (INTOLLERANZA) Siero	7F253		9 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : PISELLO (Pisum sativum) (INTOLLERANZA) Siero	7F12		9 gg	
---	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : PISTACCHIO (Pistacia vera) (INTOLLERANZA) Siero	7F203		9 gg	
--	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : PLATESSA (Pleuronectes platessa) (INTOLLERANZA) Siero	7F254		9 gg	
--	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : POLPO (Octopus spp) (INTOLLERANZA) Siero	7F59		9 gg	
---	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : POMODORO (Lycopersicon esculentum) (INTOLLERANZA) Siero	7F25		9 gg	
--	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : POMPELMO (Citrus paradisi) (INTOLLERANZA) Siero	7F209		9 gg	
--	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgG specifiche : PREZZEMOLO (Petroselinum crispum) (INTOLLERANZA)	7F86		9 gg	

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : PRUGNA (Prunus spp) (INTOLLERANZA)	7F255		9 gg	
--	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : RAFANO (Raphanus sativus) (INTOLLERANZA)	7F119		9 gg	
--	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : RISO (Oryza sativa) (INTOLLERANZA)	7F9	Chemiluminescenza	9 gg	
--	-----	-------------------	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : RUCOLA (Eruca vesicaria) (INTOLLERANZA)	7F406		9 gg	
---	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : SALMONE (Salmo salar) (INTOLLERANZA)	7F41		9 gg	
--	------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : SALVIA (Salvia officinalis) (INTOLLERANZA)	7F344		9 gg	
--	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgG specifiche : SARDINA (Sardinops spp) (INTOLLERANZA) Siero	7F61		9 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : SEDANO (Apium graveolens) (INTOLLERANZA) Siero	7F85		9 gg	
--	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : SEGALE (Secale cereale) (INTOLLERANZA) Siero	7F5		9 gg	
---	-----	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : SEME DI FINOCCHIO (Foeniculum vulgare) (INTOLLERANZA) Siero	7F219		9 gg	
--	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : SEME DI SESAMO (Sesamum orientale) (INTOLLERANZA) Siero	7F10		9 gg	
--	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : SENAPE (Brassica spp) (INTOLLERANZA) Siero	7F89		9 gg	
---	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG specifiche : SGOMBRO (Scomber scombrus) (INTOLLERANZA) Siero	7F206		9 gg	
--	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgG specifiche : SOGLIOLA (Parophrys vetulus) (INTOLLERANZA)	7F337		9 gg	

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : SOIA SEME (Glycine max) (INTOLLERANZA)	7F14		9 gg	
--	------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : SPINACIO (Spinacia oleracea) (INTOLLERANZA)	7F214		9 gg	
---	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : THE (Camellia sinensis) (INTOLLERANZA)	7F222		9 gg	
--	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : TIMO (Thymus vulgaris) (INTOLLERANZA)	7F273		9 gg	
---	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : TONNO (Thunnus spp) (INTOLLERANZA)	7F40		9 gg	
--	------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : TROTA IRIDEA (Oncorhynchus mikiss) (INTOLLERANZA)	7F204		9 gg	
---	-------	--	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgG specifiche : TUORLO D'UOVO (INTOLLERANZA) Siero	7F75		9 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : UVA (Vitis spp) (INTOLLERANZA) Siero	7F259		9 gg	
---	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : VANIGLIA (Vanilla planifolia) (INTOLLERANZA) Siero	7F234		9 gg	
---	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : VONGOLA (Mercenaria mercenaria) (INTOLLERANZA) Siero	7F207		9 gg	
---	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : ZENZERO (Zingiber officinale) (INTOLLERANZA) Siero	7F270		9 gg	
---	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : ZUCCA (Cucurbita maxima) (INTOLLERANZA) Siero	7F225		9 gg	
--	-------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

IgG specifiche : ZUCCHERO DI CANNA (Saccharum officinarum) (INTOLLERANZA) Siero	7F21		9 gg	
---	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L

Grado :

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
IgG specifiche: Uovo (Albumine e Tuorlo) (INTOLLERANZA) Siero	7F245	CHEMILUMINESCENZA	9 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione : mg/L
Grado :

IgG SU LIQUOR (SYNLAB) Liquor	11025	NEFELOMETRIA	8 gg	
---	-------	--------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

IgG Urine (SYNLAB) Urine	575	NEFELOMETRIA	16 gg	
------------------------------------	-----	--------------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

IgM su liquor (SYNLAB) Liquido Cefalorachidiano (LIQCELS)	8780	NEFELOMETRIA	8 gg	
---	------	--------------	------	--

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

IgM-HBcAb Siero	609	CMIA	2 gg	
---------------------------	-----	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Reattivo

IgM-HBcAb per reflex Siero	2297	CMIA	2 gg	
--------------------------------------	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Non Reattivo

ILEO - DIGERENTE BIOPSIA ENDOSCOPICA (SING.) CIT-COLON	IN10319	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	16 gg	
--	---------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Immunocomplessi Circolanti Siero	1313	IMMUNOENZIMATICO	5 gg	
--	------	------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µgEq/mL
< 4.4 Negativo
4.4 - 10.8 Dubbio
≥ 10.8 Positivo

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Immunofissazione Sierica Siero	1000	IMMUNOELETTROFORESI	7 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Immunofissazione urinaria Urine 24h	1001	IMMUNOELETTROFORESI	7 gg	
---	-------------	----------------------------	-------------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Immunoglobuline A Siero	1101	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg	
-----------------------------------	-------------	----------------------------	-------------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

Maschi:
0 - 0 anni: 8 - 91
1 - 11 anni: 21 - 291
12 - 60 anni: 63 - 484
oltre i 61 anni: 101 - 645

Femmine:
0 - 0 anni: 8 - 91
1 - 11 anni: 21 - 282
12 - 60 anni: 65 - 421
oltre i 61 anni: 69 - 517

Immunoglobuline G Siero	1102	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg	
-----------------------------------	-------------	----------------------------	-------------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

Maschi:
0 - 0 anni: 205 - 948
1 - 1 anni: 475 - 1.210
2 - 80 anni: 540 - 1.822
oltre i 81 anni: 700 - 1.600

Femmine:
0 - 0 anni: 203 - 934
1 - 1 anni: 483 - 1.226
2 - 80 anni: 552 - 1.631
oltre i 81 anni: 700 - 1.600

Immunoglobuline IgD Siero	1100	NEFELOMETRIA	3 gg	
-------------------------------------	-------------	---------------------	-------------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L

Fino a 0,15

Immunoglobuline IgG 1 Siero	6341	IMMUNONEFELOMETRIA	3 gg	
---------------------------------------	-------------	---------------------------	-------------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L

Maschi:
0 - 1 anni: 1,520 - 7,920
2 - 3 anni: 2,650 - 9,380
4 - 6 anni: 3,620 - 12,280
7 - 12 anni: 3,770 - 11,310
13 - 18 anni: 3,620 - 10,270
oltre i 19 anni: 4,050 - 10,110

Femmine:
0 - 1 anni: 1,520 - 7,920
2 - 3 anni: 2,650 - 9,380
4 - 6 anni: 3,620 - 12,280
7 - 12 anni: 3,770 - 11,310
13 - 18 anni: 3,620 - 10,270
oltre i 19 anni: 4,050 - 10,110

Immunoglobuline IgG 2 Siero	6342	IMMUNONEFELOMETRIA	3 gg	
---------------------------------------	-------------	---------------------------	-------------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L

Maschi:
0 - 1 anni: 0,261 - 1,357
2 - 3 anni: 0,275 - 2,158
4 - 6 anni: 0,571 - 2,904
7 - 12 anni: 0,678 - 3,882
13 - 18 anni: 0,811 - 4,719
oltre i 19 anni: 1,690 - 7,860

Femmine:
0 - 1 anni: 0,261 - 1,357
2 - 3 anni: 0,275 - 2,158
4 - 6 anni: 0,571 - 2,904
7 - 12 anni: 0,678 - 3,882
13 - 18 anni: 0,811 - 4,719
oltre i 19 anni: 1,690 - 7,860

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Immunoglobuline IgG 3	6343	IMMUNONEFELOMETRIA	3 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L	Maschi:	Femmine:
	0 - 1 anni: 0,090 - 0,920	0 - 1 anni: 0,090 - 0,920
	2 - 3 anni: 0,090 - 0,860	2 - 3 anni: 0,090 - 0,860
	4 - 6 anni: 0,130 - 0,790	4 - 6 anni: 0,130 - 0,790
	7 - 12 anni: 0,160 - 0,890	7 - 12 anni: 0,160 - 0,890
	13 - 18 anni: 0,140 - 1,060	13 - 18 anni: 0,140 - 1,060
	oltre i 19 anni: 0,110 - 0,850	oltre i 19 anni: 0,110 - 0,850

Immunoglobuline IgG 4	6344	IMMUNONEFELOMETRIA	3 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L	Maschi:	Femmine:
	0 - 1 anni: 0,004 - 0,464	0 - 1 anni: 0,004 - 0,464
	2 - 3 anni: 0,009 - 0,742	2 - 3 anni: 0,009 - 0,742
	4 - 6 anni: 0,013 - 1,446	4 - 6 anni: 0,013 - 1,446
	7 - 12 anni: 0,012 - 1,669	7 - 12 anni: 0,012 - 1,669
	13 - 18 anni: 0,049 - 1,985	13 - 18 anni: 0,049 - 1,985
	oltre i 19 anni: 0,030 - 2,010	oltre i 19 anni: 0,030 - 2,010

Immunoglobuline M	1103	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg	
Siero				

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL	Maschi:	Femmine:
	0 - 0 anni: 17 - 143	0 - 0 anni: 17 - 150
	1 - 12 anni: 41 - 183	1 - 12 anni: 47 - 240
	oltre i 13 anni: 22 - 240	oltre i 13 anni: 33 - 293

Indice Homa	1039	CALCOLO DERIVATO	1 gg	
Siero				

VALORI DI RIFERIMENTO

0,23 - 2,50

Indice PHI (indice di salute della prostata)	1172	CHEMILUMINESCENZA	5 gg	
Siero congelato				

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

PSA	µg/L	
PSA free	µg/L	
-2proPSA	ng/L	
Indice PHI	%	< 21 Basso rischio 21 - 40 Medio rischio > 40 Alto rischio

Influenza A IgG (SYNLAB)	1241	EIA	16 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Indice	< 0,8 Negativo 0,8 - 1,1 Indeterminato ≥ 1,1 Positivo
--------	---

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
INIBINA B Siero congelato	7989	IMMUNOENZIMATICO	16 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL
- Osservare un digiuno 8-12 ore prima del prelievo
- evitare di sostenere sforzi fisici nelle 12 ore prima del prelievo
- non fumare nel periodo di tempo intercorrente tra il risveglio e l'effettuazione del prelievo
- non assumere alcool nelle 12 ore precedenti il prelievo

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L

Maschi:
< 15 giorni : 68,0 - 373,0
15 giorni - 6 mesi : 42,0 - 516,0
6 mesi - 7 anni : 24,0 - 300,0
8 - 30 anni : 47,0 - 383,0
31 - 72 anni : 10,0 - 357,0

Femmine:
1 giorno - 12 anni : < 182,0
13 - 41 anni (con ciclo regolare) : 7,9 - 223,0
42 - 51 anni (con ciclo regolare) : < 107,0
14 - 47 anni (con oligomenorrea) : 6,0 - 359,0
14 - 44 anni (con amenorrea) : 10,0 - 226,0
51 - 76 anni : < 11,0

Instabilità Microsatellitare CIT-SOMA	8474	PCR E ANALISI DI FRAMMENTI	11 gg	
---	------	----------------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE MATERIALE INCLUSO IN PARAFFINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Insulemia Pre Prandiale Siero	1919	CMIA	2 gg	
---	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

μU/mL

Insulina Bovina Siero	6C71	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Insulina Porcina Siero	6C70	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
----------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Insulina Post Prandiale Siero	4108	CMIA	2 gg	
---	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

μU/mL

Insulina Umana Siero	6C73	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Insulinemia Siero	652	CMIA	1 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

μU/mL < 25

Interferone 1 ABS (SYNLAB) Siero	844	EIDA (Enzyme Immuno Dot Assay)	11 gg	
--	-----	--------------------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

Interferone gamma (SYNLAB) Siero congelato	8441	ELISA	16 gg	
--	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 2 mL

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/L < 900

INTERLEUCHINA 10 (IL10) (SYNLAB) Siero congelato	1684	CLIA	16 gg	
--	------	------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L < 5,9

Interleuchina 2 recettori Siero	6304	ELISA	4 gg	
---	------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L 19,1 - 68,5

Interleuchina 28-B: ricerca polimorfismo rs12979860 Sangue Intero EDTA	1098	PCR REAL TIME	11 gg	
--	------	---------------	-------	--

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Interleuchina 28-B: ricerca polimorfismo rs8099917 Sangue Intero EDTA	1276	PCR REAL TIME	11 gg	
---	------	---------------	-------	--

Quantità da prelevare: 3 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Interleukin 2 (IL2) (SYNLAB) Siero congelato	429	FCM	22 gg	
--	-----	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L < 5,0

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Interleukin 6 (IL6) Siero congelato	430	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L < 4,4

Intolleranza al nichel (ricerca di mutazioni su TNF e FLG) Tampone Cavo Orale	8479	MASS-ARRAY	11 gg	
---	------	------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Intolleranza Genetica a Lattosio Tampone a secco orale	G0001	PCR REAL TIME	9 gg	
--	-------	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 TAMPONE

Inviare il consenso sanitario specifico per il test INF_GEN01 Synlab

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Intolleranza genetica a lattosio : ricerca della variazione - 13910C>T Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	8461	REAL TIME PCR	9 gg	
--	------	---------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Intolleranze Alimentari EasyFood 120 Siero	1926	MICROARRAY	7 gg	
--	------	------------	------	--

Accettare singolarmente, senza altre analisi nella medesima richiesta

SYNLAB ITALIA

ALIMENTI ANALIZZATI : latte vaccino, latte pecora, latte capra, lievito di birra, lievito chimico, farro, orzo, grano, mais, segale, grano saraceno, tapioca, quinoa, amaranto, coniglio, maiale, agnello, tacchino, pollo, uova, mix caccia (fagiano, quaglia, cinghiale, capriolo), manzo, trota, salmone, tonno, mix crostacei (gamberi, canocchie, scampi, aragosta), mix molluschi (vongole, vongole veraci, cozze, capasanta, ostriche, cannolicchi), mix cefalopodi (seppia, calamaro, polpo), merluzzo, sogliola, mix pesce azzurro (suro, aringa, alice, sgombro), zucchina, melanzana, peperoni, cicoria, lattuga, carota, asparago, mix cavoli (broccoli, cavoletti di bruxelles, cavolo nero, cavolfiore, cav cappuccio, verza), spinaci, pomodori, funghi, patata, sedano, cipolla, finocchio, pesca, uva, kiwi, arancia, mix agrumi (cedro, mandarino, pompelmo, mapo), limone, albicocca, pera, mix frutti di bosco (fragole, ribes, lamponi, mirtilli, mora), prugna, mela, melone, ciliegia, mix tropicali (ananas, mango, papaia, avocado), ceci, lenticchie, fagioli, piselli, soja, mix aromi (origano, basilico, salvia, rosmarino), mix spezie (pepe, chiodi di garofano, noce moscata, cannella), anacardo, arachide, mandorla, noce, oliva, sesamo, girasole, cacao, caffè, the, zucchero bianco, mix di zuccheri (fruttosio, zucchero di canna, succo d'acero, malto d'orzo), miele.

VALORI DI RIFERIMENTO

I valori di risposta anticorpale sono espressi in %

NEGATIVO 0 - 25
LIEVE 26 - 50
MODERATO 51 - 75
ELEVATO 76 - 100

VADEMECUM GENERALE

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Intolleranze Alimentari EasyFood 184	1927	MICROARRAY	7 gg	

Siero

Accettare singolarmente, senza altre analisi nella medesima richiesta

SYNLAB ITALIA

ALIMENTI ANALIZZATI : acciuga, aglio, agnello, albicocca, alloro, anacardi, ananas, anatra, anice, anguilla, arachidi, arancia, aringa, asiago, asparago, astice, avena, avocado, baccalà, banana, basilico, bietola, branzino, broccoli, cacao, cachi, caffè, calamaro, camomilla, cannella, capperi, carciofo, carota, castagna, cavallo, cavolfiore, cavoletti di bruxelles, ceci, cetriolo, chiodi di garofano, cicoria, ciliegia, cinghiale, cipolla, cocco, cocomero, coda di rospo, coniglio, coriandolo, cozza, crescione, cumino, dattero, emmental, erba cipollina, fagiano, fagioli, fagiolini, fagiolo, farro, fava, fico, fico d'india, finocchio, formaggio fuso, fragola, funghi champignon, funghi porcini, gambero, gorgonzola, grana padano, granchio, grano duro, grano saraceno, grano tenero, halibut, indivia, kamut, kiwi, lampone, latte di capra, latte di mucca, latte di pecora, lattuga, lenticchie, lepre, lievito di birra, limone, liquirizia, lupini, luppolo, maggiorana, maiale, mais, malto d'orzo, mandarino, mandorla, mango, manzo, mela, melanzana, melograno, melone, menta, merluzzo, miele, mirtillo, mora, mozzarella, mozzarella di bufala, nocciola, noce, noce del brasile, noce, moscata, oca, oliva, orata, origano, ortica, orzo, papaia, paprica, parmigiano reggiano, patata, pecorino, peperoncino, pepe nero, peperoni, pera, pesca, pinoli, piselli, pistacchio, platessa, pollo, polpo, pomodoro, pompelmo, porro, prezzemolo, prugna, quaglia, rafano, rapa, ravanella, ribes, ricotta, riso, rombo, rosmarino, rucola, salmone, salvia, sardine, scarola, sedano, segale, seme di girasole, seme di lino, seme di zucca, senape, seppia, sesamo, sgombero, sogliola, soia, spinaci, tacchino, tapioca, the, the verde, timo, tonno, trota, uovo, uva bianca, uva rossa, verze, vaniglia, vitello, vongole, zenzero, zucca, zucchina.

VALORI DI RIFERIMENTO

I valori di risposta anticorpale sono espressi in %

NEGATIVO 0 - 25
LIEVE 26 - 50
MODERATO 51 - 75
ELEVATO 76 - 100

Intolleranze Alimentari EasyFood 60	1924	MICROARRAY	7 gg	
-------------------------------------	------	------------	------	--

Siero

Accettare singolarmente, senza altre analisi nella medesima richiesta.

SYNLAB ITALIA

ALIMENTI ANALIZZATI : latte vaccino, latte pecora, latte capra, lievito di birra, lievito chimico, farro, orzo, grano, mais, riso, coniglio, maiale, agnello, tacchino, pollo, uova, manzo, salmone, tonno, mix cefalopodi non distinto (seppia, calamaro, polpo), merluzzo, sogliola, gamberi, zucchina, melanzana, peperoni, cicoria, lattuga, carota, asparago, spinaci, pomodori, funghi, patata, sedano, cipolla, cavolfiore, pesca, uva, kiwi, arancia, limone, albicocca, pera, prugna, banana, mela, fragole, fagioli, piselli, soia, arachide, mandorla, noce, oliva, cacao, caffè, the, zucchero bianco, miele.

VALORI DI RIFERIMENTO

I valori di risposta anticorpale sono espressi in %

NEGATIVO 0 - 25
LIEVE 26 - 50
MODERATO 51 - 75
ELEVATO 76 - 100

Intolleranze Alimentari EasyFood 92	1925	MICROARRAY	7 gg	
-------------------------------------	------	------------	------	--

Siero

Accettare singolarmente, senza altre analisi nella medesima richiesta

SYNLAB ITALIA

ALIMENTI ANALIZZATI : acciuga, aglio, albicocca, ananas, anatra, arachidi, arancia, asparago, banana, basilico, bietola, branzino, cacao, caffè, camomilla, carciofo, carota, castagna, cavallo,, cavolfiore, ceci, cetriolo, ciliegia, cipolla, coniglio, fagiolini, fagiolo, farro, fava, fico, finocchio, fragola, funghi porcini, gambero, grano duro, grano tenero, kiwi, latte di capra, latte di mucca, latte di pecora, lattuga, lenticchie, lievito di birra, limone, maiale, mais, malto d'orzo, mandarino, mandorla, manzo, mela, melanzana, melone, merluzzo, miele, mirtillo, noce, oliva, orata, origano, orzo, parmigiano reggiano, patata, pepe nero, peperoni, pera, pesca, pinoli, piselli, pollo, pomodoro, prezzemolo, prugna, riso, rosmarino, salmone, sedano, seppia, sogliola, soia, spinaci, tacchino, the, the verde, tonno, trota.

VALORI DI RIFERIMENTO

I valori di risposta anticorpale sono espressi in %

NEGATIVO 0 - 25
LIEVE 26 - 50
MODERATO 51 - 75
ELEVATO 76 - 100

Iodio Sierico Totale (SYNLAB)	79976	ICPMS	13 gg	
-------------------------------	-------	-------	-------	--

Siero - Plasma

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 46,0 - 70,0

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Iodio Urinario 24 h (SYNLAB) Urine 24h	79972	ICP-MS	11 gg	

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Iodio su g di creatinina	µg/g creatinina	< 20	Deficienza severa
		20 - 49	Deficienza moderata
		50 - 99	Deficienza lieve
		100 - 199	Assunzione sufficiente
		200 - 299	Assunzione elevata
		> 300	Assunzione eccessiva
Creatinina	g/L	0,57 - 2,95	
Iodio Urinario	µg/L		

IPOFISECTOMIA TOTALE O PARZIALE

CIT-IPOFISI	IN10072	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
-------------	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Isocianato HDI Siero	6K77	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

Isocianato MDI Siero	6K76	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

Isocianato TDI Siero	6K75	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

Isoenzimi CK (Creatinchinasi) Siero	1485	ELETTROFORESI SU GEL AGAROSIO	10 gg	
---	------	----------------------------------	-------	--

L' ESAME E' COMPOSTO DA DUE ANALISI (1485 + 1486) CHE NECESSITANO DI DUE PROVETTE SEPARATE (BLU + ROSSA) CON DUE CODICI ETICHETTA DIFFERENTI.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

CK (Creatinchinasi)	U/L	Maschi: < 171,0	Femmine: < 145,0
CK-MM	%	97,0 - 100,0	
CK-MB	%	0 - 3%	
		se l'attività CK è compresa tra 15 e 500 U/L	
		0 - 4%	
		se l'attività di CK è superiore a 500 U/L	
CK-BB	%	0%	

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Isoenzimi della Fosfatasi Alcalina Siero	258	ENZIMATICO COLORIMETRICO IFCC 37 °C	5 gg	

Per il corretto invio di questa analisi è necessario produrre due etichette con relativo codice campione e due codici analisi distinti (258 + 2829)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Fosfatasi Alcalina totale	U/L	Maschi: 0 - 0 anni: 140 - 500 1 - 1 anni: 140 - 400 2 - 4 anni: 140 - 365 5 - 11 anni: 140 - 400 12 - 12 anni: 140 - 465 13 - 13 anni: 110 - 465 14 - 14 anni: 90 - 400 15 - 15 anni: 65 - 275 16 - 16 anni: 50 - 200 17 - 17 anni: 50 - 150 18 - 18 anni: 43 - 135 19 - 19 anni: 43 - 120 oltre i 20 anni: 43 - 115	Femmine: 0 - 0 anni: 140 - 500 1 - 1 anni: 140 - 400 2 - 4 anni: 140 - 365 5 - 8 anni: 140 - 400 9 - 10 anni: 140 - 430 11 - 11 anni: 140 - 400 12 - 12 anni: 100 - 350 13 - 13 anni: 75 - 300 14 - 14 anni: 55 - 200 15 - 15 anni: 40 - 150 16 - 17 anni: 40 - 110 oltre i 18 anni: 33 - 98
Isoenzima Epatico	%	Donna : 18 - 72 Uomo : 15 - 71 Bambini : 1 - 31	
Isoenzima Osseo	%	Donna : 20 - 74 Uomo : 23 - 75 Bambini : 62 - 100	
Isoenzima Biliare	%	Donna : 1 - 14 Uomo : 1 - 9 Bambini : 1 - 7	
Isoenzima Intestinale (1,12,13)	%	< 14	

Isoenzimi L.D.H. Siero	2580	ELETTROFORESI	8 gg	
----------------------------------	------	---------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

LDH Totale	U/L	Adulti: < 248 2 - 12 anni 110 - 295
L.D.H.-1	%	16,1 - 31,5
L.D.H.-2	%	29,2 - 41,6
L.D.H.-3	%	17,0 - 26,2
L.D.H.-4	%	5,9 - 12,3
L.D.H.-5	%	3,2 - 17,3

ISOLEUCINA Plasmatica (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	880	LC/MS	15 gg	
--	-----	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

ISOLEUCINA Urinaria (SYNLAB) Urine Congelate	8800	LC-MS	15 gg	
--	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Isoniazide (INH) (SYNLAB) Siero congelato	881	HPLC	8 gg	
---	-----	------	------	--

Quantità da prelevare: 2 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) a temperatura ambiente, separare e congelare

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L	Basale 0,2 - 1,0 Picco 3,0 - 10,0
------	--------------------------------------

VADEMECUM GENERALE

I

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ISTAMINA Plasmatica Plasma EDTA congelato Quantità da prelevare: 1 mL Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.	6659	ELISA	16 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
ng/mL < 1,0				
ISTIDINA Plasmatica (SYNLAB) Plasma EDTA congelato Quantità da prelevare: 1 mL Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.	824	LC/MS	15 gg	SYNLAB GERMANIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
ISTIDINA Urine (Histidine) (SYNLAB) Urine Congelate Quantità da prelevare: 10 mL	8240	LC-MS	15 gg	SYNLAB GERMANIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
IUNIC Sport Endurance Check DNA Kit Saliva per Test Genetici, Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE	8770	MASS ARRAY	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
IUNIC Sport Power Check DNA Kit Saliva per Test Genetici, Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista).	8772	MASS ARRAY	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Iva Ciliata (Iva) Siero Quantità da prelevare: 1 mL	6W16	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione kU/L Classe				
JAK2: identificazione quantitativa di V617F Sangue Intero EDTA Quantità da prelevare: 2 CAMPIONI Utilizzare il sacchetto fucsia per l'invio dei campioni	8454	REAL TIME PCR	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
JCV/BKV DNA (Polioma virus JC e BK) Plasma EDTA congelato, Urine Congelate Quantità da prelevare: Liquor 1 mL - Urine 10 mL	60022	REAL TIME PCR	9 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Poliomavirus JC e BK DNA (JCV/BKV) Non rilevato Limite di sensibilità (LoD) : Ricerca eseguita su :				

VADEMECUM GENERALE

J

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Jug r1 Juglans regia Siero	5F441	ImmunoCAP	5 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Jug r3 Juglans regia Siero	5F442	ImmunoCAP	5 gg	
--------------------------------------	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Juglans Californica (Noce di California) Siero	6T10	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Juniperus Sabinoides (Ginepro) Siero	6T6	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Ketamina Matrice Pilifera Valenza Clinica Capelli	1564CL	LC-MS-MS	13 gg	
---	--------	----------	-------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KETAMINA Negativo
Ketamina ng/mg Fino a 0,2
Norketamina ng/mg Fino a 0,2

Ketamina matrice pilifera -valenza medico legale Capelli	1564	LC-MS-MS	13 gg	
--	------	----------	-------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KETAMINA Negativo
Ketamina ng/mg Fino a 0,2
Norketamina ng/mg Fino a 0,2

Ketamina matrice Urinaria - Valenza Clinica Urine	1558CL	IMMUNOCHEMICO	3 gg	
---	--------	---------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ketamina (Test di screening) ng/mL Negativo

VADEMECUM GENERALE

K

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ketamina test di conferma -matrice urinaria	1561	LC-MS-MS	8 gg	
Urine				

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO				
Ketamina	ng/mL	< 50		
Norketamina	ng/mL	< 50		

Ketamina test di screening su urine-valenza medico legale	1558	IMMUNOCHEMICO	3 gg	
Urine				

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO				
KETAMINA (Test di screening)	ng/mL	Negativo		

Kiwi	6F84	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione	kU/L			
Classe				

Kochiascoparia (Granata)	6W17	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione	kU/L			
Classe				

L.A.C. (Lupus anticoagulant)	1353	COAGULATIVO	5 gg	
Plasma Citrato congelato				

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB ITALIA

- Prelevare il sangue intero e dispensare in provetta da 2,7 mL con fondo a U contenente Na Citrato 0,109 M (1 parte di Na Citrato + 9 parti di sangue intero)
- Mescolare il sangue con l'anticoagulante per capovolgimento 10 volte della provetta; modificata rispetto a quanto riportato sul MOD che hai tu in seguito ad una e-mail volante di Ottomano di lunedì 16.
- Centrifugare immediatamente a 3000 giri per 10'
- Separare il plasma in una provetta VUOTA, priva di qualsiasi anticoagulante/conservante/attivatore
- Centrifugare a 3000 giri per 10'
- Separare nuovamente e congelare (-20° C) in provetta VUOTA una aliquota di plasma di almeno 2 mL nel modulo che ti hanno girato è riportato 1 mL che temo sia un refuso, a giudicare dal contenuto della circolare.
- La doppia centrifugazione serve a prevenire la contaminazione da piastrine che potrebbe interferire con il dosaggio del LAC
- Consegnare al personale addetto al trasporto, indicando la tipologia di prelievo

VALORI DI RIFERIMENTO				
dRVVT (Russel Viper Venom) - Test di Screening	Ratio	≤ 1,25		
dRVVT (Russel Viper Venom) - Test di Mixing	Ratio	≤ 1,25		
dRVVT (Russel Viper Venom) - Test di Conferma	Ratio	0,70 – 1,25 LAC Forte > 1,25 vedi RN		
dRVVT (Russel Viper Venom) - RN	Ratio Normalizzat	0,70 – 1,25 LAC Debole > 1,25 LAC Positivo		
dRVVT (Russel Viper Venom) - Esito test				
aPTT (att. Silice) - Test di Screening	Ratio	≤ 1,25		
aPTT (att. Silice) - Test di Mixing	Ratio	≤ 1,25		
aPTT (att. Silice) - Test di Conferma	Ratio	0,70 – 1,25 LAC Forte > 1,25 vedi RN		
aPTT (att. Silice) - RN	Ratio Normalizzat	0,70 – 1,25 LAC Debole > 1,25 LAC Positivo		
aPTT (att. Silice) - Esito test				
CONCLUSIONE :				

VADEMECUM GENERALE

L

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
LABBRO - RESEZIONE CUNEIFORME LABBRO CIT-LABBRO	IN10073	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

LABBRO - RESEZIONE QUADRANGOLARE LABBRO CIT-LABBRO	IN10074	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

LACOSAMIDE Siero congelato	2235	LC-MS-MS	6 gg	
--------------------------------------	------	----------	------	--

Quantità da prelevare: 500 µL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 1,0 – 10,0
Per soggetti in terapia

Lamotrigina Siero congelato	680	LC-MS	6 gg	
---------------------------------------	-----	-------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L Soggetti in terapia :
3,0 - 15,0

Lampone Siero	6F343	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

LARINGE - BIOPSIA LARINGEA (SING.) CIT-LARINGE	IN10075	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	18 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

LARINGE - CORDECTOMIA BILATERALE CIT-LARINGE	IN10077	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 20_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

LARINGE - CORDECTOMIA MONOLATERALE CIT-LARINGE	IN10078	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 22_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VADEMECUM GENERALE

L

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
LARINGE - EPIGLOTTIDECTOMIA CIT-LARINGE	IN10080	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 21_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

LARINGE - LARINGECTOMIA CIT-LARINGE	IN10081	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 18_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

LARINGE - LARINGECTOMIA SOVRAGLOTTIDA CIT-LARINGE	IN10082	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 21_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

LARINGE - LARINGECTOMIA TOTALE CIT-LARINGE	IN10083	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 18_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

LARINGE - LARINGECTOMIA TOTALE CON SVUOTAMENTO DEL COLLO CIT-LARINGE	IN10084	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 18_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

LARINGE - POLIPECTOMIA O NODULECTOMIA LARINGE CIT-LARINGE	IN10085	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Lattato Plasma EDTA, Plasma Litio Eparina	305	ENZIMATICO COLORIMETRICO	3 gg	
---	-----	-----------------------------	------	--

In provetta chiusa, centrifugare immediatamente a 3000 giri per 10 minuti in centrifuga refrigerata (4°C) , separare il plasma surnatante e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL 4,5 - 19,8

Lattato su liquor (SYNLAB) Liquor congelato	8984	SPETTROFOTOMETRIA	8 gg	
---	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 3 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mmoli/L 1,20 - 2,10

VADEMECUM GENERALE

L

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Latte Siero	6F2	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Latte bollito Siero	6F231	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Latte di capra Siero	6F409	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Lattice di gomma Siero	6K82	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
----------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Lattoferrina ABS (SYNLAB) Siero	1125	EIA	11 gg	
---	------	-----	-------	--

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

RATIO < 1,0

Lattoferrina Fecale Feci	1124	ELISA	16 gg	
------------------------------------	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 5 GRAMMI

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/mL < 7,24

Lattuga Siero	6F215	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

LDH (NAC attivato) Siero	302	LATTATO-PIRUVATO IFCC	1 gg	
------------------------------------	-----	-----------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L < 220

VADEMECUM GENERALE

L

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
LDL OSSIDATE Siero congelato	6216	ELISA	5 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L ≤ 133,2

LDL-Colesterolo Siero	326	ENZIMATICO	1 gg	
---------------------------------	-----	------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL Valore desiderabile < 116

Limiti decisionali/target terapeutici:
Per soggetti a rischio moderato < 100
Per soggetti a rischio alto < 70
Per soggetti a rischio molto alto < 55

Leishmania DNA (SYNLAB) Sangue Intero EDTA	1129	PCR	13 gg	
--	------	-----	-------	--

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

Leishmania Infantum IgG Siero	7981	ELISA	16 gg	
---	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

U.A. < 9,00 Negativo
9,00 - 11,00 Indeterminato
> 11,00 Positivo

Lenticchia Siero	6F235	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
----------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L

Concentrazione
Classe

Lepidoglyphus Destructor Siero	6D71	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L

Concentrazione
Classe

LEPTINA Siero	1163	IMMUNOENZIMATICO	16 gg	
-------------------------	------	------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Adulti normopeso (BMI 18 - 25)
Uomini : <1,0 - 9,6
Donne : 2,4 - 28,0

Adulti sovrappeso (BMI 25 - 30)
Uomini : 1,3 - 28,9
Donne : 5,9 - 58,3

VADEMECUM GENERALE

L

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Leptospira DNA (SYNLAB) Sangue Intero EDTA	8761	PCR	10 gg	

Quantità da prelevare: 2 mL
Raccogliere il campione prima della somministrazione della terapia, tra il 1° e il 15° giorno di malattia

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

LEUCINA Plasmatica (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	8801	LC/MS	15 gg	
---	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

LEUCINA Urinaria (SYNLAB) Urine Congelate	8802	LC-MS	15 gg	
---	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

LEVETIRACETAM (KEPPRA) Siero congelato	6208	LC-MS	6 gg	
--	------	-------	------	--

La provetta di siero non deve avere gel separatore.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti in terapia :
20,0 – 40,0

Levodopa (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	1128	LC-MS	11 gg	
---	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 minuti) a temperatura ambiente, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Levodopa	mg/L	0,90 - 2,00 Tossicità : > 5,00
Ossimetil-dopa	mg/L	0,70 - 10,90

LH Siero	616	CMIA	1 gg	
--------------------	-----	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mUI/mL

Maschi:
Adulti : 0,5 - 12,0

Femmine:
Fase follicolare : 1,8 - 11,7
Picco metà ciclo : 7,5 - 89,0
Fase luteinica : 0,5 - 14,0
Postmenopausa senza HRT : 5,1 - 61,9

Lievi identificazione biochimica Piastra Seminata_	B552		5-6 gg	
--	------	--	--------	--

Lievi in campioni biologici diversi esame colturale	B5091		5-6 gg	
--	-------	--	--------	--

Espettorato, Saliva, Tampone Anale, Tampone Cavo Orale,
Tampone Cutaneo, Tampone Faringeo, Tampone Gengivale,
Tampone Linguale, Tampone Vaginale, Tampone Vulvare,
Unghe, Urine, Materiale Vario

VADEMECUM GENERALE

L

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Lievito Acido Naturale Siero	6F45	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Lievito di birra Siero	6F403	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
----------------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Ligustrum Vulgare (Ligustro) Siero	6T210	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Limone Siero	6F208	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Linfociti T Regolatori (CD4+ CD25+ CD127dim) Sangue Intero EDTA	0625	CITOFLUORIMETRICO	9 gg	
---	------	-------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

%

Linfociti totali Sangue Intero EDTA	0605	CITOFLUORIMETRICO	7 gg	
---	------	-------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Valore percentuale % 20,0 - 40,0
Conta assoluta/microlitro /μL 1.210 - 3.410

LINFONODO - AGOBIOPSIA LINFONODALE (SING.) CIT-LINFONODO	IN10086	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

LINFONODO - BIOPSIA LINFONODO SUPERFICIALE CIT-LINFONODO	IN10089	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

L

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
---------	------	--------	-----	---------

LINFONODO - LINFOADENECTOMIA REGIONALE DI LINFONODI MULTIPLI

CIT-LINFONODO

IN10090

INCLUSIONE IN
PARAFFINA
COLORAZIONE CON EE

22 gg

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 10_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

LINFONODO - LINFOADENECTOMIA REGIONALE MULTIPLI DA STAZIONI

CIT-LINFONODO

IN10091

INCLUSIONE IN
PARAFFINA
COLORAZIONE CON EE

23 gg

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 11_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

LINFONODO - LINFONODO SENTINELLA ASPORTAZIONE

CIT-LINFONODO

IN10088

INCLUSIONE IN
PARAFFINA
COLORAZIONE CON EE

22 gg

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 1_AP6

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

LINFONODO - SVUOTAMENTO LINFONODALE ALLARGATO CAPO, COLLO

CIT-LINFONODO

IN10092

INCLUSIONE IN
PARAFFINA
COLORAZIONE CON EE

23 gg

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 2_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Lipasi

Siero

319

CINETICO
COLORIMETRICO

1 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L 8 - 78

Lipoproteina a

Siero

3253

IMMUNOTURBIDIMETRIA

1 gg

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL < 30,0

Lipoproteine Profilo (Lipoprint) (SYNLAB)

Siero

1453

ELETTROFORESI SU
AGAROSIO

11 gg

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

LISINA Plasmatica (SYNLAB)

Plasma EDTA congelato

821

LC/MS

15 gg

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

L

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
LISINA Urinaria (SYNLAB) Urine Congelate	8210	LC-MS	15 gg	

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Lisozima Sierico (SYNLAB) Siero congelato	1132	TURBIDIMETRIA	16 gg	
---	------	---------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 3,0 - 12,0

LISTERIA MONOCYTOGENES TIPO 1 IgG Siero	4567	FIA	16 gg	
---	------	-----	-------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

LISTERIA MONOCYTOGENES TIPO 1 IgG

Titolo < 1/100 Negativo

LISTERIA MONOCYTOGENES TIPO 4B IgG Siero	4528	FIA	16 gg	
--	------	-----	-------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

LISTERIA MONOCYTOGENES TIPO 4b IgG

Titolo < 1/100 Negativo

Litiemia Siero	247	COLORIMETRICO	1 gg	
--------------------------	-----	---------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/L 0,6 - 1,2
Concentrazione terapeutica
> 1,5 Possibili effetti tossici

Lolium Perenne (Logliarello) Siero	6G5	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Lorazepam sierico (SYNLAB) Siero	1120	LC-MS	6 gg	
--	------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 30,0 - 100,0

Lorazepam Urinario (SYNLAB) Urine	1121	GC-MS	6 gg	
---	------	-------	------	--

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VADEMECUM GENERALE

L

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Lormetazepam (SYNLAB) Siero	1122	LC-MS	6 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 2,0 - 10,0

Lp PLAC2 (PLAC) TEST (SYNLAB) Siero	1439	SPETTROFOTOMETRIA	16 gg	
---	------	-------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

Centrifugare entro 60 minuti dal prelievo

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/L Maschi: < 640 Femmine: < 507

Macroprolattina Siero	6179	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Prolattina basale µg/L Maschi: 3,5 - 19,4 Femmine: 5,2 - 26,5
Prolattina dopo precipitazione µg/L
Recupero % > 60 Macroprolattina assente
< 60 Macroprolattina presente

Magnesiemia (Mg) Siero	246	ENZIMATICO	1 gg	
------------------------------------	-----	------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL 1,6 - 2,6

Magnesio Eritrocitario (SYNLAB) Sangue Intero EDTA	539	SPETTROFOTOMETRIA	8 gg	
--	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 2 mL

Da accettare contestualmente al codice 2149 SIERO PER MAGNESIO ERITROCITARIO

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/L 1,85 - 2,63

Magnesio urinario (Mg) Urine 24h	256	ENZIMATICO	2 gg	
--	-----	------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h 72,90 - 121,50

MAGNESIO URINARIO SU CAMPIONE ESTEMPORANEO Urine	2244	ENZIMATICO	1 gg	
--	------	------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/mg creatinina Maschi:
0 - 0 anni: 0,10 - 0,48
1 - 1 anni: 0,09 - 0,37
2 - 2 anni: 0,07 - 0,25
3 - 6 anni: 0,05 - 0,20
7 - 17 anni: 0,05 - 0,15
oltre i 18 anni: 0,05 - 0,15
Femmine:
0 - 0 anni: 0,10 - 0,48
1 - 1 anni: 0,09 - 0,37
2 - 2 anni: 0,07 - 0,25
3 - 6 anni: 0,05 - 0,20
7 - 17 anni: 0,05 - 0,15
oltre i 18 anni: 0,05 - 0,15

VADEMECUM GENERALE

M

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Mais (Granoturco) Siero	6F8	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Malaleuca Leucadendron Siero	6T21	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

MALATTIA DI ALZHEIMER : ricerca di mutazioni nei geni PSEN1, PSEN2 Sangue Intero EDTA	2087	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	
---	------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

MALATTIA DI PARKINSON : ricerca di mutazioni in pannello di geni Sangue Intero EDTA	2088	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	
---	------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Malto Siero	6F90	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-----------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

MAMMELLA – AGOBIOPSIA MAMMARIA CIT-MAMMELLA	IN10100	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

MAMMELLA - CAPSULA PROTESICA CIT-MAMMELLA	IN10321	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

Codice SIAPEC : 13_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

M

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
MAMMELLA - MASTECTECTOMIA SEMPLICE O TOTALE (CON O SENZA LINF.) CIT-MAMMELLA Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 12_AP5	IN10101	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
MAMMELLA - MASTECTOMIA RADICALE CIT-MAMMELLA Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 12_AP5	IN10102	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
MAMMELLA - MASTECTOMIA SOTTOCUTANEA SEMPLICE CIT-MAMMELLA Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 13_AP5	IN10103	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
MAMMELLA - NODULECTOMIA MAMMELLA CIT-MAMMELLA Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA	IN10104	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
MAMMELLA - QUADRANTECTOMIA O RESEZIONE PARZIALE CIT-MAMMELLA Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 13_AP5	IN10105	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
MAMMELLA - RESEZIONE PARZIALE IN CORSO DI MASTOPLASTICA CIT-MAMMELLA Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 13_AP5	IN10106	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
MANDARINO (CITRUS RETICULATA) Siero Quantità da prelevare: 1 mL	6F302	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione kU/L				
Classe				
Mandorla Siero Quantità da prelevare: 1 mL	6F20	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione kU/L				
Classe				

VADEMECUM GENERALE

M

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
MANGANESE Sierico Siero	718	ASSORBIMENTO ATOMICO (AA)	8 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

Utilizzare provetta specifica Metal Free (cod. SAP 600068373).

Subito dopo il prelievo la provetta non deve essere aperta, travasata o aliquotata, ma inviata tale quale al laboratorio

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Popolazione generale:
< 1,40

Manganese Urine Fine Turno Urine F.T.	7181	ICP-MS	8 gg	
---	------	--------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

• Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.

• Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Popolazione generale :
< 15

Manganese Urine Inizio Turno Urine I.T.	7180	ICP-MS	8 gg	
---	------	--------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

• Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.

• Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Popolazione generale :
< 15

Mango Siero	6F91	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-----------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione

kU/L

Classe

MDMA (Ecstasy) matrice urinaria - Valenza clinica Urine	6338CL	IMMUNOENZIMATICO	3 gg	
---	--------	------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

MDMA (Ecstasy) - Test di screening

ng/mL

Fino a 500
Negativo

MEDIASTINO - BIOPSIA MEDIASTINO CIT-MEDIASTINO	IN10107	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

Codice SIAPEC : 17_AP3

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

MEDIASTINO - ESCISSIONE NEOFORMAZIONE MEDIASTINO CIT-MEDIASTINO	IN10108	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

Codice SIAPEC : 15_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VADEMECUM GENERALE

M

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Mela Siero	6F49	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Melanzana Siero	6F262	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

MELATONINA (SYNLAB) Siero congelato	545	LC-MS	16 gg	
---	-----	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L
Giorno : < 30,0
Notte : 30,0 – 150,0

Melone Siero	6F87	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Menta Siero	6F405	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-----------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

MERCURIO Urine Fine Turno Urine F.T.	7253	ASSORBIMENTO ATOMICO	21 gg	
--	------	----------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 791 CREATININA URINE FINE TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

MERCURIO Urine Fine Turno µg/g creatinina Soggetti professionalmente esposti:
< 20 (i.t.)
Creatinina Urine Fine Turno g/L 0,30 - 3,00

MERCURIO Urine Inizio Turno Urine I.T.	7252	ASSORBIMENTO ATOMICO	21 gg	
--	------	----------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

MERCURIO Urine Inizio Turno µg/g creatinina Soggetti professionalmente esposti:
< 20 (i.t.)
Creatinina Urine Inizio Turno g/L 0,30 - 3,00

VADEMECUM GENERALE



ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Merluzzo	6F3	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

MESQUITE(PROSOPIS JUIFLORA)	6T20	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
------------------------------------	------	-------------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Metabolic Check DNA	8716	MASS-ARRAY	11 gg	
----------------------------	------	------------	-------	--

Kit Saliva per Test Genetici, Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale

Quantità da prelevare: 2 campioni
LINEA IUNIC

SYNLAB ITALIA

Compilare il modulo di consenso esami genetici SCHEACC034 + consenso informato (INF_GEN20 Synlab o consenso dello specialista)

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Metaboliti reattivi dell'ossigeno (Radicali liberi)	639	COLORIMETRICO	2 gg	
--	-----	---------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

U CARR

Valutazione ossidativa
250 - 300: normalità
301 - 320: valore 'soglia'
321 - 340: lieve stress
341 - 400: discreto stress
401 - 500: forte stress
> 500: fortissimo stress

Metadone matrice pilifera	1085	LC-MS-MS	13 gg	
----------------------------------	------	----------	-------	--

Capelli

Quantità da prelevare: Diametro ciocca 1 cm diviso in 2 aliquote
Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione.
Eseguire il prelievo secondo procedura ed inviare i campioni con catena di custodia.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

METADONE

Metadone ng/mg Fino a 0,2
EDDP ng/mg Fino a 0,2

Metadone matrice pilifera - Valenza clinica	1085CL	LC-MS-MS	13 gg	
--	--------	----------	-------	--

Capelli

Quantità da prelevare: Diametro ciocca 1 cm diviso in 2 aliquote
Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione.
Eseguire il prelievo secondo procedura ed inviare i campioni con catena di custodia.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

METADONE

Metadone ng/mg Fino a 0,2
EDDP ng/mg Fino a 0,2

VADEMECUM GENERALE

M

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Metadone matrice urinaria Urine	6671	IMMUNOENZIMATICO	3 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

METADONE (Test di screening) ng/mL Fino a 300
Negativo

Metadone matrice urinaria - Valenza clinica Urine	6671CL	IMMUNOENZIMATICO	3 gg	
---	--------	------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

METADONE (Test di screening) ng/mL Fino a 300
Negativo

Metadone test di conferma su urine Urine	6354	LC-MS-MS	8 gg	
--	------	----------	------	--

Quantità da prelevare: 20 mL aliquote B e C
Se il campione è inviato dopo le 24 ore dalla raccolta congelare a - 20 °C.
Il sabato è da escludere dal conteggio degli 8 giorni di refertazione

SYNLAB ITALIA

Per l'esecuzione di questo esame è necessario inviare i campioni con catena di custodia. Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

VALORI DI RIFERIMENTO

METADONE ng/mL Fino a 100
Negativo
EDDP ng/mL Fino a 100
Negativo

Metaemoglobina Sangue Intero Eparinato	721	CO-Ossimetria	8 gg	
--	-----	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

% Hb Totale Soggetti professionalmente esposti:
< 5

METANEFRIE PLASMATICHE LIBERE Plasma EDTA congelato	2348	LC-MS	8 gg	
---	------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Metanefrina libera ng/L 22,9 - 49,2
Normetanefrina libera ng/L 55,0 - 102,8

Metanefrine Urine 24H Urine 24h Acidificate	785	HPLC	7 gg	
---	-----	------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL
La raccolta del campione di urine delle 24 h prevede l'acidificazione delle urine stesse. L'acidificazione viene effettuata versando nel recipiente, prima di iniziare la raccolta, circa 5 ml di HCl 5 M per ogni litro di urina (4 cucchiaini di acido muriatico del commercio). Prelevare un'aliquota di circa 10 ml di urina delle 24 h acidificata con l'indicazione della diuresi totale ed inviare in apposito contenitore di trasporto.
Risposta dopo 24 h.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/24h Fino a 320

METANOLO Urine Fine Turno Urine F.T.	7531	GC	8 gg	
--	------	----	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL
• Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
• Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L Soggetti professionalmente esposti:
< 15 (f.t.)

VADEMECUM GENERALE

M

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
METANOLO Urine Inizio Turno Urine I.T.	753	GC	8 gg	

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti professionalmente esposti:
< 15 (f.t.)

Methotrexate Siero (SYNLAB) Siero	376	EIA	6 gg	
---	-----	-----	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

Il prelievo non può essere effettuato in provette con gel separatore in quanto quest'ultimo può modificare il dosaggio del farmaco nel siero e quindi il risultato dell'esame effettuato con queste provette non è attendibile.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µmol/L

Range Terapeutico

Alto dosaggio
Fino a 10,000 dopo 24h
Fino a 1,000 dopo 48h
Fino a 0,100 dopo 72h

Basso dosaggio
≤ 0,02 dopo 15 giorni

METILETILCHETONE (MEK) Urine Fine Turno Urine F.T.	7360	GC	8 gg	
--	------	----	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti professionalmente esposti:
< 2 (f.t.)

METILETILCHETONE (MEK) Urine Inizio Turno Urine I.T.	736	GC	8 gg	
--	-----	----	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti professionalmente esposti:
< 2 (f.t.)

METILISOBUTILCHETONE (MIBK) Urine Fine Turno Urine F.T.	7580	GC	8 gg	
---	------	----	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti professionalmente esposti :
< 1 (f.t.)

METILISOBUTILCHETONE (MIBK) Urine Inizio Turno Urine I.T.	758	GC	8 gg	
---	-----	----	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti professionalmente esposti :
< 1 (f.t.)

VADEMECUM GENERALE

M

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
METIONINA Plasmatica (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	823	LC/MS	15 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Miceti da coltura identificazione microscopica (oss.morfol.) Piastra Seminata#	B5900	MICROSCOPIA	22 gg	
--	-------	-------------	-------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

IDENTIFICAZIONE MICETI

Miceti in campioni biologici diversi esame colturale Capelli, Cuoio capelluto, Espettorato, Materiale Ungueale, Squame Cutanee, Materiale Vario	B509	COLTURALE	22 gg	
---	------	-----------	-------	--

MODALITA' DI RACCOLTA:

Peli e capelli: - eseguire il prelievo con pinzette, privilegiando quelli mozzi e situati perifericamente alla lesione - raccogliere in contenitore sterile.
Unghie: - detergere l'area infetta con acqua distillata sterile o alcool al 70% per rimuovere occasionali contaminanti superficiali. - raschiare a fondo fino ad ottenere materiale furfuraceo, avendo cura di eliminare le scaglie superficiali. È possibile anche prelevare frammenti di unghia utilizzando forbici sterili. - raccogliere in contenitore sterile.
Cute glabra: - detergere l'area infetta con acqua distillata sterile o alcool al 70% per rimuovere occasionali contaminanti superficiali; - prelevare per scalfittura squame preferenzialmente ai bordi della lesione utilizzando lamette o bisturi sterili; - far cadere le squame in un contenitore sterile o raccoglierle con un tampone (non inserire il tampone nel gel di trasporto, inviare dunque "a secco"). In caso di difficoltà nella scalfittura è possibile eseguire un tampone a secco

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE

Identificazione - 1 -

Miceti in campioni biologici diversi esame colturale II Cam Capelli, Cuoio capelluto, Espettorato, Materiale Ungueale, Squame Cutanee, Materiale Vario	B5092	COLTURALE	22 gg	
--	-------	-----------	-------	--

MODALITA' DI RACCOLTA:

Peli e capelli: - eseguire il prelievo con pinzette, privilegiando quelli mozzi e situati perifericamente alla lesione - raccogliere in contenitore sterile.
Unghie: - detergere l'area infetta con acqua distillata sterile o alcool al 70% per rimuovere occasionali contaminanti superficiali. - raschiare a fondo fino ad ottenere materiale furfuraceo, avendo cura di eliminare le scaglie superficiali. È possibile anche prelevare frammenti di unghia utilizzando forbici sterili. - raccogliere in contenitore sterile.
Cute glabra: - detergere l'area infetta con acqua distillata sterile o alcool al 70% per rimuovere occasionali contaminanti superficiali; - prelevare per scalfittura squame preferenzialmente ai bordi della lesione utilizzando lamette o bisturi sterili; - far cadere le squame in un contenitore sterile o raccoglierle con un tampone (non inserire il tampone nel gel di trasporto, inviare dunque "a secco"). In caso di difficoltà nella scalfittura è possibile eseguire un tampone a secco

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE

Identificazione - 1 -

Miceti in campioni biologici diversi esame colturale III Cam Capelli, Cuoio capelluto, Espettorato, Materiale Ungueale, Squame Cutanee, Materiale Vario	B5093	COLTURALE	22 gg	
---	-------	-----------	-------	--

MODALITA' DI RACCOLTA:

Peli e capelli: - eseguire il prelievo con pinzette, privilegiando quelli mozzi e situati perifericamente alla lesione - raccogliere in contenitore sterile.
Unghie: - detergere l'area infetta con acqua distillata sterile o alcool al 70% per rimuovere occasionali contaminanti superficiali. - raschiare a fondo fino ad ottenere materiale furfuraceo, avendo cura di eliminare le scaglie superficiali. È possibile anche prelevare frammenti di unghia utilizzando forbici sterili. - raccogliere in contenitore sterile.
Cute glabra: - detergere l'area infetta con acqua distillata sterile o alcool al 70% per rimuovere occasionali contaminanti superficiali; - prelevare per scalfittura squame preferenzialmente ai bordi della lesione utilizzando lamette o bisturi sterili; - far cadere le squame in un contenitore sterile o raccoglierle con un tampone (non inserire il tampone nel gel di trasporto, inviare dunque "a secco"). In caso di difficoltà nella scalfittura è possibile eseguire un tampone a secco

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE

Identificazione

VADEMECUM GENERALE

M

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
---------	------	--------	-----	---------

Miceti in campioni biologici diversi esame colturale IV Cam

B5094

COLTURALE

22 gg

Capelli, Cuoio capelluto, Espettorato, Materiale Ungueale, Squame Cutanee, Materiale Vario

MODALITA' DI RACCOLTA:

Peli e capelli: - eseguire il prelievo con pinzette, privilegiando quelli mozzi e situati perifericamente alla lesione - raccogliere in contenitore sterile.
Unghie: - detergere l'area infetta con acqua distillata sterile o alcool al 70% per rimuovere occasionali contaminanti superficiali. - raschiare a fondo fino ad ottenere materiale furfuraceo, avendo cura di eliminare le scaglie superficiali. È possibile anche prelevare frammenti di unghia utilizzando forbici sterili. - raccogliere in contenitore sterile.
Cute glabra: - detergere l'area infetta con acqua distillata sterile o alcool al 70% per rimuovere occasionali contaminanti superficiali; - prelevare per scalfittura squame preferenzialmente ai bordi della lesione utilizzando lamette o bisturi sterili; - far cadere le squame in un contenitore sterile o raccoglierle con un tampone (non inserire il tampone nel gel di trasporto, inviare dunque "a secco"). In caso di difficoltà nella scalfittura è possibile eseguire un tampone a secco

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

COLTURALE

Identificazione - 1 -

Miceti in campioni biologici diversi ricerca microscopica

B5101

MICROSCOPICO

19 gg

Cuoio capelluto, Materiale Ungueale, Squame Cutanee, Materiale Vario

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Micobatteri in campioni biologici ricerca microscop

B510

MICROSCOPIA

3 gg

Materiale Bioptico (BIOPT), Aspirato Bronchiale (BAS), Espettorato, Lavaggio Broncoalveolare (BAL), Liquidi Cavitari, Liquido Pleurico, Liquido Seminale, Materiale Vario MAT, Pus, Urine Mattino

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Micobatteri in campioni biologici ricerca microscopica II Campione

B5102

MICROSCOPIA

3 gg

Materiale Bioptico (BIOPT), Aspirato Bronchiale (BAS), Espettorato, Lavaggio Broncoalveolare (BAL), Liquidi Cavitari, Liquido Pleurico, Liquido Seminale, Materiale Vario MAT, Pus, Urine Mattino

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Micobatteri in campioni biologici ricerca microscopica III Campione

B5103

MICROSCOPIA

3 gg

Materiale Bioptico (BIOPT), Aspirato Bronchiale (BAS), Espettorato, Lavaggio Broncoalveolare (BAL), Liquidi Cavitari, Liquido Pleurico, Liquido Seminale, Pus, Urine Mattino, Materiale Vario

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Micoplasma urogenitale antibiogramma

MICOPL

1 gg

<su campione esistente>

VADEMECUM GENERALE

M

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
---------	------	--------	-----	---------

Micoplasmi urogenitali esame colturale

B584

5-6 gg

Liquido Seminale, Tampone Cervicale, Tampone Uretrale, Tampone Vaginale, Urine

Utilizzare kit specifico (cod. SAP 500026044)

URINE

Raccogliere le urine del primo getto in un contenitore sterile; miscelare l'urina roteando il contenitore, dispensare 500 microlitri (1/2 millimetro) nel brodo di trasporto ed inviare in laboratorio, mantenendo il campione al buio e a temperatura 2-8°C

LIQUIDO SEMINALE

Raccogliere il campione in un contenitore sterile e inoculare il brodo di trasporto con 25 microlitri; inviare in laboratorio mantenendo il campione al buio e a temperatura 2-8°C.

TAMPONI

Tagliare la punta del tampone e inserirla nel brodino. E' importante durante il prelievo raccogliere il maggior numero di cellule possibile.

Per tutti gli altri materiali utilizzare sempre l'apposito terreno liquido di coltura (cod. SAP 500026044)

Micoplasmi urogenitali esame colturale II campione

B5842

5-6 gg

Liquido Seminale, Tampone Cervicale, Tampone Uretrale, Tampone Vaginale, Urine

Utilizzare kit specifico (cod. SAP 500026044)

URINE

Raccogliere le urine del primo getto in un contenitore sterile; miscelare l'urina roteando il contenitore, dispensare 500 microlitri (1/2 millimetro) nel brodo di trasporto ed inviare in laboratorio, mantenendo il campione al buio e a temperatura 2-8°C

LIQUIDO SEMINALE

Raccogliere il campione in un contenitore sterile e inoculare il brodo di trasporto con 25 microlitri; inviare in laboratorio mantenendo il campione al buio e a temperatura 2-8°C.

TAMPONI

Tagliare la punta del tampone e inserirla nel brodino. E' importante durante il prelievo raccogliere il maggior numero di cellule possibile.

Per tutti gli altri materiali utilizzare sempre l'apposito terreno liquido di coltura (cod. SAP 500026044)

Micoplasmi urogenitali esame colturale III campione

B5843

5-6 gg

Liquido Seminale, Tampone Cervicale, Tampone Uretrale, Tampone Vaginale, Urine

Utilizzare kit specifico (cod. SAP 500026044)

URINE

Raccogliere le urine del primo getto in un contenitore sterile; miscelare l'urina roteando il contenitore, dispensare 500 microlitri (1/2 millimetro) nel brodo di trasporto ed inviare in laboratorio, mantenendo il campione al buio e a temperatura 2-8°C

LIQUIDO SEMINALE

Raccogliere il campione in un contenitore sterile e inoculare il brodo di trasporto con 25 microlitri; inviare in laboratorio mantenendo il campione al buio e a temperatura 2-8°C.

TAMPONI

Tagliare la punta del tampone e inserirla nel brodino. E' importante durante il prelievo raccogliere il maggior numero di cellule possibile.

Per tutti gli altri materiali utilizzare sempre l'apposito terreno liquido di coltura (cod. SAP 500026044)

MICOPLASMI UROGENITALI RICERCA MOLECOLARE

2351

REAL TIME PCR

6 gg

Liquido Seminale, Tampone Cervicale, Tampone Uretrale, Tampone Vaginale, Urine I mitto

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

*Si ricorda che la positività per M.hominis, U.urealyticum e U.parvum (riscontrabili nell'apparato genitale anche come commensali) deve essere valutata nel quadro clinico complessivo

SYNLAB ITALIA

DISPOSITIVI DA UTILIZZARE PER LA RACCOLTA :

CONTENITORE STERILE : Liquido Seminale

TAMPONE ROSA (cod. SAP 500003323) : Tampone Cervicale, Tampone Vaginale

TAMPONE ARANCIO (cod. SAP 500003321) : Tampone Uretrale

PROVETTA TAPPO NOCCIOLA (cod. SAP 500022210) : Urine I Mitto

I campioni devono essere inviati al laboratorio nei sacchetti di colore verde

VALORI DI RIFERIMENTO

Mycoplasma genitalium DNA

Non rilevato

Mycoplasma hominis DNA

Non applicabile*

Ureaplasma parvum DNA

Non applicabile*

Ureaplasma urealyticum DNA

Non applicabile*

VADEMECUM GENERALE

M

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Microalbuminuria Urine	259	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg	

Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/g creat
< 9 Normale
10 - 29 Pre-microalbuminuria
30 - 300 Microalbuminuria
> 300 Macroalbuminuria

Microalbuminuria 24 ORE Urine 24h	2590	IMMUNOTURBIDIMETRIA	2 gg	
---	------	---------------------	------	--

Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h
< 30 Normoalbuminuria
30 - 299 Microalbuminuria
≥ 300 Macroalbuminuria

Microalbuminuria II Campione Urine	2592	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg	
--	------	---------------------	------	--

Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/g creat.
< 9 Normale
10 - 29 Pre-microalbuminuria
30 - 300 Microalbuminuria
> 300 Macroalbuminuria

Microalbuminuria III Campione Urine	2593	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg	
---	------	---------------------	------	--

Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/g creat.
< 9 Normale
10 - 29 Pre-microalbuminuria
30 - 300 Microalbuminuria
> 300 Macroalbuminuria

MIDOLLO OSSEO - MIDOLLO OSSEO APPOSIZIONE/STRISCI CIT-M.OSSEO	IN10096	COLORAZIONE CON EE E MGG	13 gg	
---	---------	-----------------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE (STRISCIO ALL' ARIA)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

MIDOLLO OSSEO - BIOPSIA OSTEOMIDOLLARE CIT-M.OSSEO	IN10095	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Miele Siero	6F247	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-----------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe kU/L

VADEMECUM GENERALE

M

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
MIGLIO VERDE (SETARIA ITALICA)	6F56	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

MILZA - SPLENECTOMIA	IN10110	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
-----------------------------	---------	--	-------	--

CIT-MILZA

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 11_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

MILZA - SPLENECTOMIA PER PATOLOGIA TRAUMATICA	IN10111	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
--	---------	--	-------	--

CIT-MILZA

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 19_AP2

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Mioglobina	119	NEFELOMETRIA	3 gg	
-------------------	-----	--------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 72,0

Mioglobina Urinaria	1190	NEFELOMETRIA	2 gg	
----------------------------	------	--------------	------	--

Urine Mattino

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 6,0

Mirtillo nero	6F288	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
----------------------	-------	-------------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Mitile	6F37	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---------------	------	-------------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Mix Alberi 2 TP1	6TP1	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------	------	-------------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

VADEMECUM GENERALE

M

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Mix Alberi 3 TP4 Siero	6TP4	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
Mix Alimenti (per l'infanzia) FP5 Siero	6FP5	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
Mix Alimenti 2 - FP25 Siero	6FP25	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
Mix Alimenti 3 - FP13 Siero	6FP13	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
Mix Alimenti mare - FP2 Siero	6FP2	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
Mix Ambientale IP3 Siero	6IP3	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
Mix CARNI FP73 Siero	6FP73	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
Mix Erbe WP1 Siero	6WP1	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				

VADEMECUM GENERALE

M

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Mix Farinacei (FP3) Siero	6FP3	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
Mix frutta - FP15 Siero	6FP15	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
Mix FRUTTA ESOTICA FP50 Siero	6FP50	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
Mix Graminacee GP1 Siero	6GP1	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
Mix Muffe MP1 Siero	6MP1	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
Mix Noci - FP1 Siero	6FP1	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
MOCA (4,4 Metilen BIS (2-cloroanilina) urine Fine Turno (SYNLAB) Urine F.T.	1579	GC/MS	21 gg	
Quantità da prelevare: 10 mL				SYNLAB GERMANIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
		µg/L	< 1,0	
MOCA (4,4 Metilen BIS (2-cloroanilina) urine Inizio Turno (SYNLAB) Urine I.T.	1578	GC/MS	21 gg	
Quantità da prelevare: 10 mL				SYNLAB GERMANIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
		µg/L	< 1,0	

VADEMECUM GENERALE

M

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Molibdeno Urinario Fine Turno (SYNLAB) Urine F.T.	2103	ICP-MS	16 gg	

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 15,0 - 76,0

Molibdeno Urinario Inizio Turno (SYNLAB) Urine I.T.	2102	ICP-MS	16 gg	
---	------	--------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 15,0 - 76,0

Mono Test (MNI) Siero	107	EMOAGGLUTINAZIONE SU VETRINO	2-3 gg	
---------------------------------	-----	------------------------------	--------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

Monoidrossicarbazepina Siero congelato	6740	LC-MS	6 gg	
--	------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Non si esegue il sabato

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L Soggetti in terapia :
10,0 - 35,0

MONOMETILFORMAMMIDE (MMF) Urine Fine Turno Urine F.T.	7270	GC	21 gg	
---	------	----	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L Soggetti professionalmente esposti: < 15 (f.t.)

MONOMETILFORMAMMIDE (MMF) Urine Inizio Turno Urine I.T.	727	GC	21 gg	
---	-----	----	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L Soggetti professionalmente esposti: < 15 (f.t.)

MORFOLOGIA DEGLI SPERMATOZOI Liquido Seminale	2316	MANUALE	11 gg	
---	------	---------	-------	--

Quantità da prelevare: 0,7 mL

Eseguire la colorazione Papanicolaou di 2 vetrini e spedirli in busta verde routine.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Forme tipiche	%	≥ 4
Anomalia della testa	%	
Anomalie collo/tratto intermedio	%	
Anomalie coda	%	
Goccia citoplasmatica	%	
Indice di teratozoospermia		< 1,6

VADEMECUM GENERALE

M

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Morus Alba (Gelso bianco) Siero	6T70	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
MPL W515L/K: analisi qualitativa Sangue Intero EDTA	8724	PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO	11 gg	
Quantità da prelevare: 2 provette sangue EDTA Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
MT complex DNA (Mycobacterium tuberculosis complex) Aspirato Gastrico Neutralizzato, Materiale Biopatico, Aspirato Bronchiale (BAS), Espettorato, Lavaggio Broncoalveolare (BAL), Liquidi Cavitari, Urine Congelate Quantità da prelevare: Urine 10 mL, Espettorato 1 mL	60020	REAL TIME PCR	9 gg	
				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Mycobacterium tuberculosis complex DNA (MT)		Non rilevato		
Ricerca eseguita su :				
Mucor Racemosus Siero	6M4	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
Musk Abs Siero	6235	IMMUNOENZIMATICO	21 gg	
Quantità da prelevare: 0,5 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
		U/mL < 0,40		
Mutazioni Geni IGHV Sangue Intero EDTA, Sangue Midollare in EDTA o CITRATO	8721	PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO	11 gg	
Quantità da prelevare: 3 SANGUE INTERO EDTA o 1 SANGUE MIDOLLARE Utilizzare il sacchetto fucsia per l'invio dei campioni				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
MUXF3 Bromeline Siero	50214	ImmunoCAP	5 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
		KUA/L < 0,10		
MY BIOME - Analisi molecolare del microbiota intestinale Feci	8579		41 gg	
Attenzione: le feci vanno raccolte con KIT specifico (cod. SAP 550000682 - KIT MyBIOME) da ordinare presso magazzino Synlab				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				

VADEMECUM GENERALE

M

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Mycoplasma Genitalium DNA Liquido Seminale, Tampone Cervicale, Tampone Uretrale, Tampone Vaginale, Urine I mitto Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE (urine 10 mL) DISPOSITIVI DA UTILIZZARE PER LA RACCOLTA : CONTENITORE STERILE : Liquido Seminale TAMPONE ROSA (cod. SAP 500003323) : Tampone Cervicale, Tampone Vaginale TAMPONE ARANCIONE (cod. SAP 500003321) : Tampone Uretrale PROVETTA TAPPO NOCCIOLA (cod. SAP 500022210) : Urine I Mitto	1663	PCR REAL TIME	6 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO Mycoplasma genitalium DNA Non rilevato Ricerca eseguita su :				
Mycoplasma hominis DNA Liquido Seminale, Tampone Cervicale, Tampone Uretrale, Tampone Vaginale, Urine I mitto Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE DISPOSITIVI DA UTILIZZARE PER LA RACCOLTA : CONTENITORE STERILE : Liquido Seminale TAMPONE ROSA (cod. SAP 500003323) : Tampone Cervicale, Tampone Vaginale TAMPONE ARANCIONE (cod. SAP 500003321) : Tampone Uretrale PROVETTA TAPPO BEIGE (cod. SAP 500022210) : Urine I Mitto	8243	REAL TIME PCR	6 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO Mycoplasma hominis DNA Non Applicabile (*) Ricerca eseguita su:				
MYCOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI IgG e IgM Siero Quantità da prelevare: 1 mL Se IgM risultano negative, aggiunta analisi 2294 Micoplasma Pneumoniae Anticorpi IgA reflex	2288	CHEMILUMINESCENZA	6 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO Anticorpi Anti-Micoplasma Pneumoniae IgG kAU/L < 10 Negativo ≥ 10 Positivo Anticorpi Anti-Micoplasma Pneumoniae IgM kAU/L < 10 Negativo ≥ 10 Positivo				
myEDIT-B: Diagnosi differenziale tra disturbo bipolare e depressione unipolare Blood RNA Tube Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Utilizzare apposito dispositivo ordinabile presso il magazzino (cod. SAP 600045113). Seguire le specifiche istruzioni di raccolta. Il campione deve arrivare al laboratorio obbligatoriamente entro 48h e non può essere prelevato o inviato nei giorni prefestivi.	8836	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	25 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
myPGx - Pannello farmacogenetica completo Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE (5 mL) Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario specifico per il test (INF_GEN018 Synlab oppure consenso dello specialista)	8707	MASS-ARRAY	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
N- METILACETAMMIDE Urine Fine Turno Urine F.T. Quantità da prelevare: 10 mL ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 791 CREATININA URINE FINE TURNO	1258	GC	21 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO N-METILACETAMMIDE Urine Fine Turno mg/g creatinina Soggetti professionalmente esposti: < 30 (f.t. / f.s.l.) Creatinina Urine Fine Turno g/L 0,30 - 3,00				

VADEMECUM GENERALE

N

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
NASO - BIOPSIA CAVITA' NASALI (SING.) CIT-NASO	IN10112	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	18 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
NASO - ETMOIDECTOMIA CIT-NASO	IN10113	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 26_AP2				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
NASO - POLIPECTOMIA NASALE (SING.) CIT-NASO	IN10114	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	18 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
NASO - RESEZIONE DEI TURBINATI CIT-NASO	IN10115	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
NASO - RESEZIONE DEL SETTO NASALE CIT-NASO	IN10116	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 16_AP4				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
NASO - RESEZIONE ETMOIDO-MASCELLARE CIT-NASO	IN10117	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPECE : 16_AP4				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
NASO - RESEZIONE ETMOIDO-MASCELLARE CON EXENTERATIO ORBITAE CIT-NASO	IN10118	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 1_AP5				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
NASO - RESEZIONE MASCELLARE CON SVUOTAMENTO LINFONODALE CIT-NASO	IN10119	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 16_AP5				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				

VADEMECUM GENERALE

N

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
NASO – SECRETO NASALE CON CONTA CELLULARE FRAZIONATA PERCENTUALE	IN10306	MICROSCOPICO	13 gg	

CIT-NASO

Quantità da prelevare: 2 CAMPIONI
Inviare 2 vetrini (1 fissato con Cytofix/Cytospray + 1 essiccato all'aria)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

NASO – SECRETO NASALE CON CONTA CELLULARE FRAZIONATA PERCENTUALE ED IMMUNOISTOCHEMICA	IN10307	MICROSCOPICO	13 gg	
--	---------	--------------	-------	--

CIT-NASO

Quantità da prelevare: 3 CAMPIONI
Inviare almeno 2 vetrini (1 fissato con Cytofix/Cytospray + 1 essiccato all'aria) e un barattolo PRESERVCYT VIAL ROSA 20 ML in cui deve essere stemperato il brush

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Neisseria Gonorrheae DNA	1659	PCR REAL TIME	6 gg	
---------------------------------	------	---------------	------	--

Liquido Seminale, Tampone Cervicale, Tampone Faringeo, Tampone Rettale, Tampone Uretrale, Tampone Vaginale, Urine

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE (urine 10 mL)
DISPOSITIVI DA UTILIZZARE PER LA RACCOLTA :
CONTENITORE STERILE : Liquido Seminale

SYNLAB ITALIA

TAMPONE ROSA (cod. SAP 500003323) : Tampone Cervicale, Tampone Vaginale, Tampone Faringeo

TAMPONE ARANCIONE (cod. SAP 500003321) : Tampone Uretrale

PROVETTA TAPPO NOCCIOLA (cod. SAP 500022210) : Urine I Mitto

VALORI DI RIFERIMENTO

Neisseria gonorrhoeae DNA

Non rilevato

Ricerca eseguita su :

Neisseria gonorrhoeae esame colturale	B583	COLTURALE	4-5 gg	
--	------	-----------	--------	--

Liquido Seminale, Tampone Cervicale, Tampone Uretrale, Tampone Vaginale, Urine

Neisseria gonorrhoeae esame colturale II campione	B5831	COLTURALE	4-5 gg	
--	-------	-----------	--------	--

Liquido Seminale, Tampone Cervicale, Tampone Rettale, Tampone Uretrale, Tampone Vaginale, Urine

Neobona Advanced Prenatal Test (T21, T18, T13, Anomalie X e Y)	1502	MPS - SEQUENZIAMENTO MASSIVO PARALLELO PAIR END	8 gg	
---	------	---	------	--

Kit Specifico

Compilare il modulo di consenso INF_GEN15
Non necessaria catena di custodia

SYNLAB ITALIA

Non saranno accettati i campioni pervenuti in laboratorio il giorno antecedente qualsiasi festività

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

neoBona Karyo GenomeWide Prenatal Test	8763	MPS - SEQUENZIAMENTO MASSIVO PARALLELO PAIR END	8 gg	
---	------	---	------	--

Kit Specifico

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Inviare consenso informato INF_GEN15 compilato e firmato da medico e paziente

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

n

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
neoBona Karyo Prenatal Test Kit Specifico	8762	MPS - SEQUENZIAMENTO MASSIVO PARALLELO PAIR END	8 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Inviare consenso informato INF_GEN15 compilato e firmato da medico e paziente

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Neobona Prenatal Test (T21, T18, T13) Kit Specifico	1501	MPS - SEQUENZIAMENTO MASSIVO PARALLELO PAIR END	8 gg	
---	------	---	------	--

Compilare il modulo di consenso INF_GEN15
Non necessaria catena di custodia

SYNLAB ITALIA

Non saranno accettati i campioni pervenuti in laboratorio il giorno antecedente qualsiasi festività

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

NEOPLASIA ENDOCRINA MULTIPLA (MEN) - pannello NGS Sangue Intero EDTA	2054	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	
--	------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

NESPOLA (ERIOBOTRYA JAPONICA) Siero	6F401	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Netilmicina (SYNLAB) Siero	695	FPIA	8 gg	
--------------------------------------	-----	------	------	--

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

NEUROFIBROMATOSI : ricerca di mutazioni nei geni NF1, NF2 Sangue Intero EDTA	2097	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	
--	------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

NEUROFILAMENTI CATENA LEGGERA Siero	2330	CHEMILUMINESCENZA	6 gg	
---	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L
18 - 29 anni: < 10,7
30 - 39 anni: < 13,3
40 - 49 anni: < 17,1
50 - 55 anni: < 15,7

VADEMECUM GENERALE

N

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
NICHEL Sierico	723	ASSORBIMENTO ATOMICO	8 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL
Utilizzare provetta specifica Metal Free (cod. SAP 600068373).
Subito dopo il prelievo la provetta non deve essere aperta, travasata o aliquotata, ma inviata tale quale al laboratorio

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Popolazione generale:
< 0,94

Soggetti professionalmente esposti:
Valore limite non proposto

Nichel Urine Fine Turno	71509	ICP-MS	8 gg	
Urine F.T.				

Quantità da prelevare: 10 mL
• Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
• Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Soggetti professionalmente esposti:
Composti di nichel insolubili (ad es. saldatura):
< 5

Composti di nichel solubili (ad es. galvanica):
< 30 (f.t. / f.s.l.)

Nichel Urine Inizio Turno	7159	ICP-MS	8 gg	
Urine I.T.				

Quantità da prelevare: 10 mL
• Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
• Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Soggetti professionalmente esposti:
Composti di nichel insolubili (ad es. saldatura):
< 5

Composti di nichel solubili (ad es. galvanica):
< 30 (f.t. / f.s.l.)

Nitriti urinari	770	TEST MULTISTRATO COLORIMETRICO	1-2 gg	
Urine Mattino				

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

N-METILACETAMMIDE Urine Inizio Turno	1257	GC	21 gg	
Urine I.T.				

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

N-METILACETAMMIDE Urine Inizio Turno

mg/g creatinina

Soggetti professionalmente esposti:
< 30 (f.t. / f.s.l.)

Creatinina Urine Inizio Turno

g/L

0,30 - 3,00

Nocciola	6F17	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione

Classe

kU/L

VADEMECUM GENERALE

N

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Noce Siero	6F256	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Noce Americana Plasma, Siero	6F201	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

NOCE AMERICANO (CARYA ILLINOINENSIS) Siero	6T22	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Noce Brasiliana Siero	6F18	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Noce di Cocco Siero	6F36	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Normetanefrine urine 24 H Urine 24h Acidificate	786	HPLC	7 gg	
---	-----	------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

La raccolta del campione di urine delle 24 h prevede l' acidificazione delle urine stesse. L' acidificazione viene effettuata versando nel recipiente, prima di iniziare la raccolta, circa 5 ml di HCl 5 M per ogni litro di urina (4 cucchiaini di acido muriatico del commercio). Prelevare un'aliquota di circa 10 ml di urina delle 24 h acidificata con l'indicazione della diuresi totale ed inviare in apposito contenitore di trasporto. Risposta dopo 24 h.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/24h Fino a 390

NOROVIRUS RNA Tampone fecale	1385	REAL TIME PCR	8 gg	
--	------	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Utilizzare Tampone Tappo Verde specifico (cod. SAP 500023694)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Non rilevato

Limite di sensibilità (LoD): 809 copie/mL

VADEMECUM GENERALE

N

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
NSE (enolasi neuronale specifica) Siero	6519	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 18,3

NT-ProBNP Siero	7980	CMIA	1 gg	
---------------------------	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL
Maschi:
0 - 75 anni: < 125
oltre i 76 anni: < 450
Femmine:
0 - 75 anni: < 125
oltre i 76 anni: < 450

Numero di dibucaina Siero	3000	ENZIMATICO	2 gg	
-------------------------------------	------	------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

%
Omozigoti normali : > 75
Eterozigoti : 35 - 75

Nutritional Check DNA Tampone Cavo Orale	8719	MASS-ARRAY	11 gg	
--	------	------------	-------	--

Quantità da prelevare: 2 TAMPONI ORALI
Presentare modulo richiesta e consenso informato debitamente compilato e sottoscritto dal medico + INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

OCCHIO - ASPORTAZIONE GHIANDOLA LACRIMALE CIT-OCCHIO	IN10120	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 22_AP2

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

OCCHIO - BIOPSIA BULBO OCULARE CIT-OCCHIO	IN10121	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

OCCHIO - BIOPSIA GHIANDOLA LACRIMALE CIT-OCCHIO	IN10122	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	16 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 22_AP2

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

OCCHIO - BULBO OCULARE - ENUCLEAZIONE SEMPLICE CIT-OCCHIO	IN10123	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 3_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VADEMECUM GENERALE

O

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
OCCHIO - ESCISSIONE NEOFORMAZIONE GHIANDOLA LACRIMALE CIT-OCCHIO	IN10124	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 22_AP2

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

OCCHIO - EXENTERATIO ORBITAE CIT-OCCHIO	IN10125	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
---	---------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 3_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Ole e1 olea europaea Siero	5T224	ImmunoCAP	5 gg	
--------------------------------------	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Ole e7 olea europaea Siero	5T227	ImmunoCAP	5 gg	
--------------------------------------	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Ole e9 olea europaea Siero	5T240	ImmunoCAP	5 gg	
--------------------------------------	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Olea Europea (Olio) Siero	6T9	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Olive verdi Siero	6F223	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-----------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Omocisteina Plasma Eparinato congelato	6301	CHEMILUMINESCENZA	5 gg	
--	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Separare il prima possibile dopo il prelievo e inviare congelato.

SYNLAB ITALIA

Utilizzare provetta specifica (cod. SAP 600046765).

VALORI DI RIFERIMENTO

μmol/L
15 - 30 Iperomocisteina moderata
30 - 100 Iperomocisteina intermedia
> 100 Iperomocisteina severa

VADEMECUM GENERALE

O

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ONCODEEP DNA+RNA CIT-SOMA	IN10323		16 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE MATERIALE INCLUSO IN PARAFFINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Opiacei matrice pilifera Capelli	1086	LC-MS-MS	13 gg	
-------------------------------------	------	----------	-------	--

Quantità da prelevare: Diametro ciocca 1 cm diviso in 2 aliquote
Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione.
Esegui il prelievo secondo procedura ed inviare i campioni con catena di custodia.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

OPPIACEI		
Morfina	ng/mg	Fino a 0,2
6-acetilmorfina	ng/mg	Fino a 0,2
Codeina	ng/mg	Fino a 0,2
Diidrocodelina	ng/mg	Fino a 0,2

Opiacei matrice pilifera - Valenza clinica Capelli	1086CL	LC-MS-MS	13 gg	
---	--------	----------	-------	--

Quantità da prelevare: Diametro ciocca 1 cm diviso in 2 aliquote
Il sabato è da escludere dal conteggio dei 10 giorni di refertazione.
Esegui il prelievo secondo procedura ed inviare i campioni con catena di custodia.
Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

OPPIACEI		
Morfina	ng/mg	Fino a 0,2
6-acetilmorfina	ng/mg	Fino a 0,2
Codeina	ng/mg	Fino a 0,2
Diidrocodelina	ng/mg	Fino a 0,2

Opiacei matrice urinaria Urine	668	IMMUNOENZIMATICO	3 gg	
-----------------------------------	-----	------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

OPPIACEI (Test di screening)	ng/mL	Fino a 300
		Negativo

Opiacei matrice urinaria - Valenza clinica Urine	668CL	IMMUNOENZIMATICO	3 gg	
---	-------	------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

OPPIACEI (Test di screening)	ng/mL	Fino a 300
		Negativo

VADEMECUM GENERALE

O

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Oppiacei test di conferma su urine Urine	6355	LC-MS-MS	8 gg	

Quantità da prelevare: 20 ml aliquote B e C
Se il campione è inviato dopo le 24 ore dalla raccolta congelare a - 20 °C.
Il sabato è da escludere dal conteggio degli 8 giorni di refertazione

SYNLAB ITALIA

Per l'esecuzione di questo esame è necessario inviare i campioni con catena di custodia. Per ulteriori chiarimenti contattare il laboratorio.

VALORI DI RIFERIMENTO

Morfina	ng/mL	Fino a 100 Negativo
6-Acetil morfina	ng/mL	Fino a 100 Negativo
Codeina	ng/mL	Fino a 100 Negativo
Diidrocodaina	ng/mL	Fino a 100 Negativo

OPTEST CIT-BOCCA	IN10314	COLORAZIONE CITOCHIMICA PAPANICOLAOU,	11 gg	
----------------------------	---------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CONTENITORE THIN PREP
Per il corretto prelievo e il successivo invio dei campioni è necessario fare richiesta dell'apposito kit (codice SAP 550000916), contenente brush per il prelievo, liquido fissativo, busta rossa e istruzioni per l'esecuzione del prelievo.

SYNLAB ITALIA

Qualora l'accettazione non avvenga tramite sistema interfacciato, è necessario compilare la scheda d'accettazione SCHEACC014 in tutte le sue parti.

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e
cliniche

OPTEST+ HPV CIT-BOCCA	IN10315	COLORAZIONE CITOCHIMICA PAPANICOLAOU,	11 gg	
---------------------------------	---------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CONTENITORE THIN PREP
Il test HPV associato è il 1078

SYNLAB ITALIA

Per il corretto prelievo e il successivo invio dei campioni è necessario fare richiesta dell'apposito kit (codice SAP 550000916), contenente brush per il prelievo, liquido fissativo, busta rossa e istruzioni per l'esecuzione del prelievo.

Qualora l'accettazione non avvenga tramite sistema interfacciato, è necessario compilare la scheda accettazione SCHEACC014 in tutte le sue parti.

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e
cliniche

Origano Siero	6F283	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

ORNITINA Plasmatica (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	815	LC/MS	15 gg	
--	-----	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e
cliniche

ORNITINA Urinaria (SYNLAB) Urine Congelate	8150	LC-MS	15 gg	
--	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e
cliniche

VADEMECUM GENERALE

O

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
ORTO-CRESOLO Urine Fine Turno Urine F.T.	70810	HPLC	8 gg	

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti professionalmente esposti a toluene:
< 1,5 (f.t.)

ORTO-CRESOLO Urine Inizio Turno Urine I.T.	7081	HPLC	8 gg	
--	------	------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti professionalmente esposti a toluene:
< 1,5 (f.t.)

Orzo Siero	6F6	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
----------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe

kU/L

OSMOLALITA' SIERICA Siero	7841	PUNTO DI CONGELAMENTO	4 gg	
-------------------------------------	------	-----------------------	------	--

Quantità da prelevare: 2 mL
Provetta dedicata e tappata

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mOsm/Kg

280,00 - 295,00

OSMOLALITA' URINARIA Urine	7842	PUNTO DI CONGELAMENTO	4 gg	
--------------------------------------	------	-----------------------	------	--

Quantità da prelevare: 5 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mOsm/Kg

50 - 1200

Ossalati urine 24H Urine 24h	6352	ENZIMATICO COLORIMETRICO	7 gg	
--	------	--------------------------	------	--

Prelevare un'aliquota di circa 10 mL di urina delle 24h con l'indicazione della diuresi totale ed inviare in provetta da 10 mL tappata.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h

Uomini: 7 - 44
Donne: 4 - 31
Bambini: 13 - 38

Ossalati urine Fine Turno Urine F.T.	6351	ENZIMATICO COLORIMETRICO	7 gg	
--	------	--------------------------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti ESPOSTI:
valore limite non proposto

Ossalati urine Inizio Turno Urine I.T.	6350	ENZIMATICO COLORIMETRICO	7 gg	
--	------	--------------------------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti ESPOSTI:
valore limite non proposto

VADEMECUM GENERALE

O

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
OSSO - ASPORTAZIONE DI NEOFORMAZIONE OSSO CIT-OSSO	IN10126	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

OSSO - BIOPSIA INCISIONALE OSSO CIT-OSSO	IN10127	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

OSSO - EMIMANDIBOLECTOMIA (CON LINFOADENECTOMIA) CIT-OSSO	IN10128	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 14_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

OSSO - RESEZIONE SEGMENTARIA CIT-OSSO	IN10129	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

OSSO - TESTA FEMORALE ESCISSA PER ESECUZIONE PROTESI CIT-OSSO	IN10130	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 20_AP3

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Osteocalcina Siero congelato	6411	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
--	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (< 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Maschi: 4,6 - 65,4

Femmine: 5,4 - 59,1

Ostrica Siero	6F290	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione

kU/L

Classe

OVAIO - ANNESSIECTOMIA MONO/BILAT ALLARGATA CIT-OVAIO	IN10131	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 29_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VADEMECUM GENERALE

O

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
OVAIO - BIOPSIA E/O RESEZIONE CUNEIFORME OVAIA CIT-OVAIO	IN10132	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 32_AP2 VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
OVAIO - BIOPSIA OVARICA CIT-OVAIO	IN10133	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
OVAIO - OVARIECTOMIA ALLARGATA (UTERO, OMENTO, LINFONODI) CIT-OVAIO	IN10135	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 29_AP5 VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
OVAIO - OVARIECTOMIA BILATERALE CIT-OVAIO	IN10134	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 35_AP4 VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
OVAIO - OVARIECTOMIA MONOLATERALE CON O SENZA SALPINGECTOMIA CIT-OVAIO	IN10136	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 32_AP2 VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
P.S.A. Siero	6514	CMIA	1 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO ng/mL < 4,000				
P.S.A. Reflex Siero	1181	CMIA	1 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO ng/mL < 4,000				
PANCREAS - AGOBIOPSIA PANCREAS CIT-PANCREAS	IN10137	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 7_AP3 VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PANCREAS - CAUDECTOMIA CIT-PANCREAS	IN10138	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 6_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

PANCREAS - DUODENO-CEFALOPANCREASECTOMIA CIT-PANCREAS	IN10139	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 7_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

PANCREAS - RESEZIONE PARZIALE PANCREAS CIT-PANCREAS	IN10140	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 6_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

PANICO DISTICO (PASPALUM NOTATUM) Siero	6G17	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

PANNELLO ANTICORPALE NUCLEOLARE Siero	1943	IMMUNODOT	8 gg	
---	------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 0,5 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti-Scl 70 U.A.
Anti-RNA polimerasi III U.A.
Anti-PM-Scl 100 U.A.

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PANNELLO ANTICORPALE POLIMIOSITI/DERMATOMIOSITI	6331	IMMUNODOT	8 gg	
Siero				

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti-Jo-1	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-PL-7	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-PL-12	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-EJ	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-SRP	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-Mi-2	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-MDA-5	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-TIF1-gamma	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-Ku	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-PM-Scl 100	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-Scl 70	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-SSa/Ro52kD	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo

PANNELLO ANTICORPALE SCLERODERMIA	1945	IMMUNODOT	8 gg	
Siero				

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti-Scl 70	U.A.
Anti-CENP-A	U.A.
Anti-CENP-B	U.A.
Anti-PM-Scl 100	U.A.
Anti-PM-Scl 75	U.A.
Anti-Ku	U.A.
Anti-RNA polimerasi III	U.A.
Anti-RNP (68kD, A, C)	U.A.
Anti-Fibrillarina	U.A.
Anti-Th/To	U.A.

PANNELLO ANTICORPI Anti-SARSCoV-2 IgM+IgG – S1/RBD quantitative	2220	CMIA	3 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti-SARS-CoV-2 IgM anti SPIKE	Index	< 1,00 Negativo
Anti-SARS-CoV-2 IgG anti S1/RBD	BAU WHO/mL	< 7,1 Negativo ≥ 7,1 Positivo

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PANNELLO CARDIOVASCOLARE 6 MUTAZIONI Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	8573	REAL TIME PCR	6 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Pannello Connettiviti Siero	6324	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	8 gg	
---------------------------------------	-------------	---	-------------	--

Quantità da prelevare: 0,4 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ab Anti-DNA Nativo Quantitativo	kU/L	< 5,00 Negativo 5,00 - 10,00 Indeterminato ≥ 10,00 Positivo
Ab Anti-Cromatina (Nucleosoma)	A.I.(Antic. Index)	< 0,80 Negativo 0,80 - 1,10 Indeterminato > 1,10 Positivo
Ab Anti-ENA Antigene Sm	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo
Ab Anti-ENA Antigene Sm/RNP	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo
Ab Anti-ENA Antigene Scl-70	A.I.(Antic. Index)	< 0,70 Negativo 0,70 - 1,00 Indeterminato >1,00 Positivo
Ab Anti-ENA Antigene Jo-1	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo
Ab Anti-ENA Antigene Ssa (Ro)	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo
Ab Anti-ENA Antigene Ssa (Ro) 52 kD	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo
Ab Anti-ENA Antigene Ssa (Ro) 60 kD	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo
Ab Anti-ENA Antigene Ssb (La)	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo
Ab Anti-ENA Antigene RNP	A.I.(Antic. Index)	< 0,70 Negativo 0,70 - 1,10 Indeterminato > 1,10 Positivo
Ab Anti ENA Antigene RNP A	A.I.(Antic. Index)	< 0,70 Negativo 0,70 - 1,10 Indeterminato > 1,10 Positivo
Ab Anti ENA Antigene RNP 68 kD	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo
Ab Anti-Centromero CENPB	A.I.(Antic. Index)	< 0,80 Negativo 0,80 - 1,10 Indeterminato > 1,10 Positivo
Ab Anti- Ribosoma P	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PANNELLO EPATOPATIE AUTOIMMUNI	6332	IMMUNODOT	8 gg	
Siero				

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO		
Anti-M2/nPDC	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-M2/OGDC-E2	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-M2/BCOADC-E2	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-M2/PDC-E2	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-gp 210	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-sp 100	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-LKM1	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-LC1	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-SLA	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo
Anti-F-Actina	U.A.	<5 Negativo 5-10 Dubbio >10 Positivo

PANNELLO EPATOPATIE AUTOIMMUNI 4 ANTIGENI	1944	IMMUNODOT	8 gg	
Siero				

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO	
Anti-M2	U.A.
Anti-LKM 1 (Ricombinante P4502D6)	U.A.
Anti-LC1	U.A.
Anti-SLA	U.A.

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PANNELLO LES/SS (LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO)/(SINDROME DI SJÖGREN)	6325	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	8 gg	

Siero

Quantità da prelevare: 0,40 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ab Anti-DNA Nativo Quantitativo	UI/mL	< 5.00 Negativo 5.00 - 10.00 Indeterminato ≥ 10.00 Positivo
Ab Anti-Cromatina (Nucleosoma)	A.I.(Antic. Index)	< 0.80 Negativo 0.80 - 1.10 Indeterminato > 1.10 Positivo
Ab Anti-ENA Antigene Sm	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo
Ab Anti-ENA Antigene Sm/RNP	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo
Ab Anti-ENA Antigene Ssa (Ro)	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo
Ab Anti-ENA Antigene Ssa (Ro) 52 kD	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo
Ab Anti-ENA Antigene Ssa (Ro) 60 kD	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo
Ab Anti-ENA Antigene Ssb (La)	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo
Ab Anti- Ribosoma P	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo

Pannello MCTD (Malattie del Tessuto Connettivo Miste)	6327	Multiplex Flusso Immunometrico (MFI)	8 gg	
--	-------------	---	-------------	--

Siero

Quantità da prelevare: 0,40 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ab Anti-ENA Antigene Sm/RNP	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo
Ab Anti-ENA Antigene RNP	A.I.(Antic. Index)	< 0,70 Negativo 0,70 - 1,10 Indeterminato > 1,10 Positivo
Ab Anti ENA Antigene RNP A	A.I.(Antic. Index)	< 0,70 Negativo 0,70 - 1,10 Indeterminato > 1,10 Positivo
Ab Anti ENA Antigene RNP 68 kD	A.I.(Antic. Index)	< 1,00 Negativo ≥ 1,00 Positivo

Pannello VASK (Vasculiti Autoimmuni)	6329	IMMUNOBLOTTING	8 gg	
---	-------------	-----------------------	-------------	--

Siero

Quantità da prelevare: 0,40 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ab Anti-Proteinasi 3 (PR3)		0 - 5 Negativo 6 - 10 Indeterminato 11 - 50 Positivo > 50 Fortemente positivo
Ab Anti-Mieloperossidasi (MPO)		0 - 5 Negativo 6 - 10 Indeterminato 11 - 50 Positivo > 50 Fortemente positivo
Ab Anti-Membrana basale del glomerulo		0 - 5 Negativo 6 - 10 Indeterminato 11 - 50 Positivo > 50 Fortemente positivo

Papaya	6F293	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---------------	--------------	--------------------------	-------------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PAPP-A PER BITEST Siero congelato Quantità da prelevare: 1 mL Centrifugare e conservare a temperatura ambiente per massimo 48 ore	8971	IF-TRACE	6 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
UI/L		Donne non gravide: < 0,10		
		Settimana di Gestazione		
		11a 0,63 - 3,98		
		12a 1,04 - 6,56		
		13a 1,54 - 9,73		
		14a 2,06 - 13,00		
Paprica Plasma, Siero Quantità da prelevare: 1 mL	6F218	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
Par j2 Parietaria judaica Siero Quantità da prelevare: 1 mL	5W211	ImmunoCAP	5 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
KUA/L		< 0,10		
PARAGANGLI - ASPORTAZIONE CHIRURGICA PARAGANGLI CIT-PARAGANGLI Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 12_AP4	IN10141	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
PARAGANGLI - ASPORTAZIONE PER PATOLOGIA NEOPLASTICA CIT-PARAGANGLI Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 12_AP4	IN10142	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
Parassita malarico ricerca antigenica Sangue Intero EDTA Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 12_AP4	8968	IMMUNOCROMATOGRAFIA	2 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
Negativo				
Parassita Malarico ricerca microscopica Striscio da Sangue Intero EDTA Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 21_AP2	030	MICROSCOPIA	4 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
PARATIROIIDE - PARATIROIDECTOMIA CIT-PARATIROIIDE Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 21_AP2	IN10145	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Paratormone (PTH) Siero	641	CMIA	2 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL 25 - 109

Parietaria Judaica Siero	6W21	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L

Parietaria officinalis (Erba Vetriola) Siero	6W19	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L

Parmigiano Siero	6F67	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L

Paroxetina (SYNLAB) Siero	698	LC/MS	8 gg	
Quantità da prelevare: 2 mL				SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 20 - 65

PAR-TEST (potere antibatterico residuo) Urine	5020	Colorimetrico	7 gg	
				SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

PARVOVIRUS B19 DNA Liquido Amniotico Congelato, Sangue Intero EDTA	538	REAL TIME PCR	8 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE				SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Non rilevato

copie/mL

Parvovirus B19 DNA

Limite di sensibilità (LoD)

Ricerca eseguita su :

Patata Siero	6F35	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

kU/L

Concentrazione

Classe

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Patata Dolce Plasma, Siero	6F54	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione	kU/L			
Classe				
Paul Bunnel Siero	108	IMMUNOCROMATOGRAFIA	4 gg	
Quantità da prelevare: 500 µL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Negativo				
Pen a1 Penaeus aztecus Siero	5F351	ImmunoCAP	5 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
	KUA/L	< 0,10		
PENE - AMPUTAZIONE PENE CIT-PENE	IN10147	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 26_AP4				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
PENE - BIOPSIA PENE CIT-PENE	IN10148	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	18 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Penicillina G Siero	6C1	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione	kU/L			
Classe				
Penicillina V Siero	6C2	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione	kU/L			
Classe				
Penicillium Notatum Siero	6M1	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione	kU/L			
Classe				

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PEPE DI CAIENNA (CAPSICUM ANNUUM) Siero	6F19	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
Pepe Nero Siero	6F280	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
Pepe Verde Siero	6F263	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
Peperoncino rosso Plasma, Siero	6F279	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				
Peptide C Siero	618	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
		µg/L	0,81 - 3,85	
Peptide C Post Prandiale Siero	1382	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
		µg/L		
Peptide C Urine 24/h Urine 24H Congelate	475	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 10 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
		µg/ 24h	< 156,5	
Pera Siero	6F94	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione		kU/L		
Classe				

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Percentuale di saturazione della Transferrina Siero	3321	CALCOLO DERIVATO	1 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

%

Maschi: 20 - 50

Femmine: 15 - 50

PERCLOROETILENE Ematico Sangue Intero Eparinato	769	GC	8 gg	
---	-----	----	------	--

Quantità da prelevare: 3 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Soggetti professionalmente esposti:
< 400
(16 ore dopo la fine dell'esposizione)

PERCLOROETILENE Urine Fine Turno Urine F.T.	7691	GC	8 gg	
---	------	----	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB ITALIA

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Soggetti professionalmente esposti:
Valore limite non proposto

PERCLOROETILENE Urine Inizio Turno Urine I.T.	7690	GC	8 gg	
---	------	----	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB ITALIA

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Soggetti professionalmente esposti:
Valore limite non proposto

PERICARDIO - BIOPSIA CIT-PERICARDIO	IN10149	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

PERITONEO - BIOPSIA DI MASSA INTRAADDOMINALE CIT-PERITONEO	IN10151	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 15_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

PERITONEO - BIOPSIA PERITONEALE CIT-PERITONEO	IN10152	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

PERITONEO - OMENTECTOMIA CIT-PERITONEO	IN10153	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 29_AP2

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PERITONEO - SACCO ERNIARIO CIT-PERITONEO	IN10154	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 26_AP1

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Pesca Siero	6F95	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-----------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

PESCE PERSICO (SEBASTES SPP) Siero	6F65	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Pesce spada Siero	6F312	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-----------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Phenobarbital (Gardenale) Plasma Litio Eparina, Siero	670	PETINIA (Test immunologico di Inibizione turbidimetrica con	2 gg	
---	-----	---	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L Intervallo terapeutico :
15 - 40
> 50 Tossicità

Phl p1 Phleum pratense Siero	5G205	ImmunoCAP	5 gg	
--	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Phl p5b Phleum pratense Siero	5G215	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Phl p7 Phleum pratense Siero	5G210	ImmunoCAP	5 gg	
--	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Phleum Pratense (Codolina)	6G6	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Phoenix Canariensis (Dattero)	6T406	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Phoma Betae	6M13	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Phragmites Communis (Canna Di Palude)	6G7	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Piastrine Abs	150	ELISA	8 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 700 µL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti - Glicoproteina IIb / IIIa Negativo
Anti - Glicoproteina Ia / IIa Negativo
Anti - Glicoproteina Ib / IX Negativo
Anti - Glicoproteina IV Negativo
Anti - HLA Classe I Negativo

Piastrine in sodio citrato	004	IMPEDENZIOMETRICO	1 gg	
Sangue Intero Citratato				

VALORI DI RIFERIMENTO

10⁹/L 150 - 400

PINOLO (PINUS PINEA)	6F253	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Pinus Strobis Siero	6T16	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione	kU/L			
Classe				
Piombemia Sangue intero Li-Eparina	700	ASSORBIMENTO ATOMICO	8 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
	µg/100 mL	Soggetti professionalmente esposti : < 60 > 40 Sorveglianza sanitaria Lavoratrici in età fertile: > 40 allontanamento		
PIOMBO Urine Fine Turno Urine F.T.	7011	ICP-MS	8 gg	
Quantità da prelevare: 10 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
	µg/L	Popolazione generale: < 2,64		
PIOMBO Urine Inizio Turno Urine I.T.	701	ICP-MS	8 gg	
Quantità da prelevare: 10 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
	µg/L	Popolazione generale: < 2,64		
Piridinolina libera urine 2 ore Urine 2h	1643	HPLC	8 gg	
La mattina dell'esame, svuotare completamente la vescica e gettare queste urine segnando l'ora. Successivamente bere 250 ml di acqua, evitare di bere altro, mangiare o fumare. Dopo 2 ore urinare direttamente nel contenitore e consegnarlo al laboratorio.				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
	pmol/µmol creat.	17,04 - 32,36		
Piridinolina libera urine 24H Urine 24h	1641	HPLC	8 gg	
Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
	pmol/µmol creatin	31,9 - 57,9		
Piridinolina totale urine 2 ore Urine 2h	1645	HPLC	8 gg	
La mattina dell'esame, svuotare completamente la vescica e gettare queste urine segnando l'ora. Successivamente bere 250 ml di acqua, evitare di bere altro, mangiare o fumare. Dopo 2 ore urinare direttamente nel contenitore e consegnarlo al laboratorio.				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
	pmol/µmol creat.	Maschi: 23,0 - 65,0	Femmine: 25,0 - 83,0	
Piridinolina totale urine 24H Urine 24h	6322	HPLC	9 gg	
Quantità da prelevare: 5 mL Risposta dopo 24 h				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
	pmol/µmol creat.	Maschi: 20 - 61	Femmine: 22 - 89	

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Piruvato (Ac. Piruvico) (SYNLAB) Sangue in NaF	2960	SPETTROFOTOMETRIA	16 gg	

Quantità da prelevare: 2 CAMPIONI
Inviare sangue intero in NaF. Utilizzare le provette dedicate (cod. SAP 500032432)

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

μmol/L

Maschi:
0 - 17 anni: 60 - 100
oltre i 18 anni: 39 - 82

Femmine:
0 - 17 anni: 60 - 100
oltre i 18 anni: 39 - 82

Piruvatochinasasi Eritrocitaria Sangue Intero EDTA	295	CINETICO	8 gg	
--	-----	----------	------	--

Quantità da prelevare: 3 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

PIRUVATO-CHINASASI ERITROCITARIA
Emoglobina (Hgb)

U/g Hb
g/L

4,1 - 15,2

Pisello Siero	6F12	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe

kU/L

Pistacchio Siero	6F203	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
----------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe

kU/L

PITYROSPORUN (PITYROSPORUM ORBICULARE) Siero	6M70	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe

kU/L

Piume d'Anatra Siero	6E86	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe

kU/L

PIUME DI CANARINO (SERINUS CANARIA) Siero	6E201	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe

kU/L

Piume di Gallina Siero	6E85	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
----------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe

kU/L

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Piume di Pappagallino Siero	6E91	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Piume d'Oca Siero	6E70	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-----------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Pla I1 Plantago Lanceolata Siero	5W234	ImmunoCAP	5 gg	
--	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

PLACENTA - PLACENTA, FUNICOLO E MEMBRANE CIT-PLACENTA	IN10155	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 31_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Plantago Lanceolata (Lanciuola) Siero	6W9	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

PLASMINOGENO Plasma Citrato congelato	073	CROMOGENICO	8 gg	
---	-----	-------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

% 75 - 160

Platanus acerifolia (Platano) Siero	6T11	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Platessa Siero	6F254	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PLEURA - BIOPSIA PLEURA CIT-PLEURA	IN10156	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

PLEURA - DECORTICAZIONE CIT-PLEURA	IN10157	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

PLGF PLUS Siero congelato	1665	TRACE	6 gg	
-------------------------------------	------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L

Femmine:
8 settimane : 9,3 - 28,9
9 settimane : 11,7 - 37,8
10 settimane : 16,2 - 55,0
11 settimane : 19,0 - 61,0
12 settimane : 21,3 - 96,7
13 settimane : 25,2 - 100,4
14 settimane : 34,3 - 132,0

Poa Pratensis (Gramigna) Siero	6G8	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Pol d5 Polistes dominulus Siero	5I210	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Polipeptide Pancreatico (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	1491	RIA	21 gg	
--	------	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Prelevare 1 provetta EDTA (tappo viola), centrifugare a temperatura ambiente, separare e congelare

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

pmol/L < 100

Polistes Species (Vespa) Siero	6I4	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

POLMONE - AGOBIOPSIA PLEURICA/POLMONARE CIT-POLMONE	IN10159	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
POLMONE - AGOBIOPSIA PLEUROPOLMONARE TAC CIT-POLMONE	IN10158	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	16 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

POLMONE - LOBECTOMIA POLMONARE SEMPLICE CIT-POLMONE	IN10160	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 23_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

POLMONE - PNEUMECTOMIA (CON O SENZA LINFOADENECTOMIA) CIT-POLMONE	IN10161	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 19_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

POLMONE - PNEUMECTOMIA ALLARGATA CIT-POLMONE	IN10162	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 19_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

POLMONE - RESEZIONE ATIPICA POLMONARE CIT-POLMONE	IN10163	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 23_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

POLMONE - RESEZIONE SEGMENTARIA POLMONARE CIT-POLMONE	IN10164	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 23_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Polpo Siero	6F59	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-----------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Polvere di grano Siero	6K301	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
----------------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Pomodoro Siero	6F25	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione	kU/L			
Classe				
POMPELMO (CITRUS PARADISI) Siero	6F209	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione	kU/L			
Classe				
Populos deltoides (pioppo) Siero	6T14	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione	kU/L			
Classe				
Porfirine totali urine 24H Urine 24h	7052	SPETTROFOTOMETRIA	6 gg	
Quantità da prelevare: 10 mL Porre il campione in un contenitore scuro al riparo dalla luce (es. avvolgere la provetta con carta stagnola) e conservarlo a 2 – 8 °C				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
	µg/24h	< 150		
Potassiemia (K) Siero	242	POTENZIOMETRIA INDIRETTA	1 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
	mmol/L	3,4 - 5,1		
Potassio Urinario (K) Urine 24h	252	ELETTRODI IONOSELETTIVI DILUITI (INDIRETTA)	2 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
	mmol/24h	25,00 - 125,00		
POTASSIO URINARIO SU CAMPIONE ESTEMPORANEO Urine	2246	POTENZIOMETRIA INDIRETTA	1 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
	mmol/L	> 30		
Potenziale biologico antiossidante Siero	6392	COLORIMETRICO	2 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
	µmol/L	Maschi: Stato di fortissima carenza : < 1.400 Stato di forte carenza : 1.400 - 1.599 Stato di carenza : 1.600 - 1.799 Stato di discreta carenza : 1.800 - 1.999 Valore borderline : 2.000 - 2.200 Valore ottimale : > 2.200 Femmine: Stato di fortissima carenza : < 1.400 Stato di forte carenza : 1.400 - 1.599 Stato di carenza : 1.600 - 1.799 Stato di discreta carenza : 1.800 - 1.999 Valore borderline : 2.000 - 2.200 Valore ottimale : > 2.200		

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Prealbumina (T.B.P.A.) Siero	2603	IMMUNOTURBIDIMETRICO	2 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				
VALORI DI RIFERIMENTO				
g/L 0,10 - 0,40				
Predisposizione a Celiachia Tampone a secco orale	G0002	PCR REAL TIME	9 gg	
Quantità da prelevare: 2 Tamponi Inviare il consenso sanitario specifico per il test INF_GEN01 Synlab				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
PREDISPOSIZIONE A MELANOMA FAMILIARE - pannello NGS Sangue Intero EDTA	2055	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
PREDISPOSIZIONE A POLIPOSÌ ADENOMATOSA FAMILIARE : ricerca di mutazioni nei geni APC,MUTYH Sangue Intero EDTA	2059	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
PREDISPOSIZIONE A TUMORE FAMILIARE ALLA PROSTATA - pannello NGS Sangue Intero EDTA	2057	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
PREDISPOSIZIONE AL CARCINOMA FAMILIARE DEL COLON – Pannello NGS Sangue Intero EDTA	2048	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Predisposizione al Carcinoma Familiare del Pancreas - pannello NGS Sangue Intero EDTA	2092	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PREDISPOSIZIONE ALL' IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE - ricerca di mutazioni in pannello di geni	2094	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	

Sangue Intero EDTA

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

PREDISPOSIZIONE ALLA SINDROME DEL RENE POLICISTICO - ricerca di mutazioni in pannello di geni	2093	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	
--	------	---	-------	--

Sangue Intero EDTA

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

PREECLAMPSIA TEST (Dosaggio PLGF Plus e sFlt-1)	1666	TRACE	6 gg	
--	------	-------	------	--

Siero congelato

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

sFlt -1 ng/L

Femmine:

5 - 9 settimane : 306,0 - 1.678
10 - 13 settimane : 498,0 - 2.378
14 - 19 settimane : 764,0 - 2.828
20 - 24 settimane : 910,0 - 5.099
25 - 28 settimane : 564,0 - 3.706
29 - 33 settimane : 729,0 - 11.960
34 - 36 settimane : 1.037 - 8.645
37 - parto : 843,0 - 10.943

PLGF PLUS ng/L

Femmine:

5 - 9 settimane : 8,5 - 29,8
10 - 13 settimane : 15,1 - 104,6
14 - 19 settimane : 44,1 - 340,1
20 - 24 settimane : 120,0 - 652,4
25 - 28 settimane : 143,7 - 799,7
29 - 33 settimane : 20,0 - 1.093
34 - 36 settimane : 40,7 - 742,5
37 - parto : 27,8 - 775,9

Rapporto sFlt -1/PLGF %

Femmine:

5 - 9 settimane : 18,7 - 110,1
10 - 13 settimane : 10,4 - 91,4
14 - 19 settimane : 4,8 - 26,2
20 - 24 settimane : 1,7 - 33,5
25 - 28 settimane : 1,1 - 7,5
29 - 33 settimane : 0,9 - 589,0
34 - 36 settimane : 2,0 - 168,4
37 - parto : 1,9 - 180,5

Pregnanndiolo Urinario (SYNLAB)	6300	GAS CROMATOGRAFIA	21 gg	
--	------	-------------------	-------	--

Urine 24h

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h

Maschi:

Prima della pubertà : < 0,50
Dopo la pubertà : < 1,00

Femmine:

Fase follicolare : 0,20 - 1,50
Fase luteinica : 1,50 - 6,00
Menopausa : 0,30 - 0,90

Pregnantriolo Urinario (SYNLAB)	6299	GAS CROMATOGRAFIA	8 gg	
--	------	-------------------	------	--

Urine 24h

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h

Fino a 6 anni: < 0,15
6 - 11 anni: < 0,40
11 - 14 anni: < 1,50
> 14 anni: < 2,00

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PREGNENOLONE SOLFATO (SYNLAB) Siero	350	LC-MS	9 gg	

Quantità da prelevare: 2,5 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L	Fino a 1 mese 350 – 1500
	1 - 6 mesi 30 – 350
	6 mesi – 9 anni 5 – 30
	9 – 15 anni 10 – 55
	15 – 20 anni 20 – 70
	20 – 25 anni 45 – 155
	Donne
	25 – 30 anni 45 – 140
	30 – 35 anni 45 – 140
	35 – 40 anni 45 – 140
	40 – 50 anni 33 – 120
	50 – 60 anni 30 – 60
	> 60 anni 24 – 50
	Uomini
	25 – 30 anni 45 – 150
	30 – 35 anni 45 – 150
	35 – 40 anni 60 – 140
	40 – 50 anni 57 – 120
	50 – 60 anni 40 – 80
	> 60 anni 24 - 60

Prezzemolo Siero	6F86	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
----------------------------	-------------	--------------------------	-------------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

Primidone (Mysoline) Siero	673	EMIT	2 gg	
--------------------------------------	------------	-------------	-------------	--

Il prelievo non può essere effettuato in provette con gel separatore in quanto quest'ultimo può modificare il dosaggio del farmaco nel siero e quindi il risultato dell'esame effettuato con queste provette non è attendibile.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/mL	5 - 12 Concentrazione terapeutica
	> 15 Concentrazione tossica

Procalcitonina Siero	353	CMIA	1 gg	
--------------------------------	------------	-------------	-------------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL	Rischio di sepsi severa o shock settico:
	< 0,50 Basso rischio
	> 2,00 Alto rischio

Procollagene di tipo III Propeptide (SYNLAB) Siero	6412	EIA	10 gg	
--	-------------	------------	--------------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L	2,9 - 8,1
------	-----------

PROFILAZIONE MOLECOLARE DEL TUMORE DEL COLON su materiale biotico CIT-SOMA	8476	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	16 gg	
--	-------------	--	--------------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE MATERIALE INCLUSO IN PARAFFINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PROFILAZIONE MOLECOLARE DEL TUMORE DEL POLMONE su materiale bioptico	8465	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	16 gg	

CIT-SOMA

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE MATERIALE INCLUSO IN PARAFFINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

PROFILO ANA (Anticorpi Anti Antigeni Nucleo-Citoplasmatici) Immunodot	1938	IMMUNODOT	8 gg	
--	------	-----------	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti-Nucleosomi	U/mL
Anti-dsDNA	U/mL
Anti-Istioni	U/mL
Anti-Sm	U/mL
Anti-RNP (68kD, A, C)	U/mL
Anti-Sm/RNP	U/mL
Anti-SSa/Ro 60kD	U/mL
Anti-SSa/Ro 52kD	U/mL
Anti-SSb	U/mL
Anti-Scl70	U/mL
Anti-Ku	U/mL
Anti-PM-Scl 100	U/mL
Anti-Mi-2	U/mL
Anti-Jo 1	U/mL
Anti-PL-7	U/mL
Anti-PL-12	U/mL
Anti-SRP-54	U/mL
Anti-Ribosoma P0	U/mL
Anti-CENP-A/B	U/mL
Anti-PCNA	U/mL
Anti-sp100	U/mL
Anti-gp210	U/mL
Anti-M2 ricombinante	U/mL
Anti-M2 nPDC (nativo)	U/mL
Anti-F-actina	U/mL

PROFILO ANTICORPI ANTI MSA (Anticorpi miosite specifici)	1939	IMMUNODOT	8 gg	
---	------	-----------	------	--

Siero

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anti-Jo-1	U.A.
Anti-PL-12	U.A.
Anti-PL-7	U.A.
Anti-EJ	U.A.
Anti-OJ	U.A.
Anti-KS	U.A.
Anti-Ha	U.A.
Anti-Zo	U.A.
Anti-SRP	U.A.
Anti-Ribosoma P0	U.A.

Progesterone Plasmatico	620	CMIA	1 gg	
--------------------------------	-----	------	------	--

Siero

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL

Maschi: < 0,5

Femmine:
Fase follicolare : < 0,5
Fase luteale : 1,2 - 15,9
Menopausa : < 0,5

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Proinsulina (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	6529	EIA	8 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB GERMANIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
	pmol/L	< 11,0		
Prolattina Siero	617	CMIA	1 gg	
Il paziente deve stare steso 15 min				
VALORI DI RIFERIMENTO				
	ng/mL	Maschi: 3,5 - 19,4	Femmine: 5,2 - 26,5	
PROLATTINA DOPO 10' Siero	1367	CMIA	1 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
	ng/mL	Maschi: 3,5 - 19,4	Femmine: 5,2 - 26,5	
PROLATTINA DOPO 15' Siero	1368	CMIA	1 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
	ng/mL	Maschi: 3,5 - 19,4	Femmine: 5,2 - 26,5	
Prolattina dopo 20 minuti Siero	4609	CMIA	1 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
	ng/mL	Maschi: 3,5 - 19,4	Femmine: 5,2 - 26,5	
PROLATTINA DOPO 30' Siero	1910	CMIA	1 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
	ng/mL	Maschi: 3,5 - 19,4	Femmine: 5,2 - 26,5	
Prolattina dopo 40' Siero	4610	CMIA	1 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
	ng/mL	Maschi: 3,5 - 19,4	Femmine: 5,2 - 26,5	
Prolattina dopo 60' Siero	4611	CMIA	1 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
	ng/mL	Maschi: 3,5 - 19,4	Femmine: 5,2 - 26,5	
PROLINA Plasmatica (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	883	LC/MS	15 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.				SYNLAB GERMANIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
	ng/mL	Maschi: 3,5 - 19,4	Femmine: 5,2 - 26,5	

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PROLINA Urinaria (SYNLAB) Urine Congelate Quantità da prelevare: 10 mL	8830	LC-MS	15 gg	SYNLAB GERMANIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Propafenone (SYNLAB) Siero Quantità da prelevare: 1 mL	1114	LC-MS	6 gg	SYNLAB GERMANIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
mg/L 0,10 - 1,50				
PROPEPTIDE AMINO-TERMINALE DEL PROCOLLAGENE TIPO 1 (P1NP) Siero Quantità da prelevare: 1 mL	2344	CLIA	4 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
µg/L Premenopausa : 15,0 - 59,0 Postmenopausa : 20,0 - 76,5				
PROSTATA - AGOBIOPSIA PROSTATICA CIT-PROSTATA Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA	IN10165	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	18 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
PROSTATA - PROSTATECTOMIA (ENUCLEAZIONE, NODULECTOMIA) CIT-PROSTATA Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 37_AP4	IN10166	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
PROSTATA - PROSTATECTOMIA EXTRAFASCIALE ALLARGATA CIT-PROSTATA Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 30_AP5	IN10167	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
PROSTATA - RESEZIONE ENDOSCOPICA TRANSURETRALE (T.U.R.P.) CIT-PROSTATA Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 37_AP4	IN10168	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
Proteina 14-3-3 (SYNLAB) Liquido Cefalorachidiano (LIQCELSP) Quantità da prelevare: 1 mL Compilare modulo consenso informato esami genetici Synlab Leinfelden	375	IMMUNOBLOTTING	31 gg	SYNLAB GERMANIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Negativo				

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Proteina C funzionale Plasma Citratato	070	Funzionale cromogenico	1-2 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

% > 65

Proteina C Reattiva (P.C.R.) Siero	101	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg	
--	-----	---------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL < 1,00

Proteina C Reattiva ad alta sensibilita' Siero	1010	IMMUNOTURBIDIMETRIA	2 gg	
--	------	---------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL < 0,30

Proteina Cationica Eosinofila (ECP) Siero	6653	CHEMILUMINESCENZA	5 gg	
---	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

Prelevare il campione e lasciar coagulare il sangue per 60-120 minuti. Centrifugare a 1000-1300 giri al minuto per 10 minuti, separare e aliquotare il siero.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 24,0

PROTEINA LEGANTE IL RETINOLO Siero	369	NEFELOMETRIA	4 gg	
--	-----	--------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

g/L 0,03 - 0,06

Proteina S libera Plasma Citratato	071	Immunoturbidimetria	1-2 gg	
--	-----	---------------------	--------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

% Maschi: 65 - 160
Femmine:
Età fertile : 50 - 150
Menopausa : 65 - 160

PROTEINA S100 Siero congelato	439	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 0,15

Proteine totali Siero	2599	BIURETO	1 gg	
---------------------------------	------	---------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

g/dL 6,4 - 8,3

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PROTEINE URINARIE SU CAMPIONE ESTEMPORANEO Urine	2232	BENZETONIO CLORURO	1 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/g creatinina

Maschi:
0 - 1 anni: < 500
oltre i 2 anni: < 200

Femmine:
0 - 1 anni: < 500
oltre i 1 anni: < 200

Proteinuria 24h Urine 24h	262	BENZETONIO CLORURO	2 gg	
-------------------------------------	-----	--------------------	------	--

Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h

< 300

Proteinuria 24h II Campione Urine 24h	2622	BENZETONIO CLORURO	2 gg	
---	------	--------------------	------	--

Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h

< 300

Prothrombin Fragment 1-2 (SYNLAB) Plasma Citrato congelato	458	EIA	11 gg	
--	-----	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

Centrifugare rapidamente (entro 30 min) per 2 VOLTE CONSECUTIVE a 3000 rpm per 20 minuti in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

pmol/L

69 - 229

Pru p1 Prunus persica Siero	5F419	ImmunoCAP	5 gg	
---------------------------------------	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L

< 0,10

Pru p3 Prunus persica Siero	5F420	ImmunoCAP	5 gg	
---------------------------------------	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L

< 0,10

Pru p4 Prunus persica Siero	5F421	ImmunoCAP	5 gg	
---------------------------------------	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L

< 0,10

Prugna Plasma, Siero	6F255	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe

kU/L

VADEMECUM GENERALE

P

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
PSY PGx - Pannello farmacogenetica per farmaci psichiatrici	8710	MASS-ARRAY	11 gg	

Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE (5 mL)

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario specifico per il test (INF_GEN018 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

QF-PCR (ricerca anomalie cromosomiche sui cromosomi 13, 18, 21, X, Y)	8497	PCR E ANALISI DI FRAMMENTI	5 gg	
--	------	----------------------------	------	--

Liquido Amniotico, Villi coriali

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + SCHEACC023 (per richieste su villocentesi) o SCHEACC024 (per richieste su amniocentesi)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

QF-PCR su materiale abortivo (ricerca anomalie cromosomiche su 13, 15, 16, 18, 21, 22, X e Y)	8498	PCR E ANALISI DI FRAMMENTI	11 gg	
--	------	----------------------------	-------	--

Tessuto Abortivo

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario dello specialista

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

QT LUNGO - pannello NGS per la diagnosi della sindrome del QT Lungo Familiare	2083	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	
--	------	---	-------	--

Sangue Intero EDTA

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Quantiferon TB Gold Plus	1952	IGRA	8 gg	
---------------------------------	------	------	------	--

Kit Specifico

Quantità da prelevare: Riempimento provette fino alla linea nera

Provette conservate a 17-25°C e poste in termostato a 37°C per 18-24h entro 16 h dal prelievo; quindi centrifugate e spedite a +4°C

L'esame non può essere accettato il sabato e nei giorni prefestivi.

SYNLAB ITALIA

NON ACCETTABILE SINGOLARMENTE

VALORI DI RIFERIMENTO

Risultato

Commento

Controllo Negativo NIL

kU/L

Test valido ≤ 8,00

Antigeni TB1

kU/L

Negativo < 0,35

Antigeni TB2

kU/L

Negativo < 0,35

Controllo Positivo Mitogeno

kU/L

Test valido ≥ 0,50

Nota :

Quercus Alba (Quercia)	6T7	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------------	-----	-------------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione

kU/L

Classe

VADEMECUM GENERALE

Q

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Quetiapina (SYNLAB) Siero	1159	LC-MS	6 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 100 - 500

RA Test Siero	102	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg	
-------------------------	-----	---------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL < 30

RAFANO(RAPHANUS SATIVUS) Siero	6F119	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Rame Urine 24h Urine 24h	8994	ASSORBIMENTO ATOMICO	8 gg	
------------------------------------	------	----------------------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta con indicazione della diuresi

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/24h 15,0 - 70,0

Rame Urine Fine Turno Urine F.T.	7241	ASSORBIMENTO ATOMICO	8 gg	
--	------	----------------------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L
Popolazione generale :
< 24,0
Soggetti professionalmente esposti :
Valore limite non proposto

Rame Urine Inizio Turno Urine I.T.	724	ASSORBIMENTO ATOMICO	8 gg	
--	-----	----------------------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L
Popolazione generale :
< 24,0
Soggetti professionalmente esposti :
Valore limite non proposto

RAPA (BRASSICA NAPUS) Siero	6W203	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---------------------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
RAPPORTO ALDOSTERONE/RENINA Plasma EDTA congelato	2350	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) a temperatura ambiente, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

Il test deve sempre essere accettato contestualmente ai codici 624 Renina in Ortostatismo e 622 Aldosterone in Ortostatismo

VALORI DI RIFERIMENTO

(ng/L)/(mUI/L) < 20,6

Reazione di Widal (A.A. Salmonella) Siero	521	AGGLUTINAZIONE	4 gg	
--	-----	----------------	------	--

Quantità da prelevare: 700 µL
Se negativo risposta dopo 24 h.
Se positivo risposta dopo 48 h.

SYNLAB ITALIA

Non si esegue il sabato.

VALORI DI RIFERIMENTO

Salmonella typhi Ag O	≤ 1/40 Negativo 1/80 - 1/160 Dubbio > 1/160 Positivo
Salmonella typhi Ag H	≤ 1/40 Negativo 1/80 - 1/160 Dubbio > 1/160 Positivo
Salmonella paratyphi A totale	≤ 1/40 Negativo 1/80 - 1/160 Dubbio > 1/160 Positivo
Salmonella paratyphi B Ag O	≤ 1/40 Negativo 1/80 - 1/160 Dubbio > 1/160 Positivo
Salmonella paratyphi B Ag H	≤ 1/40 Negativo 1/80 - 1/160 Dubbio > 1/160 Positivo

Reazione di Wright (A.A Brucella IgG) Siero	151	AGGLUTINAZIONE	4 gg	
---	-----	----------------	------	--

Quantità da prelevare: 700 µL
Se negativo risposta dopo 24 h.
Se positivo risposta dopo 48 h.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

≤ 1/40 Negativo
1/80 - 1/160 Dubbio
> 1/160 Positivo

Recettore solubile Transferrina Siero	333	NEFELOMETRIA	2 gg	
---	-----	--------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 0,76 - 1,76

RENE - BIOPSIA RENALE CIT-RENE	IN10169	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

RENE - NEFRECTOMIA RADICALE CIT-RENE	IN10170	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 27_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
RENE - NEFRECTOMIA SEMPLICE CIT-RENE	IN10171	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 33_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

RENE - RESEZIONE PARZIALE RENE CIT-RENE	IN10172	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 33_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

RENINA DIRETTA IN CLINOSTATISMO Plasma EDTA congelato	6240	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
---	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mUI/L 2,80 - 39,90

RENINA DIRETTA IN ORTOSTATISMO Plasma EDTA congelato	624	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
--	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mUI/L 4,40 - 46,10

Resist. alla Proteina C attivata (APC-R) Plasma Citrato congelato	072	COAGULATIVO	6 gg	
---	-----	-------------	------	--

- Prelevare il sangue intero e dispensare in provetta da 5 ml con fondo a U contenente Na Citrato (1 parte di Na Citrato + 9 parti di sangue intero);
- agitare delicatamente per inversione almeno 3 volte;
- centrifugare immediatamente a 3000 giri per 10 minuti;
- prelevare una aliquota di surnatante di almeno 1 ml e centrifugare immediatamente a 3000 giri per 10 minuti;
- prelevare il surnatante e congelare rapidamente a - 20 °C;

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

RN $\geq 0,80$

Resistenza Osmotica Globulare Sangue Intero EDTA	024	FOTOMETRIA	3 gg	
--	-----	------------	------	--

- il prelievo deve essere assolutamente effettuato in provetta contenente K3 EDTA;
- il prelievo deve essere effettuato tassativamente nello stesso giorno della spedizione in service;
- non possono essere accettati campioni biologici inviati VENERDI e PREFESTIVI

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Test di Iper-resistenza	%	Lisi > 70%: R.O.E. Non aumentata Lisi tra 50% e 70%: R.O.E. moderatamente aumentata Lisi < 50%: R.O.E. molto aumentata
Test di Ipo-resistenza	%	Lisi > 30%: R.O.E. diminuita Lisi < 30%: R.O.E. non diminuita

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Reticolociti Sangue Intero EDTA	005	CITOMETRICO IN FLUORESCENZA	1 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

RETICOLOCITI	%	0,60 - 2,10
Reticolociti Val. Assoluto	10 ⁹ /L	34 - 102
IRF	%	2,7 - 13,8
RET-He	pg	29,3 - 35,4

RETTO - AMPUTAZIONE RETTO-SIGMA CIT-RETTO	IN10173	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
---	---------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 6_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

RETTO - AMPUTAZIONE RETTO-SIGMA PIU' CUTE PERIANALE CIT-RETTO	IN10174	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 6_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

RETTO - DIGERENTE BIOPSIA ENDOSCOPICA (SING.) CIT-RETTO	IN10175	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	16 gg	
---	---------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

RETTO - POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA (SING.) CIT-RETTO	IN10176	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	16 gg	
--	---------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Rhizopus Nigricans Siero	6M11	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
------------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

RHUMA PGx - Pannello farmacogenetica per antipiretici,antiinfiammatori,analgesici Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	8711	MASS-ARRAY	11 gg	
--	------	------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE (5 mL)
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario specifico per il test (INF_GEN018 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
RIARRANGIAMENTO IGH Test qualitativo su materiale biotico CIT-SOMA	8725	PCR E ANALISI DI FRAMMENTI	11 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE MATERIALE INCLUSO IN PARAFFINA				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
RIARRANGIAMENTO IGH TEST QUALITATIVO su sangue intero CIT-SOMA	8700	PCR E ANALISI DI FRAMMENTI	11 gg	
Quantità da prelevare: 2 CAMPIONI SANGUE EDTA o 1 SANGUE MIDOLLARE Utilizzare il sacchetto fucsia per l'invio dei campioni				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
RIARRANGIAMENTO TCR GAMMA TEST QUALITATIVO su sangue intero CIT-SOMA	8744	PCR E ANALISI DI FRAMMENTI	11 gg	
Quantità da prelevare: 2 CAMPIONI SANGUE EDTA o 1 SANGUE MIDOLLARE Utilizzare il sacchetto fucsia per l'invio dei campioni				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Riarrangiamento TCR GAMMA Test qualitativo su materiale biotico CIT-SOMA	2044	PCR E ANALISI DI FRAMMENTI	11 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE MATERIALE INCLUSO IN PARAFFINA				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Ricerca Adenovirus Feci	587	immunocromatografico	2 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
NEGATIVA				
Ricerca Adenovirus II campione Feci	5872	immunocromatografico	2 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
NEGATIVA				
Ricerca Adenovirus III campione Feci	5873	immunocromatografico	2 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
NEGATIVA				
Ricerca Antigene Helicobacter Pylori I Camp. Feci	592	CHEMILUMINESCENZA	4 gg	
				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Negativo				

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ricerca Antigene Helicobacter Pylori II Camp. Feci	5922	CHEMILUMINESCENZA	4 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

Ricerca Antigene Helicobacter Pylori III Camp. Feci	5923	CHEMILUMINESCENZA	4 gg	
---	------	-------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

Ricerca antigene Legionella Urine Mattino	1251	IMMUNOCROMATOGRAFIA	2 gg	
---	------	---------------------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

Ricerca Candida nelle feci Feci	B590		4-5 gg	
---	------	--	--------	--

Ricerca Candida nelle feci II campione Feci	B5901		5-6 gg	
---	-------	--	--------	--

Ricerca Candida nelle feci III campione Feci	B5902		5-6 gg	
--	-------	--	--------	--

Ricerca della variazione *C nel gene CYP1A2 Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	8377	RFLP PCR	11 gg	
--	------	----------	-------	--

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca della variazione *F (rs762551) nel gene CYP1A2 Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale	8378	REAL TIME PCR	11 gg	
---	------	---------------	-------	--

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca della variazione -1082G/A nel gene IL10 (interleuchina 10) Tampone Cavo Orale	8446	REAL TIME PCR	11 gg	
---	------	---------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ricerca della variazione 1533G/A nel gene CETP	8390	RFLP PCR	11 gg	
Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale				

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca della variazione 2282del4 nel gene FLG (filagrina)	8411	RFLP PCR	11 gg	
Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale				

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca della variazione -2578C/A nel gene VEGF	8516	RFLP PCR	11 gg	
Tampone Cavo Orale				

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca della variazione -278A/C nel gene CYP7A1	8395	RFLP PCR	11 gg	
Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale				

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca della variazione -308G/A (rs1800629) nel gene TNFa	8511	REAL TIME PCR	11 gg	
Tampone Cavo Orale				

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca della variazione 313 A>G (1578 A>G) nel gene GSTP (rs1695)	8421	REAL TIME PCR	11 gg	
Sangue Intero EDTA				

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca della variazione -634G>C nel gene VEGF	8517		11 gg	
Tampone Cavo Orale				

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca della variazione 844ins68 nel gene CBS	8387	REAL TIME PCR	11 gg	
Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale				

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ricerca della variazione 894G/T (rs1799983) nel gene NOS3	8483	RFLP PCR	11 gg	

Tampone Cavo Orale

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca della variazione A1166C nel gene AGTR1	8063	RFLP PCR	11 gg	
---	------	----------	-------	--

Tampone Cavo Orale

Quantità da prelevare: 1 TAMPONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca della variazione A2756G (rs1805087) nel gene MTR	8475	REAL TIME PCR	11 gg	
---	------	---------------	-------	--

Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca della variazione B/b (rs1544410) nel gene VDR	8514	REAL TIME PCR	11 gg	
--	------	---------------	-------	--

Tampone Cavo Orale

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca della variazione C699T nel gene CBS	8385	RFLP PCR	11 gg	
--	------	----------	-------	--

Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca della variazione F/f (rs2228570) nel gene VDR	8515	RFLP PCR	11 gg	
--	------	----------	-------	--

Tampone Cavo Orale

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca della variazione G-174C (rs1800795) nel gene IL6 (interleuchina 6)	8447	REAL TIME PCR	11 gg	
---	------	---------------	-------	--

Tampone Cavo Orale

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ricerca della variazione G-634C (rs1800796) nel gene IL6 (interleuchina 6)	8448	RFLP PCR	11 gg	

Tampone Cavo Orale

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca della variazione Gly972Arg (rs1801278) nel gene IRS-1	8452	RFLP PCR	11 gg	
--	------	----------	-------	--

Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca della variazione I/D (rs4646994) nel gene ACE	8049	REAL TIME PCR	11 gg	
--	------	---------------	-------	--

Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca della variazione I/D nella regione HTTLPR del gene SLC6A4	8504	PCR	11 gg	
--	------	-----	-------	--

Tampone Cavo Orale

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca della variazione I405V nel gene CETP	8389	RFLP PCR	11 gg	
---	------	----------	-------	--

Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca della variazione Ile349Val (rs698) nel gene ADH1C	8359	REAL TIME PCR	11 gg	
--	------	---------------	-------	--

Tampone Cavo Orale

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca della variazione Ins/Del nel gene GSTM	8420	REAL TIME PCR	11 gg	
---	------	---------------	-------	--

Tampone Cavo Orale

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ricerca della variazione Ins/Del nel gene GSTT Tampone Cavo Orale Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00	8422	REAL TIME PCR	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Ricerca della variazione Met235Thr (rs699) nel gene AGT Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00	8360	RFLP PCR	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Ricerca della variazione RS2046934 nel gene P2RY12 Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00	8485	PCR	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Ricerca della variazione S/s nel gene COL1A1 Tampone Cavo Orale Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00	8392	RFLP PCR	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Ricerca della variazione T1080C nel gene CBS Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00	8386	REAL TIME PCR	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Ricerca della variazione T-786C (rs2070744) nel gene NOS3 Tampone Cavo Orale Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00	8482	RFLP PCR	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Ricerca della variazione VNTR nell introne 4 (rs61722009) del gene NOS3 Tampone Cavo Orale Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00	8481	PCR	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ricerca della variazioni P nel gene ESR1 (Recettore degli Estrogeni di tipo 1)	8399	RFLP PCR	11 gg	

Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca della variazioni X nel gene ESR1 (Recettore degli Estrogeni di tipo 1)	8400	RFLP PCR	11 gg	
---	------	----------	-------	--

Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca Du variante	0232	AGGLUTINAZIONE SU COLONNA	3 gg	
----------------------------	------	---------------------------	------	--

Sangue Intero EDTA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ricerca eosinofili nel secreto nasale	034	MICROSCOPIA OTTICA	2 gg	
--	-----	--------------------	------	--

Tampone Nasale

Quantità da prelevare: 1 tampone + 1 vetrino
Necessario invio di 1 tampone + 1 striscio del materiale raccolto su vetrino

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

RICERCA EOSINOFILI SECRETO NASALE
Giudizio su materiale inviato

Negativa

Ricerca molecolare di HLA B*5701	6207	PCR	11 gg	
---	------	-----	-------	--

Sangue Intero EDTA

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

RICERCA MOLECOLARE QUALITATIVA DI VIRUS INFLUENZALI (SARS-CoV-2, FluA, FluB, RSV)	8796	REAL TIME PCR	3 gg	
--	------	---------------	------	--

Tampone naso-faringeo (Nasopharyngeal Swab)

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

SARS-CoV-2 RNA

Non rilevato

Virus dell'influenza A (FluA)

Limite di sensibilità (LoD): 673 UI/mL
Non rilevato

Virus dell'influenza B (FluB)

Limite di sensibilità (LoD): 189 copie/mL
Non rilevato

Virus respiratorio sinciziale (RSV)

Limite di sensibilità (LoD): 225 copie/mL
Non rilevato

Ricerca eseguita su :

Limite di sensibilità (LoD): 184 copie/mL

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Ricerca parassiti nelle urine Urine	029	MICROSCOPICO	3 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ricerca parassiti nelle urine II campione Urine	02901	MICROSCOPIA	3 gg	
---	-------	-------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ricerca parassiti nelle urine III campione Urine	02902	MICROSCOPIA	3 gg	
--	-------	-------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

RICERCA RIARRANGIAMENTI ALK e ROS1 su materiale biotico CIT-SOMA	8774	REAL TIME PCR	11 gg	
--	------	---------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE MATERIALE INCLUSO IN PARAFFINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

RICERCA RIARRANGIAMENTI ALK, ROS1, RET e MET su materiale biotico CIT-SOMA	8775	REAL TIME PCR	11 gg	
--	------	---------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE MATERIALE INCLUSO IN PARAFFINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Ricerca Rotavirus Feci	585	immunocromatografico	2 gg	
----------------------------------	-----	----------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

NEGATIVA

Rickettsia Conorii IgG-IgM (SYNLAB) Siero	5320	FIA	11 gg	
---	------	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anticorpi Anti-Rickettsia Conorii IgG	Titolo	< 1/64 Negativo
Anticorpi Anti-Rickettsia Conorii IgM	Titolo	< 1/64 Negativo

Rickettsia typhi IgG-IgM (SYNLAB) Siero	532	FIA	10 gg	
---	-----	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anticorpi Anti-Rickettsia Typhi IgG	Titolo	< 1/64 Negativo
Anticorpi Anti-Rickettsia Typhi IgM	Titolo	< 1/64 Negativo

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Rickettsiosis Screening (Conorii-Typhi IgG - IgM) (SYNLAB) Siero	464	FIA	11 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anticorpi Anti-Rickettsia Conorii IgG	Titolo	< 1/64 Negativo
Anticorpi Anti-Rickettsia Conorii IgM	Titolo	< 1/64 Negativo
Anticorpi Anti-Rickettsia Typhi IgG	Titolo	< 1/64 Negativo
Anticorpi Anti-Rickettsia Typhi IgM	Titolo	< 1/64 Negativo

Riso Siero	6F9	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
----------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

RIVAROXABAN (Xarelto) Plasma Citrato congelato	1937	CROMOGENICO	3 gg	
--	------	-------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL di plasma citrato separato e congelato
Compilare la Scheda anamnestica paziente SCHEAN019

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	ng/mL	Per dosaggio 20 mg/die Picco : 184 - 343 Valle : 12 - 137
		Per dosaggio 15 mg/die Picco : 178 - 313 Valle : 18 - 136

Rosolia IgG e IgM Siero	1516	CMIA	2 gg	
-----------------------------------	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Anticorpi Anti Rosolia IgG	UI/mL	< 4,9 Negativo 5,0 - 9,9 Dubbio ≥ 10,0 Positivo
Anticorpi Anti Rosolia IgM	Index	< 1,20 Negativo 1,20 - 1,60 Dubbio ≥ 1,60 Positivo

Rosolia RNA (SYNLAB) Sangue Intero EDTA	1131	PCR	16 gg	
---	------	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 5 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

RUBELLA IgG AVIDITY Siero	411	IMMUNOENZIMATICO	3 gg	
-------------------------------------	-----	------------------	------	--

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	%	≤ 30 Bassa avidità Fortemente indicativa di infezione avvenuta nei 3 mesi precedenti
		30 - 40 Avidità intermedia
		> 40 Alta avidità Fortemente indicativa di infezione pregressa avvenuta almeno 4 mesi prima

VADEMECUM GENERALE

R

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
RUBELLA IgG AVIDITY per reflex Siero	2298	IMMUNOENZIMATICO	3 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

%

≤ 30 Bassa avidità
Fortemente indicativa di infezione
avvenuta nei 3 mesi precedenti

30 - 40 Avidità intermedia

> 40 Alta avidità
Fortemente indicativa di infezione
pregressa avvenuta almeno 4 mesi
prima

RUCOLA(LERUCA VESICARIA) Siero	6F406	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Rumex Acetoscella (Acetosa Minore) Siero	6W18	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

S.H.B.G. (Sex Hormone Binding Globulin) Siero	6190	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
---	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

nmol/L

Maschi:
0 - 49 anni: 11,5 - 54,5
oltre i 50 anni: 17,3 - 71,5

Femmine:
0 - 49 anni: 17,7 - 138,3
oltre i 50 anni: 23,7 - 110,6

Salicilati Siero	676	ENZIMATICO	2 gg	
----------------------------	-----	------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

Il prelievo non può essere effettuato in provette con gel separatore in quanto quest'ultimo può modificare il dosaggio del farmaco nel siero e quindi il risultato dell'esame effettuato con queste provette non è attendibile.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

Concentrazione terapeutica :
fino a 30,0

Salix Caprea (Salice) Siero	6T12	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---------------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Salmone Siero	6F41	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

VADEMECUM GENERALE

S

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Salmonelle da coltura identificazione sierologica Piastra Seminata#	B502		5-6 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

Salmonelle esame colturale Feci	B5036		5-6 gg	
---	-------	--	--------	--

Salmonelle esame colturale II campione Feci	B503601		5-6 gg	
---	---------	--	--------	--

Salmonelle esame colturale III campione Feci	B503602		5-6 gg	
--	---------	--	--------	--

Salsola Kali (Erba Cali) Siero	6W11	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

SALVIA (SALVIA OFFICINALIS) Siero	6F344	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Sardina Siero	6F61	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

SARS-CoV-2 RNA (Rilevazione Covid 19) Tampone naso-faringeo (Nasopharyngeal Swab)	8758	REAL TIME PCR	3 gg	
---	------	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 campione
limite di sensibilità (tampone naso faringeo): 100 copie/ml
limite di sensibilità (saliva): 714 copie/ml

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

SARS-CoV-2 RNA

Non rilevato

Limite di sensibilità (LoD): 100 copie/mL

Ricerca eseguita su :

VADEMECUM GENERALE

S

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
SARS-COV-2 TOTAL (Siemens) Siero	2184	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Indice < 1 Negativo

SCAGLIOLA (PHALARIS ARUNDINACEA) Siero	6G71	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe kU/L

SCLEROSI TUBEROSA : ricerca di mutazioni nei geni TSC1 e TSC2 Sangue Intero EDTA	2066	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	
--	------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE
Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Scotch Test Feci	518	MICROSCOPICO	3 gg	
----------------------------	-----	--------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

Scotch Test II campione Feci	5182	MICROSCOPICO	3-4 gg	
--	------	--------------	--------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

Scotch Test III campione Feci	5183	MICROSCOPICO	3-4 gg	
---	------	--------------	--------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

Screening 2 Droghe d'abuso Medicina Del Lavoro Urine	6218	IMMUNOENZIMATICO	3 gg	
--	------	------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Opiacei	ng/mL	Fino a 300 Negativo
Cocaina	ng/mL	Fino a 300 Negativo
Cannabinoidi	ng/mL	Fino a 50 Negativo
Amfetamine/Metamfetamine	ng/mL	Fino a 500 Negativo
MDMA (Ecstasy)	ng/mL	Fino a 500 Negativo
Metadone	ng/mL	Fino a 300 Negativo
CREATININA	mg/dL	> 0 = 20

VADEMECUM GENERALE

S

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Screening Multiallergenico Qualitativo Adulti	1034	CHEMILUMINESCENZA	4 gg	

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

Screening Multiallergenico Qualitativo Pediatrico	1035	CHEMILUMINESCENZA	4 gg	
--	------	-------------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

Secale Cereale (Segale)	6G12	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------------	------	-------------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L

Classe

Sedano	6F85	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---------------	------	-------------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L

Classe

Segale	6F5	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---------------	-----	-------------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L

Classe

SELENIO Sierico	757	ASSORBIMENTO ATOMICO	8 gg	
------------------------	-----	----------------------	------	--

Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

Utilizzare provetta specifica Metal Free (cod. SAP 600068373).

Subito dopo il prelievo la provetta non deve essere aperta, travasata o aliquotata, ma inviata tale quale al laboratorio

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Popolazione generale :
< 159

Soggetti professionalmente esposti :
Valore limite non proposto

Semi di finocchio	6F219	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------	-------	-------------------	------	--

Plasma, Siero

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L

Classe

VADEMECUM GENERALE

S

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Semi di papavero Plasma, Siero Quantità da prelevare: 1 mL	6F224	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO Concentrazione kU/L Classe				
Semi di soia Siero Quantità da prelevare: 1 mL	6F14	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO Concentrazione kU/L Classe				
Senape Siero Quantità da prelevare: 1 mL	6F89	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO Concentrazione kU/L Classe				
Sensitivity Check DNA Kit Saliva per Test Genetici, Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale Quantità da prelevare: 2 campioni LINEA IUNIC Compilare il modulo di consenso esami genetici SCHEACC034 + consenso informato (INF_GEN20 Synlab o consenso dello specialista)	8718	MASS-ARRAY	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
SERINA Plasmatica (SYNLAB) Plasma EDTA congelato Quantità da prelevare: 1 mL Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.	884	LC/MS	15 gg	SYNLAB GERMANIA
VALORI DI RIFERIMENTO Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
SERINA Urinaria (SYNLAB) Urine Quantità da prelevare: 5 mL Congelare.	8840	LC-MS	16 gg	SYNLAB GERMANIA
VALORI DI RIFERIMENTO Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
Serotonina Siero congelato Quantità da prelevare: 1 mL Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.	6303	HPLC	9 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO µg/L 117,5 - 193,3				
Serotonina anticorpi IgG (SYNLAB) Siero Quantità da prelevare: 1 mL	1059	EIA	11 gg	SYNLAB GERMANIA
VALORI DI RIFERIMENTO OD < 200 Negativo				

VADEMECUM GENERALE

S

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Serotonina anticorpi IgM (SYNLAB) Siero	1058	EIA	11 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

OD < 200 Negativo

Serotonina urine 24H Urine 24h Acidificate	630	HPLC	9 gg	
--	-----	------	------	--

La raccolta del campione di urine delle 24 h prevede l' acidificazione delle urine stesse. L' acidificazione viene effettuata versando nel recipiente, prima di iniziare la raccolta, circa 5 ml di HCl 5 M per ogni litro di urina (4 cucchiaini di acido muriatico del commercio). Prelevare un'aliquota di circa 10 ml di urina delle 24 h acidificata con l'indicazione della diuresi totale ed inviare in apposito contenitore di trasporto.

A partire dalle 48 ore precedenti l'inizio e per tutto il tempo di raccolta delle urine è necessario osservare una dieta priva dei seguenti alimenti: ananas, avocado, banane, kiwi, more, prugne rosse, melanzane, pomodori, frutta secca, caffè, tè, cioccolato. Durante questo periodo si consiglia, previa consultazione del medico, di evitare l'assunzione di farmaci, in caso contrario, è opportuno comunicare il nome dei farmaci assunti al momento dell'esame

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/24h 50,0 - 250,0

Sertralina (SYNLAB) Siero	1117	LC-MS	6 gg	
-------------------------------------	------	-------	------	--

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 10,0 - 150,0

Sesamo Siero	6F10	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe kU/L

Seta Siero	6K74	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
----------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe kU/L

Sgombro Siero	6F206	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe kU/L

Sideremia (Ferro Sierico) Siero	330	FERENE	1 gg	
---	-----	--------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/dL Maschi: 65 - 175 Femmine: 50 - 170

Siero di latte Siero	6F236	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe kU/L

VADEMECUM GENERALE

S

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
SINDROME DI BRUGADA - pannello NGS Sangue Intero EDTA Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)	2082	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
SINDROME DI FABRY : ricerca di mutazioni nel gene GLA Sangue Intero EDTA Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)	2070	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
SINDROME DI GILBERT Sangue Intero EDTA Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Compilare il modulo di consenso privacy esami genetici INF_GEN00 da conservare presso la struttura + inviare consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista).	1637	REAL TIME PCR	11 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
SINDROME DI LI FRAUMENI : ricerca di mutazioni nei geni CHECK2, TP53 Sangue Intero EDTA Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)	2098	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
SINDROME DI NOONAN : ricerca di mutazioni in pannello di geni Sangue Intero EDTA Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)	2064	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
SINDROME DI PEUTZ-JEGHERS : ricerca di mutazioni nel gene STK11 Sangue Intero EDTA Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)	2068	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
SINDROME DI SMITH-LEMLI-OPITZ : ricerca di mutazioni nel gene DHCR7 Sangue Intero EDTA Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN20 Synlab oppure consenso dello specialista)	2067	SEQUENZIAMENTO MEDIANTE NEXT GENERATION	32 gg	SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				

VADEMECUM GENERALE

S

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Sirolimus (Rapamune) Sangue Intero EDTA	499	LC-MS-MS	6 gg	

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 3,0 - 30,0

SISTEMA NERVOSO - BIOPSIA A CIELO APERTO CIT-SISTEMA NERVOSO	IN10178	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 24_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

SISTEMA NERVOSO - BIOPSIA STEREOTASSICA CIT-SISTEMA NERVOSO	IN10179	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 25_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

SISTEMA NERVOSO - ESCISSIONE TUMORALE CIT-SISTEMA NERVOSO	IN10180	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

SMALL DENSE LDL CHOLESTEROL Siero	4560	ENZIMATICO	3 gg	
---	------	------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL Maschi: 8,0 - 43,0 Femmine: 6,9 - 36,0

SNP - BIOPSIA DI NERVO PERIFERICO CIT-SNP	IN10181	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

SNP - ESCISSIONE DI NEOFORMAZIONE NERVO CIT-SNP	IN10182	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

SNP - GANGLIECTOMIA SISTEMA NERVOSO PERIFERICO CIT-SNP	IN10183	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Sodiemia (Na) Siero	241	POTENZIOMETRIA INDIRETTA	1 gg	
---------------------------------	-----	-----------------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/L 136 - 146

VADEMECUM GENERALE

S

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Sodio urinario (Na) Urine 24h	251	ELETTRODI IONOSELETTIVI DILUITI (INDIRETTA)	2 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/24h 40 - 220

SODIO URINARIO SU CAMPIONE ESTEMPORANEO Urine	2245	POTENZIOMETRIA INDIRETTA	1 gg	
---	------	-----------------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mmol/L > 20

Sogliola Siero	6F337	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Solenopsis Invicta (Formica) Siero	6I70	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Solidago (Verga d'Oro) Siero	6W12	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

SOMA - ALLESTIMENTO PREPARATI ISTOCHIMICI CIT-SOMA	IN10184	COLORAZIONI ISTOCHIMICHE	6 gg	
--	---------	-----------------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 BLOCCHETTO IN PARAFFINA / 1 VETRINO PARAFFINATO
Codice SIAPEC : 3_AP9

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

SOMA - ALLESTIMENTO PREPARATI IIC CIASCUNO CIT-SOMA	IN10185	COLORAZIONI IMMUNOCITOSITOCHEMICH E	6 gg	
---	---------	---	------	--

Quantità da prelevare: 1 BLOCCHETTO IN PARAFFINA / 1 VETRINO PARAFFINATO
Codice SIAPEC : 5_AP9

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

SOMA - ALLESTIMENTO PREPARATI IIC CIASCUNO + VALUTAZIONE CIT-SOMA	IN10186	COLORAZIONI IMMUNOCITOCHIMICHE + VALUTAZIONE	8 gg	
---	---------	--	------	--

Quantità da prelevare: 1 BLOCCHETTO IN PARAFFINA / 1 VETRINO PARAFFINATO
Codice SIAPEC : 3_AP9

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VADEMECUM GENERALE

S

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
SOMA - ALLESTIMENTO PREPARATI ISTOLOGICI (TAGLIO + EE)	IN10187	COLORAZIONE CON EE	13 gg	

CIT-SOMA

Quantità da prelevare: 1 BLOCCHETTO IN PARAFFINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

SOMA - CONSULENZA CITOLOGICA	IN10146	COLORAZIONE CON EE	13 gg	
-------------------------------------	---------	--------------------	-------	--

CIT-SOMA

Quantità da prelevare: 1 BLOCCHETTO IN PARAFFINA / 1 VETRINO PARAFFINATO

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

SOMA - CONSULENZA ISTOLOGICA	IN10076	COLORAZIONE CON EE	20 gg	
-------------------------------------	---------	--------------------	-------	--

CIT-SOMA

Quantità da prelevare: 1 BLOCCHETTO IN PARAFFINA / 1 VETRINO PARAFFINATO

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

SOMA - CRIOSTATO	IN10188	CONGELAMENTO +TAGLIO + COLORAZIONE CON EE	4 gg	
-------------------------	---------	---	------	--

CIT-SOMA

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE DI MATERIALE A FRESCO

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

SOMA - EGFR	IN10025	COLORAZIONE IMMUNOCITOCHIMICA	18 gg	
--------------------	---------	-------------------------------	-------	--

CIT-SOMA

Quantità da prelevare: 1 BLOCCHETTO IN PARAFFINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

SOMA - FNAC LETTURA	IN10189	COLORAZIONE CON EE	8 gg	
----------------------------	---------	--------------------	------	--

CIT-SOMA

Quantità da prelevare: VETRINI O 1 CONTENITORE CYTOLYT/PRESERVCYT

SYNLAB ITALIA

91.39.C ESAME CITOLOGICO DA AGOASPIRATO APPARATO RESPIRATORIO (cod. SISS 009139C)
91.39.F ESAME CITOLOGICO DA AGOASPIRATO APPARATO DIGERENTE (cod. SISS 009139F)
91.39.G ESAME CITOLOGICO DA AGOASPIRATO DI ALTRI ORGANI O SEDI (cod. SISS 009139G)
91.39.L ESAME CITOLOGICO DA AGOASPIRATO DI TESSUTO EMOPOIETICO (cod. SISS 009139L)
91.39.N ESAME CITOLOGICO DA AGOASPIRATO DELLA TIROIDE (cod. SISS 009139N)

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

SOMA - ONCOTYPE	IN10312	REAL TIME PCR	16 gg	
------------------------	---------	---------------	-------	--

CIT-SOMA

Quantità da prelevare: 1 BLOCCHETTO IN PARAFFINA
Inviare il consenso sanitario specifico per il test (CONS_INF20 Synlab oppure consenso dello specialista).

SYNLAB ITALIA

A test concluso, il blocchetto verrà restituito al centro inviante

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

S

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
SOMA - PANNELLO LINFONODO (FINO A 6 IIC) CIT-SOMA	IN10233	COLORAZIONE IMMUNICITOCHIMICA	18 gg	
Quantità da prelevare: 1 BLOCCHETTO IN PARAFFINA Codice SIAPEC : 8_AP9				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
SOMA - PANNELLO MICROSATELLITI IIC CIT-SOMA	IN10308	COLORAZIONE IIC E MICROSCOPIA OTTICA	18 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE ISTOLOGICO O INCLUSO IN PARAFFINA				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
SOMA - PANNELLO RECETTORI DELLA MAMMELLA CIT-MAMMELLA	IN10260	4 COLORAZIONI IMMUNICITOCHIMICHE	18 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE ISTOLOGICO O INCLUSO IN PARAFFINA				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
SOMA - PDL1 CIT-SOMA	IN10311	IMMUNOISTOCHIMICO CON LETTURA MICROSCOPICA	18 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA RIPORTARE IL CODICE ESAME DI ANATOMIA INTERESSATO DALLA RICERCA				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche				
SOMA - PRELIEVO IN SEDE DI INTERVENTO COMPLESSO CIT-SOMA	IN10023		10 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
SOMA - RISCONTRO DIAGNOSTICO (AUTOPSIA) CIT-SOMA	IN10191	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	25 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 1_AP7				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
SOMA - TECNICHE PARTICOLARI SISH HER2 CIT-SOMA	IN10190	IBRIDAZIONE IN SITU NON FLUORESCENTE	8 gg	
Quantità da prelevare: 1 BLOCCHETTO IN PARAFFINA				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
SOMA - VERSAMENTO/SECRETI/SCRAPING/BAL CIT-SOMA	IN10192	COLORAZIONE CON EE	10 gg	
Quantità da prelevare: VETRINI O 1 CONTENITORE CYTOLYT/PRESERV CYT				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				

VADEMECUM GENERALE

S

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Somatomedina C (IGF-1) Siero congelato	642	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Uomini :
0-5 anni: 11-233
6-8 anni: 17-347
9-11 anni: 23-459
12-15 anni: 49-520
16-20 anni: 119-395
21-24 anni: 127-298
25-54 anni: 99-214
> 55 anni : 61-177

Donne :
0-5 anni: 8-251
6-8 anni: 24-396
9-11 anni: 49-549
12-15 anni: 90-564
16-20 anni: 122-372
21-24 anni: 107-317
25-54 anni: 100-233
> 55 anni: 49-167

SORDITÀ EREDITARIA NON SINDROMICA: Sequenziamento completo GJB2 (CX26) e ricerca delezione D13S1830	8393	PCR E SEQUENZIAMENTO DIRETTO E INVERSO	11 gg	
--	------	--	-------	--

Liquido Amniotico, Sangue Intero EDTA, Villi coriali

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario dello specialista

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Sorghum Halepense Siero	6G10	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-----------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione

kU/L

Classe

Sostanze stupefacenti valenza clinica-Intestazione -CL Amministrativo	1543		2 gg	
---	------	--	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Valenza

Data prelievo

Zona del prelievo

Lunghezza

cm

Colore

Trattamento cosmetico

Segmento analizzato da

cm

a

cm

VADEMECUM GENERALE

S

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
SOSTANZE STUPEFACENTI-INTESTAZIONE ML Amministrativo	1513		2 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Valenza
Data prelievo
Documento di riconoscimento
Identificativo documento
Zona del prelievo
Lunghezza cm
Colore
Trattamento cosmetico
Segmento analizzato da
a cm

Spinacio Siero	6F214	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Sport Profile Tampone Cavo Orale, Tampone a secco orale	G0004	PCR REAL TIME	11 gg	
---	-------	---------------	-------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e
cliniche

Stagno (SYNLAB) Siero	390	ASSORBIMENTO ATOMICO	8 gg	
---------------------------------	-----	----------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L < 2,00

Stemphylium Botryosum Siero	6M10	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---------------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Stima del filtrato Glomerulare Siero	1634	CALCOLO DERIVATO	1 gg	
--	------	------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mL/min/1,73m2

STOMACO - DIGERENTE BIOPSIA ENDOSCOPICA (SING.) CIT-STOMACO	IN10193	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	16 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e
cliniche

VADEMECUM GENERALE

S

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
STOMACO - GASTRECTOMIA PARZIALE CIT-STOMACO	IN10194	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Cod. SIAPEC: 9_AP5				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
STOMACO - GASTRECTOMIA SUBTOTALE CIT-STOMACO	IN10195	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 9_AP5				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
STOMACO - GASTRECTOMIA TOTALE CIT-STOMACO	IN10196	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 9_AP5				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
STOMACO - GASTRECTOMIA TOTALE ALLARGATA CIT-STOMACO	IN10197	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 9_AP5				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
STOMACO - GASTRORESEZIONE CIT-STOMACO	IN10198	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA Codice SIAPEC : 9_AP5				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
STOMACO - POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA (SING.) CIT-STOMACO	IN10199	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	16 gg	
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA				
VALORI DI RIFERIMENTO				
Vedi Allegato				
Streptococcus Pneumoniae Ag urinario Urine Mattino	6198	IMMUNOCROMATOGRAFIA	3 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
Negativo				
Streptococcus pyogenes nel tampone faringeo Tampone Faringeo	B5033		4-5 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
Negativo				
STREPTOCOCCUS PYOGENES NEL TAMPONE FARINGEO veloce Tampone Faringeo	1011	IMMUNOCROMATOGRAFICO	1 gg	
VALORI DI RIFERIMENTO				
Negativo				

VADEMECUM GENERALE

S

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Streptozyme Siero	106	EMOAGGLUTINAZIONE	3 gg	

Quantità da prelevare: 500 µL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Titolo
≤ 1/100 Negativo
> 1/100 Positivo

STRONGILOIDIASI IgG - IgM (SYNLAB) Siero	1161	EIA	14 gg	
--	------	-----	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 9,0

STRONGILOIDIASI TEST DI CONFERMA (SYNLAB) Siero	1056	IMMUNOBLOTTING	11 gg	
---	------	----------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

STRONZIO Urine Fine Turno (SYNLAB) Urine F.T.	7800	ICPMS	16 gg	
---	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 20 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

STRONZIO Urine Fine Turno µg/L 39 - 346
Creatinina Fine Turno g/L 0,57 - 2,95
Stronzio/Creatinina Fine Turno µg/g creatinina

STRONZIO Urine Inizio Turno (SYNLAB) Urine I.T.	780	ICPMS	16 gg	
---	-----	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 20 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

STRONZIO Urine Inizio Turno µg/L 39 - 346
Creatinina Inizio Turno g/L 0,57 - 2,95
Stronzio/Creatinina Inizio Turno µg/g creatinina

SURRENE - AGOBIOPSIA SURRENE CIT-SURRENE	IN10200	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 13_AP3

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

SURRENE - SURRENECTOMIA CIT-SURRENE	IN10201	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 12_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Tabanus Species (Tafano) Siero	6I204	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Tacrolimus (FK506) Sangue Intero EDTA	685	LC-MS-MS	6 gg	

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL 2,0 - 20,0

Tampone vagino-rettale - Ricerca Streptococcus agalactiae Tampone Vagino-Rettale	B506	COLTURALE	4-5 gg	
--	------	-----------	--------	--

Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)

Tampone vagino-rettale - Ricerca Streptococcus agalactiae Il Campione	B5061		5-6 gg	
--	-------	--	--------	--

Tampone Rettale, Tampone Vaginale, Tampone Vagino-Rettale

Utilizzare Tampone Tappo Rosa (cod. SAP 500003323)

Taraxacum Vulgare Siero	6W8	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-----------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

TAURINA Plasmatica (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	885	LC/MS	15 gg	
---	-----	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

TAURINA Urinaria (SYNLAB) Urine Congelate	8850	LC-MS	15 gg	
---	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL
Congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

TBG Siero	6140	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
---------------------	------	-------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 13,0 - 39,0

Teicoplanina (SYNLAB) Siero congelato	450	TURBIDIMETRIA	11 gg	
---	-----	---------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 10,0 - 60,0
Range di tossicità : > 60,0

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Tempo di Protrombina (P.T.) Plasma Citratato	016	COAGULATIVO	1 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

INR (International Normalised Ratio) Ratio	INR Ratio	0,90 - 1,20
---	--------------	-------------

Tempo di Tromboplastina (P.T.T.) Plasma Citratato	017	COAGULATIVO	1 gg	
---	-----	-------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Ratio	0,80 - 1,20
-------	-------------

TENUE - DIGERENTE BIOPSIA ENDOSCOPICA (SING.) CIT-TENUE	IN10318	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	16 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

TENUE - RESEZIONE ILEO COLICA (CON O SENZA LINFOADENECTOMIA) CIT-TENUE	IN10208	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 10_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

TENUE - RESEZIONE SEGMENTARIA TENUE CIT-TENUE	IN10209	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 10_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Teofillina Siero	678	EMIT	3 gg	
----------------------------	-----	------	------	--

Non si esegue il sabato

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/mL	10 - 20 Concentrazione terapeutica > 20 Concentrazione tossica
-------	---

TESSUTI MOLLI - AGOBIOPSIA TESSUTI MOLLI CIT-T.MOLLI	IN10202	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

TESSUTI MOLLI - BIOPSIA ESCISS.TESSUTI MOLLI CIT-T.MOLLI	IN10204	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	16 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
TESSUTI MOLLI - BIOPSIA INCIS. TESSUTI MOLLI CIT-T.MOLLI	IN10205	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

TESSUTI MOLLI - ESCISSIONE ALLARGATA DI NEOFORMAZIONE TESSUTI MOLLI CIT-T.MOLLI	IN10207	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
---	---------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Test di Disomia Uniparentale del Cromosoma 15 Sangue Intero EDTA	8513	PCR E ANALISI DI FRAMMENTI	16 gg	
--	------	----------------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

Compilare il modulo di consenso esami genetici INF_GEN00 + consenso informato sanitario dello specialista

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Test di Familiarità - referto nominale e legale Liquido Amniotico, Sangue Intero EDTA, Tampone Cavo Orale, Villi coriali	8495	PCR E ANALISI DI FRAMMENTI	11 gg	
--	------	----------------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 2 CAMPIONI

Inviare il consenso sanitario specifico per il test (INF_GEN16 Synlab oppure consenso dello specialista) necessariamente firmato e timbrato da un medico specialista o genetista (biologo o medico). In caso contrario, l'esecuzione del test verrà bloccata e verrà emessa non conformità.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Test di gravidanza Urine	451	IMMUNOCROMATOGRAFICO	1-2 gg	
------------------------------------	-----	----------------------	--------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Test di Nordin Urine 2h	NORDIN	CALCOLO DERIVATO	8 gg	
-----------------------------------	--------	------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Calciuria / Creatininuria	mg/mg creat.	0,020 - 0,200
Idrossiprolinuria / Creatininuria	mg/g creat.	8,0 - 20,0

TEST MULTIALLERGENICO ALEX² Siero	2275	DOSAGGIO IMMUNOLOGICO SU FASE SOLIDA	4 gg	
--	------	--------------------------------------	------	--

Quantità da prelevare: 2 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

TESTICOLO - AGOBIOSPIA TESTICOLO CIT-TESTICOLO	IN10210	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
TESTICOLO - BIOPSIA ANNESSI TESTICOLARI CIT-TESTICOLO	IN10211	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

TESTICOLO - BIOPSIA BILATERALE TESTICOLO CIT-TESTICOLO	IN10212	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

TESTICOLO - BIOPSIA TESTICOLARE CIT-TESTICOLO	IN10213	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

TESTICOLO - EMASCU LAZIONE CIT-TESTICOLO	IN10214	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 24_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

TESTICOLO - ORCHIECTOMIA BILAT. PER CASTRAZIONE TERAPEUTICA CIT-TESTICOLO	IN10215	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 31_AP2

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

TESTICOLO - ORCHIECTOMIA SEMPLICE CIT-TESTICOLO	IN10216	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 34_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

TESTICOLO - ORCHIFUNICOLECTOMIA ALLARGATA CIT-TESTICOLO	IN10217	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 28_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Testosterone libero Siero	6211	CHEMILUMINESCENZA	4 gg	
-------------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L

Uomini:
18 - 39 anni: 12,3 - 46,6
40 - 59 anni: 9,57 - 40,6
≥ 60 anni: 7,72 - 31,4

Donne:
18 - 39 anni: < 5,45
≥ 40 anni: < 4,43

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Testosterone plasmatico Siero	621	CMIA	1 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

TESTOSTERONE Plasmatico	ng/mL	Maschi: Uomini 21 - 49 anni : 2,17 - 11,65 Uomini ≥ 50 anni : 1,80 - 11,43	Femmine: Donne 21 - 49 anni : 0,07 - 0,49 Donne ≥ 50 anni : 0,09 - 0,37
	nmol/L	Maschi: Uomini 21 - 49 anni : 7,52 - 40,41 Uomini ≥ 50 anni : 6,25 - 39,63	Femmine: Donne 21 - 49 anni : 0,24 - 1,70 Donne ≥ 50 anni : 0,31 - 1,28

TETANO Abs IgG Siero	144	ELISA	3 gg	
--------------------------------	-----	-------	------	--

- Quantità da prelevare: 700 µL
- Osservare un digiuno 8-12 ore prima del prelievo
 - evitare di sostenere sforzi fisici nelle 12 ore prima del prelievo
 - non fumare nel periodo di tempo intercorrente tra il risveglio e l'effettuazione del prelievo
 - non assumere alcool nelle 12 ore precedenti il prelievo.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL	< 0.1 Protezione non affidabile.
	0.1 - 0.49 Protezione affidabile. Richiamo e controllo della concentrazione di anticorpi raccomandato dopo 4-6 settimane.
	0,5 - 0,99 Protezione affidabile. Controllo dopo 2 anni
	1,0 - 5,0 Protezione a lungo termine. Controllo dopo 5-10 anni
	> 5,0 Protezione a lungo termine. Controllo dopo 10 anni

TETRAIDROFURANO Urine Fine Turno Urine F.T.	79340	GC	8 gg	
---	-------	----	------	--

- Quantità da prelevare: 10 mL
- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
 - Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L	Soggetti professionalmente esposti: < 2 (f.t.)
------	---

TETRAIDROFURANO Urine Inizio Turno Urine I.T.	7934	GC	8 gg	
---	------	----	------	--

- Quantità da prelevare: 10 mL
- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
 - Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L	Soggetti professionalmente esposti: < 2 (f.t.)
------	---

The' Siero	6F222	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
----------------------	-------	-------------------	------	--

- Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione Classe	kU/L
--------------------------	------

TIBC-Capacita' ferro legante Siero	3310	FERENE	2 gg	
--	------	--------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/dL	250 - 450
-------	-----------

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Tiglia Cordata (Tiglio) Siero	6T208	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione	kU/L			
Classe				
Timidina Chinasi (SYNLAB) Siero	398	IMMUNOLUMINESCENZA	16 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB GERMANIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
	U/L	< 7,50		
Timo Plasma, Siero	6F273	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione	kU/L			
Classe				
Tiocianati sierici (SYNLAB) Siero	6562	GC-MS	16 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB GERMANIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
	mg/L	Intervallo terapeutico : 5,0 – 30,0 Tossicità : > 50,0 Non fumatori : 1,0 – 4,0 Fumatori : 3,0 – 12,0		
TIOCIANATI Urine Fine Turno Urine F.T.	65619	GC	8 gg	
Quantità da prelevare: 10 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
	mg/L	Non fumatori : < 4 Fumatori : < 17		
TIOCIANATI Urine Inizio Turno Urine I.T.	65609	GC	8 gg	
Quantità da prelevare: 10 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
	mg/L	Non fumatori : < 4 Fumatori : < 17		
Tipizzazione linfoc. singola CD3+HLA DR+ (linfociti T attivati) Sangue Intero EDTA	0612	CITOFUORIMETRICO	6 gg	
Il prelievo deve essere eseguito nel seguente modo: - prelevare assolutamente in K3 EDTA; - volume minimo 3 ml; - temperatura di conservazione + 4° C; - il prelievo deve essere tassativamente eseguito nello stesso giorno della spedizione in service; - non possono essere accettati campioni biologici inviati VENERDI' e PREFESTIVI.				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
	%	1,00 - 18,00		

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Tipizzazione linfocitaria singola B Totali (CD3-CD19+) Sangue Intero EDTA	0614	CITOFUORIMETRICO	6 gg	

Quantità da prelevare: 3 mL
- prelevare assolutamente in K3 EDTA;
- volume minimo 3 ml;
- temperatura di conservazione 4° C;
- il prelievo deve essere tassativamente eseguito nello stesso giorno della spedizione in service;
- non possono essere accettati campioni biologici inviati VENERDI e PREFESTIVI

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

LINFOCITI B (CD3- CD19+)	%	1 - 23 mesi: 22 - 29 2 - 6 anni: 16 - 24 7 - 17 anni: 13 - 19
	10 ⁹ /L	Adulti: 5 - 20 1 - 23 mesi: 1,00 – 1,60 2 - 6 anni: 0,44 – 0,77 7 - 17 anni: 0,26 – 0,51 Adulti: 0,07 – 0,52

Tipizzazione linfocitaria singola T Natural Killer (CD3-CD56+CD16+) Sangue Intero EDTA	0613	CITOFUORIMETRICO	6 gg	
--	-------------	-------------------------	-------------	--

Quantità da prelevare: 3 mL
Il prelievo deve essere eseguito nel seguente modo:
- prelevare assolutamente in K3 EDTA;
- volume minimo 3 ml;
- temperatura di conservazione + 4° C;
- il prelievo deve essere tassativamente eseguito nello stesso giorno della spedizione in service;
- non possono essere accettati campioni biologici inviati VENERDI e PREFESTIVI.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

LINFOCITI NATURAL KILLER (CD3- CD56+/CD16+)	%	1 - 23 mesi: 7 - 21 2 - 6 anni: 7 - 14 7 - 17 anni: 7 - 15
	10 ⁹ /L	Adulti: 4 - 28 1 - 23 mesi: 0,27 – 1,10 2 - 6 anni: 0,19 – 0,36 7 - 17 anni: 0,18 – 0,34 Adulti: 0,07 – 0,65

Tipizzazione Linfocitaria Singola T3 (CD3+) Sangue Intero EDTA	0606	CITOFUORIMETRICO	6 gg	
--	-------------	-------------------------	-------------	--

Quantità da prelevare: 3 mL
- prelevare assolutamente in K3 EDTA;
- volume minimo 3 ml;
- temperatura di conservazione + 4° C;
- il prelievo deve essere tassativamente eseguito nello stesso giorno della spedizione in service;
- non possono essere accettati campioni biologici inviati VENERDI e PREFESTIVI

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

LINFOCITI T TOTALI (CD3+)	%	1 – 23 mesi: 56 - 64 2 – 6 anni: 66 - 72 7 – 17 anni: 68 - 74
	10 ⁹ /L	Adulti: 60 - 87 1 - 23 mesi: 2,40 - 3,30 2 - 6 anni: 1,50 - 2,50 7 - 17 anni: 1,40 - 2,20 Adulti: 0,61 – 2,46

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Tipizzazione Linfocitaria singola T4-Helper-Inducer (CD3+ CD4+)	0607	CITOFUORIMETRICO	6 gg	

Sangue Intero EDTA

Quantità da prelevare: 3 mL
- prelevare assolutamente in K3 EDTA;
- volume minimo 3 mL;
- temperatura di conservazione + 4° C;
- il prelievo deve essere tassativamente eseguito nello stesso giorno della spedizione in service;
- non possono essere accettati campioni biologici inviati VENERDI e PREFESTIVI

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

LINFOCITI T HELPER (CD3+ CD4+)	%	1 – 23 mesi: 36-50 2 – 6 anni: 33-43 7 – 17 anni: 33-45
	10 ⁹ /L	Adulti: 32-61 1 - 23 mesi: 1,60 - 2,20 2 - 6 anni: 0,90 - 1,50 7 - 17 anni: 0,64 - 1,20 Adulti: 0,49 – 1,67

Tipizzazione linfocitaria singola T8 Suppressor-Citotossici (CD3+CD8+)	0608	CITOFUORIMETRICO	6 gg	
---	-------------	-------------------------	-------------	--

Sangue Intero EDTA

Quantità da prelevare: 3 mL
- prelevare assolutamente in K3 EDTA;
- volume minimo 3 mL;
- temperatura di conservazione + 4° C;
- il prelievo deve essere tassativamente eseguito nello stesso giorno della spedizione in service;
- non possono essere accettati campioni biologici inviati VENERDI e PREFESTIVI

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

LINFOCITI T SUPPRESSOR (CD3+ CD8 +)	%	1 – 23 mesi: 20-30 2 – 6 anni: 29-36 7 – 17 anni: 30-36
	10 ⁹ /L	Adulti: 14-43 1 - 23 mesi: 0,82 - 1,60 2 - 6 anni: 0,70 - 1,20 7 - 17 anni: 0,64 - 0,90 Adulti: 0,22 – 1,11
Rapporto Helper/Suppressor (CD4+/CD8+)		0,50 - 2,60

Tipizzazione molecolare HLA di classe I A (locus A)	60116	PCR E REVERSE DOT BLOT	11 gg	
--	--------------	-------------------------------	--------------	--

Sangue Intero EDTA

Quantità da prelevare: 5 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Tipizzazione molecolare HLA di classe I B (locus B)	60117	PCR E REVERSE DOT BLOT	11 gg	
--	--------------	-------------------------------	--------------	--

Sangue Intero EDTA

Quantità da prelevare: 5 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Tipizzazione molecolare HLA di classe I C (locus C)	60118	PCR E REVERSE DOT BLOT	11 gg	
--	--------------	-------------------------------	--------------	--

Sangue Intero EDTA

Quantità da prelevare: 5 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Tipizzazione molecolare HLA di classe II (locus DQB1) Sangue Intero EDTA	60120	PCR E REVERSE DOT BLOT	11 gg	

Quantità da prelevare: 5 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Tipizzazione molecolare HLA di classe II (locus DRB1) Sangue Intero EDTA	60122	PCR E REVERSE DOT BLOT	11 gg	
--	-------	------------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 5 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Tireoglobulina Siero	6141	CMIA	2 gg	
--------------------------------	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 3,7 - 64,1

TIROIDE - EMITIROIDECTOMIA CIT-TIROIDE	IN10221	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 15_AP3

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

TIROIDE - NODULECTOMIA CIT-TIROIDE	IN10222	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 20_AP2

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

TIROIDE - TIROIDECTOMIA ALLARGATA CIT-TIROIDE	IN10223	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 13_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

TIROIDE - TIROIDECTOMIA TOTALE CIT-TIROIDE	IN10224	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 13_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

TIROSINA Plasmatica (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	1236	LC/MS	15 gg	
--	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
TIROSINA Urinaria (SYNLAB) Urine Congelate	12360	LC-MS	15 gg	

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Tiroxina (T4) Siero	613	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
-------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 3 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/dL 4,50 - 10,90

Tiroxina libera (FT4) Siero	6130	CMIA	1 gg	
---------------------------------------	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

TIROXINA LIBERA (FT4)	ng/dL	1,05 - 3,21 Neonati 5gg - 14gg 0,68 - 2,53 Neonati 15gg - 19gg 0,89 - 1,70 Neonati 20gg - 1 anno 0,89 - 1,37 1 - 19 anni 0,70 - 1,48 Adulti > 19 anni
	pmol/L	13,55 - 41,41 Neonati 5gg - 14gg 8,77 - 32,64 Neonati 15gg - 19gg 11,48 - 21,93 Neonati 20gg - 1 anno 11,48 - 17,67 1 - 19 anni 9,03 - 19,09 Adulti > 19 anni

Titina Abs (SYNLAB) Siero	1164	EIA	9 gg	
-------------------------------------	------	-----	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ratio < 1,00

Titolo Antistafilo (TAF) Siero	124	AGGLUTINAZIONE SU VETRINO	3 gg	
--	-----	---------------------------	------	--

Quantità da prelevare: 500 µL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL < 2

Titolo antistreptolisिनico (TAS) Siero	100	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg	
--	-----	---------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

UI/mL < 100 Bambini età prescolare
< 250 Bambini età scolare
< 200 Adulti

TNF (Tumor Necrosis Factor) Siero congelato	6305	IMMUNOENZIMATICO	16 gg	
---	------	------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 0,5 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL 4,6 - 12,4

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Tobramicina (SYNLAB) Siero	6957	EIA	11 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB GERMANIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
mg/L 0,00 - 2,00 Basale 5,00 - 10,00 Picco massimo				
Toluene Urine Fine Turno Urine F.T.	7741	GC	8 gg	
Quantità da prelevare: 10 mL Utilizzare provetta specifica di tipologia no vacutainer (cod. SAP 500021291 PROVETTA PER URINE 10mL FONDO A U +TAPPO)				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
µg/L Soggetti professionalmente esposti: < 75 (f.t.)				
Toluene Urine Inizio Turno Urine I.T.	7740	GC	8 gg	
Quantità da prelevare: 10 mL Utilizzare provetta specifica di tipologia no vacutainer (cod. SAP 500021291 PROVETTA PER URINE 10mL FONDO A U +TAPPO)				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
µg/L Soggetti professionalmente esposti: < 75 (f.t.)				
Tonno Siero	6F40	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione kU/L Classe				
TOPIRAMATO (Topamax) Siero congelato	6967	LC-MS	6 gg	
Quantità da prelevare: 500 µL Il prelievo non può essere effettuato in provette con gel separatore in quanto quest'ultimo può modificare il dosaggio del farmaco nel siero e quindi il risultato dell'esame effettuato con queste provette non è attendibile.				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
mg/L 2,0 - 10,0				
TOXOCARA (TOXOCARA CANIS) Siero	6P5	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Concentrazione kU/L Classe				
Toxocara Canis IgG + IgM Test di Conferma (SYNLAB) Siero	1214	IMMUNOBLOTTING	16 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB GERMANIA
VALORI DI RIFERIMENTO				
Anticorpi Anti-Toxocara Canis IgG Negativo Anticorpi Anti-Toxocara Canis IgM Negativo				

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Toxoplasma gondii Avidita' IgG Siero	11805	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

TOXOPLASMA GONDII AVIDITA' IgG

< 0,200 Avidità bassa
Possibile infezione primaria negli ultimi 4 mesi

0,200 - 0,300 Avidità intermedia
Possibile infezione recente o incompleta
maturazione dell'avidità delle IgG

> 0,300 Avidità alta
Improbabile infezione primaria negli ultimi 4 mesi

Toxoplasma gondii IgG Abs Siero	11801	CMIA	2 gg	
---	-------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTICORPI ANTI-TOXOPLASMA GONDII IgG

UI/mL

< 1,6 Negativo
1,6 - 3,0 Dubbio
≥ 3,0 Positivo

Toxoplasma gondii IgG conferma Siero	11803	IMMUNOBLOTTING	16 gg	
--	-------	----------------	-------	--

Per una valutazione corretta, precisa ed affidabile del test di conferma è necessario richiedere contestualmente la determinazione di IgG e IgM.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

TOXOPLASMA GONDII IgG CONFERMA

ROP1c

MIC3

GRA7

GRA8

p30

MAG1

GRA1

rSAG1

Avidità IgG p30

Avidità IgG MAG1

Avidità IgG GRA1

Avidità IgG rSAG1

Interpretazione

TOXOPLASMA GONDII IgG E IgM (Reflex) Siero	1510	CMIA	2 gg	
--	------	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Anticorpi Anti-Toxoplasma Gondii IgG

UI/mL

< 1,6 Negativo
1,6 - 3,0 Dubbio
≥ 3,0 Positivo

Anticorpi Anti-Toxoplasma Gondii IgM

Index

< 0,50 Negativo
0,50 - 0,60 Dubbio
≥ 0,60 Positivo

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Toxoplasma gondii IgM Abs Siero	11802	CMIA	2 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

ANTICORPI ANTI-TOXOPLASMA GONDII IgM	Index	< 0,50 Negativo 0,50 - 0,60 Dubbio ≥ 0,60 Positivo
--------------------------------------	-------	--

Toxoplasma gondii IgM conferma Siero	11804	IMMUNOBLOTTING	16 gg	
--	-------	----------------	-------	--

Per una valutazione corretta, precisa ed affidabile del test di conferma è necessario richiedere contestualmente la determinazione di IgG e IgM.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

TOXOPLASMA GONDII IgM CONFERMA
ROP1c
MIC3
GRA7
GRA8
p30
MAG1
GRA1
rSAG1
Interpretazione

TPHA Qualitativo Siero	1150	EMOAGGLUTINAZIONE IN PIASTRA	3 gg	
----------------------------------	------	------------------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

TPHA Quantitativo Siero	115	EMOAGGLUTINAZIONE IN PIASTRA	3 gg	
-----------------------------------	-----	------------------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1/80 Negativo
> 1/80 Positivo

TRACHEA - BIOPSIA ENDOBRONCHIALE (SING.) CIT-TRACHEA	IN10225	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	16 gg	
--	---------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

TRACHEA - BIOPSIA TRACHEA CIT-TRACHEA	IN10226	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	---	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Transferrina Siero	332	IMMUNOTURBIDIMETRIA	1 gg	
------------------------------	-----	---------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

Maschi:
0 - 14 anni: 186 - 388
15 - 60 anni: 174 - 364
oltre i 61 anni: 163 - 344

Femmine:
0 - 14 anni: 180 - 391
15 - 60 anni: 180 - 382
oltre i 61 anni: 173 - 360

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
TREONINA Plasmatica (SYNLAB) Plasma EDTA congelato Quantità da prelevare: 1 mL Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare. VALORI DI RIFERIMENTO Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche	886	LC/MS	15 gg	SYNLAB GERMANIA
TREONINA Urinaria (SYNLAB) Urine Quantità da prelevare: 10 mL Congelare. VALORI DI RIFERIMENTO Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche	8860	LC-MS	15 gg	SYNLAB GERMANIA
Treponema pallidum DNA Materiale Bioptico, Liquido Amniotico Congelato, Sangue Intero EDTA VALORI DI RIFERIMENTO Non rilevato	8512	REAL TIME PCR	6 gg	SYNLAB ITALIA
Tri a14 Triticum aestivum Siero Quantità da prelevare: 1 mL VALORI DI RIFERIMENTO KUA/L < 0,10	5F433	ImmunoCAP	5 gg	SYNLAB ITALIA
Tri a19 Triticum spp. Siero Quantità da prelevare: 1 mL VALORI DI RIFERIMENTO KUA/L < 0,10	5F416	ImmunoCAP	5 gg	SYNLAB ITALIA
Trichinella IgG + IgM Test di Conferma (SYNLAB) Siero Quantità da prelevare: 1 mL VALORI DI RIFERIMENTO Anticorpi Anti-Trichinella IgG Negativo Anticorpi Anti-Trichinella IgM Negativo	1215	IMMUNOBLOTTING	16 gg	SYNLAB GERMANIA
Trichomonas Vaginalis Liquido Seminale, Tampone Uretrale, Tampone Vaginale, Urine Utilizzare kit specifico (cod. SAP 500025908)	B6202		5-6 gg	
Trichomonas vaginalis DNA Liquido Seminale, Tampone Cervicale, Tampone Uretrale, Tampone Vaginale, Urine I mitto Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE DISPOSITIVI DA UTILIZZARE PER LA RACCOLTA : CONTENITORE STERILE : Liquido Seminale TAMPONE ROSA (cod. SAP 500003323) : Tampone Cervicale, Tampone Vaginale TAMPONE ARANCIONE (cod. SAP 500003321) : Tampone Uretrale PROVETTA TAPPO BEIGE (cod. SAP 500022210) : Urine I Mitto VALORI DI RIFERIMENTO Trichomonas vaginalis DNA Non rilevato Ricerca eseguita su :	8330	REAL TIME PCR	6 gg	SYNLAB ITALIA

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
TRICLOROETANOLO (TCE) Urine Fine Turno Urine F.T.	7171	GC	8 gg	

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti professionalmente esposti
a metilcloroformio:
< 30 (f.t. / f.s.l.)

TRICLOROETANOLO (TCE) Urine Inizio Turno Urine I.T.	717	GC	8 gg	
---	------------	-----------	-------------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

- Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
- Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L

Soggetti professionalmente esposti
a metilcloroformio:
< 30 (f.t. / f.s.l.)

Trigliceridi Siero	323	GLICEROLO FOSFATO OSSIDASI	1 gg	
------------------------------	------------	---------------------------------------	-------------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

< 150 Rischio basso
150-199 Rischio intermedio
200-499 Rischio alto
> 500 Rischio altissimo

Triiodotironina (T3) Siero	612	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
--------------------------------------	------------	--------------------------	-------------	--

Quantità da prelevare: 3 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

0,60 - 1,81
< 0,60 Ipotiroidi
> 1,81 Ipertiroidi

Triiodotironina libera (FT3) Siero	6120	CMIA	1 gg	
--	-------------	-------------	-------------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL

1,58 - 3,91

TRIMETILAMMINA N-OSSIDO (TMAO) Plasma EDTA congelato, Siero congelato	2075	LC-MS-MS	11 gg	
---	-------------	-----------------	--------------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

Non eseguita il sabato

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µmol/L

2,25 - 5,79

Indice di rischio relativo :
< 6,20 = Rischio basso
6,20 - 9,90 = Rischio medio
> 10,00 = Rischio elevato

TRIPTASI Siero	6425	ImmunoCAP	4 gg	
--------------------------	-------------	------------------	-------------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

< 11,0

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
TRIPTOFANO Plasmatico (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	490	LC/MS	15 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

Triticum Sativum (Grano) Siero	6G15	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

TROPONINA I AD ALTA SENSIBILITA' STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO Siero congelato	2329	CMIA	4 gg	
--	------	------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Lasciare coagulare il campione, centrifugare, separare il siero e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L
Maschi:
Basso : < 6,0
Moderato : 6,0 - 12,0
Elevato : > 12,0
Femmine:
Basso : < 4,0
Moderato : 4,0 - 10,0
Elevato : > 10,0

Troponina I ad elevata sensibilita Siero	1482	CMIA	1 gg	
Eseguibile presso la sede di Padova				

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L
Maschi: < 34,2
Femmine: < 15,6

Trota Siero	6F204	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
Quantità da prelevare: 1 mL				SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

TRYPANOSOMA CRUZI IgG (SYNLAB) Siero	2268	EIA	11 gg	
Quantità da prelevare: 2 mL				SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Negativo

TSH Siero	614	CMIA	1 gg	
---------------------	-----	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

µUI/mL
Maschi:
0 - 1 anni: 0,87 - 6,15
2 - 12 anni: 0,67 - 4,16
13 - 18 anni: 0,48 - 4,17
oltre i 19 anni: 0,55 - 4,78
Femmine:
0 - 1 anni: 0,87 - 6,15
2 - 12 anni: 0,67 - 4,16
13 - 18 anni: 0,48 - 4,17
oltre i 19 anni: 0,55 - 4,78

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
TSH Riflesso Siero	1177	CMIA	1 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

µIU/mL

Maschi:
0 - 1 anni: 0,87 - 6,15
2 - 12 anni: 0,67 - 4,16
13 - 18 anni: 0,48 - 4,17
oltre i 19 anni: 0,55 - 4,78

Femmine:
0 - 1 anni: 0,87 - 6,15
2 - 12 anni: 0,67 - 4,16
13 - 18 anni: 0,48 - 4,17
oltre i 19 anni: 0,55 - 4,78

TUBA - BIOPSIA TUBA CIT-TUBA	IN10227	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 34_AP3

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

TUBA - RESEZIONE BILATERALE (PER STERILIZZAZIONE) CIT-TUBA	IN10228	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 34_AP3

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

TUBA - SALPINGECTOMIA CIT-TUBA	IN10229	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 34_AP3

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

TUBA - SALPINGECTOMIA PER GRAVIDANZA EXTRAUTERINA CIT-TUBA	IN10230	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 34_AP3

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

TUNGSTENO Urine Fine Turno (SYNLAB) Urine F.T.	1438	ICP-MS	11 gg	
--	------	--------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

TUNGSTENO Urine Fine Turno	µg/L	
Creatinina Urine Fine Turno	g/L	0,98 - 2,20
Tungsteno / Creatinina Fine Turno	µg/g creatinina	< 0,9

TUNGSTENO Urine Inizio Turno (SYNLAB) Urine I.T.	1437	ICP-MS	11 gg	
--	------	--------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

TUNGSTENO Urine Inizio Turno	µg/L	
Creatinina Urine Inizio turno	g/L	0,98 - 2,20
Tungsteno / Creatinina Inizio Turno	µg/g creatinina	< 0,9

VADEMECUM GENERALE

T

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Tuorlo Siero	6F75	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Tyrophagus Putrescentiae Siero	6D72	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Ulmus Campestris (Olmo) Siero	6T8	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Uovo (albume e tuorlo) Siero	6F245	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Ureaplasma parvum DNA Liquido Seminale, Tampone Cervicale, Tampone Uretrale, Tampone Vaginale, Urine I mitto	8270	REAL TIME PCR	6 gg	
--	------	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

DISPOSITIVI DA UTILIZZARE PER LA RACCOLTA :

CONTENITORE STERILE : Liquido Seminale

TAMPONE ROSA (cod. SAP 500003323) : Tampone Cervicale, Tampone Vaginale

TAMPONE ARANCIO (cod. SAP 500003321) : Tampone Uretrale

PROVETTA TAPPO BEIGE (cod. SAP 500022210) : Urine I Mitto

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ureaplasma parvum DNA Non Applicabile (*)
Ricerca eseguita su :

Ureaplasma urealyticum DNA Liquido Seminale, Tampone Cervicale, Tampone Uretrale, Tampone Vaginale, Urine I mitto	8335	REAL TIME PCR	6 gg	
---	------	---------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

DISPOSITIVI DA UTILIZZARE PER LA RACCOLTA :

CONTENITORE STERILE : Liquido Seminale

TAMPONE ROSA (cod. SAP 500003323) : Tampone Cervicale, Tampone Vaginale

TAMPONE ARANCIONE (cod. SAP 500003321) : Tampone Uretrale

PROVETTA TAPPO BEIGE (cod. SAP 500022210) : Urine I Mitto

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Ureaplasma urealyticum DNA Non Applicabile (*)
Ricerca eseguita su :

VADEMECUM GENERALE

U

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
UREAPLASMA UREALYTICUM IgG Siero	4548	FIA	19 gg	

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

UREAPLASMA UREALYTICUM IgG

Titolo < 1/32 Negativo

URETERE - RESEZIONE URETERALE CIT-URETERE	IN10231	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 38_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

URETRA - RESEZIONE URETRALE CIT-URETRA	IN10232	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 39_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Uricemia Siero	230	URICASI	1 gg	
--------------------------	-----	---------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/dL

Maschi: 3,5 - 7,2

Femmine:
Premenopausa : 2,6 - 6,0
Postmenopausa : 3,5 - 7,2

Uricosuria Urine 24h	231	URICASI	2 gg	
--------------------------------	-----	---------	------	--

Necessario far pervenire in laboratorio i campioni in provetta e non in barattolo

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/24h

250 - 750

URINA DA SEDE SELETTIVA O DA CATETERE CIT-URINA	IN10322	COLORAZIONE CITOCHIMICA PAPANICOLAOU,	8 gg	
---	---------	---	------	--

Quantità da prelevare: 1 CONTENITORE CYTOLYT

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e
cliniche

Urina di Ratto Siero	6E74	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione

kU/L

Classe

Urina di Topo Siero	6E72	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione

kU/L

Classe

VADEMECUM GENERALE

U

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Urtica Dioica (Ortica) Siero	6W20	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

UTERO - BIOBSIA/VABRA CIT-UTERO	IN10234	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

UTERO - EVISCERAZIONE ANTERIORE UTERO CIT-UTERO	IN10235	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 23_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

UTERO - EVISCERAZIONE POSTERIORE UTERO CIT-UTERO	IN10236	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 23_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

UTERO - ISTERECTOMIA RADICALE PER NEOPLASIA CIT-UTERO	IN10237	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 25_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

UTERO - ISTERECTOMIA SEMPLICE/SUB-TOTALE CIT-UTERO	IN10238	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 32_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

UTERO - ISTEROANNESSIECTOMIA CIT-UTERO	IN10239	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 29_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

UTERO - MATERIALE ESPULSO SPONTANEAMENTE (UTERO) CIT-UTERO	IN10240	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	22 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VADEMECUM GENERALE

U

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
UTERO - MIOMECTOMIA CIT-UTERO	IN10241	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SAP : 33_AP2

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

UTERO - RASCHIAMENTO ENDOMETRIALE/POLIPLECTOMIA ENDOMETRIALE CIT-UTERO	IN10242	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

UTERO - SPAZZOLATO ENDOMETRIALE CIT-UTERO	IN10290	COLORAZIONE CON PAPANICOLAOU	10 gg	
---	---------	---------------------------------	-------	--

Quantità da prelevare: VETRINI O 1 CONTENITORE CYTOLYT/PRESERVCYT

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Uva Siero	6F259	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

V.E.S. (Velocità di eritrosedimentazione) Sangue Intero EDTA	010	FOTOMETRIA CAPILLARE QUANTITATIVA	1 gg	
--	-----	--------------------------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

mm/h

Maschi:
0 - 30 anni: < 12
31 - 40 anni: < 10
41 - 50 anni: < 23
oltre i 51 anni: < 35Femmine:
0 - 30 anni: < 25
31 - 40 anni: < 28
41 - 50 anni: < 32
oltre i 51 anni: < 37

V.I.P. Polipeptide Intestinale Vasoattivo (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	835	ELISA	16 gg	
--	-----	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 3 mL
Centrifugare, separare e congelare il campione

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

pmol/L < 24

VAGINA - AMPUTAZIONE VAGINA CIT-VAGINA	IN10243	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	20 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 27_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VAGINA - BIOPSIA VAGINALE CIT-VAGINA	IN10244	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	18 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e
cliniche

VADEMECUM GENERALE

V

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VAGINA - PAP TEST MONOSTRATO CIT-VAGINA	IN10271	COLORAZIONE CON PAPANICOLAOU	11 gg	

Quantità da prelevare: 1 CONTENITORE THIN PREP

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VAGINA - PAP TEST VAGINALE (vetrino) CIT-VAGINA	IN10272	COLORAZIONE CON PAPANICOLAOU	11 gg	
---	---------	------------------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 VETRINO FISSATO

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VALINA Plasmatica (SYNLAB) Plasma EDTA congelato	887	LC/MS	15 gg	
--	-----	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VALINA Urinaria (SYNLAB) Urine Congelate	8870	LC-MS	15 gg	
--	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 10 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e cliniche

VANADIO Urine Fine Turno (C) Urine F.T.	7350	ICP-MS	8 gg	
---	------	--------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL
• Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
• Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 791 CREATININA URINE FINE TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

VANADIO Urine Fine Turno	µg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti: < 70 (f.t.)
Creatinina Urine Fine Turno	g/L	0,30 - 3,00

VANADIO Urine Inizio Turno (C) Urine I.T.	735	ICP-MS	8 gg	
---	-----	--------	------	--

Quantità da prelevare: 10 mL
• Utilizzare provette da 10 ML con fondo a U piene e ben tappate. L'uso di altro tipo di dispositivi, come ad esempio provette coniche (con fondo a V), comporterà l'emissione di non conformità e la mancata processazione del campione giunto in laboratorio.
• Ad ogni etichetta generata in fase di accettazione deve sempre corrispondere la relativa provetta

SYNLAB ITALIA

ACCETTARE CONTESTUALMENTE AL CODICE 790 CREATININA URINE INIZIO TURNO

VALORI DI RIFERIMENTO

VANADIO Urine Inizio Turno	µg/g creatinina	Soggetti professionalmente esposti: < 70 (f.t.)
Creatinina Urine Inizio Turno	g/L	0,30 - 3,00

VADEMECUM GENERALE

V

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Vancomicina Siero	6956	IMMUNOTURBIDIMETRIA	4 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

VANCOMICINA	mg/L	5 - 10 25 - 40 Picco 1 ora dopo
VANCOMICINA Tempo 1	mg/L	5 - 10 25 - 40 Picco 1 ora dopo
VANCOMICINA Tempo 2	mg/L	5 - 10 25 - 40 Picco 1 ora dopo

Vaniglia Siero	6F234	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

VARICELLA Abs IgA Siero	1269	IMMUNOENZIMATICO	7 gg	
-----------------------------------	------	------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	NTU	< 9,0 Negativo 9,0 - 11,0 Dubbio > 11,0 Positivo
--	-----	--

VARICELLA Abs IgG Siero	164	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
-----------------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	UI/L	< 150,0 Negativo ≥ 150,0 Positivo
--	------	--------------------------------------

VARICELLA Abs IgM Siero	1640	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
-----------------------------------	------	-------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	Index	< 0,9 Negativo 0,9 - 1,1 Indeterminato > 1,1 Positivo
--	-------	---

VASO - BIOPSIA DI VASO ARTERIOSO CIT-VASO	IN10245	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VASO - BIOPSIA DI VASO VENOSO CIT-VASO	IN10246	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VADEMECUM GENERALE

V

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VASO - ESCISSIONE DI M.A.V. CIT-VASO	IN10247	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VASO - RESEZIONE DI VASO ARTERIOSO CIT-VASO	IN10248	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VASO - RESEZIONE DI VASO VENOSO CIT-VASO	IN10249	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VDRL Siero	112	CARBON ANTIGEN CARD TEST	2 gg	
----------------------	-----	-----------------------------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1/2 = Negativo
> o uguale 1/2 = Positivo

Versamenti Cavitari (esame chimico-fisico) Liquido Ascitico, Liquido Pericardico, Liquido Pleurico, Liquido Sinoviale	2970	MICROSCOPIA	2 gg	
---	------	-------------	------	--

Quantità da prelevare: 2 mL

Utilizzare per la raccolta un contenitore sterile a tenuta di liquidi (ad esempio contenitore urine cod. 500022329)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Materiale in esame:

Aspetto	
Colore	
Quantità	mL
pH	
LDH	U/L
Proteine Totali	g/dL
Conteggio WBC	/µL
Conteggio RBC	/µL
Esame microscopico	

Ves v1 Vesputa vulgaris Siero	5I211	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

Ves v5 Vesputa vulgaris Siero	5I209	ImmunoCAP	5 gg	
---	-------	-----------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

KUA/L < 0,10

VADEMECUM GENERALE

V

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VESCICA - BIOPSIA ENDOSCOPICA VESCICALE (SING.) CIT-VESCICA	IN10250	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	18 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e
cliniche

VESCICA - CISTECTOMIA PARZIALE CIT-VESCICA	IN10251	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 29_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VESCICA - CISTECTOMIA RADICALE ALLARGATA CIT-VESCICA	IN10252	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 23_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VESCICA - CISTECTOMIA SEMPLICE CIT-VESCICA	IN10253	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 29_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VESCICA - RESEZIONE ENDOSCOPICA TRANSURETRALE (T.U.R.V.) CIT-VESCICA	IN10254	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 29_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

Vespa Cabro (Calabrone Europeo) Siero	6175	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Vespula Species (Giallone) Siero	613	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Vigabatrin (SYNLAB) Siero	1116	LC-MS	8 gg	
-------------------------------------	------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 2,00 - 10,00

VADEMECUM GENERALE

V

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgG e IgM	2272	CMIA	2 gg	
Siero				

Se IgG positive e IgM positive o dubbie, aggiunta analisi 2276 Citomegalovirus IgG Avidità

VALORI DI RIFERIMENTO

Anticorpi Anti-Citomegalovirus IgG	AU/mL	< 6,0 Negativo ≥ 6,0 Positivo
Anticorpi Anti-Citomegalovirus IgM	Index	< 0,85 Negativo 0,85 - 1,0 Dubbio ≥ 1,0 Positivo

VIRUS COXSACKIE ANTICORPI IgG e IgM	2279	IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA	9 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Coxsackie virus B1 IgG	Negativo
Coxsackie virus B2 IgG	Negativo
Coxsackie virus B3 IgG	Negativo
Coxsackie virus B4 IgG	Negativo
Coxsackie virus B5 IgG	Negativo
Coxsackie virus B6 IgG	Negativo
Coxsackie virus B1 IgM	Negativo
Coxsackie virus B2 IgM	Negativo
Coxsackie virus B3 IgM	Negativo
Coxsackie virus B4 IgM	Negativo
Coxsackie virus B5 IgM	Negativo
Coxsackie virus B6 IgM	Negativo

VIRUS EPATITE A (HAV) ANTICORPI IGG E IGM	2277	CMIA	2 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 3 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anticorpi Anti-HAV IgG	Negativo (Non rilevato)
Anticorpi Anti-HAV IgM	Negativo (Non rilevato)

VIRUS EPATITE B (HBV) REFLEX	2273	CMIA	2 gg	
Siero				

Se HBsAg e anti HBcAg positivi aggiunta analisi 2297 ANTICORPI anti HBcAg IgM Reflex
Se HBsAg positivo aggiunta analisi 2295 Antigene HBeAg Reflex.
Se HBeAg negativo aggiunta analisi 2296 HBeAb Reflex

VALORI DI RIFERIMENTO

HBsAg (Antigene di superficie virus epatite B)	Non Reattivo
HBsAb (Anticorpi anti-HBsAg)	mIU/mL < 10 Negativo > 10 Positivo
Anticorpi Anti-CORE Virus B (HBcAb Totali)	Non Reattivo

VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI REFLEX	2274	CMIA	2 gg	
Siero				

Se VCA IgM positivo o dubbio, aggiunta analisi 2290 Anticorpi Anti-Epstein Barr EA (Early) IgG

VALORI DI RIFERIMENTO

Anticorpi Anti-Epstein Barr Antigene Capsidico (VCA) Ig	S/CO	< 0,75 Negativo 0,75 - 1,0 Dubbio ≥ 1,00 Positivo
Anticorpi Anti-Epstein Barr Antigene Capsidico (VCA) Ig	S/CO	< 0,50 Negativo 0,50 - 1,0 Dubbio ≥ 1,0 Positivo
Anticorpi Anti-Epstein Barr Nuclear Antigen (EBNA) IgG	S/CO	< 0,5 Non Reattivo 0,5 - 0,9 Dubbio ≥ 1,00 Reattivo

VADEMECUM GENERALE

V

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VIRUS MORBILLLO ANTICORPI IgG e IgM	2281	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anticorpi Anti-Morbillo IgG	kAU/L	< 13,5 Negativo 13,5 - 16,5 Indeterminato > 16,5 Positivo
Anticorpi Anti-Morbillo IgM	Index	< 0,9 Negativo 0,9 - 1,1 Indeterminato > 1,1 Positivo

VIRUS PAROTITE ANTICORPI IgG e IgM	2282	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anticorpi Anti-Parotite IgG	kAU/L	< 9 Negativo 9 - 11 Indeterminato > 11 Positivo
Anticorpi Anti-Parotite IgM	Index	< 0,9 Negativo 0,9 - 1,1 Indeterminato > 1,1 Positivo

VIRUS PARVOVIRUS B19 ANTICORPI IgG e IgM	2280	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anticorpi Anti-Parvovirus B19 IgG	kUI/L	< 2,00 Negativo 2,00 - 2,49 Indeterminato ≥ 2,50 Positivo
Anticorpi Anti-Parvovirus B19 IgM	Indice	< 0,90 Negativo 0,90 - 1,09 Indeterminato ≥ 1,10 Positivo

Virus Respiratorio Sinciziale Abs IgA	1157	ELISA	8 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	NTU	< 9,0 Negativo 9,0 - 11,0 Indeterminato > 11,0 Positivo
--	-----	---

Virus Respiratorio Sinciziale Abs IgG	1156	ELISA	8 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

	NTU	< 9,0 Negativo 9,0 - 11,0 Indeterminato > 11,0 Positivo
--	-----	---

VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI IgG e IgM	2283	CHEMILUMINESCENZA	2 gg	
Siero				

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Anticorpi Anti-Varicella IgG	UI/L	< 150,0 Negativo ≥ 150,0 Positivo
Anticorpi Anti-Varicella IgM	Index	< 0,9 Negativo 0,9 - 1,1 Indeterminato > 1,1 Positivo

VADEMECUM GENERALE

V

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Vitamina A Plasma EDTA Cong al Buio	6617	HPLC	8 gg	

Quantità da prelevare: 3 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) a temperatura ambiente, separare e congelare.
Proteggere dalla luce.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 0,30 - 0,70

Vitamina B 12 Siero	661	CMIA	1 gg	
-------------------------------	-----	------	------	--

VALORI DI RIFERIMENTO

pg/mL 211 - 911

Vitamina B1 Ematica (Idrosolubile) Sangue Intero EDTA	396	LC-MS	9 gg	
---	-----	-------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 33,1 - 60,7

Vitamina B2 Ematica (Idrosolubile) Sangue Intero EDTA Cong. al Buio	6614	HPLC	8 gg	
---	------	------	------	--

Quantità da prelevare: 3 mL
Proteggere dalla luce, congelare il sangue intero.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 137 - 370

VITAMINA B3 (NICOTINAMIDE) (SYNLAB) Siero congelato al Buio	556	LC-MS	16 gg	
---	-----	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 2 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.
Proteggere dalla luce

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 10,00 - 63,00

VITAMINA B6 (Pyridoxal) (Idrosolubile) Ematica Sangue Intero EDTA	66170	LC-MS	9 gg	
---	-------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L 12,6 - 45,2

Vitamina B9 Sangue Intero EDTA	372	CMIA	10 gg	
--	-----	------	-------	--

Conservare a 2-8°C al buio e spedire entro 24H
Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L
< 150 Carenza
150 - 200 Lieve carenza
> 200 Desiderabile

Vitamina C (Idrosolubile) Plasma EDTA al Buio, Siero congelato al Buio	6612	HPLC	8 gg	
--	------	------	------	--

Il campione deve essere posto in ghiaccio immediatamente dopo il prelievo e conservato refrigerato fino al congelamento del plasma. Proteggere dalla luce

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µmol/L 26,1 - 84,6

VADEMECUM GENERALE

V

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Vitamina D (25 OH) Siero	6610	CMIA	1 gg	

VALORI DI RIFERIMENTO

nmol/L
< 30,0 Carenza
30,0 – 50,0 Insufficienza
> 50,0 Adeguatezza
(opportuno non superare 250 nmol/L)
75 – 125 Valore ottimale in pazienti
affetti da osteoporosi o condizioni a
rischio di ipovitaminosi D

Vitamina D 1-25 Diidrossi Plasma, Siero	329	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
---	-----	-------------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L 19,9 - 79,3

Vitamina E (Liposolubile) Plasma EDTA Cong al Buio	6611	HPLC	8 gg	
--	------	------	------	--

Quantità da prelevare: 3 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) a temperatura ambiente, separare e congelare.
Proteggere dalla luce.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 5,0 - 20,0

Vitamina H Biotina (SYNLAB) Siero congelato	1062	EIA	21 gg	
---	------	-----	-------	--

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L > 100

Vitamina K (SYNLAB) Siero congelato al Buio	354	LC-MS	16 gg	
---	-----	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 4 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/L 50 - 900 Digiuno
< 1800 Post Prandiale

Von Willebrand Ag Plasma Citrato congelato	461	IMMUNOTURBIDIMETRICO	9 gg	
--	-----	----------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

% 50,0 - 160,0

VON WILLEBRAND ATTIVITA' Plasma Citrato congelato	462	IMMUNOTURBIDIMETRICO	11 gg	
---	-----	----------------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

% 47,8 - 173,2

Vongola Siero	6F207	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione
Classe
kU/L

VADEMECUM GENERALE

V

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
VULVA - ASPORTAZIONE DELLA GHIANDOLA DI BARTOLINI CIT-VULVA	IN10255	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 30_AP2

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VULVA - BIOPSIA VULVARE (SING.) CIT-VULVA	IN10256	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	18 gg	
---	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VULVA - VULVECTOMIA PARZIALE CIT-VULVA	IN10257	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 40_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VULVA - VULVECTOMIA RADICALE (CON LINFOADENECT. INGUINALE) CIT-VULVA	IN10258	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 31_AP5

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VULVA - VULVECTOMIA SEMPLICE CIT-VULVA	IN10259	INCLUSIONE IN PARAFFINA COLORAZIONE CON EE	23 gg	
--	---------	--	-------	--

Quantità da prelevare: 1 CAMPIONE FISSATO IN FORMALINA
Codice SIAPEC : 40_AP4

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Vedi Allegato

VZV DNA (Varicella Zoster virus) Liquor congelato, Plasma EDTA congelato, Sangue Intero EDTA	60085	REAL TIME PCR	8 gg	
--	-------	---------------	------	--

Il sangue intero in EDTA NON va congelato, bensì conservato a 2-8°C

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Varicella Zoster Virus DNA (VZV) Non rilevato
Limite di sensibilità (LoD) : copie/mL
Ricerca eseguita su :

Waler-Rose Siero	103	EMOAGGLUTINAZIONE	4 gg	
----------------------------	-----	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 500 µL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

< 1/20 Negativo

Weil-Felix Siero	166	AGGLUTINAZIONE	4 gg	
----------------------------	-----	----------------	------	--

Quantità da prelevare: 700 µL
Se negativo risposta dopo 24 h
Se positivo risposta dopo 48 h

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Proteus OX 2 < 1/100 Negativo
Proteus OX 19 < 1/100 Negativo
Proteus OX K < 1/100 Negativo

VADEMECUM GENERALE

W

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Widal-Wright Siero	109	AGGLUTINAZIONE	4 gg	

Quantità da prelevare: 700 µL
Se negativo risposta dopo 24 h.
Se positivo risposta dopo 48 h.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Antigene O	< = 1/40 Negativo 1/80 - 1/160 Dubbio >1/160 Positivo
Antigene H	< = 1/40 Negativo 1/80 - 1/160 Dubbio >1/160 Positivo
Antigene Totale	< = 1/40 Negativo 1/80 - 1/160 Dubbio >1/160 Positivo
Antigene O	< = 1/40 Negativo 1/80 - 1/160 Dubbio >1/160 Positivo
Antigene H	< = 1/40 Negativo 1/80 - 1/160 Dubbio >1/160 Positivo
Brucella Abortus - Melitenses	< = 1/40 Negativo 1/80 - 1/160 Dubbio >1/160 Positivo

Xanthium Commune (Lappola) Siero	6W13	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
--	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione	kU/L
Classe	

Xilosio Urinario Urine 5h	341	ENZIMATICO	8 gg	
-------------------------------------	-----	------------	------	--

Somministrare al paziente adulto a digiuno da 12 ore, dopo avergli fatto vuotare completamente la vescica, 25 g di xilosio sciolti in 250 ml di acqua.
Nei bambini somministrare 1 g di xilosio per Kg di peso corporeo, non superando comunque i 25 g .
Raccogliere tutte le urine formate nelle 5 ore successive alla somministrazione dello xilosio e di indicare la diuresi.
Si raccomanda inoltre di indicare i grammi di xilosio somministrato nel caso di esame effettuato sui bambini.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

%	> 16 Adulti 16 - 33 Bambini
---	--------------------------------

Yersinia IgA conferma (SYNLAB) Siero	1356	IMMUNOBLOTTING	16 gg	
--	------	----------------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e
cliniche

Yersinia IgG Conferma (SYNLAB) Siero	1357	BLOT	16 gg	
--	------	------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Si allega risultato con spiegazioni tecniche e
cliniche

Yersinia nelle feci esame colturale Feci	B589		3 gg	
--	------	--	------	--

VADEMECUM GENERALE

Y

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Yersinia nelle feci esame colturale II Campione Feci	B5892		5-6 gg	

Yersinia nelle feci esame colturale III Campione Feci	B5893		5-6 gg	
---	-------	--	--------	--

Yogurt Siero	6F360	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Zenzero Siero	6F270	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-------------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Zinco plasmatico Plasma Eparinato, Siero	7160	COLORIMETRICO	3 gg	
--	------	---------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Popolazione generale :
800 - 1600

Soggetti professionalmente esposti :
non sono reperibili in letteratura valori
correlabili con un indice biologico di
esposizione

Zinco Urine F.T. Urine F.T.	7161	COLORIMETRICO	6 gg	
---------------------------------------	------	---------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Popolazione generale : 250 - 650

Soggetti professionalmente esposti :
non sono reperibili in letteratura
valori correlabili con un indice biologico
di esposizione

Zinco Urine I.T. Urine I.T.	716	COLORIMETRICO	6 gg	
---------------------------------------	-----	---------------	------	--

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/L

Popolazione generale : 250 - 650

Soggetti professionalmente esposti :
non sono reperibili in letteratura
valori correlabili con un indice biologico
di esposizione

VADEMECUM GENERALE

Z

ANALITA	COD.	METODO	TAT	SEZIONE
Zincoprotoporfirina Sangue Intero EDTA, Sangue Intero Eparinato	703	HPLC	8 gg	

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

µg/dL Popolazione generale : < 40

Zn-T8 Abs Plasma EDTA, Siero	1268	ELISA	16 gg	
--	------	-------	-------	--

In caso di consegna tardiva al laboratorio il campione può essere conservato in un luogo fresco (2 - 8 °C) per un massimo di 3 giorni.
Per conservazioni maggiori ai 3 giorni congelare il campione a -20°C.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

U/mL < 15 Negativo

Zonisamide (SYNLAB) Siero	1115	LC-MS	6 gg	
-------------------------------------	------	-------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB GERMANIA

VALORI DI RIFERIMENTO

mg/L 10,00 - 40,00

Zonulina Fecale Feci	1384	ELISA	11 gg	
--------------------------------	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 5 grammi
Per la raccolta del campione utilizzare il dispositivo dedicato (cod. SAP 600075556 CONTENITORE RACCOLTA FECI 100 PZ)

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL < 61

ZONULINA Sierica Siero congelato	1383	ELISA	16 gg	
--	------	-------	-------	--

Quantità da prelevare: 1 mL
Centrifugare rapidamente (entro 30 min) in centrifuga refrigerata, separare e congelare.

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

ng/mL < 34

Zucca Siero	6F225	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-----------------------	-------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe

Zucchero di canna Siero	6F21	CHEMILUMINESCENZA	3 gg	
-----------------------------------	------	-------------------	------	--

Quantità da prelevare: 1 mL

SYNLAB ITALIA

VALORI DI RIFERIMENTO

Concentrazione kU/L
Classe